ZoomText

Brugervejledning

Freedom Scientific, Inc.

www.FreedomScientific.com

440945-001 Rev C

Copyright

Fusion Copyright © 2019, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

ZoomText Magnifier Copyright © 2019, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

ZoomText Magnifier/Reader Copyright © 2019, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

ZoomText brugervejledning. Copyright © 2019, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Unauthorized copying, duplicating, selling or otherwise distributing this software or documentation is a violation of Federal Copyright Law. No part of this publication can be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the express written consent of Freedom Scientific, Inc.

Varemærker

ZoomText and xFont are registered trademarks of Freedom Scientific, Inc.

Fusion, **ZoomText Magnifier** and **ZoomText Magnifier/Reader** are trademarks of Freedom Scientific, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Sentinel er et registreret varermærke tilhørerende SafeNet, Inc.

Januar 2019 Freedom Scientific, Inc. 17757 US Highway 19 N, Suite 560, Clearwater, FL 33764 USA

Indhold

Velkommen til ZoomText	1
Magnifier funktioner	2
Magnifier/Reader funktioner	4
Kom godt i gang med ZoomText	6
Indstille ZoomText	11
Systemkrav	12
Trin 1 - Installer ZoomText	13
Trin 2 - Start Zoomtext	14
Trin 3 - Aktiver ZoomText	15
Trin 4 - Opdater ZoomText	17
Installation af ekstra stemmer	18
Anvend Opsætningsguide	19
Afinstaller ZoomText	20
Kør ZoomText	21
Starte ZoomText	22
Aktivere og deaktivere ZoomText	23
ZoomText Anvendelse af Caps Lock tasten	24
Afslutter ZoomText	25
Få hjælp til ZoomText	26
Windows Logon og Fejlsikker tilstand understøttelse	28
ZoomText brugerfladen	31
ZoomText værktøjslinje	32
Kommandotaster	34
Typer af kommandotaster	35
De vigtige ZoomText genveje	37
Kommandotaster dialogboksen	39
Kommandotaster banner	43
Løse genvej konflikter	45
Touch skærm understøttelse	46

Anvende ZoomText på en Touch skærm	47
Anvende ZoomText Touch ikon	48
Adgang til ZoomText funktioner med Touch bevægelser	51
Magnifier funktioner	55
Magnifier værktøjslinje fanen	56
Zoom ind og ud	58
Anvende Zoom til 1x	63
Rulle det forstørrede vindue	64
Zoomvinduer	65
Anvendelse med en eller flere skærmen	66
Valg af zoomvinduer	67
Justering af zoomvinduer	75
Hold vindue	76
Anvende overblik tilstand og Zoomfelt søger	80
Håndtering af flere skærme	83
Flere skærme indstillinger	84
Understøttede hardware til flere skærme	87
Anbefalede skærmindstillinger	88
Konfiguration af skærme for Flere skærme support	89
Juster automatisk efter skærmændringer	91
Funktionsadfærd med flere skærme	92
Fejlsøgning af flere skærme	93
Skærmforbedringer	94
Farveforbedringer	95
Museforbedringer	99
Markørforbedringer	103
Fokusforbedringer	107
Anvende Smart inverter	111
Navigeringsindstillinger	112
Sporing	113
Justering	115
Mus	117

Panorering	119
Læser funktioner	121
Læser værktøjslinje fanen	122
ZoomText stemmen	124
Aktiver eller deaktiver stemmen	125
Justering af læsetempo	126
Stemmeindstillinger	127
Tekstbehandling	131
Hints	134
Ekko	137
Tastaturekko	138
Mus ekko	141
Program ekko	144
Detaljer	146
AppReader	148
AppReader læsetilstande	149
Tekstlæseren	151
Starte og anvende AppReader	154
App Viser indstillinger	158
Tekstviser indstillinger	160
Delte indstillinger	163
Læsezoner	165
Oprette, rediger og slette læsezoner	166
Anvend læsezoner	169
Læsezoner værktøjslinjen	171
Læsezoner indstillinger	172
Læse med tekstmarkør	176
Læs kommandoer	179
Værktøjer funktioner	181
Værktøjer værktøj fanen	182
Søger	183

ZoomText Kamera	192
Baggrund Læser	202
ZoomText Optager	206
Konfigurationer	211
Standardkonfigurationen	212
Gemme og indlæse konfigurationer	213
Konfigurationsgenveje	214
Programindstillinger	215
Præferencer indstillinger	217
Program præferencer	218
Brugerflade præferencer	221
Udglatning Præferencer	224
Kør ZoomText som	228
ZoomText kommandoer	229
AppReader kommandoer	230
Baggrund Læser kommandoer	232
Kamera kommandoer	233
Søge kommandoer	235
Kommandotaster tilstand	237
Forstørrelseskommandoer	238
Programkommandoer	240
Læsekommandoer	241
Læsezoner kommandoer	242
Optager kommandoer	243
Læs kommandoer	244
Rulle kommandoer	245
Support kommandoer	247
Tekstmarkør kommandoer	249
Vindue kommandoer	250
ZoomText Support	253
Systeminformation	254

Rapporter et problem	255
LøsDet kommando	256
Systemanalyse	257
ZoomText Online Support	258
Om ZoomText	259
Script programmering	261
Hvad er et script og script sprog?	262
Skrive ZoomText scripts	263
Registrerer scripts	264
Script administration	268
Script genveje	271
Scripting dokumentation for Script programmører	272
Indeks	273

Kapitel 1 Velkommen til ZoomText

ZoomText er en effektiv løsning som hjælper svagsynede til at kunne anvende en computer på samme måde som en fuldt seende. ZoomText giver mulighed for at forstørre, forbedre og læse alt på skærmen på den måde som passer bedst til dit syn.



ZoomText findes i to udgaver: ZoomText *Magnifier* og ZoomText *Magnifier/Reader*.

- **ZoomText Magnifier** kan forstørre og følge aktiviteter på skærmen.
- ZoomText Magnifier/Reader indeholder alle funktioner som i ZoomText Magnifier samt højtlæsning af skærm og dokumenter. ZoomText læseværktøjerne er også gode til personer som har indlæringsproblemer.

Begge udgaver af ZoomText er designet så de kan anvendes af alle brugere i alle aldre og giver frihed til at arbejde på computeren i hjemmet, skolen og på arbejdspladsen.

Magnifier funktioner

ZoomText Magnifier er et avanceret skærmforstørrelsesprogram der kan forstørre og følge alt på din skærm.

ZoomText Magnifier inkluderer:

- Fleksibel forstørrelse. ZoomText tilbyder forstørrelsesgrader helt op til 60 gange. Forstørrelser inkluderer: 1x til 8x i trin af 1, 10x til 16x i trin af 2, 20x til 36x i trin af 4, 42x, til 60x i trin af 6 og faste forstørrelser på 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x og 4,5x. Du kan zoome ind og ud med Alle Zoomniveauer, Kun Favorit Zoomniveauer eller Kun heltals zoomniveauer.
- **Zoomvinduer.** ZoomText tilbyder en række zoomvinduer både til enkelte skærme og flere skærme opsætninger der gør at du kan indstille zoomvinduerne så de passer til dit behov.
- Avanceret Udglatning De to metoder til at udglatte på, xFont® og geometrisk udglatning, sikrer at tekst og grafik (inklusive fotografier) er skarpe og læsbare på alle zoomniveauer.
- Flere skærme indstillinger. ZoomText understøtter brug af flere skærme på dit system. ZoomText tilbyder MultiView tilstande MultiView Lokal og MultiView Global som giver mulighed for at du samtidig kan se flere programmer eller flere steder på samme tid i same program.
- Forbedre skærmfarverne. Den innovative farveforbedringsfunktion i ZoomText hjælper til at skærmen bliver lettere at læse. Specialeffekter inkluderer farvenuancer, to-farve tilstand og udskiftning af farver du har problemer med at se.
- Synlige mus og markører. Justering af farve, form og størrelse på mus og markøren gør det lettere at finde og følge dem på skærmen. Specielle søgere omkring mus og tekstmarkøren gør det let at finde dem på skærmen hvis man har tabt dem af syne.

- Fokusforbedringer. Fokusforbedringer gør det lettere at se og følge kontroller der kommer i fokus når du anvender tabulator eller piletaster til at bevæge rundt i menuer, dialoger, værktøjslinjer og andre programkontroller.
- **Glidende navigering.** Navigering i programmerne og rulle zoomvinduerne er altid helt glidende og behageligt at se på.
- Understøttelse af Touch skærm. ZoomText kan anvendes på Windows 10 og 8.1 med Touch skærm herunder tablet, laptop og desktop skærme. ZoomText følger med når du tapper, trækker og svipper på skærmen. Du kan også tilgå ZoomText funktionerne via ZoomText Touch ikonet og bevægelser.
 Bemærk: Dette kræver en 5-punkt eller større multi-Touch enhed. For yderligere information se Touch Screen understøttelse.
- **Søger.** Søgeren giver mulighed for hurtigt at finde, skimme og læse dokumenter, websider og e-mail. Du kan søge efter enkelte ord eller fraser i hele dokumenter eller kun i overskrifter, formularfelter og link.
- **ZoomText Kamera.** ZoomText Kamera giver mulighed for at forstørre trykt materiale og andre ting med et almindeligt HD web kamera.
- **Programindstillinger.** Gem dine egne ZoomText indstillinger for hvert program du anvender. Når du skifter mellem programmerne vil ZoomText automatisk indlæse og anvende netop de indstillinger som passer bedst til programmet i fokus.
- Windows Logon understøttelse. ZoomText gør det muligt både at have forstørrelse og skærmlæsning i Windows logon skærmen og sikker tilstand.

Magnifier/Reader funktioner

ZoomText Magnifier/Reader indeholder både skærmforstørrelse og skærmlæser så du både kan indstille den forstørrelse du har brug for og få læst teksten fra skærmen højt.

ZoomText Magnifier/Reader inkluderer alle funktioner i ZoomText Magnifier, samt:

- Komplet Skærmlæser. ZoomText læser automatisk alle kontroller og begivenheder mens du navigerer i dine programmer herunder menuer, dialogbokse, lister og beskeder. Du kan vælge mellem tre forskellige informationsniveauer som styrer hvor mange detaljer du får om elementet.
- AppReader. Med AppReader kan du læse tekst direkte i dit program eller hurtigt skifte til Tekstviser hvor du kan indstille hvordan teksten vises og derved opnår bedre læsbarhed af teksten. Du kan også læse mindre tekstenheder ved at markere dem med musen. Anvend AppReader Læs fra markør kommandoen til at starte AppReader oplæsningen fra det ord som musen peger på.
- Læsezoner. Læsezoner giver mulighed for hurtigt at se og lytte til teksten på bestemte steder i dit program. Du kan definere op til 10 zoner per program og du kan hente zonerne ved brug af en menu eller genveje.
- Komplet Internet tilgængelighed. ZoomText kan læse alle web sider højt i den korrekte rækkefølge. Du kan læse teksten højt automatisk eller manuelt per ord, linje, sætning eller afsnit.
- **Tekstnavigering.** Navigeringstaster gør det let at læse teksten mens du redigerer dokumenter. Med enkle kommandoer kan du læse tegn, ord linje sætning eller afsnit.
- **Tastaturekko.** Hvert tastetryk eller ord du skriver kan læses højt automatisk. Du kan vælge at få alle taster læst højt eller undlade grupper af taster.

- **Mus ekko.** Mus ekko læser automatisk den tekst som musen peger på. Enkelte ord eller hele linjer læses højt straks du peger på dem eller efter en kort pause.
- LæsDet værktøj. LæsDet værktøjet giver mulighed for at læse markerede områder på skærmen højt ved at klikke eller trække med musen.
- **Baggrund Læser.** Baggrund Læser giver mulighed for at læse dokumenter, websider, e-mail eller anden tekst højt mens du fortsætter med at arbejde med andre programmer.
- **ZoomText Optager.** ZoomText Optager giver mulighed for at du kan omdanne tekst dokumenter, web sider, e-mail og al anden tekst til lydfiler som du sener kan lytte til på din computer eller en bærbar enhed.
- Medfølgende stemmer i høj kvalitet. ZoomText Magnifier/Reader inkluderer et antal Vocalizer Expressive stemmer til de mest almindelige sprog.

Kom godt i gang med ZoomText

ZoomText tilbyder en lang række funktioner som dækker de forskellige behov. Dette emne giver et overblik over hvordan ZoomText arbejder sammen med en kvikguide for de vigtigste funktioner.

Hvordan virker ZoomText

For det meste arbejder ZoomText i baggrunden hvor den sikre at forstørrelse og oplæsning følger alle dine aktiviteter. Når du flytter musen, skriver tekst og navigerer i dine programmer vil ZoomText følge med i det forstørrede vindue. Anvender du ZoomText Magnifier/Reader vil du også få læst teksten højt når du skriver ligesom den brugerfladetekst som kommer i fokus læses højt. Alt dette sker automatisk så du kan tænke på ZoomText som din personlige hjælper på din computer.

ZoomText værktøjlinje

Layoutet er forenklet og forbedret så det er let at lære at anvende den nye ZoomText . Alle funktioner på værktøjslinjen er tilgængelige både med musen og fra tastaturet.



ZoomText værktøjlinje

Ved brug af piltasterne kan du navigere i og mellem ZoomText menuen, værktøjslinjen og knapper menuen. Når fokus er på en split knap vil et tryk på Enter skifte tilstand for denne funktion mens pil ned vil åbne den tilknyttede menu. Når fokus er Zoom niveau spin boksen (I Magnifier værktøjslinjen) eller Tempo spin boksen (på Læser værktøjslinjen) vil Pil op og ned ændre værdien og et tryk på Højre og venstre pil vil flytte fokus til næste eller forrige kontrol. I Zoomniveau spin boksen vil et tryk på Enter også skifte til 1x.

Indstilling af det forstørrede vindue

Idet det primære formål med ZoomText er at gøre skærmens indhold mere tydeligt ved at forstørre dele af den, vil første opgave være at vælge hvor meget skærmen skal forstørres. Her er den hurtige måde at justere dette.

For at forøge eller sænke forstørrelsesgraden

Hold Caps Lock tasten nede mens du trykker Pil op eller Pil ned.

For at skifte det aktuelle zoomniveau til 1x

Hold Caps Lock tasten nede mens du Enter tasten.

For at invertere lydheden på skærmen

Hold **Caps Lock** nede og tryk **C**.

Du kan læse alt om ZoomText visuelle funktioner og indstilinger i Kapitel 5—<u>Forstørrelse funktioner</u>.

Indstille ZoomText stemme og ekko funktioner

Når du anvender ZoomText Magnifier/Reader vil ZoomText læse alt højt som du foretager dig så læsetempo og ekko indstillinger skal justeres så ZoomText læser programaktiviteten på den måde som passer dig bedst. Dette inkluderer hvordan tastaturet læses højt når du skriver og hvordan ZoomText læser programaktiviteter som for eksempel menuer, dialogbokse og andre kontroller højt. Her er den hurtige måde at justere dette.

For at øge eller sænke læsetempoet

Hold Caps Lock + Alt nede og tryk Pil op eller Pil ned.

For at ændre tastatur ekko når du skriver

Hold **Caps Lock + Alt** nede og tryk **K**. Hvert tryk skifter tilstand mellem tegn, ord, tegn og ord eller intet.

For at justere detajleniveauet for program ekko

Hold **Caps Lock + Alt** nede og tryk **B**. Hvert tryk skifter tilstand mellem lav, mellem og høj. Lavt detaljeniveau læser så lidt som muligt om hvert element mens højt niveau giver så meget information som muligt.

Du kan læse alt om ZoomText visuelle funktioner og indstilinger i Kapitel 6—<u>Læser funktioner</u>.

Læsning af dokumenter, websider og e-mail.

Anvender du ZoomText Magnifier/Reader er der en ekstra funktion som du skal være opmærksom på og det er ZoomText AppReader. AppReader gør det let at læse dokumenter, websider og e-mail med enkle kommandoer. Du kan vælge hvor AppReader skal starte oplæsningen og lade den læse til slutningen af dokumentet. Du kan styrer oplæsning med pause og genoptag læsning eller skimme frem eller tilbage i teksten. Du kan også vælge at læse i App viser eller Tekstviseren. App viser læser direkte i programmet mens tekstviser åbner teksten i et særligt vindue hvor den vises i høj kontrast som linje eller side visning.

Den letteste måde at starte AppReader på er at udføre Læs fra mus kommandoen, Sådan virker det

For at starte AppReader ved brug af Start læser fra musen kommandoen

Placer musen på det ord hvor du vil starte oplæsningen og tryk så Læs fra mus genvejen: **Caps Lock + Alt + Venstre klik**

AppReader starter i den valgte tilstand og begynder at læse fra musens placering.

For at stoppe automatisk læsning

Tryk Enter eller klik med musen.

For at genoptage automatisk læsning

tryk Enter eller dobbeltklik der hvor du vil starte oplæsningen.

For at skimme teksten per sætning eller afsnit

Benyt højre pil eller venstre pil til at læse hhv. næste eller forrige sætning. Benyt pil op eller pil ned til at læse hhv. forrige eller næste afsnit.

• For at skifte mellem App Viser og Tekstviser

Tryk Tab.

For at afslutte AppReader

Højreklik eller tryk Esc.

Når AppReader afsluttes vil markøren automatisk stå på det sidste ord der blev læst højt i AppReader hvis applikationen har en tekstmarkør.

Du kan læse mere om AppReader in <u>AppReader</u> sektionen i Kapitel 6–Læser funktioner.

Slå ZoomText til eller fra og afslutte ZoomText

Selvom de fleste ZoomText brugere altid har ZoomText kørende og aktiveret kan der være tidspunkter hvor det er praktisk at slå ZoomText fra eller afslutte ZoomText helt. Du kan gøre dette på følgende måder

Slå ZoomText fra (og til igen)

Klik **på ZoomText** menuen og vælg **Deaktiver ZoomText** eller **Aktiver ZoomText**. Du kan også slå ZoomText til eller fra ved at holde **Caps Lock + Ctrl** nede og trykke **Enter**.

For at afslutte ZoomText

klik på ZoomText menuen og vælg Afslut ZoomText.

Næste trin

Den ovenstående beskrivelse er beregnet for at du kan komme i gang med at anvende ZoomText hurtigt. Der er mange flere gode funktioner som du med fordel kan læse mere om. Vi anbefaler derfor at du læser brugervejledningen for at lære mere om hvordan du kan anvende ZoomText.

Kapitel 2 Indstille ZoomText

Installer ZoomText på din computer i nogle få trin.

Denne sektion hjælper dig gennem de få trin der skal til for at installerer ZoomText.

- <u>Systemkrav</u>
- <u>Trin 1 Installer ZoomText</u>
- Trin 2 Start ZoomText
- Trin 3 Aktiver ZoomText
- Trin 4 Opdater ZoomText
- Installation af ekstra stemmer
- Anvend Opsætningsguide
- <u>Afinstaller ZoomText</u>

Systemkrav

Følgende hardware og software er mindstekrav for at kunne anvende ZoomText:

- Windows 10, 8.1 eller 7 med Service Pack 1 (eller nyere).
- Processor: 2 GHz i3 dual core processor eller lignende. i5 eller i7 anbefales.
- 4 GB Ram. 8 GB anbefales.
- Video/Grafik kort eller integreret grafikenhed med understøttelse af DirectX 10 eller nyere.
- 1,3 GB fri harddisk plads. SSD drive anbefales.
- 5-punkt multi-Touch display til Touch skærm understøttelse.
- USB 2.0 for ZoomText Kamera understøttelse.

Trin 1 - Installer ZoomText

Installation af ZoomText er enkelt og kan afsluttes i få trin.

For at installere ZoomText

- 1. Deaktiver virus-programmer og luk alle andre programmer.
- 2. Download ZoomText installationen eller indsæt ZoomText DVD skiven i drevet.

Kør ZoomText installationen eller kør Setup.exe fra DVD skiven.

Bemærk: Hvis du downloader ZoomText installationen skal denne startes ved at dobbeltklikke på den eller trykke Enter på den .

- 3. Følg instruktionerne for at gennemføre installationen.
- 4. Genstart Windows.

Bemærk: ZoomText installationen inkluderer systemkomponenter. For at disse komponenter kan installeres er det nødvendigt at have administrator rettigheder. Har du ikke det skal du kontakte din IT administrator.

Trin 2 - Start Zoomtext

Som standard vil installationsprogrammer indstille ZoomText til at starte automatisk sammen med Windows. Har du fravalgt dette under installationen skal du starte ZoomText manuelt.

For at starte ZoomText

Benyt en af følgende metoder

- I Windows Startmenuen vælges ZoomText {version}.
- På Windows skrivebordet dobbeltklikkes **ZoomText {version}** program ikonet.
- Tryk **Windows** + **K** for at åbne **Kør** prompten og skriv "ZT{version}" og tryk **Enter**.

Når ZoomText starter ændrer den din skærm så den indeholder et forstørret vindue af den normale skærm. Når du bevæger musen, skriver tekst og navigerer i dine programmer vil det forstørrede vindue følge med og vise det aktive område i vinduet. Hvis du har installeret ZoomText Magnifier/Reader vil ZoomText også kunne læse tekst højt og fortælle når der sker noget på skærmen. Alle dine Windows programmer vil virke normalt når ZoomTextkører.

Bemærk: Der kan tilknyttes en genvejstast til ZoomText program ikonet således det er muligt at starte ZoomText med en tastekommando. Tilføjelse af genveje til programikoner er en standard Windows funktion. Se Windows hjælpen for yderligere information om dette.

Trin 3 - Aktiver ZoomText

Licens Manager giver mulighed for at aktivere ZoomText via en Internet forbindelse. Aktiveringsprocessen starter automatisk når ZoomText startes.

Bemærk: Hvis du ikke har forbindelse til Internet kan du aktivere ZoomText via telefon eller ved at åbne www.fsactivate.com fra en anden computer der er forbundet til internet. For yderligere information om disse muligheder vælges Hjælp til aktivering når aktiveringsprocessen starter.

For at aktivere ZoomText via en Internetforbindelse benyttes en af følgende metoder:

- 1. I Aktivering dialog boksen vælges Start Aktivering.
- 2. Læs informationen på skærmen og anvend piltasterne til at vælge Internet (anbefalet) og tryk Enter.
- 3. Hvis din 20-cifret Autorisationskode ikke allerede vises skal den tastes ind i felterne. Autorisationskoden har du fået på email eller på tryk.
- Tryk på Enter for at fortsætte. Hvis du ikke allerede har forbindelse til Internet vil du blive gjort opmærksom på det. Opret venligst forbindelse til Internet og klik derefter Næste knappen.
- 5. Hvis du ikke allerede har registreret ZoomText vil du blive bedt om det. Registrering af ZoomText betyder du får adgang til teknisk support. Vælg Registrer nu og udfyld formularen. Du kan vælge at registrere senere men du skal registrere dig næste gang du starter ZoomText.
- 6. Efter du har registreret dig vil Licens Manager forsøge at aktivere ZoomText. Denne proces kan tage flere minutter. Når aktiveringen er afsluttet trykkes Afslut.

Bemærk: Hvis Internet Licens Manager ikke kan aktivere ZoomText skal du eventuel give licens manageren adgang i din firewall. Se Hjælp til aktivering for yderligere information.

Dongle autorisering

En dongle er en hardware enhed som du kan forbinde til en computer via en USB port. ZoomText kan anvendes på computeren sålænge ZoomText donglen er forbundet. Dette er nyttigt hvis du skal anvende ZoomText på mange forskellige computere og ikke kan aktiverer programmet på alle computerne.

Når ZoomText starter undersøger programmet om en dongle er forbundet til computeren. Hvis dette er tilfældet vil ZoomText anvende funktioner, information og licensen fra donglen. Såfremt ingen dongle bliver fundet vil ZoomText søge efter en software licens på computeren. Du kan anvende Dongle Viser værktøjet til at se information om licensen der ligger på donglen der aktuelt er koblet til din computer. For at starte Dongle viser værktøjet; I **ZoomText** menuen vælges **Licensadministration > Gennemse Værktøjer mappen** og dernæst **Dongle Viser**.

Dongler sælges særskilt eller som tilkøb til ZoomText. Kontakt din forhandler for at bestille en ZoomText Dongle.

Netværkslicens

Hvis du har en flerbruger netværkslicens skal din system administrator se www.fsactivate.com/network og downloade "network authorization tools" og "license server". Denne side beskriver også hvordan man indstiller licensserveren og hvordan netværkslicenserne aktiveres.

Trin 4 - Opdater ZoomText

ZoomText inkludere automatisk opdatering så du kan sikre at din ZoomText altid er fuldt opdateret. Derfor anbefales det at du lader automatisk opdatering være aktiveret. Vælger du at slå automatisk opdatering fra kan du selvfølgelig altid hente seneste opdatering manuelt.

Bemærk: det er nødvendigt med en Internet forbindelse for at anvende denne funktion.

For at aktivere og deaktivere automatisk opdatering

- 1. I **ZoomText** menuen vælges **Præferencer > Program**
- 2. Indstil Kontroller for online opdateringer hver gang ZoomText startes.
- 3. Klik **OK**.

For at anvende automatisk opdatering

• Når automatisk opdatering er valgt vil ZoomText automatisk kører opdateringsprogrammet som undersøger om der er nye opdateringer. Er der en opdatering tilgængelig vil opdateringsprogrammet hente og installere den. Klik **Ja** for at starte downloaden og installationen.

For at undersøge for opdateringer manuelt

• I ZoomText menuen vælges Licensadministration > Søg efter opdateringer

Opdateringsprogrammet åbnes og hjælper dig gennem processen.

Installation af ekstra stemmer

ZoomText Magnifier/Reader inkluderer et antal Vocalizer Expressive stemmer til de mest almindelige sprog. Når du installerer ZoomText vil både en mande- og en kvindestemme der passer til Windows brugerfladen blive installeret.

Du kan lytte til en prøve på ekstra stemmer ved at besøge stemme siden hos Freedom Scientific.

For at downloade ekstra Vocalizer Expressive stemmer

- 1. På **Læser** fanen klikkes på pilen ved siden af **Stemme** eller der navigeres til **Stemme** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Stemme menuen vælges Indstillinger.

Stemmeindstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Stemme** fanen.
- 4. Vælg Download ekstra stemmer...

Din web browser åbnes med Stemmesiden hos Freedom Scientific indlæst.

- 5. Følg instruktionerne på websiden for at downloade installationsprogrammer til de ønskede stemmer.
- 6. For hver download skal du dobbeltklikke på installationsprogrammet for at starte installationen.

Bemærk: ZoomText understøtter både SAPI 4 og SAPI 5 talesynteser.

Anvend Opsætningsguide

ZoomText Opsætningsguiden viser en række dialogbokse med få valgmuligheder så det er let at indstille de mest almindelige ZoomText funktioner så de passer bedst til brugeren. Opsætningsguiden kører automatisk så snart ZoomText er aktiveret. Opsætningsguiden kan køres når som helst mens ZoomText er startet op.

For manuelt at starte Opsætningsguiden

 I ZoomText menuen vælges Præferencer > Kør Opsætningsguide

Opsætningsguiden åbnes og hjælper dig gennem processen.

Bemærk: Disse indstillinger findes også i ZoomText Program Indstillinger dialog. For yderligere information se <u>Program</u> <u>indstillinger</u> i Kapitel 9–Præference indstillinger.

Afinstaller ZoomText

Hvis du ikke længere har behov for ZoomText på din computer kan du fjerne den.

For at fjerne ZoomText

- 1. Åben Windows Startmenuen.
- 2. I **Søgefeltet** skriv: Programmer og funktioner.
- 3. Tryk Enter.

Windows Programmer og funktioner appen åbnes og viser en liste over programmer som er installeret på dit system.

4. Vælg Freedom Scientific ZoomText {version} i listen og tryk Enter.

ZoomText afinstallationsprogrammet åbnes som hjælper dig gennem afinstallationen af ZoomText.

5. Følg instruktionerne for at gennemføre afinstallationen.

Kapitel 3 **Kør ZoomText**

ZoomText er et program ligesom alle andre på Windows og du kan starte og lukke det når du har behov for det. Du kan endda indstille ZoomText så det starter samme med Windows både på logon skærmen og når Windows er startet.

Får hurtigt at lære at anvende ZoomText anbefales det at læse <u>Få</u> <u>hjælp til ZoomText</u> (senere i dette kapitel). Dette afsnit er nyttigt at vende tilbage til hvis du har spørgsmål til brugen af ZoomText.

At administrere ZoomText og licensen er også vigtigt. Dette inkluderer at holde ZoomText opdateret og vide hvordan man overfører licensen hvis ZoomText skal afinstalleres.

- <u>Starte ZoomText</u>
- <u>Aktivere og deaktivere ZoomText</u>
- Anvend Caps Lock tasterne
- <u>Afslutter ZoomText</u>
- Få hjælp til ZoomText
- <u>Windows Logon og Fejlsikker tilstand understøttelse</u>

Starte ZoomText

Hvis ZoomText ikke er indstillet til at starte automatisk når Windows starter op kan du starte ZoomText manuelt på en af følgende måder.

For at starte ZoomText

Benyt en af følgende metoder

- På Windows skrivebordet vælges **ZoomText {version}** program ikonet.
- I Windows Startmenuen vælges ZoomText {version}.
- Tryk **Windows** + **K** for at åbne **Kør** prompten og skriv "ZT{version}" og tryk **Enter**.

Når ZoomText starter ændrer den din skærm så den indeholder et forstørret vindue af den normale skærm. Når du bevæger musen, skriver tekst og navigerer i dine programmer vil det forstørrede vindue følge med og vise det aktive område i vinduet. Hvis du har installeret ZoomText Magnifier/Reader vil ZoomText også kunne læse tekst højt og fortælle når der sker noget på skærmen. Alle dine Windows programmer vil virke normalt når ZoomText kører.

Bemærk: Når ZoomText kører kan du aktivere og deaktivere **Start ZoomText automatisk når Windows starter** indstillingen i Program indstillinger dialogen. For yderligere information se <u>Program</u> <u>indstillinger</u> i Kapitel 9—Præference indstillinger.

Aktivere og deaktivere ZoomText

Du kan aktivere og deaktivere ZoomText til enhver tid uden at afslutte ZoomText. Når du deaktiverer ZoomText vil skærmen vende tilbage til Windows normalvisning og al oplæsning stoppes.

For at deaktivere ZoomText

Benyt en af følgende metoder:

- Tryk ZoomText Til / Fra genvejen: Caps Lock + Ctrl + Enter
- I ZoomText menuen vælges Aktiver ZoomText eller Deaktiver ZoomText.

Tip! Hvis du ofte har behov for at deaktivere og aktivere ZoomText kan du overveje at anvende Zoom til 1x funktionen. For at læse mere se <u>Anvend Zoom til 1x</u> i Kapitel 4—Magnifier funktioner.

ZoomText Anvendelse af Caps Lock tasten

Caps Lock tasten anvendes i forbindelse med mange ZoomText kommandoer Disse kommandoer kræver at man holder Caps Lock tasten nede og dernæst trykker en eller flere bogstaver. Disse kommandoer ændrer ikke på Caps Lock tastens tilstand og Caps Lock tasten alene kan anvendes på samme måde som normalt.

Annoncering af Caps Lock tilstanden

Som standard annoncerer ZoomText ikke tilstanden for Caps Lock når dens tilstand ændres. Du kan indstille ZoomText så den annoncerer Caps Lock tilstanden på følgende måde:

- 1. På Læser fanen klikkes på pilen ved siden af **Tastatur** eller der navigeres til **Tastatur** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Tastatur menuen vælges Indstillinger.

Ekko indstillinger dialogboksen åbnes på Tastaturekko fanen.

- 3. I **Ekko når tasten trykkes ned** sektionen skal du indstille Låsetast check boksen.
- 4. Klik **OK**.

Afslutter ZoomText

Du kan lukke ZoomText til enhver tid. Når du lukker ZoomText vender skærmen tilbage til dens normale tilstand og al oplæsning stopper.

For at afslutte ZoomText

Benyt en af følgende metoder:

- I ZoomText menuen vælges Afslut ZoomText.
- Klik på Luk boksen i ZoomText bjælken.



Få hjælp til ZoomText

En lang række ZoomText funktioner og services er tilgængelige for at hjælpe dig til at få mest muligt ud af ZoomText. Herunder er en liste over disse og hvordan du finder dem.

- ZoomText brugervejledning. ZoomText leveres inklusive denne vejledning som dækker både ZoomText Magnifier og ZoomText Magnifier/Reader. De specielle ZoomText Magnifier/Reader er adskilt og lette at identificere. PDF udgaver af ZoomText vejledningen (på alle tilgængelige sprog) kan hentes fra <u>www.zoomtext.com/documentation</u>.
- ZoomText Hjælp. ZoomText Hjælp er den komplette ZoomText brugervejledning som er inkluderet i ZoomText installationen. ZoomText giver mulighed for hurtigt at finde information om det emne du søger. Du kan tilføje emner til en favoritliste. For at læse mere om hvordan du anvender ZoomText Hjælp se <u>Anvende ZoomText Hjælp</u> nedenfor.
- Værktøjslinje værktøjstip. Når du flytter musen til en kontrol i ZoomText værktøjslinjen vises et værktøjstip som indeholder navn, beskrivelse og den tilknyttede genvej for kontrollen. Dette er en hurtig måde at lære funktionerne og deres genveje at kende. Det er muligt at slå værktøjstip fra - se <u>Anvende</u> <u>Værktøjslinje værktøjstip</u> nedenfor.
- Online ressourcer. Online ressourcer er altid tilgængelige uanset om du søger opdateringer, produktaktivering eller andre webinar. Du kan læse mere på <u>www.zoomtext.com/help</u>.
- Teknisk hjælp. ZoomText support (på engelsk) har åbent på telefonen mandag til fredag, 9 til 17 Eastern Time. Ring på +1-727-803-8600.

Anvende ZoomText Hjælp

Du kan åbne ZoomText Hjælpen når du har startet ZoomText.

For at åbne ZoomText Hjælpen

Fra ZoomText værktøjslinjen, benyt en af følgende metoder:

- Tryk **F1** tasten.
- I ZoomText menuen vælges Hjælp og undervisning > ZoomText Hjælp.
- I en ZoomText dialogboks klikkes **Hjælp** knappen der vises i nederste højre hjørne af dialogboksen. Dette åbner hjælpen til den aktuelle dialogboks og funktion.

ZoomText 11 Hjælpen åbnes.

For at anvende ZoomText Hjælpen

I Hjælp vinduet klikkes på en af følgende faner:

- Indhold. Her kan du vælge det emne du er interesseret i.
- Indeks. Indeks over hjælpens indhold.
- **Søg**. Her kan du søge efter et ord eller en frase.

Bemærk: Alle ZoomText dialogbokse indeholder en Hjælp knap som åbner hjælpen som omhandler netop denne dialogboks.

Anvende ZoomText værktøjslinje værktøjstip

Du kan aktivere eller deaktiver værktøjstip efter behov.

For at aktivere eller deaktiver Værktøjslinje værktøjstip

 Fra ZoomText værktøjslinjen vælges ZoomText > Præferencer > Brugerflade.

Præferencer dialogboksen åbnes på Brugerflade fanen.

- 2. Vælg eller fravælg Vis værktøjstip for kontroller på båndet.
- 3. Klik **OK**.

Windows Logon og Fejlsikker tilstand understøttelse

ZoomText sikker tilstand tilbyder basal forstørrelse og skærmlæsning i sikker tilstand. ZoomText sikker tilstand giver mulighed for at zoome ind og ud, invertere skærmfarverne og aktivere oplæsningen så du får kontrollerne læst højt.

ZoomText sikker tilstand aktiveres efter behov under **Aktiver ZoomText i Windows logon** i ZoomText Program Præferencer dialogboksen. Se <u>Aktiver eller deaktiver ZoomText i Windows logon</u> nedenfor.

ZoomText Sikker tilstand værktøjslinjen

Når Aktiver ZoomText i Windows logon er aktiveret vil ZoomText sikker tilstand åbnes når Windows står i logon billedet eller i sikker tilstand. Denne værktøjslinje tilbyder de ZoomText funktioner som kan anvendes i sikker tilstand.



ZoomText Sikker tilstand værktøjslinjen

• **ZoomText knap**. Aktivere eller deaktivere ZoomText. Når ZoomText er deaktiveret vil forstørrelse og skærmlæsning være slået fra uden at ZoomText er lukket ned.

Genvej: Caps Lock + Ctrl + Enter

• Zoom Niveau. Indstiller forstørrelsesgraden mellem 1x og 36x.

Genvej: Caps Lock + Pil op / Caps Lock + Pil ned

• Inverter. Aktivere eller deaktivere farve invertering.

Genvej: Caps Lock + C
• Stemme. Aktivere eller deaktivere ZoomText stemmen.

Genvej: Caps Lock + Alt + Enter

Bemærk: ZoomText sikker tilstand indstillingerne gemmes automatisk når Windows afslutter sikker tilstand eller logger ind.

Aktivere og deaktivere ZoomText sikker tilstand

ZoomText sikker tilstand indstilles under Aktiver ZoomText i Windows logon i ZoomText Program Præferencer dialogboksen.

For at aktivere og deaktivere ZoomText sikker tilstand

1. I **ZoomText** menuen vælges **Præferencer > Program**.

Program præferencer dialogboksen åbnes på Program fanen.

2. Vælg eller fravælg **Aktiver eller deaktiver ZoomText i Windows logon.**

Bemærk: Du skal være logget ind med administrator rettigheder for at kunne ændre denne indstilling. Hvis du ikke er logget ind med administrator rettigheder er denne indstilling deaktiveret (grå).

3. Vælg OK.

Præferencer				×
Program	Brugerflade	Udglatning		
Logon Unders	støttelse			
Aktive	er ZoomText i Wir	ndows logon)		
Indstillinger fr	ra start			
Start	ZoomText <u>a</u> utom	atisk når Windov	ws starter	
Start	ZoomText med <u>m</u>	inimeret værktø	ijslinje	
Vis "⊻	elkommen" vindu	et när ZoomText	t starter	
✓ Vis en	n ZoomText ikon p	oå skrivebordet		
Afslut Indstilli	inger —			
🗌 gem 2	ZoomText indstillir	nger automatisk	når det lukkes	
Spørg før ZoomText lukkes				
🗹 Udlæs forstørrelsesprocesserne når ZoomText lukkes				
Automatisk oj	pdatering ——			
<mark>⊠ K</mark> ontr	oller for online op	dateringer hver	gang ZoomText starte	es
Fejlrapporter	ing			
Send	ZoomText fejl til	Freedom Scientil	fic via Internet	
		OK	Annuller	Hjælp

Program fanen

Indstillinger	Beskrivelse	
Logon Understøttelse		
Aktiver ZoomText i Windows logon	Kører ZoomText sikker tilstand i Windows logon skærmen og i andre Windows sikker tilstand skærme.	

Kapitel 4 ZoomText brugerfladen

ZoomText brugerfladen giver adgang til en række funktioner fordelt på ZoomText værktøjslinjen, Kommandotaster og Touch skærm.

Den mest almindelige måde at anvende ZoomText på, er via **ZoomText værktøjslinjen**, hvor der er adgang til alle funktioner og indstillinger gennem kontroller, menuer og dialogbokse som er lette at anvende. ZoomText brugerfladen kan anvendes fuldt ud fra tastaturet, musen og Touch skærm.

Det er nyttigt at lære sig nogle af de almindelige ZoomText **Kommandotaster** hvorigennem du kan tilpasse og anvende ZoomText uden at skulle skifte væk fra dit program og ind i ZoomText værktøjslinjen. Det er ikke nødvendigt at lære alle kommandoer at kende men de funktioner som du ofte får brug for vil være nyttige at kunne.

Anvender du en Touch skærm kan du også udføre ZoomText kommandoer via Touch kommandoer.

- <u>ZoomText værktøjslinje</u>
- <u>Kommandotaster</u>
- <u>Touch skærm understøttelse</u>

ZoomText værktøjslinje

Når du starter ZoomText vil ZoomText værktøjslinjen åbnes. ZoomText værktøjslinjen indeholder alle kontroller som styrer ZoomText og de er ordnet i ZoomText menuen samt i flere værktøjsfaner. Hver fane indeholder knapper som udfører funktionen eller ændre tilstand for en funktion. Mange af disse knapper er split knapper som giver mulighed for at skifte tilstanden for funktionen og åbne en menu med tilknyttede indstillinger. Knapperne er grupperet i kategorier og har intuitive ikoner som etiketter så de er lette at finde.



ZoomText værktøjslinje

- **ZoomText** menuen. Viser ZoomText menuen hvor du kan slå ZoomText til og fra, åbne ZoomText hjælp, gemme og indlæse konfigurationer anvende forskellige værktøjer med mere.
- **Magnifier** værktøjslinje fanen Viser værktøjer til ZoomText forstørrelsen.
- Læser værktøjslinje fane Viser værktøjer til ZoomText skærmlæser funktion.
- **Værktøjer** værktøjslinje fane Viser værktøjer til ZoomText Søger, Kamera og Optage funktioner.

Bemærk: Læser fanen vises kun hvis du anvender ZoomText Magnifier/Reader.

Anvendelse af ZoomText værktøjslinjen fra tastaturet

ZoomText værktøjslinjen kan anvendes fuldt ud fra tastaturet ved hjælp af de almindelige Windows kommandoer. Værktøjslinjen kan anvendes ved hjælp af piletaster og Enter tasten. ved at anvende piletasterne kan du navigere ind og ud af ZoomText menuen, faner, kontroller og knapmenuer. Når fokus er på en split knap vil et tryk på Enter skifte tilstand for denne funktion mens pil ned vil åbne den tilknyttede menu. Når fokus er Zoom niveau spin boksen (i Magnifier værktøjslinjen) eller Tempo spin boksen (på Læser værktøjslinjen) vil Pil op og ned ændre værdien og et tryk på Højre og venstre pil vil flytte fokus til næste eller forrige kontrol. I Zoomniveau spin boksen vil et tryk på Enter også skifte til 1x.

Minimer og gendan værktøjslinjen

ZoomText værktøjslinjen kan minimeres (skjult) og gendannet (åbnes) uden at det påvirker ZoomText.

For at minimere ZoomText

Benyt en af følgende metoder

- Klik på ZoomText titelbjælken og klik på Minimer knappen.
- Med ZoomText værktøjslinjen i fokus, tryk Esc.

For at gendanne ZoomText

Benyt en af følgende metoder

- Klik på Vis ZoomText Brugerflade knappen i statuslinjen.
- tryk Vis brugerflade genvejen: Caps Lock + Ctrl + U.

Bemærk: Hvis ZoomText værktøjslinjen allerede er åbnet men ikke i fokus vil gendan kommandoen bringe den i fokus.

Kommandotaster

ZoomText Kommandotaster giver mulighed for at styre hvordan ZoomText virker uden at skulle ind i værktøjslinjen og skifte væk fra det program du arbejder i. Ved at anvende kommandotasterne kan du arbejde hurtigere og være mere produktiv i alle dine programmer.

- Typer af kommandotaster
- <u>De vigtige ZoomText genveje</u>
- Kommando dialogboksen
- Kommandotaster
- Løse genvej konflikter

Typer af kommandotaster

ZoomText tilbyder to typer kommandoer; genveje og kommandotaster.

• **Genveje** er hurtigst at anvende fordi de udfører en funktion i et tastetryk. Genveje udføres ved at holde en eller flere kombinationstaster nede mens der trykkes en primær tast. Du kan for eksempel slå ZoomText til eller fra ved at holde Caps Lock tasten nede mens du trykker på Enter. Denne genvej vises som **Caps Lock + Ctrl + Enter** i ZoomText brugerfladen og i dokumentationen. Genveje til de andre ZoomText kommandoer vises i samme format som denne.

Bemærk: Nogle programmer kan have anvendt en eller flere af de samme genveje som ZoomText har defineret. Når dette sker, vil ZoomText få leveret genvejen først og udføre den tilsvarende ZoomText funktion og programmet du arbejder i ser ikke genveje kommandoen. For at løse dette problem skal du se i afsnittet Løse genvej konflikter.

 Kommandotaster er ikke sår hurtige at udføre som genveje men de har den fordel at de aldrig er i konflikt med andre programmers genveje kommandoer og er lettere at udføre hvis du har nedsat funktion i hænder eller fingre. Kommandotaster udføres ved en følge af tastetryk som (1) starter kommandotast tilstanden og (2) vælger en kommando gruppe hvorefter (3) selve funktionen udføres ved at trykke et bogstav. Som i eksemplet ovenfor kan du slå ZoomText til eller fra med kommandotaster ved at (1) trykke Caps Lock + Mellemrum for at gå i kommandotast tilstand (2) trykke P for at gå i Program gruppen og dernæst (3) trykke Enter for at slå ZoomText til eller fra. Denne kommandotast skrives som Caps Lock + Mellemrum, P, Enter i brugerfladen og dokumentationen. Kommandotaster til de andre ZoomText kommandoer vises i samme format som denne.

Bemærk: Idet genveje anbefales fremfor kommandotaster vil disse kun forekomme i ZoomText dokumentationen hvor der

ikke findes en tilsvarende genvej. For at se en komplet liste over kommandotaster skal du åbne ZoomText kommandotaster dialogboksen eller se <u>ZoomText kommandoer</u> sektionen i dokumentationen.

Tip! Til hver ZoomText kommando vil genvejen og kommandotasten anvende samme bogstav (den primære tast) til at udføre kommandoen.

Tip! Anvender du ZoomText Magnifier/Reader så kan du trykke et spørgsmålstegn når du er i kommandotast tilstand for at høre en liste over de tilgængelige kommandoer. Du kan også trykke F1 for at afslutte kommandotast tilstanden og åbne hjælpesystemet og se listen der.

De vigtige ZoomText genveje

For at kunne anvende ZoomText sammen med dine programmer er det nyttigt at lære de vigtigste genveje at kende. Disse genveje giver dig mulighed for at justere og håndtere de mest anvendte funktioner og indstillinger uden at skulle skifte væk fra dit program.

Bemærk: Kommandoer som er specifikke for hver funktion og indstilling er placeret under forskellige emner i ZoomText dokumentationen. Du finder en komplet liste over genveje i <u>ZoomText kommandoer</u> sektionen og <u>Kommandotaster dialogboksen</u>.

Vigtige kommandoer	Genveje	
Globale ZoomText kommandoer		
Start ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + Z	
Slår ZoomText Til / Fra	Caps Lock + Ctrl + Enter	
ZoomText brugerfladen	Caps Lock + Ctrl + U	
Forstørrelseskommandoer		
Zoom ind	Caps Lock + Pil op	
Zoom ud	Caps Lock + Pil ned	
Zoom til 1x (skift)	Caps Lock + Enter	
Rul op	Caps Lock + Shift + Pil op	
Rul ned	Caps Lock + Shift + Pil ned	
Rul til venstre	Caps Lock + Shift + Venstre pil	
Rul til højre	Caps Lock + Shift + Højre pil	
Farvefremhævning	Caps Lock + C	
Læser kommandoer (kun i ZoomText Magnifier/Reader)		
Tale Til / Fra	Caps Lock + Alt + Enter	

Læsetempo hurtigere	Caps Lock + Alt + Pil op
Læsetempo langsommere	Caps Lock + Alt + Pil ned
Detaljer (program ekko)	Caps Lock + Alt + B
Tastaturekko fanen	Caps Lock + Alt + K
Start AppReader fra mus	Caps Lock + Alt + Venstreklik
Start App Viser	Caps Lock + Alt + A
Start Tekstviser	Caps Lock + Alt + T
Start LæsDet værktøjet	Caps Lock + Alt + S

Kommandotaster dialogboksen

ZoomText kommando dialogboksen viser en liste over alle ZoomText kommandoer og giver mulighed for at ændre genvejene for hver kommando. Du kan hurtigt finde en kommando eller kommando gruppe ved at søge efter navn, genvej eller status. Du kan ændre, fjerne og aktivere/deaktivere genveje efter behov som beskrevet nedenfor. Du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på en kolonne i listen.

Bemærk: Hurtigtaster har faste bogstaver tilordnet og disse kan derfor ikke ændres.

For at åbne ZoomText kommandoer dialogboksen

 På ZoomText værktøjslinjen vælges ZoomText > Kommandotaster.

ZoomText kommandotaster				×
Skriv navnet på de	n kommando eller de t	aster du søger efter.		
ZoomText <u>k</u> ommandotaster:				
Genvej	Kommandotast	Genvej	Genvej Status	^
AppReader: Start App viser	A,A	Caps Lock + Alt + A	Slået til	
AppReader: Start AppReader	A,R	Caps Lock + Alt + R	Slået til	
AppReader: Start AppReader fra musen	A,Venstre klik	Caps Lock + Alt + Venstre klik	Slået til	
AppReader: Start LæsDet værktøjet	A,S	Caps Lock + Alt + S	Slået til	
AppReader: Start Tekstviser	A,T	Caps Lock + Alt + T	Slået til	
Kommandotast: AppReader kommandoer	A	Ingen	Ikke tildelt	
Kommandotast: Forstørrelse Kommandoer	Μ	Ingen	Ikke tildelt	
Kommandotast: Kommando tilstand valg		Caps Lock + Mellemrumstast	Slået til	
Kommandotast: Læs kommandoer	γ	Ingen	Ikke tildelt	
Kommandotast: Læser kommandoer	R	Ingen	Ikke tildelt	
Kommandotast: Program kommandoer	Р	Ingen	Ikke tildelt	
Kommandotast: Scroll kommandoer	S	Ingen	Ikke tildelt	×
Kommando: Start App viser				
Beskrivelse: Starter AppReader i App viseren.				
Iildel Hurtigtast Deaktiver valgte genveje				
Importer Genveje Nulstil markerede genveje	•			
Tilknyt konfigurationsfil Banner indstillinger		ОК	Annullér <u>H</u> jælp)

ZoomText Kommandotaster dialogen åbnes.

ZoomText kommandotaster dialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Søg	Giver mulighed for at søge og filtrere listen over kommandoer ved at skrive kommandonavnet, taster eller status du leder efter.
ZoomText kommandotaster	Viser en komplet eller filtreret liste over ZoomText kommandotaster. Du kan sortere alfabetisk i hver kolonne ved at klikke på kolonneoverskriften.
Tildel genvej	Åbner Tildel genvej dialogboksen hvor du kan tildele eller ændre tastekombinationerne for en kommando genvej.
Importer genveje	Åbner Importer genveje dialogboksen hvor du kan finde og vælge en ZoomText konfigurationsfil hvorfra du kan importere genveje.
Tildel konfigurationsfil	Åbner tildel konfiguration dialogboksen hvor du kan lede efter og vælge en eksisterende ZoomText konfigurationsfil for at anvende Indlæs konfiguration kommandoen. <i>Bemærk:</i> Tildel konfigurationsfil knappen er kun tilgængelig når en Indlæs konfiguration kommando er valgt.
Aktiver markerede genveje	Aktiverer de genveje der er markeret og deaktiveret ZoomText kommandotaster listen.
Nulstil markerede genveje	Nulstiller de markerede genveje i ZoomText kommandotaster listen til standardindstillingen.
Banner indstillinger	Åbner Kommandotaster banner indstillinger dialogboksen hvor du kan aktivere eller deaktivere banneren og konfigurere udseendet og lyd beskederne for banneren.

Vise og administrere kommandotaster

- For at søge, filtrere og sortere listen over kommandoer
 - 1. Klik i **Søg** feltet eller tryk **Tab** tasten for at flytte fokus til **Søg** feltet.
 - 2. Skriv det kommandonavn, taster eller status du leder efter og tryk **Enter.**
 - 3. Klik på kolonneoverskriften for at sortere listen som ønsket.

For at aktivere eller deaktivere genveje for en eller flere kommandoer

- 1. Marker de kommandoer du vil aktivere eller deaktivere.
- 2. Klik **på Aktiver markerede genveje** knappen eller **Deaktiver markerede genveje** knappen.

For at nulstille genveje for en eller flere kommandoer til standarden

- 1. Marker de kommandoer du vil nulstille.
- 2. Klik på Nulstil markerede kommandoer knappen.

For at tildele en ny tastekombination til en genvej

- 1. Marker den kommando du vil tildele en ny eller ændre genveje for.
- 2. Vælg Tildel genvej knappen.

Tildel genvej dialogboksen åbnes.

3. Vælg de ønskede kombinationstaster og en primær tast.

Hvis den valgte kombination allerede er i brug vil du få en "TASTE KONFLIKT!" advarsel med mulighed for at deaktivere genvejen eller gemme genvejen og tildele den genvej der er i konflikt en ny genvej.

4. Klik **OK**.

- For at importere genveje fra en anden konfigurationsfil

1. Vælg Importer genveje knappen.

Importer genveje dialogboksen åbnes og viser en liste over ZoomText konfigurationsfiler.

- 2. Vælg en konfigurationsfil fra listen eller anvend gennemse for at åbne filen fra en anden mappe.
- 3. Klik **OK.**

For at tildele en konfigurationsfil til en Indlæs konfiguration kommando

- 1. Vælg **ZoomText: Indlæs konfiguration** kommandoen.
- 2. Vælg Tildel konfigurationsfil knappen.

Tildel konfigurationsfil dialogboksen åbnes. Den aktuelle tildeling til Indlæs konfigurationsfil kommandoen vises.

3. Vælg Gennemse og vælg en konfigurationsfil knappen.

Gennemse og vælg en konfigurationsfil dialogboksen åbnes og viser en liste over ZoomText konfigurationsfiler.

- 4. Vælg en konfigurationsfil fra listen eller anvend gennemse for at åbne en konfigurationsfil fra en anden mappe.
- 5. Klik **OK**.

Kommandotaster banner

Når du åbner Kommandotaster tilstanden vil en banner blive vist så du let kan se at Kommandotaster tilstanden er aktiveret og hvilken tilstand du er i. Du kan tilpasse bannerens udseende i Kommandotaster banner indstillinger dialogboksen. Du kan aktivere eller deaktivere banneren og vælge størrelse, farve og placering af banneren. Lyd beskeder indikerer også når kommando tilstanden er aktiv. Du kan aktivere eller deaktivere lydbeskeder samt vælge typen og lydstyrke for lyd beskederne.

For at åbne Kommandotaster banner indstillinger dialogboksen

1. På ZoomText værktøjslinjen vælges **ZoomText > Kommandotaster.**

ZoomText Kommandotaster dialogen åbnes.

2. Vælg Banner indstillinger knappen.

Kommandotaster banner indstillinger dialogen åbnes.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Kommandotaster Banner Ind	stillinger		×
✓ Viser Kommandotaster	banneren (med Kom	nmandotaster aktiveret)	
Vindue <u>s</u> tørrelse:	Middel	~	
Vindue <u>f</u> arve:	Sort	~	
Vindue <u>p</u> lacering:	Top på skærm	¥	
✓ <u>R</u> ul bannertekst som er bredere end skærmen			
🔄 <u>A</u> fspil kommandotast I	ydbeskeder (når kom	imandotaster er aktiveret)	
Brug disse <u>l</u> yde:	Lyd indstilling 4	~	
Lyd effekt <u>v</u> olume:	Mellem Volume	~	
	ОК	Annullér Hjælp	

Kommandotaster banner indstillinger dialogen.

Indstillinger	Beskrivelse
Viser Kommandotaster banneren (med Kommandotaster aktiveret)	Viser en banner med den aktuelle tilstand øverst eller nederst på skærmen når funktionstast tilstand er aktiv. Banneren viser at tilstanden er aktiveret.
Banner størrelse:	Indstiller bannerens størrelse.
Banner farve:	Indstiller bannerens farve.
Banner placering:	Indstiller om banneren skal vises øverst eller nederst på skærmen.
Rul bannertekst der er bredere end skærmen.	Når teksten i banneren er bredere end skærmen vil teksten rulle fra side til side så den kan læses.
Afspil kommandotast lyd beskeder (når kommandotaster er aktive).	Afspil en lyd besked når kommandotast banneren er aktiv. Lyd beskeder indikerer også når denne tilstand er aktiv.
Anvend disse lyde:	Vælg typen af lyd der skal afspilles.
Lyd besked lydstyrke:	Vælg lydstyrken som lyden skal afspilles med.

Løse genvej konflikter

Der kan være situationer hvor en ZoomText genvej anvender samme tastekombinationer som et andet program hvorved der opstår en konflikt. Når dette sker, vil ZoomText modtage kommandoen først og programmet ser kommandoen. For at undgå dette problem kan man gøre følgende:

Metode 1: Anvend Send næste genvej igennem kommandoen

- Før du anvender kommandoen som du vil have at dit program modtager, skal du trykke ZoomText kommandoen Send næste genvej igennem på en af disse måder:
- Genvej: Ctrl + Alt + Shift + P
- Kommandotaster: Caps Lock + Mellemrum, U, P

ZoomText lader næste kommando slippe igennem til det aktive program.

Metode 2: Anvend ZoomText kommandotaster i stedet for genvejen

ZoomText kommandotaster er fri for konflikter med andre programmer.

Metode 3: Ændre eller deaktiver genvejen i ZoomText.

• Følg instruktionerne i <u>Kommandotaster dialogen</u>.

Touch skærm understøttelse

ZoomText kan anvendes på Windows 10 og 8.1 med Touch skærm herunder tablet, laptop og desktop skærme. Det betyder at du kan anvende alle funktioner i ZoomText og dine programmer med Touch skærm bevægelser; fx tap og svippe som du udfører med en eller flere fingre. ZoomText reagerer kun på de Touch bevægelser der er beregnet for den og fungerer på samme måde som tilsvarende tastatur og muse kommandoer. Du kan også anvende ZoomText brugerfladen (værktøjslinjer, menuer og dialoger) med samme standard bevægelser, som du ville anvende til alle andre programmer.

For at lære mere om at anvende Windows og dine programmer med Touch skærm skal du læse Windows hjælpen eller se Microsoft Windows websiden.

Bemærk: Du skal have en Windows enhed som mindst understøtter 5-finger bevægelser. Sådanne enheder har "Designed for Windows" logoet.

- <u>Anvende ZoomText på en Touch skærm</u>
- <u>Anvende ZoomText Touch ikon</u>
- <u>Adgang til ZoomText funktioner med Touch bevægelser</u>

Anvende ZoomText på en Touch skærm

Der er nogle få men vigtige koncepter, adfærd og teknikker som er nødvendige at kende til når en Touch skærm anvendes.

- Mange programmer tilbyder zoom og panorering i dokumenter som vises. ZoomText ligger et ekstra forstørrelseslag og panorering på dette som kan forårsage forvirring hvis begge metoder anvendes samtidigt. For at undgå dette anbefales det kun at anvende en forstørrelsesmetode af gangen.
- Anvendelse af en Touch skærm alene kræver brug af et skærmtastatur. Når ZoomText anvendes vil skærmtastaturet ikke være fuldt synligt så det er nødvendigt at panorere for at se alle taster. Dette sænker din skrivehastighed og produktivitet. Derfor anbefales det at anvende et eksternt tastatur når du skal skrive meget.

Anvende ZoomText Touch ikon

ZoomText tilbyder et særligt ZoomText Touch ikon som giver adgang til ZoomText funktioner med Touch bevægelser. Denne funktion inkluderer zoom ind og ud, rulle det forstørrede vindue og anvende ZoomText AppReader og LæsDet værktøj. Sådan virker det:

Som standard installeres ZoomText på en computer med Touch skærm sådan at ZoomText Touch ikonet vises i kanten af skærmen. Dette ikon forbliver synlig også selvom du zoomer ind og ud eller ruller det forstørrede vindue. Du kan placere ikonet andre steder i kanten af skærmen. Dette giver mulighed for at du kan placere ikonet så det ikke dækker over elementer du har behov for at se.

Bemærk: Anvend ZoomText Touch ikonet og tilhørende bevægelser kræver en 5-punkt (eller mere) multi-Touch skærm.

ZoomText Touch ikonet har to tilstande: Windows Touch tilstand og ZoomText Touch tilstand.

• Windows Touch tilstand sender alle Touch bevægelser til Windows og programmer som er åbne på samme måde som hvis ZoomText ikke var startet op. Denne tilstand er nyttig når du skal arbejde med Windows eller andre programmer end ZoomText med Touch kommandoer uden at skulle tænke på at nogle kommandoer også er anvendt i ZoomText. Når Windows Touch tilstand er aktiveret vil ikonet vises som en gruppe af Windows Start skærm fliser med en pegefinder i bunden.



• ZoomText Touch tilstand sender alle Touch bevægelser til ZoomText. Denne tilstand er nødvendig når du vil styre ZoomText med Touch kommandoer. Når ZoomText Touch tilstand er aktiveret vil ikonet vises som et ZoomText logo med en pegefinder i bunden. Ikonet vil også pulsere så du ved at ZoomText Touch tilstand er aktiv.



Aktivere og anvende ZoomText Touch ikonet

I denne sektion beskrives ZoomText Touch ikon funktionerne.

For at aktivere eller deaktiver ZoomText Touch ikon

I ZoomText menuen vælges Touch Screen understøttelse > Aktiver Touch Ikon.

Når aktiveret vil Touch ikonet vises i en af kanterne af skærmen. Ikonet er skjult hvis det er deaktiveret. Bemærk: Touch ikonet er også skjult når ZoomText er deaktiveret.

For at ændre størrelsen på Touch ikonet

I ZoomText menuen vælges Touch Screen understøttelse > Touch Ikon størrelse {størrelse}.

Touch ikonet justeres som indstillet her.

For at ændre farveskema på Touch ikonet

I ZoomText menuen vælges Touch Screen understøttelse > Touch Ikon Farve {farve}.

Touch ikonet justeres som indstillet her.

For at flytte Touch ikonet til et andet sted på skærmen

Tryk og hold en finger på ikonet og træk det til den ønskede position på en af skærmkanterne.

Når du løfter fingeren fra skærmen låser ikonet automatisk til det nærmeste anker punkt.

For at skifte mellem Windows Touch tilstand og ZoomText Touch tilstand

Dobbelt tap Touch ikonet med en finger.

Når Windows Touch tilstand er aktiveret vil ikonet vises som en gruppe af Windows Start skærm fliser. Når ZoomText Touch tilstand er aktiveret vil ikonet vises som et ZoomText logo.

Tip! Du kan skifte tilstand midlertidigt ved at holde en finger på ikonet. Når du løfter din finger vil den forrige tilstand aktiveres igen. Det betyder at når Windows Touch tilstand er aktiv så kan du midlertidigt skifte til ZoomText Touch tilstand for at sende en Touch kommando til ZoomText og vende tilbage til Windows Touch tilstand når du løfter fingeren igen. Omvendt betyder det at når ZoomText Touch tilstand er aktiv så kan du midlertidigt skifte til Windows Touch tilstand for at sende en Touch kommando til Windows Touch tilstand for at sende en Touch kommando til Windows og vende tilbage til ZoomText Touch tilstand når du løfter fingeren igen.

Adgang til ZoomText funktioner med Touch bevægelser

I denne sektion beskrives hvordan du anvender ZoomText Touch ikonet og bevægelser for at åbne og styre ZoomText funktionerne. Du skal huske at Touch ikon skal være i ZoomText Touch tilstand før du anvender disse bevægelser.

For at åbne ZoomText brugerfladen.

Dobbelt tap med fire fingre.

For at indstille forstørrelsesgraden (zoome ind eller ud).

Dobbelt tap og hold tre fingre, og træk dernæst op for at zoome ind eller ned for at zoome ud.

For at rulle det forstørrede vindue

Træk tre fingre for at flytte rundt på skærmen.

• For at justere størrelsen og placeringen af et zoomvindue

 På Magnifier værktøjslinje fanen vælges Vindue > Zoomvindue justeringsværktøj.

Justeringsværktøjet åbnes og justeringshåndtag vises på zoomvinduet.

- 2. For at ændre størrelse på vinduet holdes en finger på et af håndtagene på rammen hvorefter det kan trækkes indtil størrelsen er som ønsket.
- 3. For at flytte vinduet holdes en finger indenfor vinduet hvorefter det kan trækkes til ny placering.
- 4. For at lukke justeringsværktøjet dobbelt tappes med tre fingre.

For at anvende Visning tilstand

1. Dobbelt tap med tre fingre.

Forstørrelsen slår midlertidigt fra så du kan se feltsøgeren.

- 2. For at flytte et visningsvindue holdes en finger indenfor vinduet hvorefter det kan trækkes til den ønskede placering.
- 3. For at afslutte visningsvindue tilstand og flytte til det nye visningsvindue dobbelt tappes med én finger.
- 4. For at afslutte visningsvindue tilstand og flytte til det forrige visningsvindue dobbelt tappes med tre fingre.

For at anvende LæsDet værktøjet

1. På Læser værktøjslinjen vælges LæsDet.

LæsDet værktøjet åbnes og justeringshåndtag vises på zoomvinduet.

- 2. For at læse et enkelt ord tappes på ordet.
- 3. For at læse en samling af ord trækkes der diagonalt med én finger for at markere de ord du ønsker at få læst højt Når du løfter fingeren vil al markeret tekst blive læst højt.
- 4. For at lukke LæsDet værktøjet dobbelt tappes med tre fingre.

For at anvende AppReader

- 1. Åben dokumentet, websiden eller e-mailen som du vil læse.
- 2. Start AppReader på en af følgende måder:
 - For at starte oplæsning på et ord: Dobbelt tap med én finger på ordet hvor oplæsningen skal starte.
 - For at starte oplæsning fra tekstmarkørens placering dobbelt tappes med to fingre.

AppReader begynder at læse.

3. For at starte og stoppe oplæsningen eller navigere ord-for-ord, sætningsvis eller per afsnit anvendes AppReader Læse bevægelserne i tabellen nedenfor. 4. For at læse en samling af ord trækkes der diagonalt med én finger for at markere de ord du ønsker at få læst højt.

Når du løfter fingeren vil al markeret tekst blive læst højt.

5. For at lukke AppReader dobbelt tappes med tre fingre.

Når AppReader afsluttes vil markøren automatisk stå på det sidste ord der blev læst højt i AppReader hvis applikationen har en tekstmarkør.

AppReader læse bevægelser

Kommando	Bevægelse
Skift oplæsning (Afspil / Pause)	2-finger enkelt tap
Læs fra ny placering	1-finger enkelt tap
Læs næste ord	1-finger svip mod højre
Læs forrige ord	1-finger svip mod venstre
Læs aktuelt ord	1-finger dobbelt tap Bemærk: Gentagelse af bevægelsen på samme ord indenfor to sekunder vil skifte mellem følgende indstillinger: Læs / Stav / Fonetisk stavning. Nulstilles efter en pause på mere end to sekunder.
Læs ord under	1-finger svip nedad
Læs ord ovenfor	1-finger svip opad
Læs næste sætning	2-finger svip mod højre
Læs forrige sætning	2-finger svip mod venstre
Læs næste afsnit	2-finger svip nedad
Læs forrige afsnit	2-finger svip opad
Slut på dokument	4-finger svip nedad
Start på dokument	4-finger svip opad

Kapitel 5 Magnifier funktioner

"Magnifier funktioner" dækker over alle visuelle forbedringer som er inkluderet i ZoomText Magnifier og ZoomText Magnifier/Reader. Dette inkluderer valg af forstørrelsesgraden, zoomvindue, skærmforbedring og navigationsindstillinger.

- <u>Magnifier værktøjslinje fanen</u>
- Zoom ind og ud
- <u>Anvende Zoom til 1x</u>
- <u>Rulle det forstørrede vindue</u>
- <u>Zoomvinduer</u>
- <u>Skærmforbedringer</u>
- Navigering indstillinger

Magnifier værktøjslinje fanen

Magnifier fanen indeholder knapper som udfører funktionen eller ændre tilstand for en Magnifier funktion. Mange af disse knapper er split knapper som giver mulighed for at skifte tilstanden for funktionen og åbne en menu med tilknyttede indstillinger. Knapperne er grupperet i kategorier og har intuitive ikoner som etiketter så de er lette at finde.



Magnifier værktøjslinje fanen

- Zoom Niveau. Indstiller forstørrelsesgraden fra 1x til 36x.
- Vindue. Vælger zoomvindue typen for det forstørrede vindue. Typerne af mulige zoomvinduer afhænger af om du anvender en skærm eller flere skærme som er indstillet til "Udvid disse skærme".
- **Farve.** Slår farveforbedring til eller fra og viser en menu med farveforbedringer indstillinger. Farveforbedringer funktionen hjælper til at skærmen bliver lettere at se. Du kan vælge mellem forudbestemte farveskemaer eller oprette dine egne.
- Markør. Slår Museforbedringer til eller fra og viser en menu med indstillinger for Museforbedringer. Museforbedringer gør det lettere at se og følge tekstmarkøren. Du kan vælge mellem forudbestemte markørskemaer eller oprette dine egne.
- Markør. Slår markørforbedringer til eller fra og viser en menu med indstillinger for Markørforbedringer. Markørforbedringer gør det lettere at se og følge tekstmarkøren. Du kan vælge mellem forudbestemte markørforbedringer skemaer eller oprette dine egne.

- Fokus. Slår fokusforbedringer til eller fra og viser en menu med fokusforbedringer indstillinger. Fokusforbedringer gør det lettere at se og følge kontroller der kommer i fokus når du anvender tabulator eller piletaster til at bevæge rundt i menuer, dialoger, værktøjslinjer og andre programkontroller. Du kan vælge mellem forudbestemte fokusforbedringer skemaer eller oprette dine egne.
- Navigering. Viser en menu der åbner navigering indstillinger dialogboksen hvor du kan indstille hvordan du vil have at ZoomText skal rulle zoomvinduet for at holde fokus indenfor vinduet, herunder mus, tekstmarkør, tastatur og andre objekter som vises på skærmen.

Zoom ind og ud

ZoomText tilbyder en række zoomniveauer så du kan vælge netop den forstørrelse som passer til dit behov. Zoomniveauer inkluderer:

- 1x til 8x i trin af 1
- 10x til 16x i trin af 2
- 20x til 36x i trin af 4
- 42x til 60x i trin af 6
- Faste forstørrelser: 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x og 4,5x.

Du kan zoome ind eller ud når du har behov for det ved at anvende Zoom ind og Zoom ud genvejene eller Zoomniveau spin boksen på Magnifier fanen.

Bemærk: Anvender du flere skærme med zoomvinduet sat til MultiView Lokal eller MultiView Global vil hver visning (på hver skærm) have dets eget zoomniveau. Zoomniveau kommandoerne og kontrollerne styrer altid zoomniveauet i det aktive vindue. Du kan tvinge det aktive og det inaktive vindue til at zoome ind og ud samtidigt ved at aktivere **Brug samme forstørrelses indstillinger** i Flere skærme indstillinger dialogboksen.

For at zoome ind eller ud anvendes genvejene

- Tryk Zoom Ind og Zoom ud genvejene:
 - o Zoom Ind tryk Caps Lock + Pil op
 - o Zoom Ud tryk Caps Lock + Pil ned

• For at zoome ind og ud med musens rullehjul

• Hold **Caps Lock + Shift** nede og rul musens rullehjul for at zoome ind og ud.

For at zoome ind og ud med zoomniveau spin boksen

• På **Magnifier** værktøjslinjen justeres zoomniveauet i **Zoomniveau** spin boksen ved at klikke op eller ned knapperne eller ved at trykke Pil op eller Pil ned tasterne (når spin boksen er i fokus).

Valg et sæt af ZoomText zoomniveauer

ZoomText tilbyder tre sæt af zoomniveauer til at zoome ind og ud. Du kan zoome ind og ud med Alle Zoomniveauer, Kun Favorit Zoomniveauer eller Kun heltals zoomniveauer. Du kan zoome ind og ud med Alle Zoomniveauer, Kun Favorit Zoomniveauer eller Kun heltals zoomniveauer.

- Alle Zoomniveauer anvender alle de mulige zoomniveauer til at zoome ind og ud. Dette er standardtilstanden.
- Kun Favorit Zoomniveauer anvender et udvalg af brugerdefinerede zoomniveauer til at zoome ind og ud. Du kan vælge alle de zoomniveauer du har brug for ud fra de tilgængelige zoomniveauer.
- Kun heltals zoomniveauerudelader alle zoomniveauer der ikke er hele zoomniveauer til at zoome ind og ud.

At vælge et sæt af zoomniveauer og for at tilpasse Favorit zoomniveauer

1. På **Magnifier** værktøjslinjen vælges **Zoomvinduer** knappen som vises i nederste højre hjørne af Zoomvinduer gruppen.

Zoomvindue indstillinger dialogen vises.

- 2. Vælg Forstørrelse fanen.
- 3. I **Anvend disse zoomniveauer** komboboksen vælges det sæt af zoomniveauer der skal anvendes.
- 4. Har du valgt **Kun Favorit Zoomniveauer** kan du åbne **Favorit Zoomniveauer** listboksen og udvælge de zoomniveauer du ønsker at anvende i dette sæt.
- 5. Klik **OK**.

Zoomvinduer indstillinger				×
Forstørrelse Vindue	Hold	Zoomfelt søger		
Zoomniveauer				-
Aktuelt zoomniveau	A <u>n</u> vend disse	Zoomniveauer		
2 🗸	Alle Zoomniv	/eauer	~	
Eavorit Zoomniveauer				
1,2 ∧ 1,4 1,6 1,8 2 2,25 2,5 2,75 ∨	Favorit Zoom du kan begra passer dig be Zoomniveaue Zoomniveaue favoritter i 'F	niveauer giver muligh ense zoomtrin til dem edst. Vælg 'Favorit er' under 'Anvend diss er' og vælg dernæst d avorit Zoomniveauer'	ied for at der line listen.	
Zoom med musehjul ———	musehjul	-Kombinations ✓ Shift Alt Ctrl ✓ Caps Lock	tast	-
	ОК	Annuller	Hjælp	

Forstørrelse fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Zoomniveauer	
Aktuelt zoomniveau	Indstiller forstørrelsesgraden. Forstørrelser inkluderer: 1x til 8x i trin af 1, 10x til 16x i trin af 2, 20x til 36x i trin af 4, 42x, til 60x i trin af 6 og faste forstørrelser på 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x og 4,5x.
Anvend disse zoomniveauer	Udvælger det sæt af forstørrelsesniveauer som ZoomText anvender til at zoome ind og ud.

Favorit zoomniveauer	En listboks til at udvælge favorit
	zoomniveauer. For at ændre disse skal du
	vælge Kun Favorit Zoomniveauer under
	Anvend disse zoomniveauer komboboksen.

Tilpasse Zoom med musehjul

Mange programmer anvender musens rullehjul til at rulle dokumenter og udføre andre handlinger. ZoomText kombinerer derfor kombinationstaster med musens rullehjul for at undgå at være i konflikt med andre programmer. Som standard anvender ZoomText Zoom med musehjul Caps Lock + Shift som kombinationstaster. Det er muligt at ændre disse taster hvis det bliver nødvendigt.

For at tilpasse Zoom med musehjul

1. På **Magnifier** værktøjslinjen vælges **Zoomvinduer** knappen som vises i nederste højre hjørne af Zoomvinduer gruppen.

Zoomvindue indstillinger dialogboksen åbnes.

- 2. Vælg Forstørrelse fanen.
- 3. Du skal nu sikre at Aktiver Zoom med musehjul er markeret.
- 4. Vælg de kombinationstaster som skal trykkes ned samtidigt med at musens rullehjul anvendes for at zoome.
- 5. Klik **OK**.

Zoomvinduer in	dstillinger			×	C
Forstørrelse	Vindue	Hold	Zoomfelt søger		
Zoomniveauer					
A <u>k</u> tuelt zoomniveau		Anvend disse Zoomniveauer			
		Alle Zoomniveauer 🗸 🗸		\sim	
Eavorit Zoomniveauer					
1,2 ▲ 1,4 ↓ 1,6 ↓ 1,8 ↓ 2,25 ↓ 2,25 ↓ 2,75 ▼		Favorit Zoomniveauer giver mulighed for at du kan begrænse zoomtrin til dem der passer dig bedst. Vælg 'Favorit Zoomniveauer' under 'Anvend disse Zoomniveauer' og vælg dernæst dine favoritter i 'Favorit Zoomniveauer' listen.		ed for at der ne isten.	
Zoom med musehjul Kombinationstast					
Aktiver 20011 med 1		nasenjai	✓ Shift		
			Caps Lock		
		OK	Annuller	Hjælp	

Forstørrelse fanen

Indstillinger	Beskrivelse		
Zoom med musehjul			
Aktiver Zoom med musehjul	Aktiverer anvendelse af musens rullehjul til at ændre zoomniveau.		
Kombinationstast	Her vælges tastekombinationen der skal anvendes samme med musens rullehjul. De valgte taster skal holdes nede mens musens rullehjul aktiveres for at ændre zoomniveau.		

Anvende Zoom til 1x

Zoom til 1x funktion giver mulighed for hurtigt at skifte mellem den aktuelle forstørrelse og 1x forstørrelse. Når du zoomer til 1x vil alle øvrige ZoomText indstillinger stadig være aktive.

Anvende Zoom til 1x

Benyt en af følgende metoder

- Tryk Zoom til 1x genvejen: Caps Lock + Enter
- På **Magnifier** værktøjslinjen klikkes på Zoom til 1x knappen under **Zoomniveau** spin boksen eller der navigeres til Zoomniveau spin boksen hvorefter der trykkes **Enter**.

Aktivering af genvejen skifter tilstand mellem 1x og det tidligere zoomniveau.

Zoom til 1x knappen

Bemærk: Når du anvender Zoom til 1x kan du også anvende Zoom ind kommandoerne og kontrollerne til at zoom ind igen i mindre trin.

Rulle det forstørrede vindue

ZoomText viser det forstørrede skærmbillede i et vindue som automatisk følger musen, tekstmarkøren og programfokus. Du kan anvende rulle kommandoerne til at flytte vinduet i en vilkårlig retning. Idet vinduet ruller i en glidende bevægelse kan du fortsætte med at læse i det mens det ruller. Rulle kommandoerne giver også mulighed for hurtigt at hoppe til kanten eller centrum af skærmen samt gemme og indlæse visninger fra bestemte steder på skærmen.

For at rulle zoomvinduet

Hold Caps Lock + Shift tasterne nede og:

- 1. Tryk på pil tasterne: **Venstre** eller **Højre**. **Pil op** eller **ned**.
- 2. Tryk igen på samme tast for at øge farten. Hvert tryk øger farten yderligere.
- 3. For at sænke farten trykkes pilen i modsat retning. Hvert tryk sænker farten yderligere.
- 4. For at rulle i en anden retning trykkes pilen i den ønskede retning.
- 5. For at stoppe rulning, tryk på **Enter** eller slip **Caps Lock + Shifttasterne**.

• For at hoppe til kanten eller centrum af skærmen.

Hold **Caps Lock + Ctrl** tasterne nede og:

- Tryk på pil tasterne: **Venstre** eller **Højre**. **Pil op** eller **ned**.
- Tryk **Home** for at hoppe til centrum af skærmen.

For at gemme og indlæse et bestemt sted på skærmen

Den aktuelle visning kan gemmes og senere indlæses med følgende genveje:

- For at gemme en visning tryk Caps Lock + Ctrl + Page Down
- For at indlæse en visning tryk Caps Lock + Ctrl + Page Up
Zoomvinduer

Et zoomvindue viser det forstørrede billede af skærmen. Du kan tænke på et zoomvindue som et forstørrelsesglas som holdes foran skærmen. Et zoomvindue kan således kun vise en del af normalskærmen, men ved at rulle zoomvinduet kan man se andre dele af skærmen i forstørret tilstand. Det forstørrede vindue sporer og ruller så de følger aktiviteter på skærmen, herunder musen, tekstmarkøren og tastaturfokus.

- Kørsel med en eller flere skærme
- Valg af zoomvindue
- Justering af zoomvinduer
- <u>Hold vindue</u>
- Overblik tilstand
- <u>Håndtering af flere skærme</u>

Anvendelse med en eller flere skærmen

Når din computer anvendes med en skærm eller med to skærme sat til "Dupliker disse skærme" kan du indstille det forstørrede vindue til en af følgende typer: Fuld, Overliggende, Lup, Linje og fire låste positioner; Top, Bund, Højre og Venstre.

Når din computer anvendes med flere skærme sat til "Udvid disse skærme" kan du indstille det forstørrede vindue til en af følgende typer: Udvid, Klon, Zoom til 1x, Multiview lokal og Multiview global.

Valg af zoomvinduer

Du kan til enhver tid ændre det zoomvindue når ZoomText ar aktiv. Typerne af mulige zoomvinduer afhænger af om du anvender en skærm eller flere skærme som er indstillet til "Udvid disse skærme".

Bemærk: denne sektion indeholder information om anvendelse af flere skærme zoomvinduer typer og indstillinger. For yderligere information om at anvende ZoomText flere skærme understøttelse, herunder understøttet hardware, anbefalede indstillinger og fejlsøgning se <u>Håndtering af flere skærme</u>.

For at vælge et zoomvindue

- 1. På Magnifier værktøjer fanen vælges Vindue knappen.
- 2. Vælg **En skærm** eller **Flere skærme** afhængig af dine aktuelle skæm indstillinger.
- 3. Vælg zoomvindue type.

Det forstørrede vindue på dine skærme vil ændres afhængig af det valgte zoomvindue.

Tip! Du kan også gennemse de forskellige zoomvinduer ved at taste Zoomvindue type genvejen: **Caps Lock + Z**

Zoomvindue typen kan også vælges i Zoomvindue dialogboksen på følgende måde:

1. På **Magnifier** værktøjer fanen vælges **Vindue > Indstillinger.**

Zoomvindue dialogboksen åbnes på Vindue fanen.

- 2. Vælg det ønskede zoomvindue type.
- 3. Klik **OK**.

Zoomvinduer in	dstillinger			×
Forstørrelse	Vindue	Hold	Zoomfelt søger	
Indstillinger fo	r en skærm			
Vindue <u>t</u> yp	be: Helskæ	rm	~	
	✓ <u>I</u> nds	til linje vindue	e højden til markøren:	s højde
Indstillinger fo	r flere skærm	e ——		
<u>V</u> indue typ	be: MultiVie	w Lokal	\sim	
	E	lere skærme	indstillinger	
For at tilp dit Window <u>Windows s</u>	asse dine skæ ws kontrolpar skærmindstilli	erme skal du iel. nger	gå til skærmindstilling	eri
		OK	Annuller	Hjælp

Vindue fanen (når en skærm anvendes)

Zoomvinduer indstillinger 🛛 🗙 🗙					
Forstørrelse	indue	Hold	Zoomfelt søger		
Indstillinger for en	skærm				
Vindue <u>t</u> ype:	Helskæi	rm	\sim		
	✓ <u>I</u> ndst	il linje vindue	e højden til markøren:	s højde	
Indstillinger for fler	e skærme	e ——			
<u>V</u> indue type:	MultiVie	w Lokal	~		
	Elere skærme indstillinger				
For at tilpasse dine skærme skal du gå til skærmindstillinger i dit Windows kontrolpanel. <u>Windows skærmindstillinger</u>					
		OK	Annuller	Hjælp	

Vindue fanen (når flere skærme anvendes)

Indstillinger	Beskrivelse	
Indstillinger for en skærm		
Vindue type	Vælger zoomvindue typen når der anvendes en skærm eller flere skærmen hvor samme skærmbillede vises på alle.	
	 Fuld. Viser zoomvindue som fylder hele skærmen. Overliggende. Viser et zoomvindue som ligger ovenpå den normale skærm og vinduet kan justeres i størrelse og placering. Lup. Viser et zoomvindue som kan sammenlignes med en lup der holdes over normalskærmen og forstørre det der er lige under luppen. Luppen 	
	følger automatisk det der er i fokus herunder musen og tekstmarkøren når de flyttes. Linje. Viser et zoomvindue som kan sammenlignes med en linjelup der holdes over normalskærmen og forstørre det der er lige under den linje den dækker. Linjeluppen følger automatisk det der er i fokus herunder musen og tekstmarkøren når de flyttes.	
	Låst. Deler skærmen i to halvdele hvor den forstørrede del er på den ene side og normalskærmen er på den anden. Det forstørrede vindue kan låses på en af kanterne på skærmen: top, bund, højre eller venstre. For information om hvordan man justerer zoomvinduer se <u>Justering af Zoomvindue</u> .	
Indstil vindue højden til samme højde som tekstmarkøren.	Når tekstmarkøren flyttes rundt i teksten vil højden af markøren ændrer sig i forhold til størrelsen på skriften og linjevinduets højde tilpasses så den aktuelle tekst altid er fuld synlig i vinduet.	

Indstillinger for flere skærme		
Vindue type:	Vælger zoomvindue typen når flere skærme er indstillet til udvidet visning.	
	Lup. Viser et zoomvindue som kan sammenlignes med en lup der holdes over normalskærmen og	
	forstørre det der er lige under luppen. Luppen	
	musen og tekstmarkøren når de flyttes. Når flere	
	skærme anvendes vil Lup funktionen flytte mellem skærmene for at følge musen, tekstmarkøren og alle andre skærmaktiviteter der kan spores.	
	Udvid. Viser et enkelt zoomvindue uafbrudt som	
	fortsætter ud på alle skærmene. Det forstørrede vindue sporer og ruller for at følge aktiviteten på hele alle udvidede skærme.	
	Udvid visning er designet for at det er muligt at oprette et stort zoomvindue som dækker flere skærme.	
	Klon. Viser samme zoomvindue på to eller flere skærme. Det forstørrede vindue sporer og ruller for at følge aktiviteten på hele alle udvidede	
	skærme. Bemærk: Klon visning er kun tilgængeligt når skærmene er indstillet til samme	
	skærmopløsning og samme orientering: portræt eller landskab.	
	Klon visning er designet for situationer hvor to eller flere brugere skal kunne se det samme zoomvindue på forskellige skærme.	
	Zoom med 1x Viser et zoomvindue på din	
	hovedskærm og et ikke forstørret (1x)zoomvindue	
	op din sekundære skærm. Begge vinduer (det	
	forstørrede og 1x) sporer og ruller for at følge aktiviteten på hele alle udvidede skærme.	
	<i>Bemærk:</i> Når flere skærme er indstillet til udvidet visning vil Windows indstille en af skærmene som hovedskærmen hvor skrivebord ikoner,	

proceslinjen, Windows menu og Opgavevælger vises. Du kan vælge hvilken skærm der skal være din hovedskærm i Skærmopløsning dialogboksen som åbnes ved at højreklikke et sted på skrivebordet og vælge **Skærmopløsning**.

Zoom med 1x vinduet er designet til at man kan se både et forstørret billede og det normale skærmbillede samtidigt. Zoom med 1x er også nyttig når både en svagtseende og en normalt seende skal se på skærmen samtidigt. Den svagtseende anvender zoomvinduet og den normalt seende anvender 1x vinduet.

MultiView Lokal. Viser adskilte vinduer på hver skærm hvor hvert vindue er begrænset til dens egen skærm. Således kan skærm 1 kun vise skrivebord 1 og skærm 2 kun vise skrivebord 2 osv.

Når MultiView Lokal anvendes:

- Kun et forstørret vindue kan være aktivt af gangen.
- Når musen eller programfokus flyttes fra et skrivebord til et andet vil det aktive vindue automatisk skifte til den aktive skærm. Du kan skifte aktivt vindue ved at trykke Aktiv visning genvejen: Caps Lock + V. Når du holder Aktiv viser genvejen nede vil det forstørrede visning låses. I denne låste tilstand kan du flytte musen og objekter med musen fra det forstørrede vindue fra en skærm direkte til det forstørrede vindue på en anden skærm.
- Som standard vil hvert vindue have sin egen forstørrelsesgrad som kun kan ændres når vinduet er aktivt. Zoom Ind og Zoom ud genvejene, musehjul zoom og faktor kontroller virker således altid i den aktive visning. Du kan tvinge det aktive og det inaktive vindue til at zoome ind og ud samtidigt ved at aktivere

Brug samme forstørrelses indstillinger i Flere skærme indstillinger dialogboksen.
MultiView Lokal er designet til brugere som ønsker adskilte zoomvinduer på hvert skrivebord hvor de aldrig kan flyttes udenfor dets egen skærm.
MultiView Global. Viser adskilte vinduer på hver skærm, hvor hvert vindue kan rulle og spore aktivitet på alle skriveborde. Således kan et zoomvindue på skærm 1 også vise aktivitet som foregår på skærm 2.
Når MultiView Global anvendes:
 Kun et zoomvindue kan være aktivt ad gangen og det aktive vindue kan vise indhold fra aktivitet som foregår på en af de andre skærme. Du kan skifte aktivt vindue ved at trykke Aktiv visning genvejen: Caps Lock + V. Når du holder Aktiv viser genvejen nede vil det forstørrede visning låses. I denne låste tilstand kan du flytte musen og objekter med musen fra det forstørrede vindue fra en skærm direkte til det forstørrede vindue på en anden skærm.
• Som standard vil hvert vindue have sin egen forstørrelsesgrad som kun kan ændres når vinduet er aktivt. Zoom Ind og Zoom ud genvejene, musehjul zoom og faktor kontroller virker således altid i den aktive visning. Du kan tvinge det aktive og det inaktive vindue til at zoome ind og ud samtidigt ved at aktivere Brug samme forstørrelses indstillinger i Flere skærme indstillinger dialogboksen.
MultiView Global er designet for brugere som ønsker at kunne se to forskellige zoomvinduer med indhold fra samme program eller skrivebord.

Flere skærme indstillinger	Åbner Flere skærme indstillinger dialogboksen hvor du kan indstille ZoomText flere skærme visninger.
Windows skærmindstillinger	Åbner Windows kontrolpanel for skærmindstillinger hvor du kan indstille dine skærme.

Justering af zoomvinduer

ZoomText tilbyder et antal forskellige zoomvinduer der enten kan udfylde hele skærmen eller dele af den. Zoomvinduer inkluderer: Overliggende, Lup, Linje og Låst. Når et zoomvindue der ikke udfylder hele skærmen anvendes er det muligt at ændre på størrelse og placering af vinduet.

• For at justere størrelsen og placeringen af et zoomvindue

- 1. På **Magnifier** fanen klik på pilen ved siden af **Vindue** eller naviger til **Vindue** og tryk pil ned.
- 2. I Vindue menuen vælges Zoomvindue justeringsværktøj.

Justeringsværktøjet åbnes og justeringshåndtag vises på zoomvinduet.

- 3. For at ændre størrelsen trækkes i disse håndtag.
- 4. For at flytte vinduet placeres musen indenfor vinduet hvor det kan trækkes til ny placering.
- 5. For at rulle indholdet af vinduet holdes **Ctrl** nede hvorefter det trækkes med musen.
- 6. For at lukke justeringsværktøjet, højreklik eller tryk Esc.

Bemærk: Du kan også aktivere Zoomvindue justeringsværktøj ved at trykke genvejen: **Caps Lock + A**

Hold vindue

I det forstørrede vindue er det ikke muligt at se hele skærmen på en gang. Derfor kan der opstå situationer hvor du ikke kan se de områder på skærmen du har behov for samtidigt. Hold vindue løser dette problem ved at du kan bibeholde en del af skærmen og fortsætte med at arbejde på en anden del af skærmen. Sådan virker det

Ved at anvende Hold vindue værktøjet kan du vælge et område af skærmen som du vil fastfryse på skærmen. Når du har valgt dit område vil Hold vinduet automatisk vises ovenpå fuld zoom vinduet så du fortsat kan se det valgte område. Fuld zoom vinduet fortsætter med at fungere som normalt hvor det sporer det der er i fokus på normalskærmen.

For at oprette et Hold vindue

- 1. Indstil zoomvindue typen til Fuld.
- 2. On the **Magnifier** toolbar tab, click the arrow next to **Window** or navigate to **Window** and press the down arrow key.
- 3. I Vindue menuen vælges Hold vindue > Ny Hold vindue.

Hold vindue værktøjet åbnes.

- 4. Flyt musen så det ønskede område bliver synligt.
- 5. Hold venstre musetast nede og træk en firkant omkring det område hvor du vil oprette et Hold vindue.

Når du er slipper musetasten oprettes Hold vinduet med justeringshåndtag på rammen.

- 6. For at ændre størrelsen trækkes i disse håndtag. For at flytte vinduet placeres musen indenfor vinduet hvor det kan trækkes til ny placering. For at rulle vinduets indhold holdes **Ctrl** tasten nede mens der trækkes indenfor rammen.
- 7. For at lukke Hold værktøjet, højreklik eller tryk Esc.

Bemærk: Et Hold vindue kan justeres i størrelse og flyttes med <u>Justeringsværktøj</u>.

• For at aktivere eller deaktiver Hold vindue

Benyt en af følgende metoder

- På Magnifier fanen vælges Vindue > Hold vindue > Aktiver (eller Deaktiver).
- Tryk Hold vindue Til / Fra genvejen: Caps Lock + E

For at tilpasse Hold vindue indstillingerne

1. På **Magnifier** værktøjslinjen vælges **Zoomvinduer indstillinger** knappen som vises i nederste højre hjørne af **Zoomvinduer** gruppen.

Zoomvindue indstillinger dialogboksen åbnes.

- 2. Vælg Hold fanen.
- 3. Tilpas Hold vindue indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Zoomvinduer in	dstillinger			×
Forstørrelse	Vindue	Hold	Zoomfelt søger	
Hold visning in	idstillinger —			
	r Hold visning			
Ar	i <u>v</u> end højeste	mulige forstø	rrelse	
⊖ Ar	iv <u>e</u> nd forstørri Zoompiveeu	elsesniveaet	herunder	
	2			
_				
	<u>N</u> y Hold visnir	ng		
Bemærk: Hold visning virker kun i fuld zoomtilstand.				
		OK	Annuller	Hjælp

Hold vindue fanen

Indstillinger	Beskrivelse	
Hold vindue indstillinger		
Aktiver Hold vindue	Aktiverer Hold vindue (når zoomvindue typen er Fuld).	
Anvend højeste mulige forstørrelse	Indstiller Hold vindue så det anvendes samme forstørrelse som Fuld zoomvinduet.	
Anvend forstørrelsesgraden herunder	Giver mulighed for at indstille et bestemt forstørrelsesniveau for Hold vinduet.	

Zoomniveau	Indstiller forstørrelsesgraden for Hold vinduet. Forstørrelser inkluderer: 1x til 8x i trin af 1, 10x til 16x i trin af 2, 20x til 36x i trin af 4, 42x, til 60x i trin af 6 og faste forstørrelser på 1,2x, 1,4x, 1,6x, 1,8x, 2,5x, 3,5x og 4,5x.
Nyt Hold vindue	Aktiverer Hold værktøjet.

Anvende overblik tilstand og Zoomfelt søger

Overblik tilstand viser området som aktuelt vises i zoomvinduet på den normale skærm. Når overblik tilstand er aktiveret vil forstørrelsen slå fra så Zoomfelt søgeren kan ses på normalskærmen. Ved at flytte Zoomfelt søgeren kan du vælge et nyt område der skal forstørres.

For at anvende overblik tilstand

- 1. Benyt en af følgende metoder
 - På Magnifier fanen vælges Vindue > Overblik tilstand.
 - Tryk Overblik tilstand Til / Fra genvejen: Caps Lock + O

Forstørrelsen slår midlertidigt fra så du kan se Zoomfelt søgeren.

- 2. Flyt Zoomfelt søgeren til den ønskede placering.
- 3. Klik for at zoome ind på den nye placering.

Forstørrelsen genoptages og det valgte område vises i zoomvinduet.

Du kan indstille Zoomfelt søgeren så den har den form og farve som du bedst kan se. Zoomfelt søger kan også indstilles til at være synlig på normalskærmen når Overliggende og Låst zoomvindue anvendes.

For at aktivere eller deaktiver Zoomfelt søger

1. I Magnifier menuen vælges Zoomfelt søger

Zoomvindue dialogboksen åbnes på Zoomfelt søger fanen.

- 2. Du skal nu sikre at Vis Zoomfelt søger er markeret.
- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK.**

Bemærk: Zoomfelt søgeren kan aktiveres og deaktiveres ved at anvende Søger kommandoen: **Caps Lock + L.**

Zoomvinduer in	dstillinger			×
Forstørrelse	Vindue	Hold	Zoomfelt søger]
Forstørrelse Zoomfelt søge Zoomfelt søge Feltsøger 1x vindue Zoomfelt Blok Farve Sort Yis Zoo Blink m Blinke	Vindue r indstillinger søger vises i (å skærmen so kan også vise r for at indike søger type omfelt søger i ned søger frekvens	Hold Dverblik tilsta m skal vises i es i 1x delen o re området p	Zoomfelt søger nd hvor du kan vælge i forstørret tilstand. af Overliggende, Låst å skærmen som er fo Gennemsigtig ar	e et nyt rog Zoom med rstørret. Udfyldt 1x
		OK	Annuller	Hjælp

Zoomfelt søger fanen

Indstillinger	Beskrivelse	
Zoomfelt søger indstillinger		
Zoomfelt søger	Vælg den type zoomfelt søger som skal anvendes: Blok, Inverteret blok, Ramme eller Kors.	
Farve	Vælg farven som zoomfelt søgeren skal have.	
Gennemsigtig	Indstiller hvor gennemsigtig Zoomfelt søgeren skal være. Gennemsigtigheden styrer hvor meget af den bagvedliggende skærm der skal kunne ses gennem zoomfelt søgeren.	

Vis Zoomfelt søger i Overliggende, Låst og Zoom med 1x	Aktiverer visning af Zoomfelt søgeren i 1x delen af skærmen når et låst eller overliggende zoomvindue anvendes.
Blink med søger	Tænder eller slukker for at søgeren blinker.
Blinkefrekvens	Vælg hvilken frekvens zoomfeltsøgeren skal blinke med i sekunder (fra 0,5 til 5 i trin på 0,5).

Håndtering af flere skærme

I "Zoomvinduer" sektionen har du læst om de forskellige typer af zoomvinduer som er tilgængelige og hvordan de vælges.

Denne sektion omhandler information om hvordan ZoomText konfigureres til brug på systemer med flere skærmen og hvordan man fejlsøger problemer ved flere skærme.

ZoomText understøttelse af flere skærme virker aktuelt med to skærme med udvidet skærm. Understøttelse af systemer med tre eller flere skærme tilføjes i kommende versioner.

Bemærk: For information om hvordan Windows indstilles til flere skærme skal du se på Microsoft webside.

- Flere skærme indstillinger
- <u>Understøttet hardware</u>
- <u>Anbefalede indstillinger</u>
- Konfiguration af skærme
- Automatisk justering
- ZoomText funktionsadfærd
- <u>Fejlsøgning</u>

Flere skærme indstillinger

Flere skærme indstillinger giver mulighed for at indstille hvordan zoomvinduer skal opfører sig når dit system er sat op med flere skærme. Dette inkluderer hvordan musen flyttes mellem skærmene og hvordan skærmforbedringerne anvendes på hver skærm.

Bemærk: For en beskrivelse af zoomvindue typer som er tilgængelige i flere skærme tilstand <u>Valg af Zoomvinduer</u>.

For at konfigurere flere skærme indstillinger

- 1. På **Magnifier** fanen klik på pilen ved siden af **Vindue** eller naviger til **Vindue** og tryk pil ned.
- 2. I Vindue menuen vælges Indstillinger.

Zoomvindue indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Vindue** fanen.
- 4. Vælg Flere skærme indstillinger...

Flere skærme indstillinger dialogboksen åbnes.

- 5. Juster flere skærme indstillinger efter ønske.
- 6. Klik **OK**.

Flere skærme indstillinger					×
Når musen skifter skrivebord Hold muse markør ind Vis en linje markering	le på primært vi imellem skrivebo r musen rør og k	ndue: ordene: rydser linj	2 sekunde Altid je markerin	er 🗸 🗸	
<u>B</u> rug disse lyde:	Lyd indstilling 1	`	/		
Lyd <u>s</u> tyrke:	Lav	`	/		
Når MultiView anvendes – Brug samme forstørre Skift den aktive skærm v Når du trykker og holder øjeblik. Når skærmen er kan ændre på genvej ko	elses indstillinger ved at trykke: [denne genvej f frosset, kan mu mbinationen i ge	, Caps Loc iryser bille sen flytte enveje dia	k + V det på ska s imellem s log boksen	ermen et kærmene. Du l.]
V <u>i</u> s skærmforbedringer p	Vis skærmforbedringer på: Alle skærme 🗸 🗸				
Bemærk: Skærmopsætn sat til udvid.	ingen gælder fo	r begge sl	kærme, nå	r typen er er	
	<u>о</u> к	A	nnullér	Hjælp	

Flere skærme indstillinger dialogboksen åbnes.

Indstillinger	Beskrivelse		
Når en mus flyttes mellem skriveborde			
Hold musen fra at krydse kanten:	Holder musen fra at krydse grænsen mellem skriveborde indtil musen holdes mod kanten i en fastsat tid som vælges i den tilhørende komboboks. Bemærk: Når denne indstilling er aktiveret kan du krydse grænsen ved hurtigt at ramme kanten to gange.		
Vis en linje markering mellem skrivebordene:	Viser en linje på kanten mellem skriveborde i den form som er valgt i den tilhørende komboboks. Denne linje hjælper dig til at holde din orientering på de udvidede skærme.		
Afspil lyde når musen rammer og krydser linje markeringen	Afspiller lyde når musen rammer grænsen mellem skrivebordene og har krydset til det anden skrivebord.		

Anvend disse lyde:	Anvend disse lyde når musen rammer og krydser linje markeringen Der er fire sæt af lyde at vælge mellem.		
Lydstyrke for lyde:	Indstiller lydstyrken for de lyde der afspilles.		
Når MultiView anvendes			
Anvend samme forstørrelses indstillinger	Når MultiView Lokal eller MultiView Global zoomvinduer anvendes; Denne indstilling tvinger det aktive og inaktive visninger til at zoome ind og ud samtidigt med samme forstørrelsesgrad på alle skærme. Når forstørrelsen ændres i et aktivt vindue vil alle de andre skærme følge med.		
Skift den aktive skærm ved at trykke:	Viser den tilknyttede genvej som anvendes til at skifte det aktive vindue når MultiView Lokal eller MultiView Global zoomvinduer anvendes.		
Ander indstillinger			
Vis skærmforbedringer på:	Vælger de skærme hvor skærmforbedringerne skal anvendes.		

Understøttede hardware til flere skærme

ZoomText understøttelsen af flere skærme virker med de fleste teknologier som er designet med henblik på Microsoft Windows. De understøttede teknologier inkluderer video kort, skærme og projektorer samt display forbindelser herunder VGA, DVI, HDMI og DisplayPort. I de fleste tilfælde vil et system som kører med flere skærme som er sat til "Udvid disse skærme" fungere sammen med ZoomText. Oplever du problemer med ZoomText og flere skærme skal du se afsnittet "Flere skærme fejlsøgning" i dette kapitel eller kontakte din forhandler.

Anbefalede skærmindstillinger

ZoomText flere skærme support virker med de fleste skærme og projektorer også selvom de har forskellige størrelser og opløsninger. Følgende anbefalinger bør dog følges for at opnå bedste resultat og undgå problemer.

Skærmstørrelse, orientering og justering

For bedste resultat anbefales det at man anvender to ens skærme som placeres ved siden af eller over hinanden. Når skærmen er indstillet korrekt skal du kunne trække musen fra skærm til skærm og have en intuitiv forståelse for hvor den er når den flyttes mellem skærmene. Se <u>Konfiguration af skærme for Flere skærme support</u> for information om hvordan skærmen indstilles.

Disse faktorer er særligt vigtige når du anvender Udvid zoomvindue til at udvide vinduet over flere skærme: størrelse, orientering og justering. Hvis de to skærme er forskellige størrelser, orientering eller justering vil den forstørrede skærm i det udvidede zoomvindue være svær at overskue.

Skærmopløsninger

Anvend altid skærmen til den fysiske oplæsning som skærmen tilbyder. Anvendes skærmene i en anden opløsning vil skærmbilledet blive dårligere på den normale skærm som igen forårsger dårligere kvalitet i zoomvinduet. *Bemærk:* Denne anbefaling gælder også når du kun anvender en skærm.

Konfiguration af skærme for Flere skærme support

For at kunne anvende ZoomText med flere skærme skal dit system have flere skærme tilsluttet, aktiveret og konfigureret med følgende indstillinger:

- Skærmene skal indstilles til "Udvid disse skærme" i Skærmopløsning dialogboksen.
- Skærmene skal være perfekt justeret i den enesiede af Skærmopløsning dialogboksen.
- De udvidede skærme bør stilles tæt på hinanden så mellemrummet mellem dem er så lille som muligt.

Nedenfor er en vejledning i hvordan man indstiller skærmene.

For at indstille skærmen til "Udvid disse skærme".

Du kan indstille dine skærme til "Udvid disse skærme" ved en af følgende metoder:

Metode 1: Anvend Skift skærm genvejen: Windows + P

 Når du trykker Windows + P genvejen vil Skift skærm bjælken åbnes på skærmen. med Skift skærm bjælken åben trykkes igen Windows + P eller højre eller venstre piletaster for at gennemse de forskellige flere skærme indstillinger i Skift skærm bjælken. Når du finder Udvid indstillingen skal du trykke Enter.

Metode 2: I Skærmopløsning dialogboksen åbnes.

1. Højreklik et sted på skrivebordet og vælg **Skærmopløsning**.

Skærmopløsning dialogboksen åbnes.

 Klik på flere skærme listen og vælg Udvid disse skærme. Systemet beder dig muligvis om at bekræfte din ændring. Vælg Behold ændringerne.

Bemærk: ZoomText flere skærme understøttelse virker også når en kombination af skærm og projektor anvendes så længe de er sat til "Udvid disse skærme".

• For at indstille dine skærme.

Indstil dine skærme på følgende måde.

1. Højreklik et sted på skrivebordet og vælg Skærmopløsning.

Skærmopløsning dialogboksen åbnes. Denne dialogboks illustrerer hvordan dine skærme er indstillet.

- 2. Anvend musen til at trække skærmene så de står i korrekt rækkefølge som de fysiske skærme står. Juster dernæst kanten så de er perfekt justeret efter følgende princip.
 - Hvis skærmen står ved siden af hinanden skal toppen af skærmen eller bunden være perfekt justeret i forhold til hinanden.
 - Hvis skærmen står ved lodret over hinanden skal en af siderne være perfekt justeret i forhold til hinanden.
- 3. Klik **Udfør** eller **OK** knappen. Systemet beder dig muligvis om at bekræfte din ændring. Klik **Behold ændringer** hvis dialogboksen vises.

Juster automatisk efter skærmændringer

ZoomText detekterer automatisk ændringer som udføres på dine skærmindstillinger, herunder følgende:

- Tilføje og fjerne skærme.
- Aktivere og deaktivere skærme.
- Ændring i skærmopløsning.
- Ændring i den relative position og orientering for dine skærme.
- Ændringer i præsentationen for skærmene altså: Udvidede skærme, kopierede skære, Vis kun på {n}

Disse ændringer detekteres når ZoomText starter og mens ZoomText kører. Når en ændring er detekteret vil ZoomText automatisk justere indstillingerne så det fortsat virker med de nye indstillinger. Hvis du tidligere har anvendt samme skærm konfiguration vil ZoomText anvende indstillingerne fra dengang. her er nogle eksempler på hvordan ZoomText detekterer og indstiller sig i forhold til ændringerne:

- Når ZoomText detekterer et skifte fra en skærm til flere skærme med udevidede skærme vil ZoomText automatisk skifte til sidste vinduestype, som blev anvend for flere skærme. Er det første gang ZoomText ser flere skærme med udvidede skærme anvendes standard zoomvinduet for flere skærme, som er MultiView Lokal.
- Detekterer ZoomText et skifte fra flere skærme til en skærm eller til flere skærme sat til "Kopier disse skærme" vil ZoomText automatisk skifte til sidste vinduestype, som blev anvend for en skærm. Er det første gang ZoomText ser én skærm anvendes standard zoomvinduet for en skærm, som er Fuld zoom.

Funktionsadfærd med flere skærme

Når ZoomText anvendes på flere skærme vil nogle af ZoomText funktionerne fungerer lidt anderledes som beskrevet herunder.

Funktion	Aktuel adfærd
AppReader	Når du anvender Udvid, Klon, Zoom med 1x eller MultiView Global zoomvinduer; Det aktive forstørrede vindue ruller altid så det følger det ord der er markering af AppReader uanset hvilken skærm programmet vises på. Når MultiView Lokal zoomvindue anvendes og hvis programmet er på den inaktive skærm så vil den inaktive skærm aktiveres og rulle så den følger AppReader.
Læsezoner	Når du anvender Udvid, Klon, Zoom med 1x eller MultiView Global zoomvinduer vil det aktive forstørrede vindue altid rulle så det følger den aktive læsezone uanset hvilken skærm programmet vises på. Når MultiView Lokal zoomvindue anvendes og hvis den aktive læsezone er på den inaktive skærm så vil den inaktive skærm aktiveres og rulle så den følger den aktive læsezone.
Touch Screen	Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig på flere skærme.
ZoomText Kamera	Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig på flere skærme.
Understøttelse af tredjeparts CCTV via USB.	Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig på flere skærme.

Fejlsøgning af flere skærme

Dette afsnit hjælper til at fejlsøge problemer som kan opstå når man anvender ZoomText med flere skærme.

Problem: Dit system har tre eller flere skærme (konfigureret som udvidede skærme) og når du forsøger at starte ZoomText vises denne besked: "ZoomText support til flere skærme forudsætter at du kun har en ekstra skærm aktiveret. Deaktiver alle undtaget en udvidet skærm og prøv at aktivere flere skærme igen."

Løsning: ZoomText flere skærme support virker i denne version kun med to udvidede skærme. Understøttelse af systemer med tre eller flere skærme tilføjes i kommende versioner.

Problem: Når du anvender udvid forstørrelse vises venstre halvdel på højre side og omvendt.

Løsning: Orientering af dine udvidede skærme er omvendt i forhold til den fysiske placering. For at løse dette skal du enten ombytte skærmen (eller kablerne) eller ændre indstillingen under Skærmopløsning indstillinger - højreklikke et sted på skrivebordet og vælge Skærmopløsning.

Problem: Musen vil ikke flytte mellem skærmene men ruller rundt fra de ydre kanter.

Løsning: Orientering af dine udvidede skærme er omvendt i forhold til den fysiske placering. For at løse dette skal du enten ombytte skærmen (eller kablerne) eller ændre indstillingen under Skærmopløsning indstillinger ved at højreklikke et sted på skrivebordet og vælge Skærmopløsning.

Problem: ZoomText forstørrer kun og ruller halvdelen af visningen.

Løsning: ZoomText flere skærme support er aktiveret og du kikker kun på den ene af dine skærme. Den anden halvdel af visningen vises på den anden skærm.

Skærmforbedringer

Skærmforbedringer forbedrer læsbarheden af objekter der vises på skærmen. Med disse indstillinger kan du ændre skærmfarver så du få bedre kontrast og tydelighed og forbedre udseendet af musemarkøren, tekstmarkøren og fokus så de er lettere at se og følge på skærmen.

- <u>Farveforbedringer</u>
- <u>Museforbedringer</u>
- <u>Markørforbedringer</u>
- <u>Fokusforbedringer</u>
- <u>Anvende smart inverter</u>

Farveforbedringer

Farveforbedringer forbedrer tydeligheden af tekst og grafik på skærmen. Farveforbedringer indstillingerne består af en række filtrer som kan ændre farverne, lysstyrken og kontrasten på skærmen. Du kan vælge mellem forudbestemte skemaer eller oprette dine egne.

Tip! Når du anvender Omvendt lysstyrke og Inverter farver på Internet Explorer 11 (og meget snart andre browsere) vil det være en fordel at aktivere Smart Inverter funktionen fordi foto derved ikke bliver inverteret og dermed vises i deres normale farver. For yderligere information om denne funktion se <u>Anvende Smart</u> <u>inverter</u>.

Farveforbedringer indstillingerne aktiveres og ved at aktivere **Farve** split-knappen kontrollen på **Magnifier** fanen. Den øverste del af knappen slår farveforbedring til og fra mens den nederste del åbner Farve menuen.

For at slå Farveforbedringer til eller fra.

Benyt en af følgende metoder

- På **Magnifier** værktøjer fanen vælges **Farver** knappen.
- Tryk på Farveforbedring Til / Fra genvejen: Caps Lock + C
- For at vælge et forudbestemt farveskema
 - 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Farver** eller der navigeres til **Farver** og der trykkes på Pil ned.
 - 2. I Farve menuen vælges Skema.
 - 3. I Skema menuen vælges det ønskede farveskema.
- For at oprette et eget farveskema
 - 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Farver** eller der navigeres til **Farver** og der trykkes på Pil ned.
 - 2. I Farve menuen vælges Indstillinger.

Skærmforbedringer indstillinger dialogboksen åbnes Farve fanen.

- 3. Vælg Speciel...
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Skærmforb	edring indst	illinger				×
Farve	Mus	Markør	Fokus	Skrifttype		
Farvefor 이 1 이 3 Specialin	bedringer - Jormal Jema: Speciel) dstillinger -	Omvendt lys	sstyrke	~	Indstil	
Anvi	end Farvefori	bedringer på	Zoomvind	ue baggrund	~	
Lyss 0	ityrke og Koni lys % Koi	trast indstilling styrke ntrast	er	<u>S</u> endan standar	dindstillinger	
0 Effe F	1% kter indstilling iffekt	ger	100%			
I	ngen	`	~			
		Г	OK	Annuller	Hjælp	

Farve fanen

Indstillinger	Beskrivelse	
Farveforbedringer		
Normal	Deaktiverer alle farveforbedringer	
Skema	Aktiverer et forudbestemt farveskema (vælges i den tilhørende komboboks)	
Speciel	Aktiverer Specialindstillinger hvor du kan oprette dine egne farveskemaer.	
Indstil	Aktiverer og konfigurere Specialindstillinger så de er identiske med det valgte forudbestemte farveskema. Dette giver mulighed for at anvende et af de forudbestemte farveskemaer som udgangspunkt for dine egne skemaer.	
Specialindstillinger		
Anvend Farveforbedringer på	Afgør om farveforbedringer skal anvendes på zoomvindue, baggrunden (normalskærmen) eller begge.	
Lysstyrke og Kontrast indstillinger		
Lysstyrke	Øger eller sænker lysstyrken på skærmen fra 0 % til 100 %. Normal lysstyrke er 50 %.	
Kontrast	Øger eller sænker kontrasten på skærmen fra 0 % til 100 %. Normal kontrast er 50 %.	
Gendan standardindstilli nger	Nulstille Lysstyrke og Kontrast til 50 % (normalen)	

Effekter indstillinger	
Effekt	Indstiller typen af farve effekten og aktiverer de tilknyttede indstillinger.
	Ingen. Ingen filtrering anvendes.
	Omvendt lysstyrke. Inverterer lysstyrken for alle
	skærmfarver. Lyse farver bliver mørkere og
	omvendt.
	Inverter farver. Inverterer alle skærmfarver.
	Farvet. Transformere alle skærmfarver til en
	bestemt farvenuance mens de beholder deres lys- og mørkeværdier. Når farvet effekten er valgt vises en Farve komboboks hvor du kan vælge
	Ta format. Then aforms onen alla forman til at ta forma
	skema Når To-farve effekten er valgt vises
	Forgrundsfarve og Baggrundsfarve kombobokse hvor du kan vælge de to farver.
	Erstat farve. Erstatter en farve på skærmen med
	en Erstat med komboboks hvor du kan vælge
	farven som skal ændres og farven der i stedet skal anvendes. En båndbredde indstilling er tilgængelig hvor du kan udvide antallet af farvenuancer omkring den valgte farve.

Museforbedringer

Museforbedringer gør det lettere at se og følge musens markør. Du kan indstille størrelse og farve på musen og aktivere en søger som hjælper til med at finde musen på skærmen. Du kan vælge mellem forudbestemte skemaer eller oprette dine egne.

Museforbedringer indstillingerne aktiveres og ved at aktivere **Mus** split-knappen kontrollen på **Magnifier** fanen. Den øverste del af knappen slår farveforbedring til og fra mens den nederste del åbner Mus menuen.

For at slå Museforbedringer til eller fra.

Benyt en af følgende metoder

- På Magnifier værktøjer fanen vælges Mus knappen.
- Tryk på Museforbedringer Til / Fra genvejen: Caps Lock + P

For at vælge et forudbestemt museskema.

- 1. På **Magnifier** fanen klik på pilen ved siden af **Mus** eller naviger til **Mus** og tryk pil ned.
- 2. I **Mus** menuen vælges **Skema**.
- 3. I Skema menuen vælges det ønskede farveskema.

For at oprette et eget museskema

- 1. På **Magnifier** fanen klik på pilen ved siden af **Mus** eller naviger til **Mus** og tryk pil ned.
- 2. I Mus menuen vælges Indstillinger.

Skærmforbedringer indstillinger dialogboksen åbnes Mus fanen.

- 3. Vælg **Speciel...**
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Skærmforbedring indst	illinger			×
Farve Mus	Markør	Fokus	Skrifttype	
Museforbedringer -	Stor gul	ig_mus Fa Ty Si Klar	arve Gul /kkelse mal Gennemsigti	Indstil
● <u>A</u> ltid ○ N <u>å</u> r mus ma ○ Nå <u>r</u> mus ma ○ Når <u>k</u> ombin	arkøren står st arkøren bevær ationstasten t	ille ges rykkes ned	Kombinatio	ows
		OK	Annuller	Hjælp

Mus fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Museforbedringer	
Normal	Deaktiverer alle museforbedringer
Tema	Aktiverer et forudbestemt museskema (vælges i den tilhørende komboboks)
Speciel	Aktiverer Specialindstillinger hvor du kan oprette dine egne museskema.
Indstil	Aktiverer og konfigurere Specialindstillinger så de er identiske med det valgte forudbestemte museskema. Dette giver mulighed for at anvende et af de forudbestemte farveskemaer som udgangspunkt for dine egne skemaer.
--------------------------------------	--
Specialindstillinger	
Mus	
Anvend ZoomText udglatning mus	Aktiverer ZoomText udglattede mus i det specielle museskema.
Størrelse	Indstiller størrelsen af musen til standard (1x), stor (2x) eller ekstra stor (4x).
Farve	Indstiller farven på musen.
Mus markørsøger	
Туре	Vælger typen af mus markørsøger: Cirkel. Viser en cirkel omkring musens spids. Sonar. Viser en animeret cirkel omkring musens spids. Fuldt sigtekorn. Viser et sigtekorn som er udvidet til hele zoomvinduet med centrum på musens spids. Sigtekorn. Viser et sigtekorn med centrum på musens spids.
Farve	Indstiller farven på mus markørsøgeren.
Tykkelse	Indstiller tykkelsen på mus markørsøgeren: Smal, Middel eller Bred.
Gennemsigtig	Indstiller hvor gennemsigtig mus markørsøgeren skal være. Gennemsigtigheden styrer hvor meget af den bagvedliggende skærm der skal kunne ses gennem mus markørsøgeren.

Vis mus markørsøger	
Altid	Mus markørsøgeren er altid synlig.
Når musen står stille	Mus markørsøgeren er kun synlig når musen ikke bevæges.
Når musen bevæges	Mus markørsøgeren vises kun når musen bevæges.
Når kombinationstast en trykkes ned	Mus markørsøgeren vises kun når mus kombinationstasten holdes nede.
Kombinationstas t	Indstiller en tast eller en kombination af taster som skal holdes nede for at få vist mus markørsøgeren. <i>Bemærk:</i> Vis mus markørsøger indstillingen skal være sat til Når kombinationstasten trykkes ned.

Markørforbedringer

Markørforbedringer gør det lettere at se og følge tekstmarkøren. Det er muligt at vælge mellem flere tydelige markørsøgere som markerer tekstmarkørens position uden at dække teksten. Du kan vælge mellem forudbestemte skemaer eller oprette dine egne.

Farveforbedringer indstillingerne aktiveres og ved at aktivere **Farve** split-knappen kontrollen på **Magnifier** fanen. Den øverste del af knappen slår markørforbedring til og fra mens den nederste del åbner Markør menuen.

For at slå Markørforbedringer til eller fra.

Benyt en af følgende metoder

- På Magnifier værktøjer fanen vælges Markør knappen.
- Tryk på Markørforbedring Til / Fra genvejen: Caps Lock + R

For at vælge et forudbestemt markørskema

- 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Markør** eller der navigeres til **Markør** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I **Markør** menuen vælges **Skema**.
- 3. I Skema menuen vælges det ønskede markørskema.

For at oprette et eget markørskema

- 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Markør** eller der navigeres til **Markør** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Markør menuen vælges Indstillinger.

Skærmforbedringer indstillinger dialogboksen åbnes Markør fanen.

- 3. Vælg Speciel...
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK.**

Skærmforbedring indst	illinger				×
Farve Mus	Markør	Fokus	Skrifttype		
Markørforbedringer					
○ <u>N</u> ormal					
◯ <u>T</u> ema:	Blå kile		\sim	Indstil	
O Speciel					
Prøvevisning:	Klik her for	prøvevisning			
Specialindstillinger					
Find markør —					
Туре		Størr	relse		
Kiler	~	Midd	el	\sim	
Farve			Gennemsigtig		
El Blå	~	Klar 🛁	· · · · ·	Udfyldt	
Vis markørsøger					
Altid			Kombinatio	Instast	
⊖ <u>–</u> ann ⊖ Når markør	en står stille		Shift		
◯ Nå <u>r</u> markør	en bevæges		Alt		
◯ Når <u>k</u> ombin	ationstasten t	rykkes ned	🗹 Ctrl		
			Wind	ows	
	[OK	Annuller	Hjælp	

Markør fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Markørforbedringer	
Normal	Deaktiverer alle markørforbedringer.
Tema	Aktiverer et forudbestemt markørskema (vælges i den tilhørende komboboks).
Speciel	Aktiverer Specialindstillinger hvor du kan oprette dine egne markørskemaer.

Indstil	Aktiverer og konfigurere Specialindstillinger så de er identiske med det valgte forudbestemte markørskema. Dette giver mulighed for at anvende et af de forudbestemte markørskemaer som udgangspunkt for dine egne skemaer.
Prøvevisning	Når du klikker på Prøvevisning vises en tekstmarkør i den form som du har valgt.
Specialindstillinger	
Markørsøger	
Туре	Vælger typen af markørsøger: Kiler. Viser en trekantet kile over og under markøren. Cirkel. Viser en cirkel omkring markøren. Ramme. Viser en ramme omkring markøren.
Størrelse	Indstiller størrelsen af markørsøgeren: Smal, Middel eller Bred.
Farve	Indstiller farven på markørsøgeren.
Gennemsigtig	Indstiller hvor gennemsigtig markørsøgeren skal være. Gennemsigtigheden styrer hvor meget af den bagvedliggende skærm der skal kunne ses gennem markørsøgeren.
Vis markørsøger	
Altid Når markøren	Markørsøgeren er altid synlig. Markørsøgeren er kun synlig når markøren ikke
står stille	bevæges.
Når markøren bevæges	Markørsøgeren vises kun når markøren bevæges.

Når kombinationstast en trykkes ned	Markørsøgeren vises kun når markør kombinationstasten holdes nede.
Kombinationstas t	Indstiller en tast eller en kombination af taster som skal holdes nede for at få vist markørsøgeren. <i>Bemærk:</i> Vis markørsøger indstillingen skal være sat til Når kombinationstasten trykkes ned.

Fokusforbedringer

Fokusforbedringer gør det lettere at se og følge kontroller der kommer i fokus når du anvender tabulator eller piletaster til at bevæge rundt i menuer, dialoger, værktøjslinjer og andre programkontroller. Det er muligt at vælge mellem flere tydelige fokusforbedringer som markerer kontrollens position uden at dække teksten. Du kan vælge mellem forudbestemte skemaer eller oprette dine egne.

Fokus forbedringer indstillingerne aktiveres og ved at aktivere **Fokus** split-knappen kontrollen på **Magnifier** fanen. Den øverste del af knappen slår fokusforbedring til og fra mens den nederste del åbner Fokus menuen.

For at slå Fokusforbedringer til eller fra.

Benyt en af følgende metoder

- På Magnifier værktøjer fanen vælges Fokus knappen.
- Tryk på Fokusforbedring Til / Fra genvejen: Caps Lock + F

For at vælge et forudbestemt fokusskema

- 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Fokus** eller der navigeres til **Fokus** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I **Fokus** menuen vælges **Skema**.
- 3. I Skema menuen vælges det ønskede farveskema.

For at oprette et eget fokusskema

- 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Fokus** eller der navigeres til **Fokus** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Fokus menuen vælges Indstillinger.

Skærmforbedringer indstillinger dialogboksen åbnes Fokus fanen.

- 3. Vælg Speciel...
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Skærmforb	edring indsti	llinger			×
Farve	Mus	Markør	Fokus	Skrifttype	
Fokusfor	rbedringer				
<u>1</u> 0	<u>N</u> ormal				
01	[ema:	Rødt rekta	ngel	\sim	Indstil
	peciel)				
Specialin	dstillinger –				
Fok	us Søger —				
	Туре		G	ennemsiatia	
L L	Ramme	\sim		· · · ·	ا الحاقي بالحاف
l l	Farve		Nidr		Ouryiuc
l	Rød	\sim		Margin	
	Tykkelse		Smal	1 1 1 1	Bred
L L	Middel	\sim	_		
Vis F	Fokus søder				
	Kontinueret			Kombinatior	nstast
	⊖ <u>k</u> ort			Shift	
Ċ) ⊇Når kombin∉	ationstasten	trykkes ned	Ctrl	
	_				
		[OK	Annuller	Hjælp

Fokus fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Fokusforbedringer	
Normal	Deaktiverer alle fokusforbedringer
Tema	Aktiverer et forudbestemt fokusskema (vælges i den tilhørende komboboks)
Speciel	Aktiverer Specialindstillinger hvor du kan oprette dine egne fokusskemaer.

Indstil	Aktiverer og konfigurere Specialindstillinger så de er identiske med det valgte forudbestemte fokusskema. Dette giver mulighed for at anvende et af de forudbestemte farveskemaer som udgangspunkt for dine egne skemaer.
Specialindstillinger	•
Fokus Søger	
Туре	Vælger typen af Fokus Søger: Blok. Viser en blok over kontrollen som er i fokus. Understreget. Viser en linje under kontrollen som er i fokus. Ramme. Viser en ramme omkring kontrollen som er i fokus.
Farve	Indstiller farven på Fokus Søger.
Tykkelse	Indstiller størrelsen af Fokus Søgeren: Smal, Middel eller Bred.
Gennemsigtig	Indstiller hvor gennemsigtig Fokus Søgeren skal være. Gennemsigtigheden styrer hvor meget af den bagvedliggende skærm der skal kunne ses gennem fokus søgeren. <i>Bemærk:</i> Denne indstilling er ikke tilgængelig når Fokus Søger farven er sat til 'Inverteret.'.
Margin	Øger eller sænker mellemrummet mellem kontrollen som er i fokus og fokus søgeren.
Vis Fokus søger	
Kontinueret	Fokus Søger er altid synlig (når en kontrol er i fokus).
Kort	Fokus Søger vises i 1,5 sekunder når en kontrol får fokus.

Når kombinationstast en trykkes ned	Fokus Søger vises kun når fokus kombinationstasten holdes nede.
Kombinationstas t	Indstiller en tast eller en kombination af taster som skal holdes nede for at få vist Fokus Søger. <i>Bemærk:</i> Vis Fokus søger indstillingen skal være sat til Når kombinationstasten trykkes ned.

Anvende Smart inverter

Anvendelse af filtre som kan invertere lysstyrke og farver er populært fordi det reducere genskin og forbedrer læsbarheden af teksten på skærmen. Disse effekter får billeder til at se underlige ud.

Ved at aktivere ZoomText smart inverter funktionen vil ZoomText undlade at invertere foto så de vises i normale farver og lysstyrke.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i Internet Explorer 11 og Google Chrome men vil snarest også virke i andre browsere og programmer.

 For at aktivere eller deaktivere Smart inverter i Farver menuen

- 1. På **Magnifier** fanen klikkes på pilen ved siden af **Farver** eller der navigeres til **Farver** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Farver menuen vælges Anvend smart inverter.

For at aktivere eller deaktivere Smart inverter med en genvej

Tryk på Smart inverter Til / Fra genvejen: Caps Lock + I

Bemærk: Smart inverter kan kun aktiveres og deaktiveres når enten Omvendt lysstyrke eller Inverter farver er aktive.

Navigeringsindstillinger

Navigering indstillinger styrer hvordan du vil have at ZoomText skal rulle zoomvinduet for at holde fokus indenfor vinduet, herunder mus, tekstmarkør, tastatur og andre objekter som vises på skærmen. Her kan du indstille følgende: vælge hvilke objekter og begivenheder som ZoomText skal spore i zoomvinduet, vælge hvor objekter og begivenheder skal placeres i zoomvinduet, automatisk flytte musen til det forstørrede område eller den aktive kontrol og begrænse bevægelsesområdet for musen.

- <u>Sporing</u>
- <u>Justering</u>
- <u>Mus</u>
- <u>Panorering</u>

Sporing

Når du bevæger musen, skriver tekst og navigerer menuer, dialoger og andre program kontroller vil zoomvinduet rulle automatisk for at holde elementet der er i fokus indenfor zoomvinduet. Adfærden styres af indstillingerne i ZoomText sporing hvor du kan vælge hvilke elementer ZoomText skal spore når de bliver aktive. Du kan begrænse sporing til bestemte områder på skærmen.

For at ændre indstillingerne

- 1. På Magnifier værktøjer fanen vælges Navigering knappen.
- 2. I Navigering menuen vælges Sporing.

Navigering indstillinger dialogboksen åbnes på Sporing fanen.

- 3. Tilpas indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Navigeringsir	ndstillinger				×
Sporing	Justering	Mus	Panoreri	ng	
Spor følger ☑ <u>Mu</u> ☑ <u>T</u> el	nde elementer s markør stmarkør nuer	⊻ Konl ⊇⊻ær ⊻ Vi <u>n</u> d	roller ktøjstip uer	U <u>a</u> rslinge	r
		OK	Annuller	Hjæ	lp

Sporing fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Spor følgende elementer	
Mus markør	Aktiverer sporing af musen.
Tekstmarkør	Aktiverer sporing af tekstmarkøren.
Menuer	Aktiverer sporing af menu elementer når de modtager tastatur fokus.
Kontroller	Aktiverer sporing af kontroller når de modtager tastatur fokus.
Værktøjstip	Aktiverer sporing af værktøjstip når de vises på skærmen.
Vinduer	Aktiverer sporing af vinduer når de bliver aktive.
Varslinger	Aktiverer sporing af advarsler når de vises på skærmen.

Justering

Justering indstillinger styrer hvordan zoomvinduet ruller for at holde det sporede element inde i zoomvinduet. Der er to hovedtyper af justeringsmetoder; kant og centrum. Med Kant justering vil zoomvinduet kun rulle når det er nødvendigt for at holde markeringen indenfor vinduet. Centrum betyder at markeringen holdes i centrum af vinduet. Der findes en tredje justering som kaldes "Smart justering", der ruller en kontrol så det meste af den er synlig i zoomvinduet.

For at ændre justering indstillinger

- 1. På Magnifier værktøjer fanen vælges Navigering knappen.
- 2. I Navigering menuen vælges Justering.

Navigering indstillinger dialogboksen åbnes på Justering fanen.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Navigeringsi	ndstillinger			×
Sporing	Justering	Mus	Panorering	
Mus markø	ör justering —			
	denfor kantmarg	jin	Kantr	nargin
() <u>C</u> e	entreret i zoomvi	induet	159	% ▼
Tekstmark	ør justering –			
🔘 Ing	<u>d</u> enfor kantmarç	jin	Kantr	nargin
○ C <u>e</u> ntreret i zoomvinduet 15% 👻			% 🔹	
Menu justi	ering og kontrol			
● <u>A</u> u	itomatisk justeri	ng med mode	ervindue	
⊖Ce	ntreret i zoomvi	induet		
		OK	Annuller	Hjælp

Justering fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Indenfor kantmargin	Zoomvinduet ruller først når det er nødvendigt for at holde et objekt indenfor en bestemt margin fra kanten.
Centreret i zoomvinduet	Zoomvinduet ruller så det sporrede objekt holdes i centrum af zoomvinduet.
Kant margin	Definerer hvor tæt på kanten af zoomvinduet et sporet objekt kan komme på kanten før zoomvinduet rulles, Kant margin kan indstilles mellem 0 % og 50 %; halvdelen af bredden og højden af vinduet.
Automatisk justering med modervindue	Zoomvinduet ruller for at holde det sporrede objekt eller menu element og den største del af det indenfor zoomvinduet.

Mus

Mus navigering indstillinger, mus placering og begrænsning hjælper til at overskue skærmen. Med mus placering vil musen altid kunne hentes ind i visningen når der er behov for det. Med mus begrænsning kan du sikre at musen ikke forlader det aktive vindue eller bliver på en vandret eller lodret linje.

For at ændre indstillinger for mus navigering

- 1. På Magnifier værktøjer fanen vælges Navigering knappen.
- 2. I Navigering menuen vælges Mus.

Navigering indstillinger dialogboksen åbnes på Mus fanen.

- 3. Klik **OK**.
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.

Navigeringsin	ndstillinger			×
Sporing	Justering	Mus	Panorering]
Mus positio	n ———			
	t musen ind på	skærmen når	den flyttes	
Begræns n	nusen			
	ld Shift-tasten i	nede for at fly	ytte vandret elle	r lodret
∟_H <u>o</u>	ld Ctrl-tasten n	ede for at for	blive indentor vir	nduet
		OK	Annuller	Hjælp

Mus fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Flyt musen ind på skærmen når den flyttes	Flytter automatisk musen til centrum af den forstørrede del af skærmen og når musen flyttes forbliver den i centrum.
Flyt musen til den aktive enhed	Flytter automatisk musen til menu elementer og dialogbokse når de kommer i fokus.
Hold Shift-tasten nede for at flytte vandret eller lodret	Ved at holde Shift tasten nede mens musen flyttes vil musen tvinges til at forblive på den vandrette eller lodrette linje som den starter ud på. Denne begrænsede bevægelse giver en mere glidende rulning i rækker og kolonner.
Hold Ctrl-tasten nede for at forblive indenfor vinduet	Ved at holde Ctrl tasten nede mens musen flyttes vil musen tvinges til at forblive på den vandrette eller lodrette linje som den starter ud på. Denne begrænsede bevægelse giver en mere glidende rulning i rækker og kolonner.

Panorering

Glidende panorering betyder at det er mere naturligt at se på zoomvinduerne når de ruller for at holde det der er i fokus synligt. Når du skriver tekst og navigerer i menuer, dialoger og andre program kontroller vil zoomvinduet vise indholdet i en glidende bevægelse.

• For at ændre indstillinger for panorering indstillinger

- 1. På Magnifier værktøjer fanen vælges Navigering knappen.
- 2. I navigering menuen vælges Panorering.

Navigering indstillinger dialogboksen åbnes på Panorering fanen.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Navigeringsi	ndstillinger			×
Sporing	Justering	Mus	Panorering	
Aktivér	glat <u>p</u> anorering)		
	Pano	preringshasti	ghed	
Lang	jsommere		Hurtigere	
	nvend glidende	panorering i	AppReader (App	viser)
		OK	Annuller	Hjælp

Panorering fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Aktivér glidende panorering	Aktiverer ZoomText glidende panorering funktion.
Panoreringshastighed	Styrer hvor hurtigt ZoomText panorere fra en placering til en anden.
Anvend glidende panorering i AppReader	Aktiverer glidende panorering når ord markeres i AppReader.

Kapitel 6 Læser funktioner

"Læser funktioner" dækker over skærmlæsning funktioner som er inkluderet i ZoomText Magnifier/Reader. Disse inkluderer ZoomText stemmen, tastatur-, mus og program ekko, AppReader og Læsezone værktøjer samt tekstmarkør og Læse kommandoer.

Bemærk: Læser funktioner er kun tilgængelige i ZoomText Magnifier/Reader.

- Læser værktøjslinje fanen
- <u>ZoomText stemmen</u>
- Ekko indstillinger
- <u>AppReader</u>
- <u>Læsezoner</u>
- Læse med tekstmarkør
- <u>Læs kommandoer</u>

Læser værktøjslinje fanen

Læser fanen indeholder knapper som udfører tilknyttede funktioner eller ændre indstillinger for en Læser funktion. Mange af disse knapper er split knapper som giver mulighed for at skifte tilstanden for funktionen og åbne en menu med tilknyttede indstillinger. Knapperne er grupperet i kategorier og har intuitive ikoner som etiketter så de er lette at finde.



Læser værktøjslinje fanen

Bemærk: Læser fanen vises kun hvis du anvender ZoomText Magnifier/Reader.

- Stemme. Aktiverer eller deaktivere oplæsning og giver mulighed for at åbne Stemme indstillinger dialogboksen hvor du kan vælge og tilpasse stemmen.
- **Tempo**. Styrer oplæsningstempoet.
- **Tastatur**. Slår tastatur ekko til eller fra og vælger tastatur ekko indstillinger. Tastaturekko giver mulighed for at du kan høre hvilke taster du trykker på og hvilke ord du skriver.
- **Mus.** Slår mus ekko til eller fra og vælger mus ekko indstillinger. Mus ekko læser automatisk den tekst der er under musen.
- **Detaljer.** Indstiller detaljeringsgraden. Detaljer indstillingen giver mulighed for at styre hvor meget information der skal læses om et program element der kommer i fokus.

- AppReader. Starter AppReader som kan læse tekst i det sidst aktive program. AppReader giver mulighed for at læse dokumenter, web sider og e-mail uden at forlade programmet.
- **Zoner.** Giver mulighed for at oprette, redigere og navigere læsezoner. Læsezoner giver mulighed for hurtigt at se og lytte til teksten på bestemte steder i dit program.

ZoomText stemmen

ZoomText giver mulighed for at du kan indstille oplæsningen så den passer bedst til dit behov. Du kan vælge mellem mande- og kvindestemmer, justere tempo og lydstyrke samt hvordan tekster skal læses. Du kan også aktivere eller deaktiver stemmen efter behov.

- Aktiver eller deaktiver stemmen
- Justering af læsetempo
- Valg af stemme
- Indstilling af tekstbehandling
- Indstilling af Hint

Aktiver eller deaktiver stemmen

Du kan slå oplæsningen til og fra når du har behov for det uden at ændrer på forstørrelsesfunktionerne.

For at aktivere eller deaktiver stemmen

Benyt en af følgende metoder

- På Læser værktøj fanen vælges Stemme > Aktiver (eller Stemme > Deaktiver).
- Tryk Stemme Til/Fra genvejen: Caps Lock + Alt + Enter

Bemærk: AppReader vil læse højt selvom stemmen er deaktiveret.

Der kan være tidspunkter hvor du vil stoppe oplæsningen. For eksempel når ZoomText læser en besked boks som du allerede kender. Du kan stoppe oplæsningen ved at slukke stemmen helt.

For at slukke igangværende oplæsning

Tryk og slip **Ctrl** tasten.

Den igangværende oplæsning stopper.

Justering af læsetempo

Læsetempo giver mulighed for at styre hvor hurtigt ZoomText læser.

For at justere læsetempo

Benyt en af følgende metoder

- På Læser værktøjslinjen juster niveauet i **Tempo** spin boksen.
- Tryk Stemme hurtigere eller Stemme langsommere genvejene.
 - o Stemme hurtigere: Caps Lock + Alt + Pil op
 - o Stemme langsommere: Caps Lock + Alt + Pil ned

Bemærk: Læsetempoet kan også justeres i Stemmeindstillinger dialogboksen. For yderligere information se <u>Stemmeindstillinger</u>.

Der er en særskilt indstilling af læsetempo for AppReader. Denne indstilling er i AppReader dialogboksen (Delte indstillinger fanen). For yderligere information se <u>AppReader delte indstillinger</u>.

Stemmeindstillinger

Under stemmeindstillinger kan du vælge og indstille ZoomText stemmen efter behov. Du kan vælge mellem en række forskellige sprog og stemmer samt indstille tempo, stemmeleje og lydstyrke.

For at ændre stemmeindstillinger

- 1. På **Læser** fanen klikkes på pilen ved siden af **Stemme** eller der navigeres til **Stemme** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Stemme menuen vælges Indstillinger.

Stemmeindstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Stemme** fanen.
- 4. Du skal nu sikre at Aktiver tale output er markeret.
- 5. Vælg talesyntese, stemme og indstil tempo, stemmeleje og lydstyrken efter behov.
- 6. For at afprøve talesyntesen kan du skrive tekst i **Prøvetekst** feltet og klikke **Læs prøvetekst**.
- 7. Klik **OK**.

Stemmeindst	illinger				×
Stemme	Tekstbehandling	Tips			
Aktiver	tale output				
Sprog	Dansk			~	
Synte	se Vocalizer Ex	pressive		~	
Stemn	ne Sara Compa	ct		~	
	<u>D</u> ownload	flere stemmer	·		
Stemmeind	stillinger				
Tempo	o Stemmele	je Lyds	tyrke		
100	30%	▲ ▼ 75'	%	Eunktior	ner
Prøvetekst					
Skriv prøve oplæ: stemr	en tekst her og tryk d etekst knappen for at l sningen med den valgt meindstillinger.	ernæst på La nøre æ stemme og	es 🔨	<u>L</u> æs prøv	etekst
		OK		Annuller	Hjælp

Stemme fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Aktiver tale output	Aktivere eller deaktivere oplæsning for skærmlæsning.
Sprog	Viser en liste over tilgængelige talesynteser på din computer.
Syntese	Viser en liste over tilgængelige talesynteser på din computer. <i>Bemærk:</i> ZoomText understøtter også SAPI 4 og SAPI 5 talesynteser.
Stemme	Viser en liste over tilgængelige stemmer til den valgte talesyntese.

Download ekstra stemmer	bner standard web browseren på siden hos reedom Scientific hvor du kan lytte til emmerne før du henter ekstra Vocalizer xpressive stemmer som kan anvendes sammen red ZoomText.	
Stemmeindstillinger		
Tempo	Styrer oplæsningstempoet.	
	Der er en særskilt oplæsningstempo indstilling for AppReader. For yderligere information se Læser indstillinger.	
Stemmeleje	Indstiller stemmeleje for den aktuelle stemme. Stemmeleje indstilles fra 5 % til 100 %, i trin af 5 %.	
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken for den aktuelle stemme. Lydstyrken indstilles fra 5 % til 100 %, i trin af 5 %.	
Funktioner	Viser indstillinger for den valgte talesyntese herunder udtale styring. Hvis talesyntese udtaler et ord forkert kan det ændres ved at tilføje den fonetiske stavning.	
Prøvetekst		
Prøvetekst / Læs prøve	 Her kan du afprøve taleindstillingerne. Du kan skrive en tekst i Prøvetekst feltet og få læst den højt ved at klikke på Læs prøve knappen. De aktuelle indstillinger anvendes til at læse prøveteksten højt inklusiv indstillingerne i tekstbehandling og Hints fanerne. 	

* Hvis AppReader er indstillet til at anvendes særskilte taleindstillinger vil tempo være deaktiveret (grå) når Stemme indstillinger dialogboksen åbnes fra AppReader Tekstviser værktøjslinjen.

Tilføj stemmer

ZoomText Magnifier/Reader inkluderer et antal Vocalizer Expressive stemmer til de mest almindelige sprog. Når du installerer ZoomText vil både en mande- og en kvindestemme der passer til Windows brugerfladen blive installeret. Du kan lytte til en prøve på ekstra stemmer ved at besøge stemme siden hos Freedom Scientific.

For at downloade ekstra Vocalizer Expressive stemmer

- 1. På **Læser** fanen klikkes på pilen ved siden af **Stemme** eller der navigeres til **Stemme** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Stemme menuen vælges Indstillinger.

Stemmeindstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Stemme** fanen.
- 4. Vælg Download ekstra stemmer...

Din web browser åbnes med Stemmesiden hos Freedom Scientific indlæst.

- 5. Hent de stemmer du har brug for.
- 6. Dobbeltklik på hver stemmepakke for at installere dem.

Bemærk: ZoomText understøtter både SAPI 4 og SAPI 5 talesynteser fra andre producenter.

Tekstbehandling

Tekstbehandling kan styre hvordan tal, tegnsætning og ord med indre versaler skal læses højt. Med disse indstillinger kan du oprette en oplæsningsmåde som sørger for at oplæsningen af selv komplekse ord og tal læses så de er lettere forståelige.

For at tilpasse tekstbehandling indstillingerne

- 1. På **Læser** fanen klikkes på pilen ved siden af **Stemme** eller der navigeres til **Stemme** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Stemme menuen vælges Indstillinger.

Stemmeindstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Tekstbehandling** fanen.
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Stemmeindst	illinger			×
Stemme	Tekstbehandling	Tips		
Stemme Tekst Stemme Tekst Filt Cifre Ial Zoo Læ Læ Udtale Ial Læ Læ Læ	Tekstbehandling s ord med indre versale rer gentagene tegn esyntesen styrer taloplæs s tal enkeltvis s tal i par esyntesen styrer oplær s alle sætningstegn s kun sætningstegn de	Tips er som flere ord æsning ning sning af sætnin	igstegn	
		OK	Annuller	Hjælp

Tekstbehandling fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Tekst	
Læs ord med indre versaler som flere ord	Opdeler ord med indre versaler i enkelte ord for bedre oplæsning. For eksempel vil ordet "ZoomText" blive sendt til talesyntesen som "Zoom Text".
Filtrer gentagene tegn	Begrænser antallet af gange gentagne tegn læses højt. Dette er nyttigt hvis gentagne tegn anvendes til formatering.
Gentag antal	Sætter det maksimale antal af gange gentagne tegn læses højt. Antallet kan indstilles fra 2 til 10.

Cifre		
Talesyntesen styrer taloplæsning	Tal læses på den måde talesyntesen er indstillet til.	
ZoomText styrer taloplæsning	ZoomText styrer taloplæsning For eksempel læses "2017" som to tusinde og sytten.	
Læs tal enkeltvis	Tal læses enkeltvist. For eksempel læses "2017" som to nul et syv.	
Læs tal i par	Tal læses parvist. For eksempel læses "2017" som tyve sytten.	
Udtale		
Talesyntesen styrer oplæsning af sætningstegn	Sætningstegn læses på den måde talesyntesen er indstillet til.	
Læs alle sætningstegn	Alle sætningstegn læses højt.	
Læs kun sætningstegn der er en del af ordet	Kun de sætningstegn der er en del af et ord læses. For eksempel læses sales@freedomscientific.com som "sales snabel-a Freedom Scientific punkt com".	

Hints udløser lyde når du støder på store bogstaver, link samt start eller slut på dokument. Hints kan være en ændring i stemmeleje når elementet læses eller en tekst der læses højt fx "Kap" eller "Link" før elementet læses.

For at ændre Hints indstillinger

- 1. På **Læser** fanen klikkes på pilen ved siden af **Stemme** eller der navigeres til **Stemme** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Stemme menuen vælges Indstillinger.

Stemmeindstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg Hints fanen.
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Stemmeindst	tillinger			×
Stemme	Tekstbehandling	Tips		
Versaler Inc Skj Sig	gen oplysning om versa ft toneleje ved versale "Versal" før læsning af	ler r i en versal	Skift Stemmeleje -10%	
Link — O Ski O Sig	gen oplysning om link <u>f</u> t toneleje ved læsning "Link" før læsning af el	ı af link t link	Skift Stemmeleje	
		ОК	Annuller	Hjælp

Hints fanen

Indstillinger	Beskrivelse			
Versaler				
Ingen oplysning om versaler	Ingen oplysning når store bogstaver læses.			
Skift toneleje ved versaler	Tonelejet ændres når store bogstaver læses.			
Sig "Versal" før læsning af en versal	Ordet "Versal" læses før det store bogstav læses.			
Stemmeleje ændring (Versaler)	Procentændringen i stemmelejet sker når det store bogstav læses. Stemmeleje ændring kan sættes til -50 % til +50 % i trin af 10 %.			

Link			
Ingen oplysning om link	Ingen oplysning når link læses.		
Skift toneleje ved læsning af link	Tonelejet ændres når store link læses.		
Sig "Link" før et link læses.	Ordet "Link" læses højt før selve linkteksten læses.		
Stemmeleje ændring (Link)	Procentændringen i stemmelejet sker når linkteksten læses. Stemmeleje ændring kan sættes til -50 % til +50 % i trin af 10 %.		
Ekko

Ekko indstillingerne styrer hvordan ZoomText læser når du skriver på tastaturet, anvender musen og navigerer i dine programmer. Disse indstillinger giver mulighed for at styre hvor meget information du vil have når tekst skrives eller kontroller kommer i fokus.

- <u>Tastaturekko</u>
- <u>Mus ekko</u>
- Program ekko
- <u>Detaljer</u>

Tastaturekko

Tastaturekko giver mulighed for at du kan høre hvilke taster du trykker på og hvilke ord du skriver. Du kan vælge at få de enkelte tegn, ord eller både tegn og ord læst højt De skrevne ord læses højt så snart du taster mellemrum eller et sætningstegn. Du kan også vælge hvilken gruppe at printbare og ikke printbare tegn du vil have læst højt.

For at skifte ekko tilstand

Benyt en af følgende metoder

- På Læser værktøj fanen vælges Tastatur knappen.
- Tryk Tastaturekko tilstand genvejen: Caps Lock + Alt + K

For at ændre indstillinger for tastaturekko

- 1. På Læser fanen klikkes på pilen ved siden af **Tastatur** eller der navigeres til **Tastatur** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I **Tastatur** menuen vælges **Indstillinger**.

Ekko indstillinger dialogboksen åbnes på Tastaturekko fanen.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Indstillinger fo	or Ekko				×
Tastatur	Mus	Program	Detaljer		
Tastatur ek O Inte O Ans O Ans Ekko når ta Prir Nay Red	ko et ekko ilag ilag og ord isten trykkes itbare taster gigeringstaste	ned Eunktio er Låseta	onstaster nationstast st	Multin Andre	nedie taster e taster
		OK	Anr	nuller	Hjælp

Tastaturekko fanen

Indstillinger	Beskrivelse		
Tastaturekko			
Intet ekko	Deaktiverer al tastaturekko.		
Anslag	Aktiverer al tastaturekko ved tastetryk. Du kan vælge hvilke taster der skal læses under indstillingerne for Ekko når tasten trykkes ned .		
Ord	Aktiverer al tastaturekko ved ord. Oplæsningen sker så snart et ord er komplet på skærmen.		
Anslag og ord	Aktiverer tastaturekko ved anslag og ord.		
Ekko når tasten trykkes ned			
Printbare taster	Læser alle printbare tegn: bogstaver, tal og symboler.		

Navigeringstaster	Læser navigeringstaster: piletaster, Home , End, Page Up og Page Down .
Redigeringstaster	Læser redigeringstaster: Backspace, Insert , Delete, Escape og Enter .
Funktionstaster	Læser funktionstasterne: F1 til F12.
Kombinationstast	Læser kombinationstaster: Alt, Ctrl, Shift og Windows tasten.
Låsetast	Læser låsetasterne samt deres status: Caps Lock, Num Lock og Scroll Lock.
Andre taster	Læser diverse taster: Pause, Print Screen og Applikationstasten .

Bemærk: Mulighederne under Ekko når tasten trykkes ned er kun tilgængelige når tastaturekko er sat til Anslag eller Anslag og ord.

Mus ekko

Mus ekko læser automatisk den tekst der er under musen. Når du flytter musen rundt på skærmen vil ord og linjer blive læst højt når musen rammer dem eller efter en kort pause.

For at skifte Mus ekko tilstand

Benyt en af følgende metoder

- På Læser værktøj fanen vælges Mus knappen.
- Tryk Mus ekko tilstand genvejen: Caps Lock + Alt + M

For at ændre indstillinger for mus ekko

- 1. På Læser fanen klikkes på pilen ved siden af **Mus** eller der navigeres til **Mus** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Mus menuen vælges Indstillinger.

Ekko indstillinger dialogboksen åbnes på Mus ekko fanen.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Indstillinger f	or Ekko			×
Tastatur	Mus	Program	Detaljer	
Mus ekko O Int O Øje O Hv	et ekkoj sblikkeligt ekko le ekko		viletid (i sekunder) 0,5	
Når musen ○ Kur @ Ekł	bevæges he n ekko på ord xo på alle ord	n over et ord i linjen eller em	net	
		OK	Annuller	Hjælp

Mus fanen

Indstillinger	Beskrivelse		
Mus ekko			
Intet ekko	Deaktiverer al mus ekko.		
Øjeblikkeligt ekko	Aktiverer al mus ekko. Ord læses så snart musen rammer dem.		
Hvile ekko	Aktiverer forsinket mus ekko. Ord læses hver musen holdes hviler en bestemt tid på en tekst.		
Hviletid (i sekunder)	Tiden som musen skal holde stille på en tekst før den læses højt. Indstillingen gælder kun for Hvile ekko .		
Når musen bevæges hen over et ord			
Kun ekko på ord	Kun ord lige under musen læses højt.		

Ekko på alle ord i linjen eller emnet	Når musen flyttes til en ny linje eller på et nyt objekt vil alle ord eller linjen blive læst højt. Objekter inkluderer: titellinjer, menu elementer, dialog kontroller, skrivebordikoner
	elementer, dialog kontroller, skrivebordikoner
	og status linje knapper.

Bemærk: Når du anvender mus ekko vil ekko tilstanden skifte hvis du trykker på **Shift** tasten mellem **Kun ekko på ord** og **Ekko på alle ord i linjen eller emnet**.

Program ekko

Program ekko styrer hvilke elementer der læses højt når du navigerer og anvender dine programmer. Disse elementer inkluderer: vindue titler, menuer, dialoger, listeoversigter, træoversigter og tekster som markøren står på. Detaljeringsgraden som læses for elementerne kan justeres under Detaljer indstillingerne.

For at ændre indstillinger for program ekko

1. På Læser fanen vælges Ekko indstilinger knappen der vises som et diagonalt pil-ikon i nederste højre hjørne i Ekko gruppen.

Ekko indstillinger dialogboksen åbnes på Program ekko fanen.

- 2. Juster indstillingerne efter ønske.
- 3. Klik **OK**.

Indstillinger f	or Ekko				×
Tastatur	Mus	Program	Detaljer		
Ekko når el	lementet kon	nmer i fokus —			
	stmarkør	\checkmark	<u>V</u> ærktøjstip		
<u> М</u> е	nuer	\checkmark	Vinduetitlen		
Kor	ntroller	\checkmark	V <u>a</u> rslinger		
	<i>a</i>				
Når markør	en flyttes til	ny linje			
OEkk	xo på ordet v	ed markøren			
● Ekk	v <u>o</u> på hele ling	jen			
		OK	Annu	iller	Hjælp

Program fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Ekko når elementet kommen	i fokus
Tekstmarkør	Når tekstmarkøren flyttes læses teksten samt dens nye position højt. Mængden af tekst der læses afhænger af hvor langt markøren har flyttet sig: tegn, ord, linje, sætning eller afsnit.
Menuer	Når du åbner en menu vil dens titel læses efterfulgt af menu elementet som markeres.
Kontroller	Når du navigerer i dialogbokse, træoversigter og listeoversigter vil elementerne læses højt når de markeres eller kommer i fokus.
Værktøjstip	Værktøjstip læses når de vises.
Vinduestitlen	Når et vindue kommer i fokus læses indholdet af titellinjen.
Varslinger	Advarsler læses når de vises.
Når markøren flyttes til ny	linje
Ekko på ordet ved markøren	Når tekstmarkøren flyttes til en ny linje læses teksten samt dens nye position højt.
Ekko på hele linjen	Når tekstmarkøren flyttes til en ny linje læses hele linjen højt.

Detaljer

Detaljer indstillingen giver mulighed for at styre hvor meget information der skal læses om et program element der kommer i fokus. Program kontroller inkluderer: program og dokument vinduer, menuer, dialoger, knapper, ikoner.

Der er tre detaljeringsgrader - Lav, Middel og Høj - hvorved det er hurtigt at skifte til et højere niveau. Høj niveauet giver mest information mens Lav giver mindst information. Hvert niveau kan justeres efter behov. Hvert niveau kan justeres efter behov.

For at skifte detaljeringsgrad

Benyt en af følgende metoder

- På Læser værktøj fanen vælges Detaljer knappen.
- Tryk Ekko detaljeniveau genvejen: Caps Lock + Alt + B

For at ændre indstillingerne

- 1. På Læser fanen klikkes på pilen ved siden af **Detaljer** eller der navigeres til **Detaljer** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Detaljer menuen vælges Indstillinger.

Ekko indstillinger dialogboksen åbnes på Detaljer fanen.

- 3. Tilpas indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Indstillinger f	or Ekko					×
Tastatur	Mus	Program	Detaljer			
Detaljenive	eau /: Læs elemer Idel: Læs eler j: Læs elemer stillinger	nter med minds nenter med mo nter med flest r	t mulig inforn derat inform nulige inform	nation) ation ationer		
Kontr Kontr Kontr Dialog Annoncere	ol hurtigtast oltilstand oltype olværdi g gruppenavn er hurtigtaste	n for den aktiv	> re kontrol.	*	⊻ælg alle Eravælg alle	
		OK	An	nuller	Hjælp	

Detaljer fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Detaljeniveau	
Lav	Læs elementer med mindst mulig information.
Middel	Læs elementer med moderat information.
Høj	Læs elementer med flest mulige informationer.
Detalje indstillinger	En liste med check bokse som indstiller detaljeringsgraden. De aktuelle indstillinger kan ses på hvilke check bokse der er valgt.
Vælg alle	Markerer alle elementer i Detaljer indstillinger listen.
Fravælg alle	Fjerner markeringen fra alle elementer i Detaljer indstillinger listen.

AppReader

AppReader er et godt læseværktøj som kan læse i dokumenter, websider og e-mail mens du visuelt kan fælge med i den læste tekst. AppReader kan læse tekst automatisk fra start til slut, skimme gennem teksten eller læse specifikke områder som du vælger med musen. Uanset hvilken måde du foretrækker at læse på vil AppReader være en god hjælp.

- <u>AppReader læsetilstande</u>
- <u>Tekstlæseren</u>
- Starte og anvende AppReader
- <u>App Viser indstillinger</u>
- <u>Tekstviser indstillinger</u>
- Delte indstillinger

AppReader læsetilstande

Før du begynder med at anvende AppReader er det en god ide at se på de forskellige læsetilstande som er tilgængelige. Ved at forstå hvordan læsetilstande virker kan du vælge den mest effektive tilstand til den applikation som du arbejder i.

AppReader tilbyder disse læsetilstande: App Viser, Tekstviser og LæsDet værktøjet.

- App Viser læser direkte i din applikation. Din applikation ændrer ikke udseende når du starter og stopper AppReader. App Viser er idel for brugere som ønsker at læse uden de tekstforbedringer som Tekstviser tilbyder.
- **Tekstviser** læser i et specielt læsevindue hvor teksten formateres i forhold til de indstillinger du har valgt. Teksten vises på en enkelt linje som ruller vandret på skærmen (Linjetilstand) eller på flere linjer (Sidetilstand). I begge visninger kan du vælge skrifttype, høj-kontrast farver, ordmarkering og forstørrelse. Tekstviser er bedst til de brugere som har behov for yderligere forbedringer af den viste tekst. Se <u>Tekstviser</u> for at læse mere om denne funktion.
- LæsDet værktøjet markerer områder på skærmen ved at klikke og trække musen på skærmen. Den tekst som er synlig på skærmen kan læses med LæsDet værktøjet også selvom teksten ikke er i det program som er i fokus. LæsDet værktøjet er god til hurtigt at læse tekstområder der vises på skærmen.

Du kan anvende AppReader i næsten alle applikationer men de tilgængelige læsetilstande afhænger af understøttelsen i det program du anvender AppReader i. Der skelnes mellem Fuld og basal understøttelse.

• Fuld understøttelse giver mulighed for at anvende alle tre læsetilstande: App Viser, Tekstviser og LæsDet værktøjet. De fleste applikationer hvor der vises længere tekster er fuldt understøttet af AppReader, for eksempel Microsoft Word, Microsoft Outlook, Adobe Reader og Internet Explorer. Basal understøttelse giver kun mulighed for at anvende LæsDet værktøjet. Forsøger du at starte AppReader i App Viser eller Tekstviser tilstand vil AppReader automatisk skifte til LæsDet værktøjet hvis de to tilstande ikke kan anvendes.



AppReader markerer det læste ord i Microsoft Word.

Tekstlæseren

AppReader Tekstviser er en visning hvor teksten formateres så den er lettere at se. Teksten vises på en enkelt linje som ruller vandret på skærmen (Linjetilstand) eller på flere linjer (Sidetilstand). I begge visninger kan du vælge skrifttype, høj-kontrast farver, ordmarkering og forstørrelse.

Tekstviser fylder hele skærmen med en værktøjslinje øverst og dokumentet nedenfor. Dokumentet er formateret og vist som valgt i Tekstviser indstillinger.



AppReader Tekstlæser i sidetilstand



AppReader Tekstlæser i linjetilstand

Tekstviser værktøjslinjen giver mulighed for at styre hvordan Tekstviseren skal virke.

Z Zoom	Text AppRea	ader					 ×
Afspil	6 ‡ Zoomniveau	65 🗘 Тетро) Linje	Şide	App vi.	Indstil	

Tekstviser værktøjslinjen

- Afspil/Pause. Starter og stopper oplæsningen ved det markerede ord. Når Afspil aktiveres vil Pause knappen blive synlig.
- Zoom Niveau. Indstiller forstørrelsesgraden som anvendes i Tekstviser mellem 1x og 36x.
- **Tempo**. Styrer oplæsningstempoet.
- Linje. Viser teksten på en enkelt linje. Når der læses vil teksten rulle vandret på skærmen.
- **Side.** Viser teksten på flere linjer indenfor vinduets bredde. Når der læses vil teksten rulle lodret ligesom rulletekster på et TV.

- App Viser. Skifter til App Viser tilstand.
- Indstillinger. Åbner AppReader dialogboksen med Tekstviser indstillingerne.

Starte og anvende AppReader

Du kan starte AppReader i flere forskellige tilstande og på forskellig vis. Disse metoder beskrives i det følgende herunder hver tilstands adfærd.

For at starte AppReader ved brug af Start læser fra musen kommandoen

 Placer musen der hvor du ønsker at starte oplæsningen fra og tryk dernæst Start læser fra musen kommandoen: Caps Lock + Alt + Venstreklik

AppReader starter i den valgte tilstand og begynder at læse fra musens placering. Tryk Enter for at stoppe oplæsningen. For at starte oplæsningen skal du dobbeltklikke på et ord eller trykke Enter. Se "Læs med AppReader" nedenfor for yderligere information om hvordan man arbejder med AppReader.

For at starte AppReader direkte i App Viser eller Tekstviser tilstand

- Vælg **Anvend App Viser** eller **Anvend Tekstviser** i **AppReader** knapmenuen eller tryk en af følgende genveje:
 - o Start App Viser: Caps Lock + Alt + A
 - o Start Tekstviser: Caps Lock + Alt + T

AppReader starter i den valgte tilstand og begynder med at læse fra den aktuelle tekstmarkør position. Hvis der ikke er en tekstmarkør vil AppReader starte med at læse tekst fra det første synlige ord indenfor det forstørrede vindue indenfor målvinduet. Ellers læser AppReader fra første synlige ord i målapplikationen. Se "Læs med AppReader" nedenfor for yderligere information.

For at starte LæsDet værktøjet

• Vælg **Anvend LæsDet værktøjet** i **AppReader** knapmenuen eller tryk Start LæsDet værktøjet genvejen: **Caps Lock + Alt + S**

LæsDet værktøjet aktiveres.

For at starte AppReader i den valgte tilstand som er valgt i AppReader menuen

• På Læser fanen vælges AppReader knappen eller tryk Start AppReader genvejen: Caps Lock + Alt + R

AppReader starter i den valgte AppReader tilstand.

Læse med AppReader

For at starte og stoppe oplæsning

Tryk **Enter** eller dobbeltklik på ordet hvorfra du vil starte oplæsningen.

For at skimme ord for ord, sætning eller afsnit

Anvend AppReader kommandoerne herunder

For at skifte mellem App Viser og Tekstviser

Tryk Tab.

For at afslutte AppReader

Højreklik eller tryk Esc.

Når AppReader afsluttes vil markøren automatisk stå på det sidste ord der blev læst højt i AppReader hvis applikationen har en tekstmarkør. Følgende genveje kan anvendes til at starte AppReader

Kommando	Genvej
Start AppReader fra mus	Caps Lock + Alt + Venstreklik
Start App Viser	Caps Lock + Alt + A
Start Tekstviser	Caps Lock + Alt + T
Start LæsDet værktøjet	Caps Lock + Alt + S
Start AppReader (i valgte tilstand)	Caps Lock + Alt + R

Når AppReader er aktiv vil følgende taster kunne anvendes til at styre AppReader.

Kommando	Tast
Næste ord	Ctrl + Højre pil
Forrige ord	Ctrl + Venstre pil
Næste sætning	Højre pil
Forrige sætning	Venstre pil
Næste afsnit	Pil ned
Forrige afsnit	Pil op
Næste side	Page Down
Forrige side	Page Up
Aktuelt ord *	Ctrl + Alt + Shift + Pil op
Aktuel linje	Ctrl + Alt + Shift + Højre pil
Aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned
Aktuelt afsnit	Ctrl + Alt + Shift + venstre pil

Første ord på linje	Home
Sidste ord på linje	End
Start på dokument	Ctrl + Home
Slut på dokument	Ctrl + End
Næste link	L
Forrige link	Shift + L
Følg link	Ctrl + Enter

* Når Aktuelt ord kommandoen anvendes vil gentagne tryk indenfor to sekunder give følgende adfærd:

- Første tryk: læser ordet
- Andet tryk: staver ordet
- Tredje tryk: staver ordet fonetisk

App Viser indstillinger

App Viser indstillingerne giver mulighed for at tilpasse udseendet af ordmarkeringen i AppReader herunder markeringsform, farve og gennemsigtighed.

- For at tilpasse App Viser indstillingerne
 - 1. På Læser fanen vælges AppReader > App Viser indstillinger.

AppReader indstillinger dialogboksen åbnes på App Viser fanen.

- 2. Tilpas App Viser indstillingerne efter ønske.
- 3. Klik **OK**.

opReader ind	stillinger			
App viser	Tekstvisning	Delte ind	stillinger	
Funktioner	og marker ord it App visning når o s d rkeringen	dokumentet s Smal Ge Klar	slutter Tykkelse ennemsigtig	Bred Udfyldt
Prøvevis E	^{sning} Ksempelte	ekst i A	pp viser	
1				
		OK	Annuller	Hjælp

App Viser fanen

Indstillinger	Beskrivelse			
Funktioner				
Spor og marker ord	Aktiverer sporing og markering af ord når AppReader læser.			
Afslut App visning når dokumentet slutter.	Når aktiveret vil AppReader lukke automatisk når den er færdig med at læse, <i>Bemærk:</i> AppReader lukker ikke automatisk hvis der navigeres manuelt til slutningen af dokumentet.			
Markering				
Form	Indstiller hvordan markeringen skal se ud: Blok, Understreget, Ramme eller Kile.			
Farve	Indstiller farven på markeringen.			
Tykkelse	Indstiller tykkelsen af markeringen.			
Gennemsigtig	Indstiller gennemsigtigheden for markeringen. <i>Bemærk:</i> Denne indstilling er ikke tilgængelig når markeringsfarven er sat til 'Inverteret.'.			
Følg markeringen	Indstiller sporingstypen: Kant, Centrum eller Spring frem. Med Kant justering vil zoomvinduet kun rulle når det er nødvendigt for at holde markeringen indenfor vinduet. Centrum betyder at markeringen holdes i centrum af vinduet. Spring frem betyder at vinduet starter med at vise markeringen i øverste venstre hjørne og først springer frem når markeringen forlader vinduet.			
Prøvevisning	Viser et eksempel på hvordan markeringen kommer til at se ud.			

bemærk: Der er yderligere indstillinger tilgængelige for App Viser under Delte indstillinger fanen.

Tekstviser indstillinger

Tekstviser indstillingerne giver mulighed for at tilpasse tekstens udseende og hvordan ordmarkeringen i Tekstviser skal se ud.

For at tilpasse Tekstviser indstillingerne

1. På Læser fanen vælges AppReader > Tekstvisning indstillinger.

AppReader indstillinger dialogboksen åbnes på Tekstviser fanen.

- 2. Tilpas Tekstviser indstillingerne efter ønske.
- 3. Klik **OK**.

App viser	Tekstvisning	Delte	e indstillinger	
Skrifttyper				
Skrifttv	ре		Form	
Calibri	-	\sim	Normal	\sim
Delu verent fo				
Dokument ra	irver —	D		
	_	Бадgr		
			orc 🗸	
Formatering:	smærker ——			
🗌 Vis m	nærker for afsnit:	¶		
	erstrea link			
	erstreg link			
Markering	erstreg link			
Markering Form	erstreg link		Tykkelse	
Markering Form Blok	erstreg link	mal 📛	Tykkelse	Bred
Markering Form Blok Farve	erstreg link	mal —	Tykkelse , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bred
Markering Form Blok Farve	erstreg link S genta	mal —	Tykkelse Gennemsigtig	Bred
Markering Form Blok Farve	erstreg link Si genta V	mal —	Tykkelse Gennemsigtig	Bred Udfyldt
Markering Form Blok Farve Følg ma	erstreg link Si genta V rkeringen	mal — (lar —	Tykkelse Gennemsigtig	Bred Udfyldt
Markering Form Blok Farve Følg ma Centru	erstreg link Si genta V rkeringen m V	mal — Klar —	Tykkelse Gennemsigtig	Bred Udfyldt
Markering Form Blok Farve Farve Følg ma Centru	erstreg link Si genta V rkeringen m V isning	mal — <lar td="" —<=""><td>Tykkelse Gennemsigtig</td><td>Bred Udfyldt</td></lar>	Tykkelse Gennemsigtig	Bred Udfyldt
Markering Form Blok Farve Mag Følg ma Centrur Prøvevi	erstreg link singenta v rkeringen m v Eksempelt	mal – Klar –	Tykkelse Gennemsigtig	Bred Udfyldt

Tekstviser fanen

Indstillinger	Beskrivelse			
Skrifttyper				
Skrifttype	Vælger den skrifttype som skal anvendes i Tekstviser som for eksempel Arial, Tahoma eller Verdana.			
Form	Vælger den skriftform som skal anvendes i Tekstviser som for eksempel Normal, Fed eller Kursiv.			
Dokumentfarver				
Tekst	Vælger den tekstfarve som skal anvendes i Tekstviser. Baggrund og tekstfarve kan ikke være ens.			
Baggrund	Vælger baggrundsfarve i Tekstviser. Tekst- og baggrundsfarve kan ikke være ens.			
Formateringsmærker				
Vis mærker for afsnit	Viser afsnitsmarkering når et afsnit afsluttes i det originale dokument.			
Understreg link	Link vises med understregning i Side- og Linjetilstand.			
Markering				
Form	Indstiller hvilken form der skal anvendes til markeringen: Blok, Understreget, Ramme eller Kile.			
Farve	Vælger markeringsfarven.			
Tykkelse 1, 2	Indstiller tykkelsen af ordmarkeringen.			
Gennemsigtighed 2	Indstiller gennemsigtigheden for ordmarkeringen.			
Følg markeringen	Indstiller sporingstypen: Kant, Centrum eller Spring frem. Med Kant justering vil			

	Tekstviseren kun rulle når det er nødvendigt for at holde markeringen indenfor vinduet. Centrum betyder at markeringen holdes i centrum af vinduet. Spring frem betyder at vinduet starter med at vise markeringen i øverste venstre hjørne og først springer frem når markeringen forlader vinduet.
Prøvevisning	Viser et eksempel på hvordan markeringen kommer til at se ud med den valgte skrifttype, farve og markeringsindstillinger.

1 Denne indstilling er ikke tilgængelig når markeringsformen er sat til 'Blok'.

2 Denne indstilling er ikke tilgængelig når markeringsformen er sat til 'Blok' eller markeringsfarven er sat til 'Inverteret'.

Bemærk: Der er yderligere indstillinger tilgængelige for Tekstviser under Delte indstillinger fanen.

Delte indstillinger

Delte indstillinger giver yderligere muligheder for at justere App Viser og Tekstviser. Du kan indstille et læsetempo som kun gælder for AppReader og aktiverer særlige Lyd aktiviteter.

For at ændre Delte indstillinger

1. På Læser fanen vælges AppReader > Delte indstillinger.

AppReader indstillinger dialogboksen åbnes på Delte indstillinger fanen.

- 2. Juster de delte indstillingerne efter ønske.
- 3. Klik **OK**.

AppReader inc	İstillinger					×
App viser	Tekstvisning	Delte indstill	inger			
Læsehastig	hed					
AppRea Læser Valgt n	ader kan anvendes værktøjslinjen) elle: edenfor.	det globale læs r det specielle la	etempo esetemp	(indstille 10 som e	es pă er	
	end specielt læsete	empo				
	100 ×					
Aktiviteter						
∑ <u>S</u> ig '	"Start på dokument	" og "Slut på do	kument"	I		
		ΠΚ	Annull	er	Hiæln	

Delte indstillinger fanen

IndstillingerBeskrivelseLæsetempoNår markeret vil det være muligt at vælge et
specielt læsetempo som kun gælder for
AppReader, altså uafhængigt af indstillingen i
Stemmeindstillinger dialogboksen.TempoStyrer læsetempoet i AppReader.
Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig

Aktiviteter

Sig "Start på dokument" og "Slut på dokument"	Teksten "Start på dokument" og "Slut på dokument" læses når App Viser og Tekstviser navigerer til henholdsvis start og slut på
	dokumentet.

når Anvend specielt læsetempo er markeret.

Læsezoner

Læsezoner giver mulighed for hurtigt at se og lytte til teksten på bestemte steder i dit program. Eksempel: I databaser er det ofte tilfældet at informationen man har behov for at se er spredt på flere steder på skærmen i felter. Når man laver opslag er man ofte kun interesseret i et eller få felter. Med læsezoner kan man hurtige finde og læse de steder på skærmen hvor informationen er placeret.

Du kan oprette op til ti læsezoner til hvert program. Når du åbner og skifter program vil de zoner der er oprettet til det aktive program blive indlæst i ZoomText.

- Oprette, redigering og sletning
- <u>Anvend læsezoner</u>
- Læsezoner værktøjslinjen
- <u>Læsezoner indstillinger</u>

Oprette, rediger og slette læsezoner

Oprettelse af en ny læsezone er helt enkelt. I de fleste tilfælde defineres zonens område, zonen navngives og indstilles til om den skal vises, læses højt eller begge. Du kan til enhver tid redigere en zone eller slette den.

For at oprette en ny læsezone

- 1. Åben det program du vil oprette en læsezone til. Find den information og det sted på skærmen du vil oprette en zone for.
- 2. Aktiver Opret zone værktøjet på en af følgende måder:
 - Skift til ZoomText brugerfladen På Læser værktøj fanen vælges Zoner > Ny.
 - Tast Opret zone genvejen: Caps Lock + Alt + C.

Opret zone værktøjet åbnes og eksisterende zoner for det aktive program bliver alle synlige.

- 3. Flyt musen så det ønskede område i programmet bliver synligt.
- 4. Hold venstre musetast nede og træk en firkant omkring det område hvor du vil oprette zonen.

Når du er tilfreds med firkantens størrelse slippes musetasten og Læsezoner dialogen åbnes. Her skal du navngive zonen og indstille zonens adfærd. For information om Læsezoner dialogen se <u>Læsezoner Indstillinger</u>.

5. I **Zone navn** feltet skal du skrive et navn som beskriver den nye zone.

Når du navigerer til næste kontrol i dialogboksen vil det nye zonenavn blive synligt i listen.

- 6. Under **Zonen er relativ til** skal du vælge zonens relative placering i programvinduet.
- 7. Under **Zoneaktiviteter** skal du indstille zonens adfærd.

8. Klik **Aktiver** for at teste zonen.

Læsezoner dialogen skjules mens zonen vises og/eller læses med dine indstillinger.

- 9. For at oprette flere zoner klikkes **Ny Zone** og trin 4 til 9 gentages.
- 10. Klik **OK** når du er færdig.

For at redigere en zone

- 1. Åben det program som indeholder en læsezone der skal redigeres.
- 2. Åben Rediger zone værktøjet på en af følgende måder:
 - Skift til ZoomText brugerfladen. På Læser værktøj fanen vælges Zoner > Rediger.
 - Tryk Rediger zone genvejen: **Caps Lock + Alt + E**.

Rediger zone værktøjet åbnes og eksisterende zoner for det aktive program bliver alle synlige. Læsezoner værktøjslinjen er synlig ved den aktive zone.

3. Flyt musen til den ønskede zone og klik på Næste eller Forrige knapperne på Læsezoner værktøjslinjen for at få den ønskede zone ind i visningen.

Bemærk: Næste og Forrige knapperne er kun tilgængelige hvis der er oprettet mere end en zone.

- 4. Klik i zonen for at aktivere redigeringstilstanden og juster zonen efter behov.
 - For at ændre størrelsen trækkes i håndtagene.
 - For at flytte vinduet placeres musen indenfor vinduet hvor det kan trækkes til ny placering.
 - For at teste læsezonen klikkes på Afspil.
- 5. Tast zonenummeret eller klik Næste eller Forrige for at flytte til en anden zone.

- 6. For at redigere en ny zone gentages trin 3 og 4.
- 7. Tryk **ESC** eller høreklik for at afslutte værktøjet.

For at slette en zone

1. På Læser værktøj fanen vælges Zoner > Indstillinger.

Læsezoner dialogboksen åbnes.

2. I **Vis zoner oprettet for** komboboksen vælges det program som indeholder den zone der skal slettes.

Zonelisten opdateres så den viser de zoner som er tilknyttet det valgte program.

- 3. i **Zoner** listen vælges den zone der skal slettes.
- 4. Klik **Slet**.

Den slettede zone fjernes fra listen.

- 5. For at slette en ny zone gentages trin 2 til 4.
- 6. Klik **OK** når du er færdig.

Anvend læsezoner

Når du har oprettet læsezoner til et program kan du anvende dem hver gang programmet er aktivt. Du kan aktivere en enkelt zone af gangen (via menuen eller en genvej) eller gå i en tilstand hvor du kan navigere i læsezonerne.

For at aktivere en læsezone

- 1. Åben det program som indeholder en læsezone der skal aktiveres.
- 2. Aktivere den ønskede zone på en af følgende måder:
 - Skift til ZoomText brugerfladen På Læser værktøj fanen vælges Zoner > Aktriver > {zone nummer}.
 - Tryk Aktiver Zone genvejen: Caps Lock + Alt + {Zone nummer}.
 - Tryk Liste zoner genvej: **Caps Lock + Alt + L**, vælg dernæst den ønskede zone fra menuen.
 - Anvend Næste og Forrige Læsezoner genvejene:

Næste Zone: **Caps Lock + Alt + N** Forrige Zone: **Caps Lock + Alt + P**

Den valgte læsezone vises og eller læses afhængig af zone indstillingerne.

Hvert program kan have læsezoner nummereret fra 1 til 10. Læsezoner genveje svarer til zonenummeret. For eksempel har læsezone 1 genvejen **Caps Lock + Alt + 1**, Læsezone 2 er **Caps Lock + Alt + 2**, osv.

Bemærk: genvejen til læsezone 10 er Caps Lock + Alt + 0.

• For at navigere gennem alle læsezoner

- 1. Åben det program som indeholder de læsezoner der skal navigeres i.
- 2. Aktivér Navigering tilstand på en af følgende måder:

- På Læser værktøj fanen vælges Zone navigering
- Tryk Naviger zoner genvejen: **Caps Lock + Alt + G**

Navigering tilstand aktiveres og læsezoner værktøjslinjen er synlig ved den først aktive læsezone. Zonenavnet og nummeret læses.

3. For at starte og stoppe oplæsning af zonen klikkes Afspil/Pause knappen.

Bemærk: Afspil/Pause knappen er deaktiveret (grå) når der navigeres til zoner uden oplæsning.

- 4. For at navigere til en anden zone klikkes Næste eller Forrige knapperne.
- 5. For at lukke navigering tilstand, højreklik eller tryk **Esc**.

Læsezoner værktøjslinjen

Læsezoner værktøjslinjen er synlig ved den aktive zone så snart du åbner en læsezone. På værktøjslinjen indeholder kontroller der styrer navigering og læsning af zonerne.



Læsezoner værktøjslinjen: Rediger og navigering tilstande



Læsezoner værktøjslinjen: Aktiver tilstand

	Afspil/Pause/Stop. Starter og stopper oplæsning. Når Afspil aktiveres vil Pause eller stop knappen blive synlig afhængig af den tilstand der er aktiv. Pause knappen vises i Aktiver og Navigering tilstande når du kan holde pause i oplæsningen ved et markeret ord. Stop knappen vises i Rediger tilstand hvor læsning altid starter forfra i zonen. Genvej: Enter
	Forrige. Aktiverer den forrige zone. Genvej: Shift + Tab <i>Bemærk:</i> Denne knap er ikke synlig i 'Aktiver' tilstand.
	Næste aktiverer den næste zone. Genvej: Tab <i>Bemærk:</i> Denne knap er ikke synlig i 'Aktiver' tilstand.
×	Luk afslutter Læsezone tilstand. Genvej: Esc

Læsezoner indstillinger

Læsezoner indstillinger giver mulighed for at oprette, teste og redigere læsezoner. Når aktiveret vise Læsezoner dialogboksen en liste over de oprettede zoner til det aktuelle program. ved at vælge en zone fra Zoner listen kan du redigere indstillingerne for den, aktivere zonen eller slette zonen. Du kan også oprette nye zoner eller navigere gennem alle zonerne i det aktuelle program

For yderligere information om at oprette, redigere, navigere og aktivere zoner se <u>Oprette og redigere Læsezoner</u> og <u>Anvende</u> <u>Læsezoner</u>.

For at tilpasse zone indstillingerne

1. På Læser værktøj fanen vælges Zoner > Indstillinger.

Læser dialogboksen åbnes på Zoner fanen.

- 2. Juster indstillingerne efter ønske.
- 3. Klik **OK**.
| Læsezoner | × |
|---|---|
| <u>V</u> is zoner oprettet for:
Microsoft Word | ~ |
| Zoner
1. My First Zone
Genvej: Ctrl + Win + 1
Rediger ∑let Aktiver
Naviger blandt zonerne | Zonenavn
My First Zone
Zonen er relativ til
Øverst til venstre
Øverst til højre
Venstre bund
Højre bund
Gentrum
Zoneaktiviteter
Læs teksten i zonen
Rul til zone
Øvis og læs zone
Marker zonen for:
1 sekund
Vend tilbage til forrige placering
Vend tilbage til forrige placering |
| ОК | Annullér Hjælp |

Læsezoner dialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Vis zoner oprettet for:	Viser en liste over de programmer som kører på computeren. Zoner som er tilknyttet det valgte program vises i Zoner list boksen.
Zoner	Viser en liste over de zoner som er tilknyttet det program som er valgt i Vis zoner oprettet for: listen.
Genvej	Viser genvejen for den valgte zone.
Rediger	Aktiverer Rediger zone værktøjet. Når aktiveret er Læsezoner dialogboksen skjult og zonerne zoner som er tilknyttet det aktuelle program vises. Rediger zone værktøjet åbnes så du kan ændre størrelse og placering af zonerne.

Slet	Sletter den valgte zone.
Aktiver	Aktiverer den valgte zone. Når aktiveret er Læsezoner dialogboksen skjult og den valgte zone læses. Derefter åbnes Læsezoner dialogboksen igen.
Ny zone	Aktiverer Ny zone værktøjet. Når aktiveret er Læsezoner dialogboksen skjult og zonerne zoner som er tilknyttet det aktuelle program vises. Ny zone værktøjet åbnes så du kan oprette en ny zone.
Naviger blandt zonerne	Aktiverer Zone navigering tilstand. Når aktiveret er Læsezoner dialogboksen skjult og den valgte zone og navigering værktøjslinjen vises. Ved at anvende værktøjslinje kontrollerne eller tastatur kommandoer kan du starte og stoppe zonelæsning og navigere til næste eller forrige zone.
Zonenavn	Her kan du give din den valgte zone et navn. Zonenavnet vises i Zoner listen i Læsezoner dialogen. De vises også i Læsezoner menuen (tryk Læsezoner liste genvejen: Caps Lock + Alt + L) og når Zoner > Aktiver vælges på Læser værktøjslinjen.
Zonen er relativ til	
top venstre, top højre, bund venstre, bund højre eller centrum	Indstiller den relative position for zonen indenfor programvinduet. Dette beholder zonen på den korrekte placering også når der ændres størrelse eller placering programvinduet. <i>Bemærk:</i> I nogle tilfælde vil en ændring i størrelsen af et programvindue også påvirke størrelsen af kontroller i vinduet. Når dette sker skal du eventuelt tilpasse læsezonerne.

Zoneaktiviteter	
Læs teksten i zonen	Når en læsezone aktiveres vil alt tekst indenfor zonen blive læst højt.
Rul til zone	Når en læsezone aktiveres vil zonen rulles så den er synlig i visningen og markeres.
Vis og læs zone	Når en læsezone aktiveres vil zonen rulles så den er synlig i visningen, markeres og læses.
Marker zonen for:	Indstiller den tid (i sekunder) som zonen markeres. <i>Bemærk:</i> Markering sker kun når Rul til zone er valgt.
Vend tilbage til forrige placering	Efter zonen er vist vil ZoomText rulle tilbage til den placering som var synlig før zonen blev aktiveret.
Nedton området udenfor zonen	Når en læsezone aktiveres vil området udenfor zonen blive nedtonet.

Læse med tekstmarkør

Tekstmarkør læsekommandoer giver mulighed for at navigere og læse mens du skriver og redigerer i dokumenter per ord, linje, sætning eller afsnit. Når du anvender disse kommandoer vil tekstmarkøren flytte sammen med kommandoerne. For eksempel vil kommandoen Læs næste sætning flytte markøren til starten af næste sætning og læse hele sætningen. Følgende tabel viser en liste over tekstmarkør kommandoerne.

Kommando	Genvej	Taster
Læs forrige tegn	Venstre pil	N/A
Læs næste tegn	Højre pil	N/A
Læs forrige ord	Ctrl + Venstre pil	N/A
Læs næste ord	Ctrl + Højre pil	N/A
Læs forrige linje 3	Pil op	N/A
Læs næste linje 3	Pil ned	N/A
Læs forrige sætning	Caps Lock + Alt + Venstre pil	N/A
Læs næste sætning	Caps Lock + Alt + Højre pil	N/A
Læs forrige afsnit	Ctrl + Pil op	N/A
Læs næste afsnit	Ctrl + Pil ned	N/A
Læs aktuelt tegn 1	Ctrl + Alt + Shift + Enter	N/A
Læs aktuelt ord 2	Ctrl + Alt + Shift + Pil op	N/A
Læs aktuel linje	Ctrl + Alt + Shift + Højre pil	N/A
Læs aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned	N/A
Læs aktuelt afsnit	Ctrl + Alt + Shift + venstre pil	N/A

1 Andet tryk på Læs aktuelt tegn kommandoen læser tegnet højt fonetisk: "Alpha, Bravo, Charlie, ...".

2 Gentage tryk på Læs aktuelt ord kommandoen giver følgende oplæsning:

- Første tryk: læser ordet
- Andet tryk: staver ordet
- Tredje tryk: staver ordet fonetisk: "Alpha, Bravo, Charlie, ..."

Bemærk: Gentagne tryk skal ske indenfor to sekunder.

3 Denne kommando læser det aktuelle ord eller hele linjen afhængig af Program ekko indstillingen **Når markøren flyttes til ny linje**.

Udover tekst læse kommandoerne ovenfor vil ZoomText også læse højt når der navigeres med de almindelige Windows kommandoer som er opført i følgende tabel.

Anslag	Program adfærd	ZoomText adfærd
Backspace	Sletter tegnet til venstre for markøren.	Læser det slettede tegn.
Delete	Sletter tegnet til højre for markøren.	Læser det nye tegn til højre for markøren.
Home	Flytter markøren til starten af linjen.	Læser første ord på linjen (eller intet hvis linjen starter med et blanktegn).
End	Flytter markøren til slutningen af linjen.	Læser "Slut på linje".
Page Up	Flytter en side tilbage i dokumentet.	Denne kommando læser ordet eller hele linjen afhængig af program ekko indstillingen Når markøren flyttes til ny linje.

Page Down	Flytter en side frem i dokumentet.	Denne kommando læser ordet eller hele linjen afhængig af program ekko indstillingen Når markøren flyttes til ny linje.
Ctrl + Home	Flytter til start på dokumentet.	Denne kommando læser ordet eller hele linjen afhængig af program ekko indstillingen Når markøren flyttes til ny linje.
Ctrl + End	Flytter til slut på dokumentet.	Denne kommando læser ordet eller hele linjen afhængig af program ekko indstillingen Når markøren flyttes til ny linje.

Læs kommandoer

Læs kommandoer annoncerer forskellige skrivebord og program elementer efter behov. Som standard vil disse kommandoer ikke have nogen genveje tilknyttet og aktiveres med kommandotaster. Du kan selv tilknytte genveje til dem hvis du har bruge for det via kommandotaster dialogboksen.

Kommando	Genvej	Taster
Læs aktuelle dato	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, D
Læs aktuelle tidspunkt	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, T
Læs celletitlen	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, C
Læs cellekommentarer	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, N
Læs celleformel	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, O
Læs celle rækketitlen	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, R
Læs udklip	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, P
Læs dialogens standardknap	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, B
Læs dialogens gruppenavn	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, G
Læs besked teksten	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, M
Læs fanebladet	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, A
Læs fokus	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, F
Læs markeret tekst	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, S
Læs statuslinje	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, U
Læs Vinduestitlen	Ikke tildelt	Caps Lock + Mellemrum, Y, W

Kapitel 7 Værktøjer funktioner

Værktøjer fanen indeholder ekstra værktøjer, som gør det lettere at arbejde på computeren herunder Søger, Kamera, Baggrund Læser og Optager.

- <u>Værktøjer værktøj fanen</u>
- <u>Søger</u>
- <u>Kamera</u>
- Baggrund Læser
- <u>Optager</u>

Bemærk: Baggrund Læser og Optager er kun tilgængelige i ZoomText Magnifier/Reader.

Værktøjer værktøj fanen

Værktøjer fanen giver adgang til en hurtig måde at starte ZoomText værktøjer funktionerne på. Mange af disse knapper er split knapper som giver mulighed for at skifte tilstanden for funktionen og åbne en menu med tilknyttede indstillinger. Knapperne er grupperet i kategorier og har intuitive ikoner som etiketter så de er lette at finde.



Værktøjer værktøj fanen

Bemærk: Baggrund læser og Optager er kun tilgængelige i ZoomText Magnifier/Reader.

- **Søger.** Søgeren giver mulighed for hurtigt at finde, skimme og læse dokumenter, websider og e-mail.
- Kamera. Starter ZoomText kamera funktionen når et understøttet kamera er tilsluttet og tilgængelig for ZoomText.
- **Baggrund Læser.** Starter Baggrund læseren med den tekst som er i Windows udklipsholderen.
- **Optager.** Starter ZoomText Optager med den tekst som er i Windows udklipsholderen.

Søger

Søgeren giver mulighed for hurtigt at finde, skimme og læse dokumenter, websider og e-mail. Du kan søge efter ord og fraser. Når du har fundet det du søger kan du lade søgeren læse fra stedet. Søger kan også finde og følge link og kontroller som betyder at du let kan navigere mellem sider. Alle disse funktioner udføres via Søger værktøjslinjen og dialogboks samt kommandotaster.

Bemærk: Stemme og AppReader funktioner er ikke tilgængelige når Søger anvendes i ZoomText Magnifier.

Søger tilbyder to måder at søge sider på: **Sidesøgning** og **Liste søgning.** Disse to måder beskrives i det følgende.

Bemærk: Søger kan anvendes i en række dokumentbaserede programmer herunder Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Word og Microsoft Outlook.

Starte Søger

For at starte Søger

Benyt en af følgende metoder:

- På Værktøjer værktøjslinjen vælges Søger knappen.
- Tryk Start Søger genvejen: Caps Lock + Ctrl + F

Søger værktøjet/dialogen åbnes.

Side Søgning

Side Søgning er en enkelt opbygget værktøjslinje hvor du kan skrive den tekst du leder efter og dernæst anvende værktøjs kontroller eller tastatur kommandoer til at gennemse alle forekomster. Du kan også begrænse side søgning til bestemte webside elementer form for eksempel overskrifter, link eller kontroller.



Søger: Side Søgning værktøjslinje.

For at anvende Side Søgning

- 1. Hvis Søger aktuelt er i Liste søgning tilstand klikkes på List knappen for at skifte til Side søgning tilstand.
- 2. Marker de Side elementer du vil søge i. Vælg **Al tekst**, som er anbefalet for de fleste søgninger, for at udføre en fritekst søgning herunder i skjulte grafik etiketter og kontroller.
- 3. I **Søg** feltet skrives det ord eller den frase du vil søge efter.

Hvis hverken ordet eller frasen findes blandt de valgte side elementer vil Søge feltet blive orange og navigering knapperne bliver deaktiveret.

Bemærk: Når Sideelementer er sat til All Tekst skal du skrive mindst et tegn i Søge feltet for at starte en søgning. Når Side elementer er sat til en af de andre typer kan du navigere i disse elementer uden at angive en søge tekst.

4. Klik **Næste** og **Forrige** knapperne for at navigere frem og tilbage i resultatlisten.

Når du navigere bliver elementerne markeret. Anvender du ZoomText Magnifier/Reader med Tale aktiveret vil sætningen som indeholder elementet blive læst højt.

- 5. For at få Søger til at følge et link eller klikke på en kontrol i det aktuelle element klikkes **Udfør** knappen.
- 6. For at få Søger til at starte oplæsningen fra det aktuelle element klikkes **AppReader** knappen. *
- 7. For at aktivere eller deaktivere oplæsning i Søger klikkes **Speech** knappen. *
- 8. For at afslutte Søger klikkes på Luk knappen på titellinjen.

* I ZoomText Magnifier vil AppReader og taleindstillingerne ikke være tilgængelige hvorfor disse knapper er deaktiveret (grå).

Liste Søgning

Liste Søgning udvider værktøjslinjen så den viser en liste over overskrifter, link, kontroller og andre almindelige elementer som findes på siden. Du kan søge, filtrere og sortere listen.

🗟 ZoomText Søger				×
Alle elementer v <mark>Ai Squared v</mark> Si <u>d</u> e elementer <u>S</u> øg	K Fo <u>r</u> rige	Næste Udf	D jør Al	ppReader Liste
Liste Søgning viser resultater svarende til Side ele	ementer indstillir	ngerne og Søg tekst.		
Fundne elementer: 6	S <u>o</u> rter efter	Sideorden	\sim	O <u>p</u> datér liste
Navn			Туре	
Ai Squared			Sektion	n: Banner Landmark
Ai Squared			Link	
Ai Squared Ai Squared			Image	
Play Our Ai Squared Video Play Our Video			Link	
Click here to read our latest news News from	AI Squared		Link	
Click here to read the full article titled 'Ai Square	<mark>ed</mark> joins VFO, h	ome of Freedom	Link	
Skiul grafik uden navn				Indstillinger
				2. reschinger in
			Lul	k <u>H</u> jælp

Søger: Liste Søgning værktøjslinjen / dialogboksen.

For at anvende Liste Søgning

- 1. Hvis Søger aktuelt er i Side søgning tilstand klikkes på List knappen for at skifte til Side søgning tilstand.
- 2. I **Side elementer** komboboksen, vælges den type elementer som du vil se i resultatlisten.

3. For at søge (eller filtrere) listen skrives et ord eller en frase **i Søge** feltet.

Når du skriver i Søge feltet bliver listen automatisk filtreret så den kun viser de elementer som indeholder din søgetekst. Søge feltet bliver farvet orange hvis der ikke findes nogen elementer i resultatlisten.

- 4. Du kan sortere listen ved at vælge en sortering i Sorter efter listen. Du kan også sortere listen ved at klikke på **Navn** og **Type** overskrifterne i toppen af listen.
- 5. For at få Søger til at starte oplæsningen fra det markerede element klikkes **AppReader** knappen. *
- 6. For at få Søger til at følge et link eller klikke på en kontrol i det aktuelle element klikkes **Udfør** knappen.
- 7. For at få Søger til at gå til placeringen for det markerede element klikkes **Gå Til** knappen.
- 8. For at afslutte Søger klikkes på Luk knappen.

* I ZoomText Magnifier vil AppReader ikke være tilgængelige hvorfor disse knapper er deaktiveret (grå).

Genindlæse listen i Liste søgning

Visse web sider indeholder områder som ændrer sig dynamisk, for eksempel nyhedssider og sider der viser live resultater fra sportskampe. Når Søger startes eller skifter til Liste søgning henter den det aktuelle indhold fra web siden og ignorere derefter ændringer på siden. Hvis du ved at siden indeholder dynamisk opdaterede områder kan du klikke på **Genindlæs Listen** for at opdatere søgeresultaterne.

Skjule unavngivne billeder i Liste Søgning

Mange websider indeholder billeder uden navn. For at forhindre at unavngivne billeder fylder listen over fundne elementer op kan du fravælge disse ved at markere Skjul grafik uden navn.

Søger kommandotaster

Følgende genveje kan anvendes til at starte Søger

Kommando	Genveje
Start søger	Caps Lock + Ctrl + F

Følgende taster kan anvendes til at starte Søger.

Kommando	Taster
Start søger	Caps Lock + Mellemrum, F

Når Søger er aktiv kan følgende taster anvendes til at styre søgeren.

Kommando	Anslag
Skifte Side elementer typen op	Ctrl + Pil op
Skifte Side elementer typen ned	Ctrl + Pil ned
Udfør element	Ctrl + Enter
Første element (i filtreret liste)	Ctrl + Home
Sidste element (i filtreret liste)	Ctrl + End
Næste kontrol	Ctrl + C
Næste formular	Ctrl + F
Næste overskrift	Ctrl + H
Næste overskrift niveau 1 6	Ctrl + 1 6
Næste billede	Ctrl + I
Næste link	Ctrl + L
Næste liste	Ctrl + S
Næste tabel	Ctrl + T
Næste element	Enter eller Ctrl + Højre pil

Forrige kontrol	Ctrl + Shift + C
Forrige formular	Ctrl + Shift + F
Forrige overskrift	Ctrl + Shift + H
Forrige overskrift niveau 1 6	Ctrl + Shift + 1 6
Forrige billede	Ctrl + Shift + I
Forrige link	Ctrl + Shift + L
Forrige liste	Ctrl + Shift + S
Forrige tabel	Ctrl + Shift + T
Forrige element	Shift + Enter eller Ctrl + venstre pil
AppReader	Alt + R
Skifte liste søgning	Alt + L
Tekstsøger	Esc

Søger markering og stemme indstillinger

Søger indstillinger giver mulighed for at du kan indstille søgemarkeringen og stemme indstillinger som anvendes når du skimmer resultatlisten. Markeringen gør det lettere at finde og følge de fundne elementer når Næste og Forrige kommandoerne anvendes. Markér Søger indstillingerne giver mulighed for at tilpasse udseendet af ordmarkeringen herunder markeringsudformning, farve og gennemsigtighed. Søge stemmen annoncerer hvert fundne element når Næste og Forrige kommandoerne anvendes. Søger stemme indstillinger giver mulighed for at aktivere eller deaktivere oplæsning af de fundne elementer.

For at ændre indstillinger for Markér Søger

- 1. På **Værktøjer** fanen klikkes på pilen ved siden af **Søger** eller der navigeres til **Søger** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Søger menuen vælges Indstillinger.

Søger indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg Markering fanen.
- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK.**

Søger indstillin	ger	×
Markering	Stemme	
Markér Søger Form Ramme Farve Middel Middel	Ger Klar	nemsigtig
Prøvevisr El	^{ing} (sempel på Søger	element
	ΟΚΑ	nnuller Hjælp

Søger indstillinger Markering fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Markér Søger	
Form	Indstiller formen der anvendes til at markere det aktuelle resultat: Blok, Understreget eller Ramme.
Farve	Indstiller farven på markeringen.
Tykkelse	Indstiller tykkelsen af markeringen.
Gennemsigtig	Indstiller gennemsigtigheden for markeringen. <i>Bemærk:</i> Denne indstilling er ikke tilgængelig når markeringsfarven er sat til 'Inverteret.'.
Prøvevisning	Viser et eksempel på hvordan markeringen kommer til at se ud.

• For at ændre indstillinger for Søger Stemme indstillinger

- 1. På **Værktøjer** fanen klikkes på pilen ved siden af **Søger** eller der navigeres til **Søger** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Søger menuen vælges Indstillinger.

Kamera indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Vælg **Stemme** fanen.
- 4. Juster stemme indstillingerne efter ønske.
- 5. Klik **OK**.

Søger indstillin	ger			×
Markering	Stemme			
Søger Stemm	e ———			
⊠ <u>L</u> æs hv Næste	ert element de og Forrige kon	er findes med Imandoerne		
		OK	A 11	
		UK	Annuller	Hjælp

Søger indstillinger Stemme fanen

Indstillinger	Beskrivelse
Søger stemme	
Søge stemmen annoncerer hvert fundne element når Næste og Forrige kommandoerne anvendes.	Aktiverer eller deaktiverer oplæsning af de fundne elementer når Næste og Forrige kommandoerne anvendes.

ZoomText Kamera

ZoomText Kamera funktionen understøtter alle HD web kamera så du kan forstørre bøger, blade, strikketøj, billeder osv. direkte på din computerskærm. Enkle kontroller styrer zoom, farver og kontrast. Du kan skifte mellem fuld og låst vinduer som giver mulighed for at du kan have kamera billedet på skærmen samtidigt med dine programmer. ZoomText Kamera funktionen omdanner derved en bærbar computer til et let anvendeligt og bærbart CCTV.

ZoomText 11 is a powerful complete impaired. Consisting of two adapt screen reading – ZoomText allows computer screen, providing com and the Internet. ZoomText 10 al standard HD webcam. ZoomText 10 is a powerful compute impaired. Consisting of two adaptiv screen reading – ZoomText allows y



ZoomText Kamera - Fuld skærm

ZoomText Kamera - Låst skærm

Komme godt i gang med ZoomText Kamera

Før du kan anvende ZoomText Kamera funktionen skal du anskaffe et passende kamera og en holder samt vælge dit kamera i ZoomText Kamera indstillinger.

Anskaffelse at et passende kamera og en holder

For at anvende ZoomText Kamera funktionen skal du koble et HD kamera til som ikke har autofokus. Kameraet bør tilbyde mindst 1080p video opløsning med automatisk korrektion for lavt lysniveau. Du skal også have en ledig USB 2.0 port til kameraet.

Udover kameraet skal du have en passende holder eller stativ så du kan lægge ting under kameraet, fx en bøg. Holderen bør være justerbar og stabil.

Freedom Scientific tilbyder en færdig pakke som indeholder både kamera og stativ. For yderligere information og dette skal du kontakte din forhandler eller se www.freedomscientific.com (på engelsk).

Indstilling af kameraet på dit arbejdsområde.

For at opnå bedst ydelse og brugbarhed bør du følge denne vejledning i hvordan du indstiller kameraet.

- Placer kameraet så tæt som muligt på din computerskærm. Dette gør det muligt at flytte ting du placerer under kameraet uden du skal flytte dig væk fra computeren.
- Du skal sikre at der er tilstrækkeligt med lyd omkring området kameraet skal filme.
- Juster din kameraholder så den kameraet ca. 10 cm fra det du vil se på.
- At vælge et kamera (når mere end et kamera er tilkoblet computeren)

ZoomText detekterer automatisk web kamera som er tilsluttet din computer, herunder evt. indbyggede kamera. Du skal indstille ZoomText så det anvender det kamera du ønsker. Under kamera indstillinger i ZoomText værktøjer dialogboksen finder du indstillingen.

For at vælge et kamera

- 1. På **Værktøjer** fanen klikkes på pilen ved siden af **Kamera** eller der navigeres til **Kamera** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Kamera menuen vælges Indstillinger.

Kamera indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. I listen over **Aktrive kamera** listen vælges det kamera du ønsker at anvende
- 4. Klik **OK**.

Anvende ZoomText Kamera

Anvend følgende trin for at starte, indstille og anvende ZoomText Kamera.

For at starte ZoomText Kamera

- 1. Benyt en af følgende metoder
 - På Værktøjer værktøjslinjen vælges Kamera knappen.
 - Tryk start Kamera genvejen: Caps Lock + Ctrl + C

Kamera billedet åbnes på øverste halvdel af skærmen mens ZoomText zoomvinduet er på den anden halvdel af skærmen. ZoomText kamera værktøjslinjen åbnes nederst på skærmen.

2. Hvis Kamera værktøjslinjen ikke er synlig trykkes **Caps Lock + Ctrl + C** for at aktivere kamera kommandotaster tilstand og tryk dernæst **T** for at få værktøjslinjen ind på skærmen.



ZoomText Kamera værktøjslinjen

For at rotere billedet

Placer et dokument under kameraet så det vises korrekt på skærmen. Hvis dokumentet vises roteret på skærmen skal du klikke på **Roter** knappen indtil det vises korrekt.

For at zoome ind og ud

Klik **på Zoom +** eller **Zoom -** knapperne for at indstille til korrekt forstørrelse.

For at ændre farver på billedet

1. Vælg Farve knappen.

Farvemenuen åbnes

2. Vælg mellem **Normal** (fulde farver) og en række høj-kontrast **To-farve Skemaer**.

3. For at skifte mellem Normal farver og det valgte To-farve skema trykkes **Caps Lock + Ctrl + C** for at aktivere kamera kommandotaster tilstand og dernæst trykke **Alt + Enter** for at skifte farvetilstand.

For at justere kamera tydelighed (lysstyrke og kontrast)

1. Vælg Tydelighed knappen.

Kamera tydelighed dialogboksen åbnes.

Kamera Tydelighed		×
Aktiver lysstyrk	e og kontrast indstillingerne	
<u>L</u> ysstyrke		
<u>K</u> ontrast	_	
Nulstil	OK Annullér	

- 2. Marker Aktiver lysstyrke og kontrast indstillingerne.
- 3. Juster **Lysstyrke** og **Kontrast** gliderne for at tilpasse tydeligheden.
- 4. Klik **Nulstil** knappen for at indstille Lysstyrke og Kontrast til kameraets standardindstillinger.
- 5. Klik **OK**.

Tip: Anvend Lysstyrke indstillingen til at fjerne genskin i billedet.

Bemærk: Denne knap er deaktiveret (grå) hvis det aktive kamera ikke understøtter justering af lysstyrke og kontrast.

For at justere kamera fokus

1. Vælg **Fokus** knappen.

Kamera Fokus dialogboksen åbnes.



- 2. Marker Aktiver manuelt kamera fokus.
- 3. Juster Fokus gliderne for at indstille fokus på billedet.
- 4. Klik **OK**.

Bemærk: Denne knap er deaktiveret (grå) hvis det aktive kamera ikke understøtter automatisk autofokus.

For at flytte det låste vindue

Vælg Låst knappen. Hvert klik på knappen skifter placering af det låste vindue i denne rækkefølge: Låst top > Låst højre > Låst bund > Låst venstre.

For at skifte mellem Fuld og låst visning.

Benyt en af følgende metoder

- For at skifte mellem Fuld og Låst trykkes **Caps Lock + Ctrl + C** for at aktivere kamera kommandotaster tilstand og tryk dernæst **Tab** for at få skifte tilstanden.
- Fra Låst visning på ZoomText Kamera værktøjslinjen klikkes **Fuld** knappen.

Bemærk: Som standard vil start eller skift til ZoomText kamera i Fuld visning åbne en dialogboks for at informere dig om at ZoomText Kamera værktøjslinjen ikke er tilgængelig i Fuld visning. Denne dialog viser også en liste med de genveje du kan anvende for at styre ZoomText kamera i Fuld visning (eller Lås visning). Du kan trykke **Esc** for at afslutte ZoomText Kamera.

For at afslutte ZoomText Kamera

Benyt en af følgende metoder

- Fra Fuld visning trykkes ESC.
- Fra Låst visning trykkes Exit knappen.

Kamera Video og Systemydelse

På ældre computere kan anvendelsen af ZoomText Kamera betyde at computeren virker langsom når kamerafunktionen er indstillet til høj opløsning, specielt med kamera indstilling på 1280 og højere. For at løse dette problem skal du sænke opløsningen for kameraet indtil dit system fungerer på et acceptabelt niveau, Opløsningen for ZoomText Kamera finder du i Kamera fanen i ZoomText værktøjer dialogboks. Se "ZoomText Kamera indstillinger" nedenfor.

ZoomText Kamera indstillinger

ZoomText Kamera indstillinger giver mulighed for at indstille og starte kameraet.

For at tilpasse ZoomText Kamera indstillinger

- 1. På **Værktøjer** fanen klikkes på pilen ved siden af **Kamera** eller der navigeres til **Kamera** og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Kamera menuen vælges Indstillinger.

Kamera indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Juster kamera indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.

Kamera i	indstillinger			×
Kamer				
Kamer	a Aktivt Kamara			
	Logitech HD webca	IM C615	~	
	🗹 Inds <u>t</u> iller automa	itisk kameraet I	til mindst zoom	
	Opløsning		Opdateringshastighe	ed
	1920 × 1080	\sim	10 FPS	\sim
	Bemærk: Anvendels opdateringshastighe	e af både høj (ed kan betyde (opløsning og høj at dit system bliver lø	angsomt.
Kamer	avisning ———			
	Visningstilstand		Roter billede	
	Låst til Top	\sim	0 grader	\sim
Forbe	dringer			
	Farveskema			
	Normal	~		
Avanc	erede indstillinger:			
	<u>V</u> ærktøjslinjen sk	kal altid være s	ynlig	
	🗹 Vis kommando in:	struktioner når	Fuldskærm er aktiv	
St	art Kamera			
	Г	ОК	Annullér	Hjælp

ZoomText Kameradialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Kamera	
Aktivt Kamera	Viser navnet på det kamera som ZoomText anvender og giver mulighed for at vælge et andet kamera.
Stiller automatisk kameraet til mindst zoom	ZoomText vælger automatisk det kamera som har en opløsning der er tættest på skærmens opløsning.

Opløsning	Viser den aktuelle kamera opløsning og giver mulighed for at vælge anden kamera opløsning. Fra at anvende denne indstilling skal du fravælge Indstiller automatisk kameraet til mindst zoom. <i>Bemærk:</i> Anvendelse af både høj opløsning og høj opdateringshastighed kan betyde at din computer bliver langsom.
Opdateringshastigh ed	Viser den aktuelle kamera opdateringshastighed og giver mulighed for at vælge en anden kamera opdateringshastighed. <i>Bemærk:</i> Anvendelse af både høj opløsning og høj opdatering kan betyde at din computer bliver langsom.
Kameravisning	
Visningstilstand	Viser den aktuelle kamera visning og giver mulighed for at vælge en anden visning for ZoomText Kamera.
Roter billede	Viser den aktuelle billede rotation og giver mulighed for at vælge en anden billede rotation.
Forbedringer	
Farveskema	Viser de aktuelle farvefilter indstillinger og giver mulighed for at vælge et bestemt farvefilter.
Avancerede indstillinger	A
Værktøjslinjen skal altid være synlig	Når valgt vil Kamera værktøjslinjen forblive synlig (ovenpå alle andre vinduer) også når det ikke har fokus. <i>Bemærk:</i> denne indstilling er også tilgængelig i system menuen i Kamera titelbjælken (Vises ved at klikke på Kamera ikonet i titelbjælken for Kamera værktøjslinjen).

Vis kommando	Aktiverer eller deaktiverer visning af advarsler
instruktioner når	med kommando instruktioner når der skiftes til
Fuldskærm er aktiv	Fuldskærm.
Start Kamera	Starter ZoomText Kamera Denne knap er grå (deaktiveret) hvis ZoomText Kamera allerede er startet.

ZoomText Kamera kommandotaster

Følgende genveje kan anvendes til at starte ZoomText kamera

Kommando	Genveje
Start Kamera	Caps Lock + Ctrl + C

Følgende taster kan anvendes til at starte ZoomText Kamera.

Kommando	Taster
Start Kamera	Caps Lock + Mellemrum, C

Når Kamera værktøjslinjen er aktiv kan følgende taster anvendes til at justere ZoomText Kamera indstillingerne.

Kommando	Tast
Vis værktøjslinjen	Т
Zoom Ind	Pil op
Zoom ud	Pil ned
Roter billede	Højre pil / Venstre pil
Låst/Fuld Skift	Tab
Låst position	Caps Lock + Højre pil / Venstre pil
Læsbarhed Til / Fra	Shift + Enter
Læsbarhed nulstil	Shift + Backspace
Lysstyrke Forøg	Shift + Pil op
Lysstyrke Sænk	Shift + Pil ned

Kontrast Forøg	Shift + Venstre pil
Kontrast Sænk	Shift + Højre pil
To-farve Til / Fra	Alt + Enter
To-farve Skema	Alt + Højre pil / Venstre pil
Fokus Automatisk / Manuel	Ctrl + Enter
Fokus ind	Ctrl + Pil op
Fokus ud	Ctrl + Pil ned
Afslut	X

Baggrund Læser

Baggrund Læser giver mulighed for at læse dokumenter, websider, email eller anden tekst højt mens du fortsætter med at arbejde med andre programmer. Du skal ganske enkelt kopiere teksten som du vil omdanne og starte ZoomText Baggrund Læser. Mens teksten læses højt kan du skifte til andre programmer og både skrive tekst eller se på Internet.

For at starte Baggrund Læser

- 1. Marker teksten du vil optage og kopier den til Windows udklipsholder.
- 2. Gør en af følgende for at starte Baggrund læseren
 - På **Værktøjer** fanen vælges **Baggrund Læser** knappen.
 - Tryk Start Baggrund Læser genvejen: Caps Lock + Ctrl + B

Baggrund Læser værktøjslinjen åbnes og begynder at læse tekst du har kopieret.



Baggrund læser værktøjslinjen

Bemærk: Hvis værktøjslinjen ikke åbnes når du starter Baggrund Læser er det fordi "Start Værktøjslinjen når der anvendes genveje" er markeret i Baggrund Læser indstillinger. Se <u>baggrund Læser indstillinger</u> nedenfor.

Når du har startet baggrund Læser kan du styre den via værktøjslinjen eller kommandotaster.

Får at åbne Baggrund Læser værktøjslinjen.

Tryk Start Baggrund Læser genvejen: **Caps Lock + Ctrl + B** og tryk dernæst **T**.

For at styre Baggrund læser via værktøjslinjen

- 1. For at starte og stoppe oplæsning af zonen klikkes **Afspil/Pause** knappen.
- 2. For at skimme frem eller tilbage klikkes **Næste** og **Forrige** knapperne.
- 3. For at starte oplæsningen forfra tryk **Genstart** knappen.
- 4. For at læse tekst som du har kopieret til Windows udklipsholder klikkes på **Kopier** knappen.
- 5. For at afslutte Baggrund Læser klikkes på Luk knappen.

For at styre Baggrund læser via kommandotaster

- 1. Hvis Baggrund Læser ikke er aktiv trykkes Baggrund Læser genvejen: **Caps Lock + Ctrl + B**
- 2. For at starte og stoppe oplæsning af zonen klikkes Enter.
- 3. For at hoppe til næste eller forrige sætning anvendes **Højre pil** og **Venstre pil**.
- 4. For at hoppe til næste eller forrige ord anvendes **Ctrl + Højre pil** eller **Ctrl + Venstre pil**.
- 5. For at genstarte oplæsningen anvendes **Shift + Enter**.
- 6. For at læse tekst som du har kopieret til Windows udklipsholder trykkes der **C**.
- 7. For at afslutte Baggrund Læser trykkes **X**.

Baggrund Læser indstillinger

Baggrund Læser indstillinger giver mulighed for at indstille hvordan du ønsker at værktøjslinjen vises når du starter baggrund Læser.

For at ændre indstillinger for Baggrund Læser

- På Værktøjer fanen klikkes på pilen ved siden af Baggrund Læser eller der navigeres til Baggrund Læser og der trykkes på Pil ned.
- 2. I Baggrund Læser menuen vælges Indstillinger.

Baggrund Læser indstillinger dialogboksen åbnes.

- 3. Juster indstillingerne efter ønske.
- 4. Klik **OK**.



Baggrund Læser dialogboksen

Indstillinger	Beskrivelse	
Værktøjslinje indstillinger		
Værktøjslinjen skal altid være synlig	Baggrund Læser værktøjslinjen forbliver øverst på skrivebordet også selvom ZoomText ikke er i fokus.	
Start Værktøjslinjen når der anvendes genveje	Når Baggrund Læser er startet med en genvej (Læs udklipsholder eller Læs markeret tekst) vil værktøjslinjen åbnes minimeret på Windows proceslinjen.	

Baggrund Læser kommandotaster

Følgende genveje kan anvendes til at starte Baggrund læser.

Kommando	Genveje
Start Baggrund Læser	Caps Lock + Ctrl + B

Følgende kommandotaster kan anvendes til at starte Baggrund læser.

Kommando	Taster
Start Baggrund Læser	Caps Lock + Mellemrum, B

Når Baggrund læser er aktiv vil følgende taster kunne anvendes til at styre Baggrund læser.

Kommando	Tast
Vis værktøjslinjen	Т
Kopier	С
Afspil / Pause	Enter
Start forfra	Shift + Enter
Næste sætning	Højre pil
Forrige sætning	Venstre pil
Næste ord	Ctrl + Højre pil
Forrige ord	Ctrl + Venstre
Aktuelt ord	Ctrl + Alt + Shift + Pil op
Aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned
Afslut	X

ZoomText Optager

ZoomText Optager giver mulighed for at du kan omdanne tekst dokumenter, web sider, e-mail og al anden tekst til lydfiler som du sener kan lytte til på din computer eller en bærbar enhed. Du skal ganske enkelt kopiere teksten som du vil omdanne og starte ZoomText Optager. I nogle få trin kan du navngive din optagelse og en mappe hvorefter du skal klikke på Optag knappen. Optagelsen dannes på basis af den stemme som du har valgt i ZoomText. Vælger du iTunes eller Windows Media Player som din mappe placeres alle dine optagelser i "ZoomText Optager" play listen. Anvender du iTunes kan dine optagelser også synkroniseres automatisk med din iPod, iPhone eller anden iEnhed.

For at optage tekst fra Windows udklipsholder

- 1. Marker teksten du vil optage og kopier den til Windows udklipsholder.
- 2. Gør en af følgende for at starte Baggrund læseren:
 - På Læser værktøj fanen vælges Optager knappen.
 - Tryk Start Optager genvejen: Caps Lock + Ctrl + D

Baggrund læser værktøjslinjen åbnes med den tekst du har kopieret.

Udfør optagelsen

Når du starter ZoomText Optager vil dens dialog åbnes sammen med teksten du har kopieret. dernæst skal du vælge hvordan optagelsen skal udføres og klikke på Optag tekst knappen. Der vises en statuslinje som fortæller hvor langt optagelsen er. Du kan enten afvente den bliver færdig eller skifte til et andet program og fortsætte dit arbejde. Der afspilles en lyd når optagelsen er færdig.

Den tid det tager at oprette optagelsen afhænger af hvor stor en tekst du omdanner til lydfil. Som hovedregel kan du regne med at det tager 5-10 sekunder per side.

Bemærk: Når "Optag tekst til:" er sat til iTunes vil iTunes programmet åbnes når optagelsen er færdig.

ZoomText	Optager			×
Anvend Zoom Media Player	nText Optager til at eller en valgt mapp	: omdanne tekster be.	til lyd i iTunes, V	Vindows
Optag tekst t	il:			
Filer	~			
Spor navn				Sport type
Hjælpe folk e	er vores prioritet			wav \sim
Spor Placering	g			
C:\Users\sm	oore.AISQUARED\f	Music		Gennemse
Opta	ag tekst			
Prøvevisning	og optag			
Lyt til gi	røvevisning	Hjælpe folk er vo	ores prioritet.	~
<u>K</u> opier fra	Udklipsholder			
				× .
Skju	l Talesyntese <u>I</u> ndst	illinger	Luk	Hjælp
Indstillinger fo	or syntese			
Sprog	Danish		~	·
Syntese	VocalizerExpress	ive	~	·
Stemme	Magnus Compact	:	~	•
	<u>T</u> empo(OPM) 100 ▼	Stemmeleje 33% 📮	Lydstyrke 77% 두	

ZoomText Optager dialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Optag tekst til:	Her vælges hvortil optagelsen skal laves. Vælg mellem iTunes, Windows Media Player eller en fil. <i>Bemærk:</i> iTunes og Windows Media Player vises kun i listen hvis de er installeret.
Navn	Her kan du give din optagelse et navn. Navnet der foreslås er de første fem bogstaver af teksten i optagelsen. Du kan overskrive dette forslag. <i>Bemærk:</i> Ugyldige tegn i filnavne erstattes af en understregning.

Туре	Her vælges det lydformat som optagelsen bliver lavet i.
	 Hvis "Optag tekst til" er sat til Fil kan du vælge mellem WAV og WMA.
	 Hvis "Optag tekst til" er sat til iTunes indstilles formatet automatisk til MP3.
	• Hvis "Optag tekst til" er sat til Windows Media Player indstilles formatet automatisk til WMA.
Placering	Viser den aktuelle mappe hvor lydfilen bliver gemt. Du kan ændre denne mappe. <i>Bemærk:</i> Denne kontrol er deaktiveret (grå) når "Optag tekst til" er sat til iTunes — fordi iTunes selv styrer hvilken mappe der anvendes.
Gennemse	Åbner en Windows Stifinder dialog hvor du kan vælge mappen hvor lydfilen skal gemmes. <i>bemærk:</i> Knappen er deaktiveret (grå) hvis "Optag tekst til" er sat til iTunes.
Optag tekst	Starter optagelsen. Mens der optages kan den annulleret ved at klikke på "Afbryd optagelse".
Prøvevisning og optag	
Lyt til prøve / Afbryd prøve	Læser op til de første 400 ord af den kopierede tekst. Under oplæsningen kan den afbrydes ved at klikke på "Afbryd prøve".
Kopier fra Udklipsholder	Kopierer den tekst som er i Windows udklipsholder (erstatter den tidligere kopierede tekst).
Vis / Skjul Talesyntese Indstillinger	Åbner eller lukker den del af ZoomText Optager dialogboksen hvor du kan indstille talesyntesen.

F
Indstillinger for talesyntese		
Sprog	Viser en liste over tilgængelige talesynteser på din computer.	
Talesyntese	Viser en liste over tilgængelige talesynteser på din computer. Bemærk: ZoomText understøtter også SAPI 4 og SAPI 5 talesynteser.	
Stemme	Viser en liste over tilgængelige stemmer til den valgte talesyntese.	
Tempo	Her kan du indstille oplæsningstempoet (hvis talesyntesen understøtter dette).	
Stemmeleje	Her kan du indstille stemmeleje (hvis talesyntesen understøtter dette).	
Lydstyrke	Her kan du indstille lydstyrken (hvis talesyntesen understøtter dette).	

Kapitel 8 Konfigurationer

Alle ZoomText indstillinger kan gemmes i en konfigurationsfil som senere kan indlæses. Konfigurationsfiler indeholder alle indstillinger, herunder forstørrelsesniveau, zoomvindue typen, skærmforbedringer, læseindstillinger, programindstillinger og genveje. Der er ingen grænse for antallet af konfigurationsfiler du kan gemme. Du kan også oprette specifikke konfigurationer til dine programmer som indlæses automatisk når programmerne er i fokus.

- <u>Standardkonfigurationen</u>
- <u>Gemme og indlæse konfigurationer</u>
- <u>Konfigurationsgenveje</u>
- <u>Programindstillingerne</u>

Standardkonfigurationen

Når du starter ZoomText vil standardkonfigurationsfilen, ZT.ZXC, automatisk blive indlæst. Denne fil indeholder de forudbestemte ZoomText standardindstillinger. Du kan oprette dine egen standardindstillinger, som så vil blive indlæst når du starter ZoomText. Selvom du ændrer standardindstillingerne vil de forudbestemte standarder let kunne genskabes.

For at gemme en standardkonfiguration

- 1. Indstil ZoomText som ønsket.
- 2. I **ZoomText** menuen vælges Filer > **Gem som standard**.

En dialogboks åbnes hvor du skal bekræfte at du vil overskrive standardkonfigurationen.

3. Vælg Ja for at overskrive den tidligere standardkonfiguration.

For at genskabe den forudbestemte standardkonfiguration

1. I **ZoomText** menuen vælges **Konfigurationer > Gendan** *fabriksindstillinger*.

En dialogboks åbnes hvor du skal bekræfte at du vil genskabe standardkonfigurationen.

2. Vælg Ja for at overskrive den tidligere standardkonfiguration.

Gemme og indlæse konfigurationer

De aktuelle ZoomText indstillinger kan til enhver tid gemmes i en konfigurationsfil. Denne konfigurationsfil kan indlæses på et senere tidspunkt og de gemte indstillinger træder straks i kraft.

For at gemme en konfigurationsfil

- 1. Indstil ZoomText som ønsket.
- 2. I ZoomText menuen vælges Konfigurationer > Gem brugerindstillinger.

Gem konfigurationer dialogboksen åbnes og viser de eksisterende konfigurationsfiler.

- 3. Skriv navnet på den nye konfiguration i Filnavn feltet,
- 4. Klik **OK**.

For at indlæse fra en konfigurationsfil

1. I ZoomText menuen vælges Åben brugerindstillinger.

Åben brugerindstillinger dialogboksen åbnes og viser de eksisterende konfigurationsfiler.

- 2. Marker den ønskede konfigurationsfil.
- 3. Klik **Åben**.

Konfigurationsgenveje

Du kan anvende genveje til at indlæse konfigurationsfiler uden først at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Før en konfigurationsgenvej kan anvendes skal der tilknyttes en konfigurationsfil til den. Følgende tabel viser en liste over standard konfigurationsgenveje. For information om hvordan man tilknytter en konfigurationsfil til en genvej se "For at tildele en konfigurationsfil til en Indlæs konfiguration kommando" i <u>Kommando</u> <u>dialogboksen</u>.

Indstillinger	Beskrivelse
Indlæs Konfigurationsfil 1	Caps Lock + 1
Indlæs Konfigurationsfil 2	Caps Lock + 2
Indlæs Konfigurationsfil 3	Caps Lock + 3
Indlæs Konfigurationsfil 4	Caps Lock + 4
Indlæs Konfigurationsfil 5	Caps Lock + 5
Indlæs Konfigurationsfil 6	Caps Lock + 6
Indlæs Konfigurationsfil 7	Caps Lock + 7
Indlæs Konfigurationsfil 8	Caps Lock + 8
Indlæs Konfigurationsfil 9	Caps Lock + 9
Indlæs Konfigurationsfil 10	Caps Lock + 0

Programindstillinger

I hver ZoomText konfiguration kan du definere specielle indstillinger for hvert program du anvender. Du kan for eksempel få ZoomText til at vise din Web browser i en forstørrelse og din tekstbehandler i en anden forstørrelse. Så snart et af disse programmer kommer i fokus vil ZoomText skifte forstørrelsesgrad til det du har indstillet. Programmer hvortil der ikke er oprettet specielle indstillinger vil blive vist og læst højt efter standardindstillingerne i konfigurationsfilen.

For at definere og gemme programindstillinger

- 1. Åben det program du vil oprette indstillinger for.
- 2. Skift direkte til ZoomText og vælg de specielle indstillinger du har behov for i dette program.
- 3. Tryk Gem programindstillingerne genvejen: **Caps Lock + Ctrl + S** eller på ZoomText værktøjslinjen vælges **ZoomText > Programindstillinger > Gem programindstillingerne**.

En dialog spørger om du vil gemme programindstillingerne.

4. Klik på Ja for at gemme indstillingerne.

Du kan til enhver tid deaktivere eller slette programindstillingerne. Deaktiverede programindstillinger forbliver i konfigurationsfilen og kan aktiveres igen når du får brug for det. Slettede programindstillinger vil blive fjernet fra konfigurationsfilen.

For at deaktivere eller slette programindstillinger

- Tryk Juster Programindstillingerne genvejen: Caps Lock + Ctrl
 + M eller på ZoomText værktøjslinjen vælges ZoomText
 - > Programindstillinger > Juster programindstillinger.

Juster programindstillinger dialogen åbnes.

2. For at deaktivere programindstillinger; I **Anvend programindstillinger for** listen fjernes markeringen ved de ønskede programmer. De umarkerede programmer forbliver i listen men vil ikke blive anvendt når programmerne kommer i fokus.

3. For at slette programindstillinger; vælg de ønskede programmer og klik på **Slet valgte.**

De markerede programmer fjernes fra listen.

4. Klik **OK**.

Juster Programindstillingerne	×
Brug programindstillinger for:	<u>A</u> ktiver alle <u>D</u> eaktiver alle <u>S</u> let valgte
OK Annul	lér Hjælp

Juster programindstillinger dialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Anvend programindstillinger for:	Viser en liste over programindstillinger som er gemt i den aktuelle ZoomText konfiguration.
Aktiver alle	Aktiverer alle elementer i listen i Anvend programindstillinger dialogboksens liste.
Deaktiver alle	Deaktiverer alle elementer i listen i Anvend programindstillinger dialogboksens liste.
Slet valgte	Sletter markerede elementer i listen i Anvend programindstillinger dialogboksens liste.

Kapitel 9 Præferencer indstillinger

Indstillingerne giver mulighed for at styre hvordan ZoomText starter og afslutter, hvordan ZoomText opdaterer sig selv og informerer om fejl samt hvordan brugerfladen skal se ud og typen af udglatning der skal anvendes på den forstørrede skærm.

- <u>Program indstillinger</u>
- <u>Brugerfladeindstillinger</u>
- <u>Udglatning præferencer</u>
- Kør ZoomText som

Program præferencer

Program præferencer styrer hvordan ZoomText starter og afslutter samt giver mulighed for at aktivere automatisk opdatering.

For at ændre indstillinger for program præferencer

1. I ZoomText menuen vælges Præferencer> Program.

Program præferencer dialogboksen åbnes på Program fanen.

- 2. Juster program præferencer indstillingerne efter ønske.
- 3. Vælg OK.

Præferencer					>	<
Program	Brugerflade	Udglatning				
Logon Understøttelse						
Indstillinge	r fra start 🛛 —					
🗌 Sta	art ZoomText <u>a</u> uto	matisk når Windo	ows starter			
🗌 Sta	art ZoomText med	<u>m</u> inimeret værkt	øjslinje			
🗹 Vis	" <u>V</u> elkommen" vind	uet når ZoomTe>	d starter			
✓ V <u>i</u> s	en ZoomText ikor	ı på skrivebordet				
	is den startes på ε	en fjernserver af	ventes at k	lienten opretter	forbindelse	
Afslut Inds	tillinger					
ger	m ZoomText indsti	llinger automatisł	k når det lul	kkes		
🗹 Spy	ørg før ZoomText	lukkes				
<u>u</u> d	læs forstørrelsesp	rocesserne når Z	oomText lu	ikkes		
Automatisk	opdatering —					
<u> </u>	ntroller for online (opdateringer hve	r gang Zoo	mText startes		
Fejlrapport	ering					
Send ZoomText fejl til Freedom Scientific via Internet						
			OK	Annuller	Hjælp	

Program fanen.

Indstillinger	Beskrivelse	
Logon Understøttelse		
Aktiver ZoomText i Windows logon	Kører ZoomText sikker tilstand i Windows logon skærmen og i andre Windows sikker tilstand skærme. ZoomText sikker tilstand tilbyder basal forstørrelse og skærmlæsning i sikker tilstand.	
Opstart indstillinger		
Start ZoomText automatisk når Windows starter	ZoomText starter automatisk samme med Windows.	
Start ZoomText med minimeret værktøjslinje	ZoomText brugerfladen er minimeret når ZoomText er startet.	
Vis "Velkommen" vinduet når ZoomText starter	Hver gang ZoomText starter vises Velkommen til ZoomText sammen med ZoomText værktøjslinjen. Velkommen vinduet indeholder nyttig information og genveje til nye brugere.	
Vis en ZoomText ikon på skrivebordet	Viser en ZoomText ikon på skrivebordet	
Hvis den startes på en fjernserver afventes at klienten opretter forbindelse	Når ZoomText (eller Fusion) startes på en fjernserver vil den forblive i hviletilstand indtil ZoomText (eller Fusion) startes op på klienten.	
Afslut Indstillinger		
Gem ZoomText indstillinger automatisk når det lukkes	Alle ZoomText indstillinger gemmes automatisk til den aktive konfiguration når ZoomText lukkes.	
Spørg før ZoomText lukkes	Du bliver spurgt om du vil lukke ZoomText inden det sker.	

Udlæs forstørrelsesprocesserne når ZoomText lukkes	Udlæser forstørrelsesprocesserne når ZoomText lukkes. Ellers vil ZoomText processerne fortsat kører for at det er hurtigere at starte ZoomText igen indtil Windows lukker.
Automatisk opdatering	
Kontroller for opdateringer hver gang ZoomText startes	Hver gang ZoomText startes søges der efter nye opdateringer via Internet forbindelsen hvis den er aktiv. Er der en opdatering tilgængelig vil opdateringsprogrammet hente og installere den.
Fejlrapportering	
Send ZoomText fejl til Freedom Scientific via Internet	Opstår der en ZoomText programfejl vil der blive oprettet en fejlrapport som sendes til Freedom Scientific via den aktive Internet forbindelse. Ingen personlig information er inkluderet i fejlrapporten.

Brugerflade præferencer

Brugerflade præferencer styrer hvordan ZoomText brugerfladen vises på Windows skrivebordet.

For at ændre indstillinger for brugerflade præferencer

1. I **ZoomText** menuen vælges **Præferencer > Brugerflade**.

Præferencer dialogboksen åbnes på Brugerflade fanen.

- 2. Juster brugerflade præferencer indstillingerne efter ønske.
- 3. Vælg OK.

Præferencer	×
Program Brugerflade Udglatning	
Værktøjslinje indstillinger Vis værktøjstip for kontroller på båndet) Værktøjslinjen skal altid være synlig gendan værktøjslinje efter brug af et ZoomText værktøj Værktøjslinje markerings <u>f</u> arve: Brun ~	
Joblinjeindstillinger	
Brugergrænsefladesprog	
Sprog: Dansk ~	
Andre Indstillinger ☑ Aktiver overgangs <u>e</u> ffekter for skærmforbedringer	
OK Annuller Hjælp	

Brugerflade fanen.

Indstillinger	Beskrivelse	
Værktøjslinje indstillinger		
Vis værktøjstip for kontroller på båndet	Betyder at værktøjstip vises når musen føres hen over kontroller på ZoomText værktøjslinjen.	
Værktøjslinjen skal altid være synlig	ZoomText brugerflade vinduet forbliver øverst på skrivebordet også selvom ZoomText ikke er i fokus.	
Gendan værktøjslinje efter brug af et ZoomText værktøj	ZoomText værktøjslinjen gendannes altid når et ZoomText værktøj afsluttes.	
Værktøjslinje markeringsfarve:	Indstiller den farve der skal anvendes til at markere kontrollerne på ZoomText værktøjslinjen.	
Joblinjeindstillinger		
Vis ZoomText Værktøjslinjen og bakkeikon	Når ZoomText kører vil dens Værktøjslinje og bakkeikon være synlige.	
Vis kun ZoomText værktøjslinjen	Når ZoomText kører vil kun Værktøjslinjen være synligt.	
Vis kun ZoomText bakkeikon	Når ZoomText kører vil kun bakkeikonet være synligt.	
Brugerfladesprog		
Sprog	Indstiller sproget der anvendes i ZoomText brugerfladen.	
	<i>Bemærk:</i> Denne indstilling er ikke tilgængelig i versioner som kun indeholder engelsk.	

Ander indstillinger		
Aktiver overgangseffekter for skærmforbedringer	Aktiverer glidende skifte mellem ZoomText skærmforbedringer skemaer.	

Udglatning Præferencer

Udglatning indstillinger styrer hvordan ZoomText udglatter og forbedrer tekst og grafik (herunder foto) på den forstørrede skærm. ZoomText tilbyder to typer af udglatning, xFont® og Geometrisk udglatning, som kan aktiveres særskilt eller samtidigt.

- **xFont** virker kun på tekst og viser den bedst mulige tekstkvalitet på den forstørrede tekst. Er ikke tilgængelig i alle applikationer. Når XFont ikke er tilgængelig vil geometrisk udglatning blive anvendt på teksten på den forstørrede skærm.
- **Geometrisk udglatning** giver en høj kvalitet af udglatning på både grafik og tekst der hvor xFont ikke kan anvendes. Der er to typer af geometrisk udglatning: ClearSharp og klassisk.
 - o **ClearSharp** er den nye type af geometrisk udglatning der giver bedre udglatning og mere effektiv afvikling.
 - o **Klassisk** er den tidligere metode til geometrisk udglatning der fortsat vil være tilgængelig for de brugere der gerne vil fortsætte med samme type udglatning som tidligere.

Når ZoomText er aktiveret og forstørrelsen er slået til så er det muligt at skifte mellem typerne af udglatning for at finde netop den type der passer bedst.

For at skifte mellem udglatningsmetoderne

• Tryk Udglatningstilstand genvejen: Caps Lock + X

Du kan se og konfigurere udglatning indstillingerne i Præferencedialogen.

For at ændre udglatning indstillingerne

1. I **ZoomText** menuen vælges **Indstillinger > Udglatning.**

Præferencedialogen vises med indholdet af Udglatning fanen.

- 2. Juster indstillingerne, som ønsket.
- 3. Vælg OK.

Præferencer	×
Program Brugerflade Udglatning	
XFont Indstillinger xFont forstørrelsen virker kun på tekst og viser den højeste mulige kvalitet af den forstørrede tekst. xFont er ikke tilgængelig i alle applikationer.	
Aktiver xFont forstørrelse Vis xFont forstørret tekst i fed skrift	
Udlad programmer	
Geometrisk Udglatning	-
og grafik, hvor xFont forstørrelsen ikke virker.	
● <u>C</u> learSharp ○ <u>K</u> lassisk	
○ Ingen	
OK Annuller Hjælp	

Udglatning fanen

Indstillinger	Beskrivelse	
XFont Indstillinger		
Aktiver xFont forstørrelse	Aktiver xFont. xFont viser teksten i højeste kvalitet og bør altid være aktiveret.	
Vis xFont forstørret tekst i fed skrift	Viser al tekst som er forstørret af xFont som fed tekst	
Udelad programmer	Indstillinger for hvornår xFont skal udelades i problem programmer. Se "Udelad xFont i problem programmer" nedenfor.	

Geometrisk udglatning	
ClearSharp	Aktiverer ClearSharp geometrisk udglatning.
Klassisk	Aktiverer Klassisk geometrisk udglatning.
Ingen	Deaktivér geometrisk udglatning.

Udelad xFont i problem programmer

Nogle programmer viser brugerfladen på en måde som ikke tillader xFont at virke korrekt som betyder at der kan være tekst der mangler eller er defekt. Sker dette kan du udelade brug af xFont for det program ved at markere programmets navn i Udelad xFont dialogboksen.

Bemærk: De programmer som allerede er identificeret som problem programmer i forhold til xFont er tilføjet listen i ZoomText standardkonfigurationen.

For at udelade xFont i udvalgte programmer

1. I **ZoomText** menuen vælges **Indstillinger > Udglatning.**

Præferencedialogen vises med indholdet af Udglatning fanen.

2. Vælg Udelad programmer...

Udelad programmer dialogboksen åbnes.

- 3. I **Undlad brug af XFont i**: list boksen marker de programmer som ikke anvende xFont.
- 4. Klik **OK**.
- 5. Genstart ZoomText. Dette trin er påkrævet for at aktivere ændringerne i Udelad Applikationer dialogboksen.

Udelad programmer		×
I nogle programmer vil XFont tek Hvis dette sker skal det pågælde nedenfor hvorved XFont ikke vil t Undlad brug af XFont i:	stvisningen ikke virke korrekt. nde program markeres i listen blive anvendt i programmet	
Programnavn	Vist navn	^
explorer.exe	Windows Explorer	
fontdrvhost.exe		
Isass.exe	Local Security Authority Ser.	
		×
<	>	
ОК	Annullér Hjælp	

Udelad programmer dialogboksen

Indstillinger	Beskrivelse
Undlad brug af XFont i:	Viser en liste over de programmer som kører på computeren. De markerede programmer bliver ikke behandlet med xFont.

Kør ZoomText som

I nogle tilfælde kan det være at du ønsker at ZoomText Magnifier/Reader starter som en ZoomText Magnifier. Dette kan styres i Kør ZoomText som dialogboksen.

For at styre hvilket produkttype ZoomText starter i

1. I **ZoomText** menuen vælges **Præferencer > Kør ZoomText som**.

Kør ZoomText som dialogboksen åbnes.

- 2. Vælg den produkttype som ZoomText skal starte i.
- 3. Klik Genstart ZoomText nu.

ZoomText afsluttes og starter igen i den produkttype du har valgt.



Kør ZoomText som dialogboksen

Indstillinger	Beskrivelse
ZoomText Magnifier	Indstiller ZoomText så den starter som ZoomText Magnifier.
ZoomText Magnifier/Reader	Indstiller ZoomText så den starter som ZoomText Magnifier/Reader.
Genstart ZoomText nu	Afslutter og genstarter ZoomText i den valgte produkttype.

Kapitel 10

ZoomText kommandoer

Denne sektion indeholder en komplet liste over ZoomText kommandoer herunder genveje, kommandotaster og taster.

- <u>AppReader kommandoer</u>
- Baggrund Læser kommandoer
- Kamera kommandoer
- <u>Søge kommandoer</u>
- <u>Kommandotaster tilstand</u>
- Forstørrelseskommandoer
- <u>Programkommandoer</u>
- <u>Læsekommandoer</u>
- Læsezoner kommandoer
- <u>Optager kommandoer</u>
- <u>Læs kommandoer</u>
- <u>Rulle kommandoer</u>
- <u>Support kommandoer</u>
- Tekstmarkør kommandoer
- Vindue kommandoer

AppReader kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at starte AppReader.

Kommando	Genveje
Start AppReader fra mus	Caps Lock + Alt + Venstreklik
Start App Viser	Caps Lock + Alt + A
Start Tekstviser	Caps Lock + Alt + T
Start LæsDet værktøjet	Caps Lock + Alt + S
Start AppReader (i valgte tilstand)	Caps Lock + Alt + R

Følgende kommandotaster kan anvendes til at starte AppReader.

Kommando	Taster
Start AppReader	Caps Lock + Mellemrum, A

Når AppReader er aktiv vil følgende taster kunne anvendes til at styre AppReader.

Kommando	Tast
Næste ord	Ctrl + Højre pil
Forrige ord	Ctrl + Venstre
Næste sætning	Højre pil
Forrige sætning	Venstre pil
Næste afsnit	Pil ned
Forrige afsnit	Pil op
Næste side	Page Down
Forrige side	Page Up

Aktuelt ord *	Ctrl + Alt + Shift + Pil op
Aktuel linje	Ctrl + Alt + Shift + Højre pil
Aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned
Aktuelt afsnit	Ctrl + Alt + Shift + venstre pil
Første ord på linje	Home
Sidste ord på linje	End
Start på dokument	Ctrl + Home
Slut på dokument	Ctrl + End
Næste link	L
Forrige link	Shift + L
Følg link	Ctrl + Enter

* Når Aktuelt ord kommandoen anvendes vil gentagne tryk indenfor to sekunder give følgende adfærd:

- Første tryk: læser ordet
- Andet tryk: staver ordet
- Tredje tryk: staver ordet fonetisk

Baggrund Læser kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at starte Baggrund læser.

Kommando	Genveje
Start Baggrund Læser	Caps Lock + Ctrl + B

Følgende kommandotaster kan anvendes til at starte Baggrund læser.

Kommando	Taster
Start Baggrund Læser	Caps Lock + Mellemrum, B

Når Baggrund læser er aktiv vil følgende taster kunne anvendes til at styre Baggrund læser.

Kommando	Tast
Vis værktøjslinjen	Т
Kopier	С
Afspil / Pause	Enter
Start forfra	Shift + Enter
Næste sætning	Højre
Forrige sætning	Venstre pil
Næste ord	Ctrl + Højre pil
Forrige ord	Ctrl + Venstre pil
Aktuelt ord	Ctrl + Alt + Shift + Pil op
Aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned
Afslut	X

Kamera kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at starte ZoomText kamera

Kommando	Genveje
Start Kamera	Caps Lock + Ctrl + C

Følgende taster kan anvendes til at starte ZoomText Kamera.

Kommando	Taster
Start Kamera	Caps Lock + Mellemrum, C

Når Kamera værktøjslinjen er aktiv kan følgende taster anvendes til at justere ZoomText Kamera indstillingerne.

Kommando	Tast
Vis værktøjslinjen	Т
Zoom Ind	Pil op
Zoom ud	Pil ned
Roter billede	Højre pil / Venstre pil
Låst/Fuld Skift	Tab
Låst position	Caps Lock + Højre pil / Venstre pil
Læsbarhed Til / Fra	Shift + Enter
Læsbarhed nulstil	Shift + Backspace
Lysstyrke Forøg	Shift + Pil op
Lysstyrke Sænk	Shift + Pil ned
Kontrast Forøg	Shift + Venstre pil
Kontrast Sænk	Shift + Højre pil
To-farve Til / Fra	Alt + Enter

To-farve Skema	Alt + Højre pil / Venstre pil
Fokus Automatisk / Manuel	Ctrl + Enter
Fokus ind	Ctrl + Pil op
Fokus ud	Ctrl + Pil ned
Afslut	X

Søge kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at starte Søger

Kommando	Genveje
Start søger	Caps Lock + Ctrl + F

Følgende taster kan anvendes til at starte Søger.

Kommando	Taster
Start søger	Caps Lock + Mellemrum, F

Når Søger er aktiv kan følgende taster anvendes til at styre søgeren.

Kommando	Taster
Skifte Side elementer typen tilbage	Ctrl + Pil op
Skifte Side elementer typen frem	Ctrl + Pil ned
Udfør element	Ctrl + Enter
Første element (i filtreret liste)	Ctrl + Home
Sidste element (i filtreret liste)	Ctrl + End
Næste kontrol	Ctrl + C
Næste formular	Ctrl + F
Næste overskrift	Ctrl + H
Næste overskrift niveau 1 6	Ctrl + 1 6
Næste billede	Ctrl + I
Næste link	Ctrl + L
Næste liste	Ctrl + S
Næste tabel	Ctrl + T

Næste element	Enter eller Ctrl + Højre pil
Forrige kontrol	Ctrl + Shift + C
Forrige formular	Ctrl + Shift + F
Forrige overskrift	Ctrl + Shift + H
Forrige overskrift niveau 1 6	Ctrl + Shift + 1 6
Forrige billede	Ctrl + Shift + I
Forrige link	Ctrl + Shift + L
Forrige liste	Ctrl + Shift + S
Forrige tabel	Ctrl + Shift + T
Forrige element	Shift + Enter eller Ctrl + venstre pil
AppReader	Alt + R
Skifte liste søgning	Alt + L
Tekstsøger	Esc

Kommandotaster tilstand

Følgende genveje kan anvendes til at starte kommandotaster tilstanden.

Kommando	Genveje
Valg af kommandotilstand	Caps Lock + Mellemrum

Når kommandotaster tilstanden er aktiv vil følgende taster kunne anvendes til at tilgå kommandogrupperne.

Kommando	Taster
AppReader kommandoer	S
Start Baggrund Læser	Е
Start Kamera	С
Start søger	F
Start Optager	D
Forstørrelseskommandoer	М
Programkommandoer	Р
Læserkommandoer	R
Læs kommandoer	Υ
Rulle kommandoer	S
Support kommandoer	U
Vindue kommandoer	W
Zone kommandoer	Ζ

Forstørrelseskommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Zone kommandoe	er.
---	-----

Kommando	Genveje
Forstørrelseskommandoer	Ikke tildelt
Forbedre farver Til / Fra	Caps Lock + C
Forbedre markør Til / Fra	Caps Lock + R
Forbedre fokus Til / Fra	Caps Lock + F
Forbedre mus Til / Fra	Caps Lock + P
Forbedre Smart inverter Til / Fra	Caps Lock + I
Udglatningstilstand	Caps Lock + X
Skift Zoom og 1x	Caps Lock + Enter
Zoom Ind	Caps Lock + Up
Zoom ud	Caps Lock + Pil ned

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Zone kommandoerne:

Kommando	Taster
Forstørrelseskommandoer	Caps Lock + Mellemrum, M
Forbedre farver Til / Fra	С
Forbedre markør Til / Fra	R
Forbedre fokus Til / Fra	F
Forbedre mus Til / Fra	Р
Forbedre Smart inverter Til / Fra	J
Udglatningstilstand	X

Skift Zoom og 1x	Enter
Zoom Ind	Pil op
Zoom ud	Pil ned

Programkommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Programkommandoer.

Kommando	Genveje
Programkommandoer	Ikke tildelt
ZoomText Til / Fra	Caps Lock + Ctrl + Enter
Vis brugerflade	Caps Lock + Ctrl + U
Indlæs konfiguration 1 10	Caps Lock + Ctrl + 1 0 Bemærk: 0 anvendes til at indlæse konfiguration 10
Juster Programindstillingerne	Caps Lock + Ctrl + M
Gem programindstillingerne	Caps Lock + Ctrl + S

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Programkommandoerne:

Kommando	Taster
Programkommandoer	Caps Lock + Mellemrum, P
ZoomText Til / Fra	Enter
Vis brugerflade	U
Indlæs konfiguration 1 10	1 10 Bemærk: 0 anvendes til at indlæse konfiguration 10
Juster Programindstillingerne	М
Gem programindstillingerne	S

Læsekommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Læser kommandoer.

Kommando	Genveje
Læsekommandoer	Ikke tildelt
Tastaturekko fanen	Caps Lock + Alt + K
Mus ekko fanen	Caps Lock + Alt + M
Detaljeniveau ekko	Caps Lock + Alt + B
Stemme Til / Fra	Caps Lock + Alt + Enter
Valgt stemme	Caps Lock + Alt + V
Læsetempo hurtigere	Caps Lock + Alt + Pil op
Læsetempo langsommere	Caps Lock + Alt + Pil ned

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Læser kommandoerne:

Kommando	Taster
Læsekommandoer	Caps Lock + Mellemrum, R
Tastaturekko fanen	Κ
Mus ekko fanen	М
Detaljeniveau ekko	Е
Stemme Til / Fra	Enter
Valgt stemme	V
Læsetempo hurtigere	Pil op
Læsetempo langsommere	Pil ned

Læsezoner kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Zone kommandoer.

Kommando	Genveje
Zone kommandoer	Caps Lock + Alt + Z
Opret zone	Caps Lock + Alt + C
Rediger zone	Caps Lock + Alt + E
Liste Zone	Caps Lock + Alt + L
Naviger blandt zonerne	Caps Lock + Alt + G
Næste zone	Caps Lock + Alt + N
Forrige zone	Caps Lock + Alt + P
Aktiver Zone 1 10	Caps Lock + Alt + 1 0 Bemærk: 0 aktiverer Zone 10.

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Zone kommandoerne:

Kommando	Taster
Zone kommandoer	Caps Lock + Mellemrum, Z
Opret zone	С
Rediger zone	А
Liste Zoner	L
Naviger zonerne	G
Næste zone	Ν
Forrige zone	Р
Aktiver Zone 1 10	1 0 Bemærk: 0 aktiverer Zone 10.

Optager kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at starte ZoomText optager.

Kommando	Genveje
Start Optager	Caps Lock + Ctrl + D

Følgende genveje kan anvendes til at starte ZoomText optager.

Kommando	Taster
Start Optager	Caps Lock + Mellemrum, D

Læs kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Læs kommandoer.

Kommando	Genveje
Læs kommandoer	Ikke tildelt

Følgende genveje kan anvendes til at aktivere Læs kommandoer.

Kommando	Taster
Læs kommandoer	Caps Lock + Mellemrum, Y
Læs aktuelle dato	D
Læs aktuelt tidspunkt	Т
Læs celletitlen	С
Læs cellekommentarer	Ν
Læs celleformel	0
Læs celle rækketitlen	R
Læs udklip	Р
Læs dialogens standardknap	Е
Læs dialogens gruppenavn	G
Læs besked teksten	М
Læs fanebladet	S
Læs fokus	F
Læs markeret tekst	S
Læs statuslinje	U
Læs Vinduestitlen	W
Rulle kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Rulle kommandoer.

Kommando	Genveje			
Rulle kommandoer	Ikke tildelt			
Rul op	Caps Lock + Shift + Pil op			
Rul ned	Caps Lock + Shift + Pil ned			
Rul til venstre	Caps Lock + Shift + Venstre pil			
Rul til højre	Caps Lock + Shift + Højre pil			
Scroll Stop	Caps Lock + Shift + Enter			
Spring op	Caps Lock + Ctrl + Pil op			
Spring ned	Caps Lock + Ctrl + Pil ned			
Spring til venstre	Caps Lock + Ctrl + Venstre pil			
Spring til højre	Caps Lock + Ctrl + Højre pil			
Spring til centrum	Caps Lock + Ctrl + Home			
Gem skærm	Caps Lock + Ctrl + Page Up			
Gendan skærm	Caps Lock + Ctrl + Page Down			

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Rulle kommandoerne:

Kommando	Taster
Rulle kommandoer	Caps Lock + Mellemrum, S
Rul op	Pil op
Rul Ned	Pil ned
Rul til venstre	Venstre pil

Rul til højre	Højre pil
Scroll Stop	Enter
Spring op	Ctrl + Pil op
Spring ned	Ctrl + Pil ned
Spring til venstre	Ctrl + Venstre pil
Spring til højre	Ctrl + Højre pil
Spring til centrum	Ctrl + Home
Gem skærm	Ctrl + Page Up
Gendan skærm	Ctrl + Page Down

Support kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Support kommandoer.

Kommando	Genveje
Support kommandoer	Ikke tildelt
AHOI Til/Fra	Ctrl + Alt + Shift + A
AHOI Rapport	Ctrl + Alt + Shift + R
Kopier skærm	Ctrl + Alt + Shift + C
Slet markør	Ctrl + Alt + Shift + D
Slip næste genvej igennem	Ctrl + Alt + Shift + P
Sporing Til/Fra	Ctrl + Alt + Shift + T
Genskriv skærmmodel	Ctrl + Alt + Shift + U
ZoomText Information	Ctrl + Alt + Shift + I

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Zone kommandoerne:

Kommando	Taster
Support kommandoer	Caps Lock + Mellemrum, U
AHOI Til/Fra	S
AHOI Rapport	R
Kopier skærm	С
Slet markør	D
Slip næste genvej igennem	Р
Sporing Til/Fra	Т
Genskriv skærmmodel	U

ZoomText Information	J
----------------------	---

Tekstmarkør kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre tekstmarkør kommandoer.

Kommando	Genveje
Aktuelt tegn	Ctrl + Alt + Shift + Enter
Aktuelt ord	Ctrl + Alt + Shift + Pil op
Aktuel linje	Ctrl + Alt + Shift + Højre pil
Aktuel sætning	Ctrl + Alt + Shift + Pil ned
Aktuelt afsnit	Ctrl + Alt + Shift + Venstre pil
Næste sætning	Caps Lock + Alt + Højre pil
Forrige sætning	Caps Lock + Alt + Venstre pil

Følgende taster er standard Windows kommandoer til at flyttetekstmarkøren.

Kommando	Windows taster
Næste tegn	Højre pil
Forrige tegn	Venstre pil
Næste ord	Ctrl + Højre pil
Forrige ord	Ctrl + Venstre pil
Næste linje	Pil op
Forrige linje	Pil ned
Næste afsnit	Ctrl + Pil ned
Forrige afsnit	Ctrl + Pil op

Vindue kommandoer

Følgende genveje kan anvendes til at styre Vindue kommandoer.

Kommando	Genveje				
Vindue kommandoer	Ikke tildelt				
Zoomvindue type	Caps Lock + Z				
Zoomvindue justeringsværktøj	Caps Lock + A				
Hold visning Til / Fra	Caps Lock + E				
Hold visning	Caps Lock + N				
Flyt mus til visning	Ikke tildelt				
Flyt visning til mus	Ikke tildelt				
Skift aktiv viser	Caps Lock + V				
Zoomfelt søger Til / Fra	Caps Lock + L				
Overblik tilstand Til / Fra	Caps Lock + O				

Følgende kommandotaster kan anvendes til at styre Vindue kommandoerne:

Kommando	Taster				
Vindue kommandoer	Caps Lock + Mellemrum, W				
Zoomvindue type	Z				
Zoomvindue justeringsværktøj	S				
Hold visning Til / Fra	А				
Hold visning	Ν				
Flyt mus til visning	Pil ned				
Flyt visning til mus	Pil op				

Skift aktiv viser	V
Zoomfelt søger Til / Fra	L
Overblik tilstand Til / Fra	0

Kapitel 11 ZoomText Support

ZoomText leveres med en række indbyggede og online værktøjer som altid er tilgængelige. Disse værktøjer og services inkluderer informationssøgnings værktøjer, vejledninger, videoer og en hurtig vej til at rapportere et problem med ZoomText. Nogle af disse værktøjer kan også være nødvendige at anvende når et problem fejlsøges.

- <u>Systeminformation</u>
- <u>Rapporter et problem</u>
- LøsDet kommando
- <u>Systemanalyse</u>
- Online Hjælp

Systeminformation

Systeminformation dialogboksen åbnes hvor der vises en række informationer om dit systems hardware, software og konfiguration som kan være nyttig i forbindelse med fejlsøgning.

For at åbne Systeminformation dialogboksen

I ZoomText menuen vælges ZoomText Support > System Info.

ZoomText Support							×
Systeminformation	Rappo	rter et problem	Lø:	sDet			
System							_
OS Navn:		Windows 10					
OS Version:		10.0.17134					
System RAM:		8183 MB					
Windows Mappe	e:	C:\WINDOWS					
Systemkatalog:		C:\WINDOWS\:	system	32			
CPU:		Intel(R) Core(T	M) i5 C	PU	661	@ 3.33G	Hz
Enhed beskrivel	se:	AMD Radeon H	D 5700	Series			
Driverversion:		15.201.1151.1	008				
Driverdato:		11-4-2015					
Bits per pixel:		32					
Skærmopløsning	<u>]</u> :	1920 × 1080					
DirectX funktion	er:	Feature Level 1	1_0				
Forstørrelsesme	etode:	Unknown					
				Luł	<	Hja	ælp

ZoomText support dialogboksen åbnes i System Info fanen.

System Info fanen.

Rapporter et problem

Rapporter et problem dialogen giver mulighed for at indsende en fejlrapport via internet. Indsendelse af fejlrapporter kræver at du udfylder en kort formular hvori du skal beskrive problemet du oplever. Når du indsender en rapport indeholder en information om ZoomText ydeevnen og dine konfigurationer. Disse filer indeholder ingen personlige data.

For at anvende Rapporter et problem dialogen

I **ZoomText** menuen vælges **ZoomText Support > Rapporter et** problem.

ZoomText Support dialogboksen åbnes i Rapporter et problem fanen.

ZoomText Suppor	t		×
Systeminformatio	n Rapporter et problem	LøsDet	
Beskriv det pr gerne trinvist	oblem du har oplevet med Zoo så det kan reproduceres ved	omText så detaljeret s test.	om muligt,
l			
Hvor godt kør	er ZoomText på din computer ~	?	
Fornavn:			
Efternavn:			
E-mail:			
Telefon:	inkluder om råde- og landekode		
Rapporten du for at hjælpe	indsender inkluderer ZoomTe med at finde årsagen.	xt logfiler og konfigura	ationsfilen
	Vis filer	Indsend rapport	
		Luk	Hjælp

Rapporter et problem fanen.

LøsDet kommando

LøsDet kommandoer anvendes til at løse specifikke problemer og adfærd efter fejlsøgning er gennemført af en ZoomText ekspert. LøsDet kommandoen leveres af ZoomText eksperten og indtastes i LøsDet dialogen.

For at anvende en LøsDet kommando

I **ZoomText** menuen vælges **ZoomText Support > LøsDet** kommando.

ZoomText Support dialogboksen åbnes på LøsDet fanen.

ZoomText Support			×
Systeminformation	Rapporter et problem	LøsDet	
Løs det kommando Modt nede	er ager du en LøsDet komman nfor hvorefter LøsDet knap	do skal den skrives i feltet open aktiveres.	-
Angiv Lø	sDet kommandoen her:]
		Anvend LøsDet kommando	
		Luk	jælp

LøsDet fanen.

Systemanalyse

ZoomText systemanalysen kan finde potentielle problemer på dit system som kan forårsage nedsat funktion når ZoomText anvendes.

For at køre ZoomText systemanalyse

I **ZoomText** menuen vælges **ZoomText Support > ZoomText** systemanalyse.

ZoomText systemanalyse dialogboksen åbnes.

ZoomText Systemanalyse	×
ZoomText Systemanalyse identificerer potentielle problemer i i systemets hardware, software og konfigurationer som kan forringe systemets funktion når det kører ZoomText. Analysen har identificeret følgende potentielle problemer.	
Windows Experience Index er mindre end 5.0	
Mere information	s.
ОК	

ZoomText systemanalyse dialogboksen.

ZoomText tilbyder Online hjælp som for det meste er på engelsk.

- For at åbne online hjælp
 - I ZoomText menuen vælges ZoomText Support > Online hjælp.

Om ZoomText

Om ZoomText dialogboksen viser program og licensinformation herunder produkttypen, version, serienummer og brugernavn.

For at se Om ZoomText informationen

1. I ZoomText menuen vælges Om ZoomText

Om ZoomText dialogboksen åbnes.

2. Klik **OK** når du er færdig.

Om ZoomText				×
Programinformation				
Ζ	ZoomText® 201 Ophavsret © 20 Beskyttet af U.& Beskyttet af U.S Beskyttet af U.& Licenseret unde	9 018, Freedom Scientific, Inc. 3. patent nummer 7,483,592 5. patent nummer 7,912,322 4. patent nummer 2,422,082 r U.S. patent nummer 5,490,2	Speciel Opdateringskode	_
	Produkt:	ZoomText Magnifier/Reader	1	
	Туре:	Lokal Fusion ILM, 0 opdater	inger tilbage	
	Version:	2019.1811.88 ILM		
	Serienummer:			
	Fjernadgang:	Deaktiveret		
	Låsekode:			
Anerkendelser				
			Luk Hjælp	

Om ZoomText dialogboksen.

Indstillinger	Beskrivelse
Produkt	Viser produkttypen: 'Magnifier' eller 'Magnifier/Reader'.
Туре	Viser installationstypen: 'Produkt' eller 'Demo'
Version	Viser ZoomText produktversion og build nummer.
Serienummer	Viser serienummeret. <i>bemærk:</i> Der vises ikke noget serienummer hvid ZoomText er installeret som Demo.
Navn	Viser navnet på brugeren.
Firma	Viser firmanavnet.

Script hjælper til at kunne anvende computerprogrammer mere effektivt og på samme niveau som en fuldt seende. I mange situationer, specielt i jobsammenhæng, er scripts meget nyttige for at kunne få endnu mere udbytte af ZoomText.

Med ZoomText script kan du oprette og anvende script til at styre ZoomText og andre programmer så forstørrelsen og oplæsningen giver forbedret feedback samt til at automatisere opgaver. Dette gør det hurtigere at arbejde med programmerne.

Her er nogle få eksempler på hvad du kan gøre med ZoomText script:

- Automatisk læse forudbestemte felter i en database.
- Automatisk læse nye elementer i din mailboks og automatisk læse dem når de åbnes.
- Automatisk læse programkontroller og data på en mere meningsfyldt måde.
- Automatisk læse ny tekst som opstår i et chat vindue.
- Automatisk læse når et bestemt informationsfelt ændrer for eksempel hvis summen i et regneark falder under en fastsat grænse.

Denne sektion indeholder information om hvordan man skriver, Registrer og administrer ZoomText script.

- <u>Hvad er et script?</u>
- <u>Skrive scripts</u>
- <u>Registrerer scripts</u>
- <u>Script administration</u>
- <u>Script genveje</u>
- <u>Script Dokumentation</u>

Hvad er et script og script sprog?

Hvad er et script? Et script er en tekstfil som indeholder programmeringskommandoer der kan styre en ZoomText eller program opgave. Script kan bestå af nogle få linjer eller mange linjer i et komplekst program. ZoomText script er skrevet i et af standard script sprog som for eksempel VBScript, Jscript/JavaScript, C# eller Perl. Der er ingen krav om særlige værktøjer eller tekstbehandler for at kunne skrive script - Windows Notesblok virker fint til formålet. Det er dog nødvendigt at have erfaring med at skrive scripts.

Hvad er et script sprog? Script sprog er programmeringssprog der styrer eksisterende programmer og komponenter. Script sprog kan oprettes uden specielle kompilere eller udviklingsmiljøer. De er derfor gode til hurtigt at udvikle løsninger på mindre opgaver. Dr findes mange forskellige script sprog som typisk er udviklet til specielle formål.

Hvilke script sprog kan anvendes til at skrive et ZoomText script? Vi anbefaler følgende: VBScript, Jscript/JavaScript, C# og Perl.

Skrive ZoomText scripts

Selvom næsten alle kan lære at skrive basale ZoomText scripts anbefales det at få en øvet script ZoomText programmør til at hjælpe med at skrive scripts. Det er vigtigt at script programmøren har forståelse for de behov man har som synshandikappet.

En erfaren script programmør er måske tilgængelig indenfor din organisation - spørg i din IT afdeling. Du kan også finde uafhængige script programmører via Internet. Hvis du ikke kan finde en god script programmør kan du kontakte din forhandler eller Freedom Scientific support på support@freedomscientific.com.

Andre kilder til information om ZoomText scripts

Der er et stigende antal ZoomText script tilgængelige og disse kan være tilgængelig som download og køb. Disse scripts vil blive gjort tilgængelige i ZoomText Scripting Library på Freedom Scientific websiden. For yderligere information gå til www.aisquared.com/scripting.

Registrerer scripts

For at kunne anvende scripts som er skrevet til ZoomText skal de først registreres i ZoomText Script Manager. Der findes to typer ZoomText script som kan registreres; script programmer og script komponenter.

- Et script program er en tekst fil som registreres ved at vælges den. Script program filer er typisk skrevet i VBscript (.VBS), Jscript (.JS) eller Perl (.PL).
- En script komponent er et program der skal registreres i både Windows og ZoomText. Disse programmer har oftest efternavnet .DLL eller .WSC.

Vigtigt! Du skal have administrator rettigheder for at ændre i ZoomText Script Manager. Registrering og ændring af scripts kan betyde at de ikke virker som de skal hvorfor de kun børe redigeres af en der er bekendt med ZoomText scripting.

For at registrere et script program i ZoomText (fx VBS, JS, PL)

1. I **ZoomText** menuen vælges **Scripting > Script Manager**.

Script Manager dialogboksen åbnes

2. I Script Manager dialogen vælges Registrer et Script...

Registrer dialogboksen åbnes.

- 3. Find mappen hvori script programmet du vil registrere ligger.
- 4. Vælg script programmet og klik OK.

Script Manager dialogboksen åbnes

5. Klik **OK.**

For at registrere en script komponent i ZoomText (fx DLL, WSC)

- 1. Hvis din script komponent allerede er registreret i Windows skal du fortsætte til trin 2. Ellers skal du registrere dit script i Windows på følgende måde:
 - o For at registrere en Windows script komponent (.WSC fil):
 - a) I Windows Stifinder finder du script filen.
 - b) Højreklik på filen og vælg Registrer.
 - o For at registrere en COM script komponent (.DLL fil):
 - a) klik på Windows Start knappen og vælg Kør...
 - b) Skriv: COMMAND
 - c) Klik **OK**.

Kommando prompten åbnes.

- d) I kommandoprompten skrives: REGSVR32 {sti\scriptfilnavn}
- e) Tryk Enter tasten.

Scriptet er nu registreret i Windows.

- f) Skriv: EXIT
- g) Tryk Enter tasten.

Kommando prompten lukkes.

- I Indstillinger menuen vælges Scripting > Script Manager...
 Script Manager dialogboksen åbnes
- 3. I Script Manager dialogen vælges Registrer et Script...

Registrer Script dialogboksen åbnes.

- 4. I Script komponent program ID feltet skal du skrive program ID (dvs. ProgID) for script komponenten som du vil registrere.
- 5. Klik **OK**.

🗛 Registrér script	—		×
For at registrere en script fil indtastes sti og filnavn ønsker at registrere.	n for scrip	tet, du	
Script fil sti og navn:			
		<u>G</u> enne	emse
For at registrere en script komponent indtastes pro komponenten, du ønsker at registrere.	ogram ID	for	
Script komponent program ID (ProgID):			
]	
Script information:			
Der findes ingen information for dette script			
⊻is script information OK Annulle	ér	Hjælj	p

Registrer Script dialogboksen åbnes.

Indstillinger	Beskrivelse
Script fil sti og navn:	Her skal du angive mappe og script filnavnet der skal registreres. Du kan også anvende gennemse knappen til at udpege mappe og fil.
Gennemse	Åbner Vælg Script Fil dialogboksen hvor du kan navigere til mappen og vælge script filen.
Script komponent program ID (ProgID):	Her skal du angive program ID for script komponenten der skal registreres. Program ID'en levers af script programmøren.
Script information	Viser information om det markerede script eller script komponent (forudsat at script programmøren har tilføjet denne information) herunder dato, version, kontakt information og en beskrivelse af scriptets formål.

Vis Script Information	Når du indtaster program ID vil et klik på Vis
	Script Information knappen åbne script
	informationen (forudsat at script
	programmøren har tilføjet denne information).

Script administration

ZoomText scripting funktion giver mulighed for at du kan registrere og køre script til et vilkårligt program. Nogle brugere har måske kun behov for nogle få script til et bestemt program men andre har behov for mange til flere forskellige programmer. ZoomText Script Manager gør registreringsprocessen, visning og administration af scripts helt enkelt.

Her er en oversigt over mulighederne i ZoomText Script Manager:

- Registrer script skrevet til ZoomText
- Hurtigt aktivere eller deaktivere script efter behov (uden at skulle registrer eller af-registrere dem)
- Åbne og redigere scripts. *Vigtigt:* redigering af scripts bør kun udføres af en kvalificeret script programmør.
- Vis en beskrivelse af hvert script herunder dets formål.

Bemærk: Du skal have administrator rettigheder for at ændre i ZoomText Script Manager. Registrering og ændring af scripts kan betyde at de ikke virker som de skal hvorfor de kun børe redigeres af en der er bekendt med ZoomText scripting.

For at vise og administrere ZoomText scripts

1. I **ZoomText** menuen vælges **Scripting > Script Manager**.

Script Manager dialogboksen åbnes

- 2. Juster de registrerede script efter ønske.
- 3. Klik Luk.

💁 ZoomText Script Manager 👘	—	
Registrerede scripts:	Script handlinge	r:
	<u>A</u> ktivér	<u>D</u> eaktivér
	R <u>e</u> digér	Afregis <u>t</u> rér
	Indstillinger	
<u>R</u> egistrér et script		
Script information:		
Intet script valgt		
	Luk	<u>H</u> jælp

ZoomText Script Manager dialogboksen

Indstillinger	Beskrivelse
Registrerede scripts:	Viser en liste over de script som aktuelt er registreret og klar til brug når ZoomText kører. Scripts som står i listen kan aktiveres, deaktiveres, flyttes op og ned i prioritering (hvis de udføres som følge af samme begivenhed) eller slettes helt ved at af- registrere scriptet. For at udføre disse handlinger vælges det ønskede script (eller scripts) hvorefter den ønskede script handling vælges.
Registrering af et script	Åbner Registrer Script dialogboksen hvor du kan angive de script som skal registreres til brug med ZoomText. For information om registrering af script se Registrering af Scripts.

Script Information:	Viser information om det markerede script (forudsat at script programmøren har tilføjet denne information) herunder dato, version, kontakt information og en beskrivelse af scriptets formål.
Script handlinger	
Aktiver	Aktiverer det markerede script (eller scripts). Når et script er aktiveret udføres det når ZoomText kører — afhængig af scriptets formål. <i>Bemærk:</i> Et script kan også aktiveres eller deaktiveres ved at klikke i den tilhørende check boks.
Deaktiver	Deaktiverer det markerede script (eller scripts). Når et script er deaktiveret forbliver det registreret til ZoomText med udføres ikke. <i>Bemærk:</i> Et script kan også aktiveres eller deaktiveres ved at klikke i den tilhørende check boks.
Rediger	Åbner det markerede script i Windows Notesblok hvor det kan redigeres.
Afregistrér	Fjerner de markerede scriptet så det ikke længere indlæses af ZoomText. Når et script er afregistreres stopper det straks og bliver fjernet fra listen over registrerede script.
Indstillinger	Vise indstillinger interface til det valgte script.

For mere information om at oprette og registrere scripts se ZoomText Scripting dokumentation for Script programmører. I **ZoomText** menuen vælges **Scripting > Dokumentation**.

Script genveje

ZoomText scripts kan skrives så de udføres automatisk som følge af en begivenhed eller genvej. Når et script er skrevet så det skal aktiveres med en genvej vil den blive synlig i ZoomText genveje dialogboks. Ligesom alle andre ZoomText genveje kan du se og ændre script genvejen.

For at se script genveje

1. I ZoomText menuen vælges Kommandotaster

ZoomText Kommandotaster dialogen åbnes.

2. I **Søgefeltet** skriv: SCRIPTS.

En liste over script genveje vises i Genveje kommando listen.

3. Klik på script genvejen for at se hvilke taster der er defineret.

Genvejens taster vises i primær tast samt Kombinationstast indstillingerne.

- 4. Juster indstillingerne efter ønske.
- 5. Gentag trin 3 og 4 for hver genvej du vil tilpasse.
- 6. Klik **OK**.

Scripting dokumentation for Script programmører

ZoomText Scripting dokumentationen for Script programmører giver en oversigt over hvordan man skriver og tester scripts.

• For at se Dokumentation for Script programmører

I **ZoomText** menuen vælges **Scripting > Dokumentation**.

Indeks

afinstaller ZoomText, 20 afslut ZoomText, 25 Aftalen Copyright, 2 Varemærker, 2 aktivere og deaktivere ZoomText, 23 aktivering aktivering af ZoomText, 15 dongle autorisering, 16 netværkslicens, 16 Anvend Opsætningsguide, 19 AppReader, 148 App Viser, 149 App Viser indstillinger, 158 Delte indstillinger, 163 LæsDet værktøj, 149 læsetilstande, 149 start og anvendelse, 154 Tekstlæseren, 151 Tekstviser, 149 Tekstviser indstillinger, 160 Baggrund Læser, 202 brugerflade, 31 brugerflade præferencer, 221 brugervejledning ZoomText brugervejledning, 26 Caps Lock tast (anvendelse), 24 detaljer, 146 dongle autorisering, 16 ekko indstillinger Detaljer, 146 Mus ekko, 141 om, 137 Program ekko, 144 Tastaturekko, 138

ekskluder xFont fra programmer, 226 Farveforbedringer, 95 fejlsikret tilstand understøttelse, 28 flere skærme Anbefalede skærmindstillinger, 88 Fejlsøgning, 93 Flere skærme adfærd, 92 Funktioner, 84 Juster automatisk efter skærmændringer, 91 Konfiguration af skærme, 89 om, 83 Understøttede hardware til flere skærme, 87 fokusforbedringer, 107 funktioner Forstørrelse, 2 Magnifier/Reader, 4 Genveje fejlsøgning, 45 konfiguration genveje, 214 hente hjælp, 26 hint (stemme), 134 hjælp, 26 anvende hjælp, 27 online ressourcer, 26 Hold vindue, 76 indstilling af ZoomText, 11 Afinstaller ZoomText, 20 Anvend Opsætningsguide, 19 Systemkrav, 12 tilføje ekstra stemmer, 18 Trin 1 - Installer ZoomText, 13 Trin 2 - Start ZoomText, 14 Trin 3 - Aktiver ZoomText, 15 Trin 4 - Opdater ZoomText, 17 Installation af ZoomText, 13 justering (navigering), 115 justering af zoomvinduer, 75 kamera, 192

kom godt i gang nye brugere, 6 kommandoer (efter gruppe) AppReader, 230 Baggrund Læser, 232 Forstørrelse, 238 Kommandotaster tilstand, 237 Læs, 179, 244 Læser, 241 Læsezoner, 242 Program, 240 Rul, 245 Support, 247 Søger, 235 Tekstmarkør, 176, 249 Vindue, 250 ZoomText Kamera, 233 ZoomText Optager, 243 kommandotaster alle kommandoer, 229 dialog, 39 Genveje, 35 kommandotaster, 35 om, 34 typer af, 35 vigtige genveje, 37 konfigurationer gemme og indlæse, 213 Genveje, 214 om, 211 standardkonfigurationen, 212 Kør ZoomText som, 228 kørsel af ZoomText, 21 kørsel med en eller flere skærme, 66 logon prompt, 28 Læs kommandoer, 179 LæsDet værktøj, 149 Læser funktioner (om), 121

Læser værktøjslinje fane, 122 Læsezoner anvende, 169 indstillinger, 172 om, 165 oprette, redigering og sletning, 166 værktøjslinje, 171 LøsDet kommando, 256 Magnifier funktioner (om), 55 Magnifier værktøjslinje fanen, 56 markørforbedringer, 103 mus (navigation), 117 mus ekko, 141 Museforbedringer, 99 navigation indstillinger Justering, 115 Mus, 117 om, 112 Panorering, 119 Sporing, 113 netværkslicens, 16 om ZoomText, 259 online hjælp ressourcer, 26 opdater ZoomText, 17 opdater ZoomText aktivere og deaktivere automatisk opdatering, 17 opdater ZoomText Anvende automatisk opdatering, 17 opdater ZoomText Anvende manuel opdatering, 17 overblik tilstand, 80 panorering (navigation), 119 program ekko, 144 program præferencer, 218 programindstillinger gemmer, 215 justering, 215 om, 215

præferencer brugerflade, 221 ekskluder xFont, 226 Kør ZoomText som, 228 om, 217 program, 218 udglatning, 224 rulle det forstørrede vindue, 64 scripting dokumentation, 272 hvad er scripts?, 262 om, 261 registrerer scripts, 264 script administration, 268 script genveje, 271 skrive scripts, 263 skærmforbedringer Farveforbedringer, 95 Fokusforbedringer, 107 markørforbedringer, 103 Museforbedringer, 99 om, 94 Smart inverter, 111 smart inverter, 111 sporing (navigation), 113 starte ZoomText, 14, 22 starte ZoomText start automatisk, 22 stemme aktivere og deaktivere, 125 juster læsetempo, 126 ZoomText stemmen, 124 stemmeindstillinger, 127 Hints, 134 Stemme, 127 Tekstbehandling, 131 support LøsDet kommando, 256

om ZoomText, 259 online support, 258 rapporter et problem, 255 systemanalyse, 257 systeminformation, 254 ZoomText support, 253 systemanalyse, 257 systeminformation, 254 systemkrav, 12 Søger, 183 kommandoer, 187 liste Søgning, 185 markering og stemme indstillinger, 189 side søgning, 183 starter, 183 værktøjslinje, 183, 185 tastatur ekko, 138 teknisk hjælp, 26 tekstbehandling (stemmer), 131 Tekstmarkør kommandoer, 176 tilføje ekstra stemmer, 18 Touch skærm support Adgang til ZoomText funktioner, 51 Anvende ZoomText på en Touch skærm, 47 Anvende ZoomText Touch ikon, 48 om, 46 **UAC**, 28 udglatning præferencer, 224 ekskluder xFont, 226 Velkommen til ZoomText, 1 værktøjer Baggrund Læser, 202 Søger, 183 ZoomText Kamera, 192 ZoomText Optager, 206 Værktøjer funktioner (om), 181 Værktøjer værktøjslinje fane, 182 værktøjslinje

anvendelse via tastatur, 33 Læser fanen, 122 Magnifier fanen, 56 minimer og gendan, 33 Værktøjer fanen, 182 værktøjstip, 26 ZoomText værktøjslinje, 32 værktøjslinje værktøjstip aktivere og deaktivere, 27 værktøjstip, 26 zoom ind og ud, 58 Zoom til 1x, 63 zoomfelt, 80 zoomniveau Anvende Zoom til 1x, 63 Tilpasse Zoom med musehjul, 61 Valg et sæt af ZoomText zoomniveauer, 59 Alle Zoomniveauer, 59 Kun Favorit Zoomniveauer, 59 Kun heltals zoomniveauerudelader, 59 Zoom ind og ud, 58 zoom med musehjul, 58 ZoomText Hjælp, 26 ZoomText Kamera, 192 anvende, 193 hente fra kamera, 192 indstille et kamera, 193 kameraindstillinger dialog, 197 kom godt i gang, 192 video og system ydelse., 197 ZoomText Optager, 206 ZoomText sikker tilstand, 28 aktivere og deaktivere, 29 værktøjslinje, 28 ZoomText stemme, 124 ZoomText support, 253 ZoomText systemanalyse, 257 ZoomText Touch ikon, 48

ZoomText værktøjslinje, 32 minimer og gendan, 33 zoomvindue Anvende overblik tilstand og Zoomfelt søger, 80 Anvende Zoom til 1x, 63 Hold vindue, 76 justering, 75 kørsel med en eller flere skærme, 66 markering, 67 når en skærm anvendes, 65, 67 når flere skærme anvendes, 65, 67 om, 65 rulle det forstørrede vindue, 64
Noter