

ZoomText

Guida Utente

Freedom Scientific, Inc.

www.FreedomScientific.com

440945-001

Copyright

Fusion

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Tutti i diritti riservati.

ZoomText Ingranditore

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Tutti i diritti riservati.

ZoomText Ingranditore/Lettore

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Tutti i diritti riservati.

Guida utente di ZoomText

Copyright © 2025, Freedom Scientific, Inc. Tutti i diritti riservati.

La Copia, duplicazione, vendita o distribuzione in altro modo di questo software o la documentazione ad esso allegata costituisce violazione della legge federale sul copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, memorizzata in un sistema di recupero, o tradotta in qualsiasi lingua in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo senza l'espreso consenso scritto di Freedom Scientific, Inc.

Marchi di fabbrica

ZoomText e **xFont** sono marchi registrati di Freedom Scientific, Inc.

Fusion, **ZoomText Ingranditore** e **ZoomText Ingranditore/Lettore** sono marchi registrati di Freedom Scientific, Inc.

Microsoft e **Windows** sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Sentinel è un marchio registrato di SafeNet, Inc.

Marzo 2025

Freedom Scientific Inc.

Sommario

Sommario	3
Benvenuti in ZoomText	1
Funzioni di Ingrandimento	3
Funzioni di Ingranditore/Lettore	6
Iniziamo con ZoomText	8
Setup di ZoomText	14
Requisiti di sistema	15
Passo 1-Installare ZoomText	16
Passo 2— Avviare ZoomText	17
Passo 3— Attivare ZoomText	18
Aggiungere più voci	20
Usare la Procedura di Avvio Guidato	21
Disinstallare ZoomText	22
Eseguire ZoomText	23
Avviare ZoomText	24
Attivare e Disattivare ZoomText	25
Uso del tasto Caps Lock da parte di ZoomText	26
Uscire da ZoomText	27
Supporto alla Schermata di Accesso a Windows e alla Modalità Sicura	28
Programma Early adopter	31
L'interfaccia utente di ZoomText	34
La Barra degli Strumenti di ZoomText	35
Oscuramento schermo (solo Fusion)	38
Tasti Comando	39
Tipi di Tasti di Comando	40

I Tasti Fondamentali di ZoomText	42
La finestra di dialogo Tasti di Comando	44
Il Banner Tasti a Livelli	49
Risolvere Conflitti di Tasti	52
Supporto Touch Screen	53
Usare ZoomText su un TouchScreen	54
Accedere alle funzioni di ZoomText tramite gesti a tocco	55
Funzioni di ingrandimento	59
La Scheda Ingrandimento della Barra degli Strumenti	60
Aumentare e Ridurre l'Ingrandimento	62
Usare la funzionalità Ingrandimento 1x	68
Scorrere la Vista Ingrandita	69
Finestre Ingrandite	71
Usare Uno o Più Monitor	72
Selezionare finestre ingrandite	73
Regolare le Finestre Ingrandite	83
Vista contestuale	84
Usare la modalità Panoramica ed il Localizzatore Vista	91
Gestire Monitor Multipli	94
Opzioni Monitor multipli	95
Hardware per monitor multipli supportato	98
Configurazioni dei monitor consigliate	99
Configurare gli Schermi per il Supporto ai Monitor Multipli	100
Adeguamento automatico ai cambiamenti dei display	102
Comportamenti delle Funzioni con Monitor Multipli	103
Risoluzione dei problemi con i Monitor Multipli	105
Miglioramenti Schermo	107
Miglioramenti colore	108
Miglioramenti puntatore	113

Miglioramenti cursore	119
Miglioramenti Focus	123
Usare Inverti Smart	128
Vista testo in tempo reale	129
Vista testo in tempo reale	Error! Bookmark not defined.
Schema colori per la Vista testo in tempo reale	137
Impostazioni di Navigazione	139
Tracciamento	140
Allineamento	143
Mouse	146
Scorrimento	149
Funzioni del Lettore	152
La scheda Lettore della barra degli strumenti	153
La voce di ZoomText	155
Abilitare e Disabilitare la Voce	156
Regolare la Velocità della Voce	157
Impostazioni Voce	158
Elaborazione Testo	162
Suggerimenti	166
Audio	169
Riscontro	171
Riscontro Tastiera	172
Riscontro Mouse	175
Riscontro Programmi	178
Prolissità	181
Lettore Applicazione	184
Modalità di lettura del Lettore Applicazione	185
L'ambiente della vista Testo	187
Avviare ed utilizzare il Lettore Applicazione	190

Impostazioni Vista Testo	194
Aree di Lettura	198
Creare, Modificare e Eliminare Aree di Lettura	199
Usare le Aree di Lettura	202
La barra degli strumenti Aree di Lettura	204
Impostazioni delle Aree di Lettura	206
Leggere con il cursore di Testo	211
Comandi di Lettura	215
Strumenti	217
La scheda Strumenti della Barra degli Strumenti	218
Strumento di Ricerca	220
Fotocamera ZoomText	231
Lettore in Background	242
Registratore ZoomText	247
Assistente vocale	253
Configurazioni	268
La Configurazione Predefinita	269
Salvare e caricare le configurazioni	270
Tasti di scelta Rapida per le Configurazioni	271
Impostazioni delle Preferenze	273
Preferenze del Programma	274
Preferenze dell'Interfaccia Utente	279
Preferenze Arrotondamento	283
Preferenze di lettura tradizionale	289
Esegui ZoomText come	291
Comandi ZoomText	293
Comandi Lettore Applicazione	294
Comandi del Lettore in Background	297
Comandi della Fotocamera	299

Comandi dello Strumento di Ricerca	301
Modalità Tasti a Livelli	304
Comandi Ingranditore	306
Comandi Programma	308
Comandi Lettore	310
Comandi per le Aree di Lettura	312
Comandi del Registratore	314
Comandi di Lettura	315
Comandi di Scorrimento	317
Comandi di Supporto	319
Comandi del cursore di testo	321
Comandi per le finestre	323
Supporto ZoomText	325
System Information	326
Strumenti (Supporto)	330
Desktop remoto	331
Scheda video	333
Programma Early adopter	335
Training Center	338
Informazioni su ZoomText	339
Sviluppo di Script	341
Cosa sono gli script e i linguaggi di scripting?	343
Scrivere script per ZoomText	344
Tasti rapidi per gli script	345
Documentazione per sviluppatori di script	346
Indice	347

Benvenuti in ZoomText

ZoomText è una potente soluzione per l'accesso al computer che permette agli utenti ipovedenti di vedere, sentire e usare tutte le applicazioni su desktop, laptop e tablet con sistema Windows. ZoomText vi fornisce strumenti per ingrandire, migliorare e leggere lo schermo nel modo a voi più confortevole, in modo che possiate trarre il massimo vantaggio dal vostro computer.



ZoomText è disponibile in due versioni: *ZoomText Ingranditore* e *ZoomText Ingranditore/Lettore*.

- **ZoomText Ingranditore** fornisce un set completo di strumenti per ingrandire e migliorare la leggibilità dello schermo del computer.
- **ZoomText Ingranditore/Lettore** fornisce tutti gli strumenti della versione Ingranditore, più una serie di utili strumenti per la lettura di schermate e documenti, pensata appositamente per gli utenti ipovedenti. Gli strumenti di lettura di ZoomText sono perfetti anche per gli individui con difficoltà di apprendimento, bassa alfabetizzazione e altre difficoltà di lettura.

Entrambe le versioni di ZoomText sono progettate per utenti di tutte le età e capacità informatiche, ed hanno l'obiettivo di garantire produttività e indipendenza a casa, a scuola e sul posto di lavoro.

Funzioni di Ingrandimento

ZoomText Ingranditore è un sofisticato programma di ingrandimento dello schermo che ingrandisce e migliora tutto ciò che compare a video.

Le funzionalità di ZoomText Ingranditore includono:

- **Ingrandimento Flessibile.** ZoomText fornisce una vasta scelta di livelli di ingrandimento, fino a 60x. I livelli includono: da 1x a 8x in incrementi di 1, da 10x a 16x in incrementi di 2, da 20x a 36x in incrementi di 4, da 42x a 60x in incrementi di 6, nonché i livelli frazionarie di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x. Potete aumentare e diminuire l'ingrandimento usando Tutti i livelli di ingrandimento, Solo i livelli preferiti o Solo i livelli interi.
- **Potenti finestre ingrandite.** ZoomText fornisce un'ampia varietà di tipi di finestre ingrandite per configurazioni a uno o più monitor, permettendovi di configurare la vista ingrandita secondo le vostre esigenze.
- **Arrotondamento Avanzato.** ZoomText fornisce due tipi di arrotondamento avanzato, xFont® e Arrotondamento eometrico, i quali assicurano che il testo e la grafica (comprese le fotografie) siano nitidi e leggibili a tutti i livelli di ingrandimento.
- **Supporto ai Monitor Multipli.** Il supporto per monitor multipli di ZoomText vi permette di visualizzare di vedere una maggiore quantità di informazioni in vari modi. Le esclusive modalità MultiVista di ZoomText - MultiVista Globale e MultiVista Locale (in attesa di brevetto) - permettono di visualizzare simultaneamente più applicazioni o più porzioni della stessa applicazione.
- **Colori a Schermo Migliorati.** Innovativi modi di controllare i colori migliorano la nitidezza dello schermo e riducono l'affaticamento degli occhi. Gli effetti speciali includono: tonalità di colore, modalità a due colori e la sostituzione di colori problematici.

- **Cursori e Puntatori Visibili.** I miglioramenti alla dimensione e al colore rendono più facile vedere il puntatore del mouse. Speciali localizzatori intorno al puntatore del mouse e al cursore di testo li rendono facili da trovare e da seguire.
- **Miglioramenti Focus.** I miglioramenti del focus rendono facile localizzare e seguire il controllo focalizzato quando vi spostate attraverso i menu, le finestre di dialogo e altri controlli delle applicazioni.
- **Navigazione fluida.** La navigazione delle applicazioni e lo scorrimento della vista sono sempre fluidi e confortevoli.
- **Supporto per dispositivi touch screen.** ZoomText può essere utilizzato su dispositivi touch screen Windows 10 e 8.1, compresi tablet, computer portatili e monitor desktop. ZoomText vi seguirà mentre toccate, trascinate e scorrete il dito in tutte le vostre applicazioni. Inoltre, potete accedere istantaneamente alle funzionalità chiave di ZoomText utilizzando l'icona touch ed i gesti di ZoomText. Nota: questa funzione richiede un dispositivo multi-touch a 5 punti o superiore. Per maggiori informazioni, consultate Supporto Touch Screen.
- **Strumento di Ricerca.** Lo Strumento di Ricerca vi aiuta a cercare, spostarvi e leggere documenti, pagine web ed e-mail. Potete cercare singole parole o frasi in tutto il documento o solo in elementi specifici, come intestazioni, form e link.
- **Fotocamera ZoomText.** Fotocamera ZoomText La Fotocamera di ZoomText permette di ingrandire documenti stampati, libri e altri oggetti usando una normale webcam HD.
- **Impostazioni per le Applicazioni.** Potete salvare impostazioni specifiche per ogni applicazione che usate. Quando passate da un'applicazione all'altra, ZoomText caricherà automaticamente le impostazioni desiderate.

- **Supporto alla Schermata di Accesso a Windows.** ZoomText fornisce supporto per l'ingrandimento e la lettura dello schermo nella schermata di accesso a Windows e in altre schermate in modalità sicura.

Funzioni di Ingranditore/Lettore

ZoomText Ingranditore/Lettore è un programma di ingrandimento e lettura dello schermo completamente integrato che ingrandisce, migliora e legge ad alta voce tutto ciò che si trova a video.

ZoomText Ingranditore/Lettore include tutte le funzionalità di ZoomText Ingranditore, più:

- **Funzionalità complete di lettura dello schermo.** ZoomText leggerà automaticamente tutti i controlli e gli eventi mentre vi spostate nelle applicazioni, compresi i menu, le finestre di dialogo, le visualizzazioni ad elenco e i messaggi. Tre livelli di prolissità vi danno un controllo completo sulla quantità di dettagli che vi verranno comunicati.
- **Lettore Applicazione.** Con il Lettore Applicazione, potete leggere direttamente nell'applicazione in cui vi trovate o passare al volo alla vista testo ad alto contrasto, migliore per una fruizione visiva. Potete anche leggere istantaneamente blocchi di testo cliccando e trascinando il mouse. Usate il comando Leggi dal Puntatore del Lettore Applicazione per avviare istantaneamente il Lettore Applicazione dalla parola sotto il puntatore del mouse.
- **Aree di lettura** Le Aree di lettura vi permettono di vedere e sentire istantaneamente specifiche posizioni nelle vostre applicazioni. Potete definire fino a 10 aree per ogni applicazione, che potete attivare tramite un menu a comparsa o comandi da tastiera.
- **Accessibilità completa a Internet.** ZoomText è in grado di leggere qualsiasi pagina web, nell'ordine di lettura corretto. Potete leggere automaticamente o navigare manualmente per parola, riga, frase e paragrafo.

- **Navigazione del testo.** I tasti di navigazione facilitano la lettura durante la creazione e la modifica dei documenti. Con semplici comandi potete leggere per carattere, parola, riga, frase e paragrafo, anche durante la selezione del testo.
- **Riscontro della tastiera.** Ogni tasto o parola digitata viene pronunciata automaticamente. Potete scegliere di sentire tutti i tasti o solo gruppi di tasti selezionati.
- **Riscontro del Mouse.** Il riscontro del mouse legge automaticamente il testo a cui si punta. Singole parole o intere righe di testo vengono pronunciate istantaneamente o dopo un breve passaggio del mouse.
- **Strumento SpeakIt.** Lo strumento SpeakIt vi consente di leggere aree selezionate dello schermo facendo clic o trascinando il mouse.
- **Lettore in Background.** Il Lettore in Background vi consente di ascoltare documenti, pagine web, e-mail o qualsiasi testo mentre eseguite contemporaneamente altre attività.
- **Registrazione di ZoomText.** Il Registratore di ZoomText vi consente di trasformare il testo presente in documenti, pagine web, e-mail o in altre fonti in file audio. Queste file li potrete poi ascoltare sul vostro computer o trasferire su altri dispositivi come ad esempio sul vostro smartphone.
- **Voci premium integrate.** ZoomText Ingranditore/Lettore include una libreria completa di sintetizzatori vocali Vocalizer Expressive, che fornisce voci con supporto per le lingue e i dialetti più comunemente parlati in tutto il mondo.

Iniziamo con ZoomText


ZoomText ha svariate funzionalità progettate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Questo argomento fornisce una panoramica del funzionamento di ZoomText, oltre ad una rapida carrellata delle caratteristiche essenziali che tutti gli utenti devono imparare a conoscere.

Come funziona ZoomText

Per la maggior parte del tempo, ZoomText lavora in background, tracciando tutte le vostre attività e fornendo una vista ingrandita e migliorata dell'lesschermate. Quindi, mentre spostate il puntatore del mouse, digitate testo o vi muovete con la tastiera,, il vostro punto di interesse sarà sempre in vista. Se state usando ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText vi leggerà verbalmente ciò che state facendo, dandovi una conferma uditiva di dove vi trovate, cosa state digitando e altro ancora. Tutto questo avviene automaticamente, quindi potete pensare a ZoomText come alla vostra guida personale attraverso il computer.

La Barra degli Strumenti di ZoomText

La barra degli strumenti di ZoomText ha un layout snello e moderno, che la rende facile e veloce da imparare e usare. Potete usare l'intera barra degli strumenti usando sia il mouse che la tastiera.

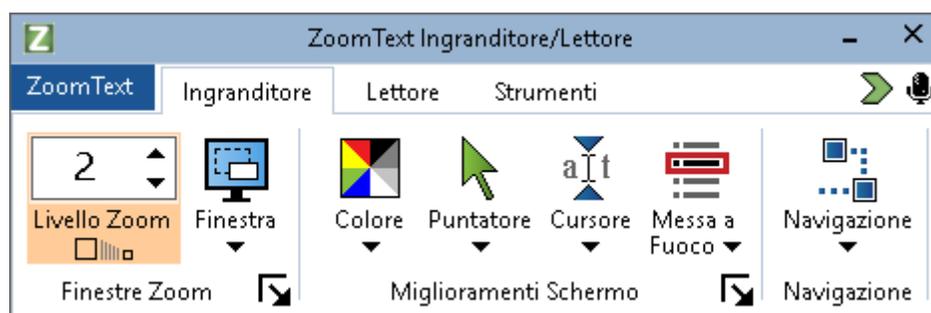

La Barra degli Strumenti di ZoomText

Usando i tasti freccia, potete spostarvi nel menù di ZoomText, tra i controlli e le schede della barra degli strumenti e tra i menù a pulsante. Quando vi trovate su un pulsante multifunzione, premendo Invio attiverete o disattiverete la funzionalità, mentre premendo la Freccia Giù aprirete il relativo menù. Quando il focus è nella casella spin Livello di ingrandimento (sulla barra degli strumenti Ingrandimento) o nella casella spin Velocità (sulla barra degli strumenti Lettore), premendo le frecce Su e Giù imposterete il valore della casella spin, mentre premendo le frecce Sinistra e Destra sposterete il focus sul controllo precedente o successivo. Nella casella spin Livello di Ingrandimento, premendo il tasto Invio attiverete la funzionalità Ingrandimento a 1X.

Impostare la Vista Ingrandita

Poiché lo scopo principale di ZoomText è quello di rendere lo schermo più grande e più facile da vedere, la prima operazione da compiere è quella di regolare il livello di ingrandimento e i colori dello schermo per una visione confortevole. Ecco i metodi rapidi per regolare queste impostazioni.

- **Per aumentare o diminuire il livello di ingrandimento**

Tenete premuto il tasto **Caps Lock** e premete i tasti freccia **Su** e **Giù**.

- **Per passare tra il livello di ingrandimento attuale e la visione a 1x**

Tenete premuto il tasto **Caps Lock** e premete il tasto **Invio**.

- **Per invertire il contrasto dello schermo**

Tenete premuto il tasto **Caps Lock** e premete **C**.

Potete avere più informazioni su tutte le funzionalità e le impostazioni visive di ZoomText nella sezione [Funzioni di Ingrandimento](#) Capitolo 5— [Funzioni di Ingrandimento](#).

Impostare le Funzioni di Voce e Riscontro

Se state usando ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText vi leggerà verbalmente tutto ciò che state facendo; quindi, il vostro secondo compito sarà quello di impostare le opzioni di voce e riscontro in modo che il programma vi legga ad alta voce i programmi nel modo che più vi aggrada. Queste opzioni includono il modo in cui ZoomText vi legge i tasti quando digitate, nonché il modo in cui vi vengono letti i menu, le finestre di dialogo e altri controlli mentre vi spostate all'interno delle applicazioni. Ecco i metodi rapidi per regolare queste impostazioni.

- **Per aumentare e diminuire la velocità della voce di ZoomText**

Tenete premuti **Caps Lock + Alt** e premete i tasti freccia **Su** e **Giù**.

- **Per impostare il riscontro della tastiera durante la digitazione**

Tenete premuti **Caps Lock + Alt** e premete **K**. Ogni pressione di questa combinazione modificherà il riscontro della tastiera, ciclando tra le varie opzioni disponibili: caratteri, parole, caratteri e parole o niente.

- **Per impostare il livello di prolissità per la lettura dei programmi**

Tenete premuti **Caps Lock + Alt** e premete **B**. Ogni pressione di questa combinazione modificherà il livello di prolissità, passando tra Alta, Media e Bassa. Il livello basso leggerà la minor quantità di dettagli per ogni elemento, mentre il livello alto leggerà la maggior quantità di dettagli possibile.

Potete avere più informazioni su tutte le funzionalità e le impostazioni di lettura e riscontro di ZoomText nella sezione [Funzioni di voce e riscontro](#) Capitolo 6— [Funzioni del lettore](#).

Lettura di documenti, pagine web ed e-mail

Se state usando ZoomText Ingranditore/Lettore, c'è un'altra importante funzione che dovete imparare a conoscere: il Lettore Applicazione di ZoomText. Il Lettore Applicazione rende facile farsi leggere documenti, pagine web ed e-mail attraverso semplici comandi. Potete scegliere dove

il Lettore Applicazione dovrà iniziare a leggere, per poi eseguire una lettura continua fino alla fine del documento. Potete controllare la lettura mettendo in pausa e riprendendo il parlato, oppure scorrendo avanti e indietro tra le unità di testo. Inoltre, potete scegliere di leggere in una di due viste: Vista Testo e Vista Applicazione. La Vista Applicazione legge direttamente all'interno dell'applicazione in cui lavorate, mentre la Vista Testo legge in un ambiente speciale, nel quale il testo viene riformattato per una lettura più facile, ad alto contrasto e in una modalità a scelta tra Singola Riga e Schermo Intero.

Il modo più facile per avviare il Lettore Applicazione è usare il comando Leggi dal Puntatore. Ecco come funziona.

- **Per lanciare il Lettore Applicazione usando il comando Leggi dal Puntatore**

Posizionate il puntatore del mouse sulla parola dalla quale volete iniziare la lettura, poi premete il comando Leggi dal Puntatore: **Caps Lock + Alt + Click Sinistro**

Il Lettore Applicazione si avvierà nella modalità selezionata e inizierà a leggere dalla parola cliccata.

- **Per interrompere la lettura automatica**

Premete **Invio** o fate clic.

- **Per riprendere la lettura automatica**

Premete **Invio** o fate un doppio clic nel punto in cui volete riprendere la lettura.

- **Per scorrere rapidamente per frasi o paragrafi**

Premete i tasti freccia sinistra o destra per leggere la frase precedente o successiva. Premete i tasti freccia su o giù per leggere il paragrafo precedente o successivo.

- **Per passare tra Vista Applicazione e Vista Testo**

Premete **Tab**.

- **Per uscire dal Lettore Applicazione**

Fate un Click Destro o premete **Esc**.

quando uscite dal lettore applicazione, il cursore si posizionerà automaticamente sull'ultima parola che è stata evidenziata nel lettore applicazione, se un cursore esiste.

Potete avere più informazioni sul Lettore Applicazione nella sezione [Lettore Applicazione](#) la sezione [Lettore Applicazione](#) del Capitolo 6— Funzioni del Lettore.

Abilitare e Disabilitare ZoomText ed uscire da ZoomText

La maggior parte degli utenti di ZoomText mantiene il programma in esecuzione durante ogni sessione di lavoro. Tuttavia, ci possono essere momenti in cui potreste voler disattivare temporaneamente ZoomText, o uscire del tutto dal programma. Potete fare queste operazioni come descritto di seguito.

- **Per disabilitare (e riabilitare) ZoomText**

Fate clic sul menu **ZoomText** e selezionate **Disabilita ZoomText** o **Abilita ZoomText**. Potete anche abilitare e disabilitare ZoomText tenendo premuti **Caps Lock + Ctrl** e premendo il tasto **Invio**.

- **Per uscire da ZoomText**

Fate clic sul menù **ZoomText**, quindi selezionate **Esci da ZoomText**.

Passi Successivi

Le istruzioni fornite sopra dovrebbero permettervi di iniziare a lavorare in modo produttivo in tutte le vostre applicazioni. Tuttavia, esistono molte altre funzionalità e impostazioni da imparare che vi aiuteranno a ottimizzare l'uso di ZoomText ancora di più. Quindi, vi raccomandiamo

di investire un po' di tempo nell'esplorazione dell'intero sistema di aiuto guida utente per saperne di più su come usare ZoomText.

Setup di ZoomText

Installare ed eseguire ZoomText è un processo piuttosto semplice, che richiede solo pochi minuti e pochi passi da completare.

Questa sezione vi guiderà attraverso i passi necessari per installare e configurare ZoomText per l'uso.

- [Requisiti di sistema](#)
- [Passo 1-Installare ZoomText](#)
- [Passo 2—Avviare ZoomText](#)
- [Passo 3—Attivare ZoomText](#)
- [Passo 4—Aggiornare ZoomText](#)
- [Aggiungere più voci](#)
- [Usare la Procedura di Avvio Guidato](#)
- [Disinstallare ZoomText](#)

Requisiti di sistema

Per eseguire ZoomText è necessario il seguente hardware/software:

- Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, o Windows Server® 2016
- Processore: processore i7 dual core da 2 GHz raccomandato.
- 16 GB raccomandati.
- Scheda video/grafica integrata o dedicata con supporto per DirectX 10 o superiore.
- 2 GB di spazio su disco rigido. Si raccomanda un disco SSD.
- Scheda audio compatibile Windows (per sintesi vocale)
- Il supporto ai touch screen richiede un dispositivo multi-touch a 5 punti.
- Il supporto Fotocamera di ZoomText richiede USB 2.0.

Passo 1-Installare ZoomText

L'installazione di ZoomText è molto semplice, e permette di completare il processo in pochi passi.

▪ Per installare ZoomText

1. Se non avete ancora scaricato ZoomText, potete scaricarlo dal [sito web di VisionDept](#). Una volta completato il download, andate alla posizione in cui avete salvato il file eseguibile, selezionatelo e premete Invio.

Il programma di installazione di ZoomText si avvierà automaticamente.

2. Seguite le istruzioni per completare l'installazione.
3. Riavviate Windows.

Quando passate a una nuova versione di ZoomText, le impostazioni personalizzate di una versione precedente verranno importate automaticamente. Questo include funzioni quali il livello di ingrandimento, i miglioramenti di colore, mouse, puntatore e cursore, nonché qualunque impostazione personalizzata abbiate creato per l'applicazione. (Le impostazioni personalizzate più vecchie delle due versioni precedenti non saranno importate).

Nota: Il programma di installazione di ZoomText installerà componenti a livello di sistema. Per installare questi componenti, dovete avere privilegi amministrativi. Se non avete questi privilegi, contattate il vostro amministratore di rete prima di procedere con l'installazione.

Passo 2—Avviare ZoomText

Per default, il programma di installazione configurerà ZoomText per avviarsi automaticamente all'avvio di Windows. Se avete deselezionato questa opzione nel programma di installazione, dovrete avviare ZoomText manualmente usando uno dei metodi descritti di seguito.

▪ Per avviare ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Nel menu **Start** di Windows, scegliete **ZoomText {versione}**.
- Nel desktop di Windows, cliccate due volte sull'icona **ZoomText Versione**.
- Premete **Windows + R** per aprire la finestra di dialogo **Esegui**, digitate "ZT{versione}" e premete **Invio**.

Quando ZoomText si avvia, modifica il vostro schermo mostrando una vista ingrandita del desktop di Windows e delle vostre applicazioni. Mentre muovete il mouse, digitate il testo e vi spostate all'interno delle vostre applicazioni, la vista ingrandita scorrerà automaticamente, mantenendo l'area attiva in vista. Se avete installato ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText leggerà anche ad alta voce qualsiasi elemento, azione ed evento nelle vostre applicazioni. Tutte le vostre applicazioni Windows funzioneranno normalmente mentre ZoomText è in esecuzione.

Nota: All'icona del programma ZoomText può essere aggiunto un tasto di scelta rapida che permette di avviare ZoomText con un comando da tastiera. Aggiungere tasti di scelta rapida alle icone di un programma è una funzionalità standard di Windows. Fate riferimento alla guida di Windows per istruzioni su come aggiungere un tasto di scelta rapida.

Passo 3—Attivare ZoomText

Il License Manager vi permette di attivare ZoomText usando una connessione Internet. Il processo di attivazione inizia automaticamente quando si avvia ZoomText.

Nota: Se non avete una connessione Internet, potete attivare ZoomText per telefono, fax o visitando www.fsactivate.com da un computer con accesso a Internet. Per maggiori informazioni su queste opzioni, scegliete Guida per l'attivazione quando inizia il processo di attivazione.

- **Per attivare ZoomText tramite Internet, fate quanto segue:**
 1. Nella finestra di dialogo Attivazione, scegliete Avvia Attivazione.
 2. Leggete le istruzioni, quindi usate le frecce per selezionare Internet (raccomandato) e confermate premendo Invio.
 3. Se il vostro numero di autorizzazione a 20 cifre non viene mostrato automaticamente, inseritelo nella casella di editazione. Potete trovare il vostro numero di autorizzazione in stampa e in braille sulla custodia del DVD ZoomText.
 4. Premete Invio per continuare. Vi verrà chiesto di collegarvi a Internet se non lo avete già fatto. Dovete stabilire una connessione a Internet per poter continuare con l'attivazione.
 5. Se non avete già registrato ZoomText, vi verrà chiesto di farlo. Registrare ZoomText vi consentirà di ricevere assistenza tecnica. Scegliete Registra ora e completate il modulo di registrazione online seguendo le istruzioni fornite. Potete anche decidere di registrarvi in seguito, ma dovete necessariamente farlo la volta successiva che avviate JAWS.
 6. Dopo che avrete inviato la vostra registrazione, Internet License Manager proverà ad attivare ZoomText. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti. Quando l'attivazione viene terminata con successo, scegliete Fine.

Nota: se Internet License Manager non può attivare JAWS, potreste dover riconfigurare il vostro software firewall. Consultate la Guida per l'Attivazione per maggiori informazioni.

Autorizzazione con Chiave Hardware

La Chiave Hardware è un dispositivo che potete collegare alla porta USB di un computer. ZoomText è autorizzato a funzionare sul computer fin tanto che la chiave rimane collegata. Questo è utile se dovete usare ZoomText su molti computer diversi e non volete attivare il programma su ognuno di essi.

Quando ZoomText si avvia, per prima cosa cerca una chiave hardware collegata al computer. Se ne trova una, ZoomText userà le informazioni di licenza in essa contenute per l'autorizzazione. Se non viene trovata una chiave, ZoomText cercherà le informazioni di licenza nel vostro computer. Potete usare l'utility Dongle Viewer per visualizzare informazioni sulla licenza relativa alla chiave attualmente collegata al computer. Per avviare l'utility Dongle Viewer; nel menu **ZoomText** scegliete **Gestisci licenza > Esplora cartella Utility**, poi scegliete **Dongle Viewer**.

Le chiavi hardware sono vendute separatamente o come caratteristica aggiuntiva all'acquisto di ZoomText. Se volete acquistare una chiave, contattate VisionDept.

Licenza di Rete

Se avete una licenza di rete multiutente, il vostro amministratore di sistema deve andare su www.fsactivate.com/network e scaricare gli strumenti di autorizzazione di rete e il server di licenza. Questa pagina contiene anche semplici istruzioni per installare il server di licenza e attivare la licenza di rete.

Aggiungere più voci

ZoomText Ingranditore/Lettore include una libreria di voci Vocalizer Expressive per le lingue più comunemente parlate e i loro accenti più comuni. Quando installate ZoomText, almeno una voce maschile o femminile corrispondente alla lingua del vostro sistema operativo Windows viene automaticamente installata insieme a ZoomText.

Potete installare più voci Vocalizer Expressive utilizzando l'utility Aggiungi/Rimuovi Voci.

■ Per installare voci Vocalizer Expressive aggiuntive:

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Voce** o spostatevi fino a **Voce** e premete il tasto freccia giù.

2. Nel menù **Voce**, fate clic su **Aggiungi/Rimuovi Voci**.

Apparirà la finestra di dialogo Aggiungi/Rimuovi Voci Vocalizer Expressive.

3. Nella casella combinata **Seleziona una Lingua** selezionate la lingua per la quale volete scaricare le voci.
4. Nella casella elenco **Voci Premium**, selezionate le voci che volete installare. Potete selezionare un numero illimitato di voci. Per ascoltare un esempio della voce corrente per decidere se volete installarla, fate clic su **Ascolta Esempio** o premete **Alt + P**. Se una voce è già installata, questo verrà indicato nell'elenco.
5. Selezionate il pulsante **Installa voci selezionate** per avviare l'installazione.
6. Quando l'installazione è terminata, scegliete **Fine** per chiudere l'utility. Dovete riavviare ZoomText per cominciare a usare le nuove voci installate.

Nota: in ZoomText, potete passare tra le voci installate utilizzando l'opzione **Impostazioni** nel menù **Voce**.

Usare la Procedura di Avvio Guidato

La procedura di Avvio Guidato di ZoomText mostra una serie di semplici finestre di dialogo che vi permettono di configurare facilmente le caratteristiche e le impostazioni principali di ZoomText. La procedura guidata di avvio viene eseguita automaticamente subito dopo aver attivato ZoomText. La Procedura di Avvio Guidato può anche essere eseguita in qualsiasi momento quando ZoomText è in esecuzione.

▪ Per eseguire manualmente l'Avvio Guidato

- Nel menu **ZoomText** scegliete **Preferenze > Procedura di Avvio Guidato**

Apparirà la Procedura di Avvio Guidato, che vi guiderà nella configurazione delle funzionalità principali.

Nota: queste impostazioni appaiono anche nella finestra di dialogo Preferenze Programma di ZoomText. Per saperne di più, consultate [Preferenze del Programma](#) al Capitolo 9—Impostazioni Preferenze.

Disinstallare ZoomText

Se non avete più bisogno di ZoomText sul vostro sistema, potete disinstallarlo in qualsiasi momento.

▪ Per disinstallare ZoomText

1. Aprite il menù **Start** di Windows.
2. Nella casella di **Ricerca**, digitate: Programmi e Funzionalità
3. Premete **Invio**.

Apparirà L'applicazione Programmi e funzionalità di Windows, che mostrerà un elenco di applicazioni installate sul vostro sistema.

4. Nell'elenco delle applicazioni, scegliete **Freedom Scientific ZoomText {versione}**, e poi premete **Invio**.

Il programma di disinstallazione di ZoomText apparirà e vi guiderà nel processo di disinstallazione.

5. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di disinstallazione.

Eseguire ZoomText

ZoomText è un'applicazione standard che potete avviare e chiudere in qualsiasi momento durante la vostra sessione di Windows. Potete anche configurare ZoomText per caricarsi automaticamente all'avvio di Windows, sia nella schermata di accesso sia dopo la comparsa del desktop.

Per aiutarvi a imparare e padroneggiare ZoomText più velocemente, vi consigliamo di esplorare le informazioni e le risorse descritte in [Come ottenere aiuto con ZoomText](#) (più avanti in questo capitolo). Queste risorse sono sempre disponibili e vi incoraggiamo ad usarle ogni volta che ne avete bisogno.

Sapere come gestire il vostro software ZoomText e la vostra licenza è altrettanto importante. Ciò significa mantenere il vostro software aggiornato con gli ultimi miglioramenti, sapere quando e come trasferire l'attivazione e utilizzare le risorse di supporto di ZoomText.

- [Avviare ZoomText](#)
- [Attivare e disattivare ZoomText](#)
- [Usare il tasto Caps Lock](#)
- [Uscire da ZoomText](#)
- [Ottenere aiuto con ZoomText](#)
- [Supporto alla Schermata di Accesso a Windows e alla Modalità Sicura](#)
- [programma Early Adopter](#)

Avviare ZoomText

Se ZoomText non è configurato per avviarsi automaticamente all'avvio di Windows, potete avviarlo manualmente manualmente usando una delle seguenti procedure.

▪ Per avviare ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Sul desktop di Windows, selezionate l'icona del programma **ZoomText {versione}**.
- Nel menu **Start** di Windows, scegliete **ZoomText {versione}**.
- Premete **Windows + R** per aprire la finestra di dialogo **Esegui**, digitate "ZT{versione}" e premete **Invio**.

Quando ZoomText si avvia, modifica il vostro schermo mostrando una vista ingrandita rispetto a quella normale. Mentre muovete il mouse, digitate il testo e vi spostate all'interno delle vostre applicazioni, la vista ingrandita scorrerà automaticamente, mantenendo l'area attiva in vista. Se avete installato ZoomText Ingranditore/Lettore, ZoomText leggerà anche ad alta voce qualsiasi elemento, azione ed evento nelle vostre applicazioni. Tutte le vostre applicazioni Windows funzioneranno normalmente mentre ZoomText è in esecuzione.

Nota: Una volta che ZoomText è in esecuzione, potete abilitare e disabilitare l'opzione **Avvia automaticamente ZoomText all'avvio di Windows** nella finestra di dialogo **Preferenze Programma**. Per saperne di più, consultate [Preferenze del Programma](#) al Capitolo 9—Impostazioni Preferenze.

Attivare e Disattivare ZoomText

Potete attivare e disattivare ZoomText in qualsiasi momento, senza uscire dal programma. Quando è disattivato, ZoomText riporterà lo schermo al suo stato normale (non ingrandito) e la sintesi vocale sarà sospesa.

▪ Per attivare e disattivare ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Premete il tasto rapido Attiva/Disattiva ZoomText: **Caps Lock + Ctrl + Invio**.
- Nel menu ZoomText, selezionate **Attiva ZoomText** o **Disattiva ZoomText**.

Suggerimento! Se disattivate e riattivate frequentemente ZoomText per visualizzare lo schermo non ingrandito, provate invece ad usare la funzione Zoom 1x. Per saperne di più, consultate [Usare Zoom 1x](#) in Capitolo 4—Funzioni di Ingrandimento.

Uso del tasto Caps Lock da parte di ZoomText

Il tasto Caps Lock è usato in molti dei comandi da tastiera di ZoomText. Questi comandi richiedono di tenere premuto il tasto Caps Lock mentre si premono uno o più tasti aggiuntivi. Questi comandi non alterano lo stato del blocco delle maiuscole e non interferiscono con la pressione e il rilascio del tasto Caps Lock (da solo) per attivare e disattivare il blocco delle maiuscole.

Lettura dello stato del Blocco Maiuscole

Per impostazione predefinita, ZoomText non annuncia quando lo stato del blocco maiuscole è attivato o disattivato. Tuttavia, potete attivare l'annuncio dello stato del blocco maiuscole come segue:

1. Nella scheda **Letto** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Tastiera** o spostatevi su **Tastiera** e premete la freccia giù.
2. Nel menù **Tastiera**, selezionate **Impostazioni**.
Apparirà la finestra di dialogo Riscontro, che mostrerà la scheda Tastiera.
3. Nella sezione **Pronuncia questi tasti quando vengono premuti**, mettete la spunta sulla casella **Tasti di Blocco**.
4. Fate clic su **OK**.

Uscire da ZoomText

Potete uscire da ZoomText in qualsiasi momento. Quando uscite da ZoomText, lo schermo ritornerà al suo stato normale (non ingrandito) e tutto l'output vocale verrà terminato.

▪ Per uscire da ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Nel menù **ZoomText**, selezionate **Esci da ZoomText**.
- Nella barra del titolo, fate clic sul box Close.




Supporto alla Schermata di Accesso a Windows e alla Modalità Sicura

La Modalità Sicura di ZoomText fornisce funzioni essenziali di ingrandimento e lettura dello schermo nella schermata di accesso a Windows e nelle schermate sicure. La barra degli strumenti della Modalità Sicura di ZoomText vi permette di ingrandire e rimpicciolire, invertire i colori dello schermo e abilitare la voce per annunciare ogni controllo e azione che eseguite nei prompt sicuri di Windows.

La Modalità sicura di ZoomText si abilita scegliendo **Avvia ZoomText nella Schermata di Accesso a Windows** nella finestra di dialogo Preferenze Programma di ZoomText. Consultate [Abilitare e Disabilitare ZoomText nella Schermata di Accesso a Windows](#) qui sotto.

La Barra degli Strumenti della Modalità Sicura di ZoomText

Quando il supporto alla schermata di accesso di ZoomText è abilitato, la barra degli strumenti della Modalità Sicura apparirà ogni volta che la schermata di accesso di Windows o un altro prompt sicuro diventano attivi. Questa barra fornisce controlli per regolare le impostazioni disponibili nella Modalità Sicura di ZoomText.

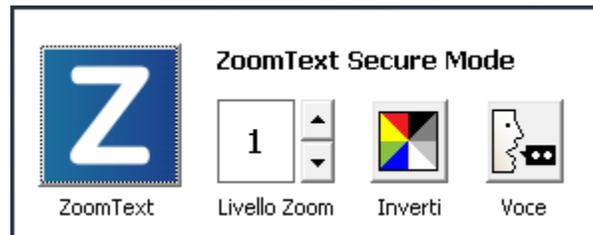

La Barra degli Strumenti della Modalità Sicura di ZoomText

- **Pulsante ZoomText.** Abilita o disabilita ZoomText. Quando è disabilitato, ZoomText riporterà lo schermo al suo stato normale (non ingrandito) e la sintesi vocale sarà sospesa; tuttavia, il programma rimarrà attivo.

Tasto rapido: **Caps Lock + Ctrl + Invio**

- **Livello di Ingrandimento** Imposta il livello di ingrandimento da 1x a 60x.

Tasto rapido: **Caps Lock + Su / Caps Lock + Giù**

- **Inverti.** Abilita o disabilita l'inversione dei colori.

Tasto rapido: **Caps Lock + C**

- **Voce.** Abilita o disabilita la voce di ZoomText.

Tasto rapido: **Caps Lock + Alt + Invio**

*Nota:*Le impostazioni della Modalità Sicura di ZoomText vengono automaticamente salvate e ripristinate ogni volta che si esce e si entra in un prompt sicuro di Windows.

Abilitare e disabilitare la Modalità Sicura di ZoomText

La Modalità Sicura di ZoomText viene abilitata o disabilitata nella finestra di dialogo Preferenze Programma di ZoomText.

▪ **Per abilitare o disabilitare la Modalità Sicura**


1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Programma**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Programma.

2. Selezionate o deselezionate **Avvia ZoomText nella Schermata di Accesso a Windows**

*Nota:*Dovete essere loggati con privilegi amministrativi per impostare questa opzione. Se non siete loggati con privilegi amministrativi questa opzione sarà oscurata.

3. Fate clic su **OK**.

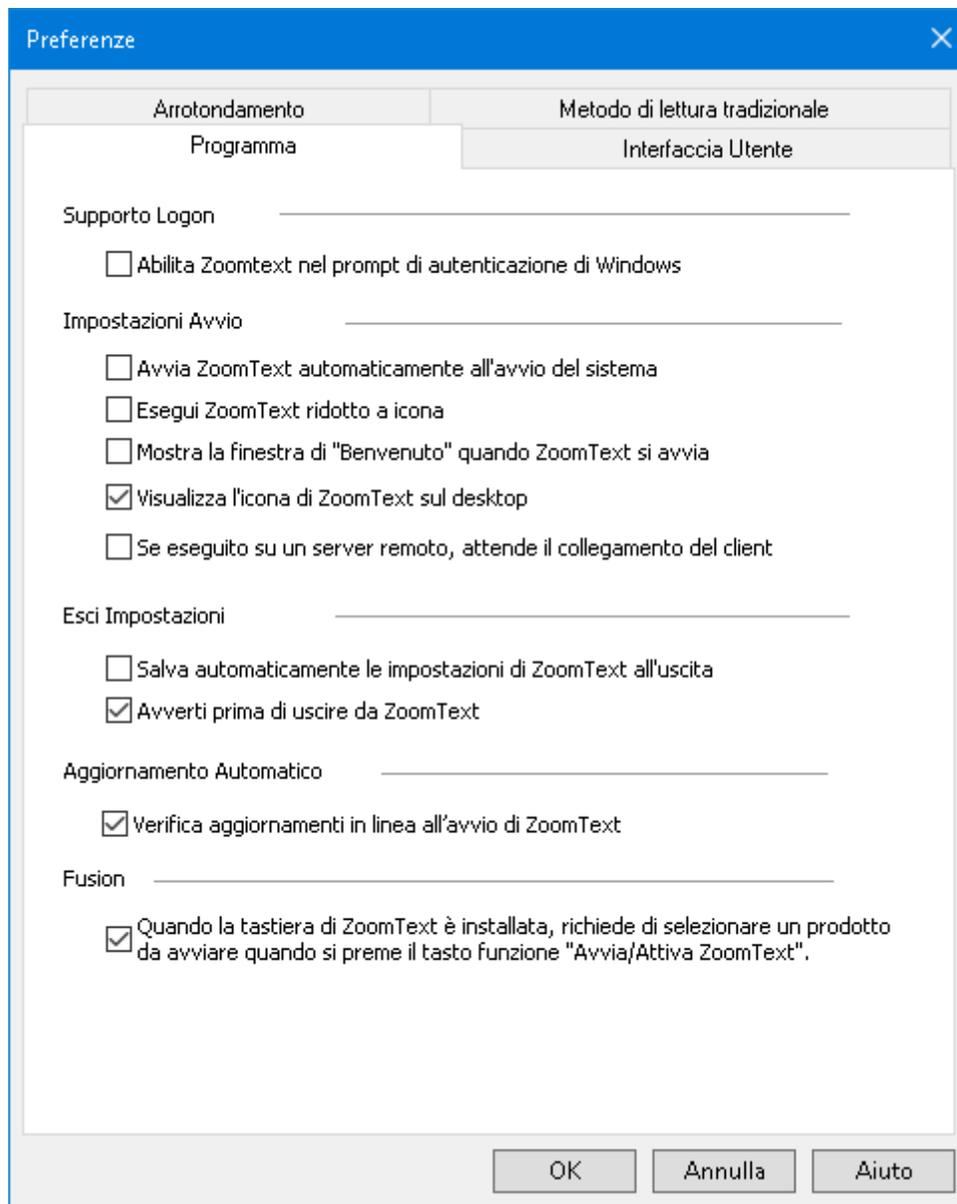

La scheda Programma

Impostazione	Descrizione
<i>Supporto Logon</i>	
Abilita ZoomText nella Schermata di Accesso a Windows	Abilita l'utilità ZoomText Secure Mode nella schermata di accesso a Windows e in altre schermate sicure di Windows.

Programma Early adopter

Nota: il programma Early adopter vi consente di provare in anteprima le funzionalità del prodotto ancora in fase di sviluppo. Man mano che introduciamo gradualmente nuove funzionalità, potete valutarle e fornire feedback che ci aiuteranno ad apportare miglioramenti prima del rilascio finale.

Usare il programma Early Adopter

- **Per attivare o disattivare le funzionalità del programma Early Adopter**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Programma Early adopter**.

Apparirà la finestra di dialogo Programma Early Adopter, che mostrerà le funzionalità disponibili da provare. La finestra di dialogo sarà vuota se non c'è alcuna funzionalità da provare.

2. Selezionate una o più caselle di controllo per attivare le funzionalità. Deselezionate una o più caselle di controllo per disattivare le funzionalità.

Nota: se state testando una versione modificata di una funzionalità già esistente, questa tornerà allo stato originale quando disattivate la casella di controllo.

3. Fate clic su **OK** e riavviate il programma. Le funzionalità che avete attivato saranno disponibili all'uso.

Inviare feedback

Durante la valutazione di una funzionalità, vi invitiamo a fornirci feedback sulla vostra esperienza. Il feedback può essere fornito indipendentemente dal fatto che la funzionalità in questione sia attiva o disattiva.

■ Per inviare feedback


1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Programma Early adopter**.

La finestra di dialogo Programma Early Adopter mostrerà le funzionalità disponibili su cui inviare feedback.

2. Selezionate il pulsante **Invia feedback** relativo alla funzione che state provando.

Apparirà il form di feedback del programma Early adopter.

3. Compilate il form di feedback, quindi fate clic su **Invia feedback**.

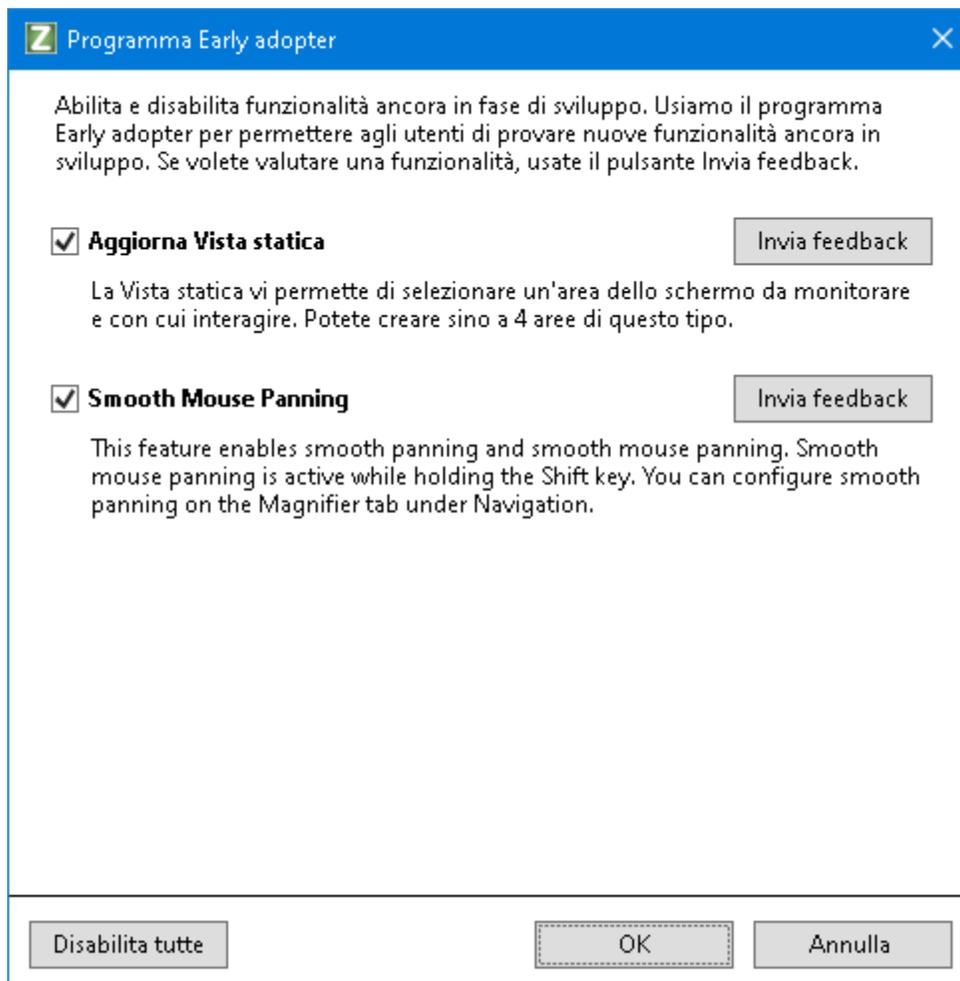

Un esempio della finestra di dialogo Programma Early Adopter

Impostazione	Descrizione
Funzionalità in sviluppo:	Visualizza il nome e la descrizione delle funzionalità disponibili in anteprima. Selezionate la casella di controllo per abilitare la funzionalità. Deselezionate la casella per disabilitare la funzionalità. Quando disattivate una funzionalità, questa tornerà al suo stato originale.
Invia feedback	Apre un form che vi consente di inviare feedback su una funzionalità.
Disabilita tutte	Disabilita tutte le funzionalità.

L'interfaccia utente di ZoomText

L'interfaccia utente di ZoomText fornisce vari modi per utilizzare ZoomText, tra cui la barra degli strumenti, i tasti di comando e i gesti touch.

Il modo principale per utilizzare ZoomText è la **Barra degli Strumenti**, che fornisce accesso a tutte le funzionalità e le impostazioni di ZoomText attraverso comandi, menu e finestre di dialogo di facile utilizzo. L'interfaccia di ZoomText è pienamente gestibile attraverso la tastiera, il mouse o i gesti su un touch screen.


Fareste bene a imparare ad usare almeno alcuni dei **Tasti di comando** di ZoomText, che vi permetteranno di impostare ed usare il programma senza dover attivare la barra degli strumenti, allontanandovi dall'applicazione che state usando. Non dovrete imparare tutti i tasti di comando, ma usare la tastiera per le funzioni che attivate più di frequente vi permetterà di lavorare molto più velocemente in tutte le vostre applicazioni.

Se state usando un computer desktop, un portatile o un tablet dotato di touch screen, potete usare il supporto touch screen di ZoomText per accedere alla barra degli strumenti di ZoomText, agli strumenti modali e alle impostazioni principali usando gesti a tocco standard.

- [La Barra degli Strumenti di ZoomText](#)
- [Barra di accesso rapido](#)
- [Oscuramento schermo \(solo Fusion\)](#)
- [Tasti di Comando](#)
- [Supporto Touch Screen](#)

La Barra degli Strumenti di ZoomText

Quando avviate ZoomText, la Barra degli Strumenti apparirà a schermo. La barra degli strumenti di ZoomText contiene tutti i controlli per interagire con il programma, ordinatamente organizzati rispettivamente nel menù ZoomText e nelle varie schede che compongono la barra stessa. Ogni scheda contiene pulsanti rapidi per attivare e impostare tutte le funzionalità principali di ZoomText. Molti di questi sono pulsanti multifunzione, che vi permettono sia di attivare la funzionalità sia di aprire un menù per modificare le sue impostazioni. I pulsanti sono raggruppati per categoria, e hanno icone e dispongono di comode etichette ed icone per una facile identificazione.

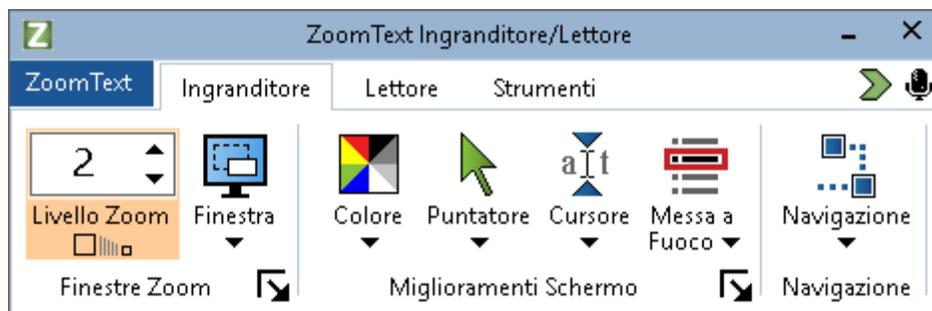

La Barra degli Strumenti di ZoomText

- **Menù di ZoomText.** Mostra il menu di ZoomText, da cui potete attivare e disattivare il programma, aprire la Guida, salvare e caricare le configurazioni, configurare i tasti di comando, usare gli strumenti di supporto e altro ancora.
- **Scheda Ingrandimento.** Mostra controlli della barra degli strumenti relativi alle funzioni di ingrandimento di ZoomText.
- **Scheda Lettore.** Mostra controlli della barra degli strumenti relativi alle funzioni di lettura dello schermo di ZoomText.
- **Scheda Strumenti** Mostra controlli della barra degli strumenti relativi alle funzioni Localizzatore, Telecamera e Ascolto.

Nota: La scheda Lettore apparirà solo se ZoomText è in esecuzione come ZoomText Ingranditore/Lettore.

Utilizzare la Barra degli Strumenti di ZoomText con la Tastiera

La barra degli strumenti di ZoomText è completamente accessibile da tastiera usando i comandi di navigazione standard di Windows. Per un uso ancora più facile, la barra degli strumenti può essere interamente controllata soltanto tramite le Freccie e il tasto Invio. Usando i tasti freccia, potete spostarvi nel menù di ZoomText, tra i controlli e le schede della barra degli strumenti e tra i menù a pulsante. Quando vi trovate su un pulsante multifunzione, premendo Invio attiverete o disattiverete la funzionalità, mentre premendo la Freccia Giù aprirete il relativo menù. Quando il focus è nella casella spin del livello di ingrandimento (nella scheda Ingranditore della barra degli strumenti) o nella casella spin Velocità (nella scheda Lettore della barra degli strumenti), premendo i tasti Su e Giù imposterete il valore, mentre premendo i tasti Destra e Sinistra sposterete il focus sul controllo successivo. Nella casella spin Livello di Ingrandimento, premendo il tasto Invio attiverete la funzionalità Ingrandimento a 1X.

Ridurre a Icona e Ripristinare la Barra degli Strumenti

La barra degli strumenti di ZoomText può essere ridotta a icona (nascosta) e ripristinata (resa visibile) senza influenzare il funzionamento di ZoomText.

▪ Per ridurre a icona ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Sulla barra del titolo di ZoomText, fate clic sul pulsante Riduci a icona.
- Mentre la barra degli strumenti di ZoomText è attiva, premete Esc.

▪ Per ripristinare ZoomText

Fate una delle azioni seguenti:

- Fate clic sul pulsante ZoomText nella barra delle applicazioni.
- Premete il tasto rapido Mostra Interfaccia Utente: **Caps Lock + Ctrl + U**.

Nota: Se la barra degli strumenti di ZoomText è aperta ma coperta da altre applicazioni, ripristinarla la porterà in primo piano.

Oscuramento schermo (solo Fusion)

La funzionalità Oscuramento schermo impedisce ad altri di vedere ciò che state facendo, oscurando lo schermo. Quando questa funzionalità viene attivata, apparirà il messaggio di stato "Oscuramento schermo di Fusion, clic destro per uscire"; inoltre, la sintesi vocale annuncerà "Oscuramento schermo attivo". L'oscuramento schermo rimarrà attivo fino a quando non viene disattivato o Fusion viene riavviato.

Nota: Oscuramento schermo è esclusivamente una funzionalità di privacy, e non aumenterà la durata della batteria in un portatile o tablet.

Attivare e disattivare l'Oscuramento schermo

Se l'Oscuramento è attivo e lo schermo del vostro computer è nero, **fate un clic destro** per disattivarlo.

Per attivare o disattivare l'Oscuramento schermo, fate una delle seguenti azioni:

- nel menù **Fusion**, selezionate **Oscuramento schermo**
- Premete **Insert + Spazio**, seguito da **F11**.
- Toccate tre volte con tre dita su un touch screen

Nota: se state usando uno strumento come il Lettore applicazione, la lettura verrà interrotta quando l'Oscuramento schermo viene attivato o disattivato. Per riprendere la lettura, dovete riavviare il Lettore applicazione.

Tasti Comando

I Tasti Comando di ZoomText consentono di regolare e utilizzare ZoomText senza dover attivare la barra degli strumenti e senza doversi spostare lontano da dove si sta attualmente lavorando. L'Utilizzo dei tasti di comando consente di lavorare più velocemente e in modo più produttivo in tutte le applicazioni.

- [Tipologie di Tasti Comando](#)
- [Tasti Comando Essenziali](#)
- [Finestra di dialogo tasti Comando](#)
- [Banner Tasti Stratificati](#)
- [Risoluzione dei conflitti tasti di scelta rapida](#)

Tipi di Tasti di Comando

ZoomText fornisce due tipi di tasti di comando, i Tasti di Scelta Rapida e i Tasti a Livelli.

- **I tasti di scelta rapida** sono il modo più veloce e raccomandato per utilizzare ZoomText, in quanto consentono di attivare i comandi con una singola azione da tastiera. I tasti di scelta rapida vengono eseguiti tenendo premuto uno o più tasti modificatori, per poi premere un tasto principale. Per esempio, per attivare e disattivare ZoomText, dovete tenere premuti i tasti Caps Lock e Ctrl per poi premere il tasto Invio. Questo comando apparirà come **Caps Lock + Ctrl + Invio** nell'interfaccia utente e nella documentazione di ZoomText. I tasti di scelta rapida per altre azioni di ZoomText appariranno in questo stesso formato.

Nota: Alcune applicazioni possono avere tasti di scelta rapida che usano la stessa combinazione di ZoomText. Quando questo accade, ZoomText elaborerà il tasto senza passarlo all'applicazione. Per aggirare il problema, consultate [Risolvere Conflitti di Tasti](#).

- **I Tasti a Livelli** non sono così veloci da eseguire come i tasti di scelta rapida, ma hanno il vantaggio di non entrare mai in conflitto con altre applicazioni e di essere più facili da eseguire se avete una mobilità delle mani limitata. I tasti a livelli vengono eseguiti premendo una sequenza di tasti che: (1) entra nella modalità tasti a livelli, (2) seleziona un gruppo di comandi e (3) attiva il comando desiderato. Per esempio, per attivare o disattivare ZoomText con i tasti a livelli, dovrete (1) premere Caps Lock + Spazio per entrare nella modalità tasti a livelli, (2) premere P per entrare nel gruppo Programma, e (3) premere Invio per attivare o disattivare ZoomText. Questo comando apparirà come **Caps Lock + Spazio, P, Invio** nell'interfaccia utente e nella documentazione di ZoomText. I tasti a livelli per altri comandi ZoomText appariranno in questo stesso formato.

Nota: Poiché l'uso dei tasti di scelta rapida è raccomandato rispetto all'uso dei tasti a livelli, nella documentazione di ZoomText i tasti a livelli appariranno solo negli argomenti relativi alle funzioni per cui non è disponibile un tasto di scelta rapida. Per vedere un elenco completo dei tasti a livelli disponibili, aprite la finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText o consultate l'argomento lista delle tabelle dei tasti di comando nella sezione [Comandi ZoomText](#).

Suggerimento! Per ogni comando di ZoomText, il tasto di scelta rapida e il tasto a livelli usano lo stesso tasto per completare il comando, il che rende intuitivo l'apprendimento di entrambi i comandi.

Suggerimento! Se state eseguendo ZoomText Ingranditore/Lettore, mentre siete in un qualsiasi livello della modalità tasti a livelli, potete digitare un punto di domanda per ascoltare un elenco di comandi disponibili nel livello corrente. Potete anche premere il tasto F1 per uscire dalla modalità a livelli e aprire la guida, in corrispondenza dell'elenco dei comandi per il livello corrente.

I Tasti Fondamentali di ZoomText

Per utilizzare ZoomText nelle vostre applicazioni, è fondamentale imparare ed utilizzare i tasti di scelta rapida principali. Questi tasti vi permetteranno di impostare e utilizzare le funzioni e le impostazioni più comunemente usate senza dover abbandonare la vostra applicazione.

Nota: I comandi specifici per ogni funzione e impostazione si trovano negli argomenti della documentazione di ZoomText. Troverete anche una lista completa dei tasti di scelta rapida nella sezione [Comandi di ZoomText](#) e nella finestra di dialogo [Tasti di comando](#).

Comandi Fondamentali	Tasti di scelta Rapida
<i>Comandi Globali di ZoomText</i>	
Avvia ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + Z
Abilita/Disabilita ZoomText	Caps Lock + Ctrl + Invio
Interfaccia Utente di ZoomText	Caps Lock + Ctrl + U
<i>Comandi di Ingrandimento</i>	
Aumenta Ingrandimento	Caps Lock + Freccia Su
Diminuisci Ingrandimento	Caps Lock + Freccia Giù
Torna a vista 1x (Attiva/Disattiva)	Caps Lock + Invio
Scorri in Alto	Caps Lock + Shift + Freccia Su
Scorri in Basso	Caps Lock + Shift + Freccia Giù

Comandi Fondamentali	Tasti di scelta Rapida
Scorri a Sinistra	Caps Lock + Shift + Freccia Sinistra
Scorri a Destra	Caps Lock + Shift + Freccia Destra
Miglioramento Colore	Caps Lock + C
<i>Comandi del Lettore (solo ZoomText Ingranditore/Lettore)</i>	
Voce Attiva / Disattiva	Caps Lock + Alt + Invio
Aumenta Velocità Voce	Caps Lock + Alt + Freccia Su
Diminuisci Velocità Voce	Caps Lock + Alt + Freccia Giù
Prolissità (Riscontro Programma)	Caps Lock + Alt + B
Modalità Riscontro Tastiera	Caps Lock + Alt + K
Avvia Lettore Applicazione dal Puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Avvia Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Avvia Vista Testo	Caps Lock + Alt + T
Avvia Strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S


La finestra di dialogo Tasti di Comando

La finestra di dialogo Tasti di Comando di ZoomText visualizza un elenco di tutti i comandi di ZoomText e vi permette di personalizzare il tasto di scelta rapida per ogni comando. Potete trovare rapidamente qualsiasi comando o gruppo di comandi digitando il nome, i tasti o lo stato nella casella di ricerca. Potete anche riassegnare, disassegnare e attivare/disattivare i tasti di scelta rapida secondo le vostre esigenze, come descritto qui sotto. Potete ordinare la lista in ordine alfabetico cliccando su qualsiasi colonna dell'elenco.

Nota: I tasti di accesso hanno assegnazioni fisse che non possono essere cambiate.

- **Per aprire la finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText**
 - Dalla barra degli strumenti di ZoomText, scegliete **Tasti di Comando ZoomText**.

Apparirà la finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText.

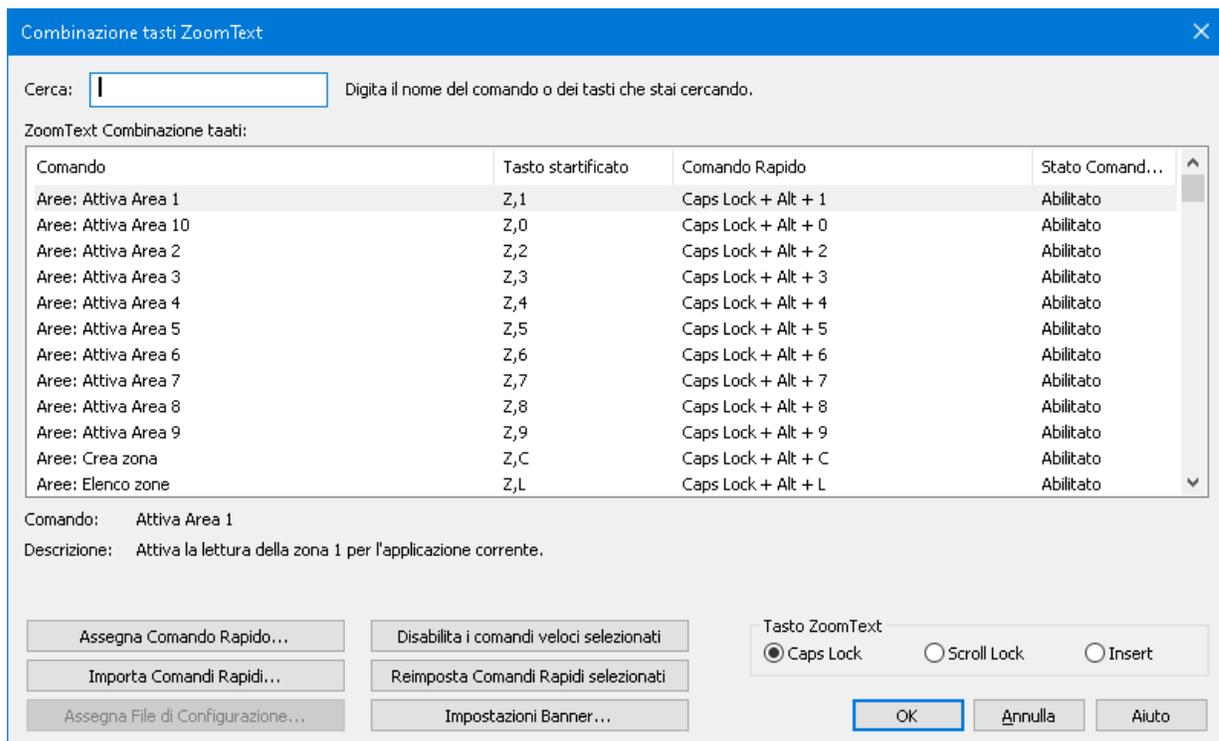

La finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText

Impostazione	Descrizione
Cerca	Permette di cercare e filtrare l'elenco dei comandi digitando il nome del comando, i tasti o lo stato che state cercando.
Tasti di Comando ZoomText	Mostra un elenco completo o filtrato dell'elenco comandi ZoomText. Potete ordinare l'elenco in ordine alfabetico per qualsiasi colonna cliccando sul titolo della colonna stessa.
Assegna Comando Rapido	Apre la finestra di dialogo Assegna Tasto, dove potete assegnare (o riassegnare) il tasto di scelta rapida per un comando.
Importa Comandi Rapidi	Apre la finestra di dialogo Importa Tasti, dove potete sfogliare e selezionare un file di configurazione di ZoomText da cui importare le assegnazioni dei tasti di scelta rapida.
Assegna File di Configurazione	<p>Apre la finestra di dialogo Assegna Configurazione, dove potete sfogliare e selezionare un file di configurazione ZoomText esistente da assegnare al comando Carica Configurazione selezionato.</p> <p><i>Nota:</i> Il pulsante Assegna File di Configurazione è abilitato solo quando è selezionato un comando Carica Configurazione.</p>
Abilita Tasti Selezionati	Abilita il tasto di scelta rapida per qualsiasi comando che è attualmente selezionato e disabilitato nell'elenco Tasti di Comando ZoomText.

Impostazione	Descrizione
Reimposta Comandi Rapidi selezionati	Ripristina il tasto di scelta rapida al valore predefinito per qualsiasi comando attualmente selezionato nell'elenco Tasti di Comando ZoomText.
Impostazioni Banner	Apre la finestra di dialogo Impostazioni Banner Tasti a Livelli, dove potete attivare e disattivare il banner e configurare l'aspetto e i suoni del Banner.
Tasto ZoomText	<p>Con la maggior parte dei comandi, ZoomText usa il tasto Caps Lock come tasto "modificatore". Caps Lock viene premuto in combinazione con altri tasti per impartire i comandi. ZoomText vi permette di scegliere quale tasto usare per questo modificatore, che viene anche chiamato tasto ZoomText. I tasti selezionabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caps Lock (predefinito) • Scroll Lock • Insert

Visualizzare e Gestire i Tasti di Comando

▪ Per cercare, filtrare e ordinare l'elenco dei comandi

1. Cliccate nella casella **Cerca** premete il tasto **Tab** per spostare il focus della tastiera sulla casella **Cerca**.
2. Digitate il nome, i tasti o lo stato del comando che state cercando e premete **Invio**.
3. Cliccate sui titoli delle colonne per riordinare l'elenco in base ad esse.

- **Per abilitare o disabilitare i tasti di scelta rapida per uno o più comandi**
 1. Selezionate i comandi che volete abilitare o disabilitare.
 2. Cliccate sui pulsanti **Attiva Tasti Selezionati** o **Disattiva Tasti Selezionati**.

- **Per ripristinare i tasti di scelta rapida per uno o più comandi (alle assegnazioni di fabbrica)**
 1. Selezionate i comandi che volete ripristinare.
 2. Fate clic su **Reimposta Comandi Rapidi selezionati**.

- **Per assegnare una nuova combinazione a un comando**
 1. Selezionate il comando a cui volete assegnare un tasto di scelta rapida nuovo o diverso.
 2. Selezionate il pulsante **Assegna Tasto di Scelta Rapida**

*Apparirà la finestra di dialogo **Assegna Tasto di Scelta Rapida**.*
 3. Selezionate i tasti modificatori che volete, nonché il tasto primario.

Se la combinazione di tasti selezionata è già utilizzata da un altro comando, apparirà un avviso "CONFLITTO DI TASTI!" con opzioni per disabilitare il tasto o salvare quello attuale per poi riassegnare quello in conflitto.
 4. Cliccate **OK**.

- **Per impostare i tasti di scelta rapida da un altro file di configurazione**
 1. Selezionate il pulsante **Importa Tasti di Scelta Rapida**.

*Apparirà la finestra di dialogo **Importa Tasti di Scelta Rapida**, che visualizza un elenco di file di configurazione dei tasti di scelta rapida di ZoomText.*

2. Selezionate un file di configurazione dall'elenco visualizzato o sfogliate un'altra cartella per selezionare il file di configurazione desiderato.
3. Cliccate **OK**.

▪ **Per assegnare un file di configurazione a un comando Carica Configurazione**

1. Selezionate il comando **ZoomText: Carica Configurazione** desiderato.
2. Selezionate il pulsante **Assegna File di Configurazione**.

Apparirà la finestra di dialogo Assegna File di Configurazione. Verrà visualizzata l'assegnazione relativa al comando Carica Configurazione corrente.

3. Selezionate il pulsante **Sfoglia e seleziona un file di configurazione**.

Apparirà la finestra di dialogo Seleziona Configurazione, che mostra un elenco di file di configurazione di ZoomText.

4. Selezionate un file di configurazione dall'elenco visualizzato o sfogliate un'altra cartella per selezionare il file di configurazione desiderato.
5. Cliccate **OK**.

Il Banner Tasti a Livelli

Quando entrate nella modalità Tasti a Livelli, un banner può essere visualizzato per avvisarvi che la modalità è attiva e in quale modalità a Livelli vi trovate. Potete personalizzare l'aspetto del banner nella finestra Impostazioni Banner Tasti a Livelli. Potete attivare e disattivare il banner oltre a selezionare la dimensione, il colore e la posizione in cui apparirà. Potete anche attivare dei suoni per indicare l'attivazione della modalità a Livelli. Potete attivare o disattivare i suoni, oltre a scegliere il tipo e il volume degli stessi.

- **Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Banner Tasti a Livelli**


1. Dalla barra degli strumenti di ZoomText, scegliete **Tasti di Comando ZoomText**.

Apparirà la finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText.

2. Selezionate il pulsante **Impostazioni Banner**.

Apparirà la finestra di dialogo impostazioni Banner Tasti a Livelli.

3. Regolate le impostazioni secondo le vostre esigenze.
4. Cliccate **OK**.

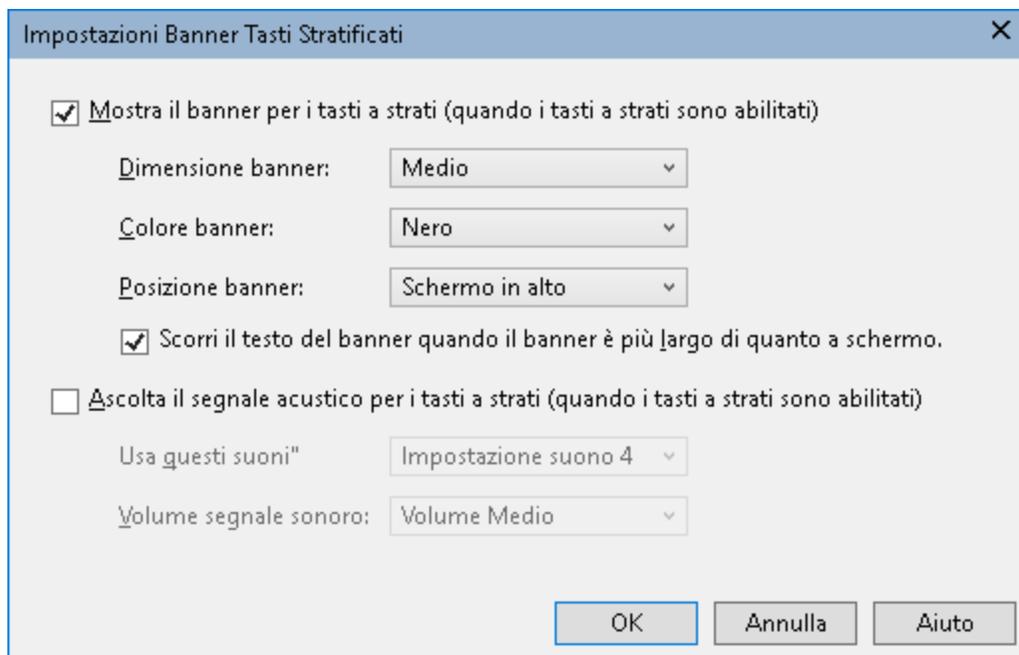

La finestra di dialogo impostazioni Banner Tasti a Livelli.

Impostazione	Descrizione
Mostra il banner per i tasti a livelli (quando i tasti a livelli sono attivi)	Visualizza un banner che mostra la modalità Tasti a Livelli corrente nella parte superiore o inferiore dello schermo quando la modalità Tasto Funzione è attiva. Il banner fornisce un'indicazione visiva che la modalità è attiva.
Dimensione Banner:	Imposta la dimensione del Banner Tasti a Livelli.
Colore Banner:	Seleziona il colore del Banner Tasti a Livelli.
Posizione Banner:	Seleziona la posizione del Banner Tasti a Livelli, che può essere posizionato sul bordo superiore o inferiore dello schermo.
Scorri il testo del Banner quando è più largo dello schermo	Quando il testo visualizzato nel Banner è più largo dello schermo, scorrerà da un lato all'altro in modo da poter essere letto per intero.

Impostazione	Descrizione
Riproduci il suono per i tasti a livelli (quando i tasti a livelli sono attivi)	Riproduce un suono quando i Tasti a Livelli sono attivi. Il segnale sonoro fornisce un'indicazione udibile che la modalità è attiva.
Usa questi suoni	Seleziona lo stile del segnale sonoro.
Volume suoni:	Seleziona il livello del volume per i segnali sonori.

Risolvere Conflitti di Tasti

Ci possono essere situazioni in cui un tasto di scelta rapida di ZoomText usa la stessa combinazione di tasti di un tasto in un'altra applicazione, creando quello che è conosciuto come un "conflitto di tasti". Quando questo accade, ZoomText riceve ed elabora il comando, ma l'altra applicazione no. Potete aggirare o risolvere questo problema nei seguenti modi:

Metodo 1: usare il comando Passa Tasto Successivo

- Prima di premere il comando in conflitto che volete inviare alla vostra applicazione, eseguite il comando Passa Tasto Successivo usando il tasto di scelta rapida o i tasti a Livelli:
- Tasto: **Ctrl + Alt + Shift + P**
- Tasti a Livelli: **Caps Lock + Spazio, U, P**

ZoomText passerà il prossimo tasto di scelta rapida all'applicazione attiva.

Metodo 2: Usare i Comandi a Livelli di ZoomText invece del tasto di scelta rapida

I tasti di ZoomText sono modali, quindi non entrano in conflitto con altre applicazioni.

Metodo 3: riassegnare o disattivare il tasto di scelta rapida in ZoomText

- Seguite le istruzioni nell'argomento [La Finestra di Dialogo Tasti di Comando](#).

Supporto Touch Screen

ZoomText può essere utilizzato su dispositivi touch screen Windows 10 e 8.1, compresi tablet, computer portatili e monitor desktop. Questo significa che potete controllare l'intero set di funzioni di ZoomText e delle vostre applicazioni usando gesti sul vostro touch screen, vale a dire tocchi e strisciate con uno o più dita. ZoomText non interferirà con i gesti indirizzati alle vostre applicazioni, ma risponderà agli eventi innescati dalle applicazioni allo stesso modo in cui risponderebbe agli eventi della tastiera o del mouse. Potete anche accedere all'interfaccia utente di ZoomText (barre degli strumenti, menu e finestre di dialogo) utilizzando gli stessi gesti standard a cui siete abituati da altre applicazioni.

Per imparare a usare Windows e le applicazioni attraverso i gesti touch, consultate il sistema di aiuto di Windows, o cercate sul sito web di Microsoft Windows gli articoli sull'uso dei dispositivi touch screen e dei gesti in Windows.

Nota: dovete avere un dispositivo Windows che supporta almeno 5 punti di tocco simultaneamente. Questi dispositivi hanno il logo "Designed for Windows".

- [Usare ZoomText su un TouchScreen](#)
- [Usare l'icona Touch di ZoomText](#)
- [Accedere alle funzioni di ZoomText tramite gesti a tocco](#)

Usare ZoomText su un TouchScreen

Ci sono alcuni concetti e tecniche importanti da tenere a mente quando si usa ZoomText su un display touch screen:

- Molte applicazioni prevedono lo zoom e lo scorrimento dei documenti che mostrano. Un programma di ingrandimento dello schermo aggiunge un secondo livello di zoom e scorrimento, che può diventare disorientante se sia l'applicazione che il programma di ingrandimento stanno zoomando allo stesso tempo. Per evitare questo tipo di disorientamento, è consigliabile usare un solo zoom alla volta.
- L'utilizzo di un dispositivo touch screen autonomo richiede l'uso di una tastiera su schermo. Quando usate ZoomText con la vista ingrandita, la tastiera a schermo non sarà completamente visibile, quindi dovrete far scorrere la vista ingrandita per accedere a tutti i tasti. Questo vi rallenterà nella digitazione, e quindi nella produttività. Pertanto, vi consigliamo di collegare una tastiera fisica quando dovete digitare grandi quantità di testo.

Accedere alle funzioni di ZoomText tramite gesti a tocco

In questa sezione imparerete come utilizzare l'icona touch e i gesti a tocco per utilizzare le funzioni principali di ZoomText. Ricordate che l'icona Touch deve essere in modalità ZoomText Touch quando eseguite questi gesti.

- **Per mostrare l'interfaccia utente di ZoomText**

Toccate due volte con quattro dita.

- **Per regolare il livello di ingrandimento**

Toccate due volte con tre dita e tenete premuto, quindi trascinate verso l'alto per aumentare l'ingrandimento e verso il basso per ridurlo.

- **Per far scorrere la vista ingrandita**

Trascinate tre dita per spostarvi sullo schermo.

- **Per regolare la dimensione e la posizione di una finestra ingrandita**

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, selezionate **Finestra > Zoom Finestra Zoom > Strumento di Regolazione**.

Apparirà lo strumento di regolazione, e sulla finestra saranno visibili le maniglie di ridimensionamento.

2. Per ridimensionare una finestra, tenete il dito su una maniglia di ridimensionamento e trascinatela fino a raggiungere la dimensione desiderata.
3. Per spostare una finestra, tenete un dito al suo interno e trascinatela fino alla posizione desiderata.
4. Per uscire dallo strumento di regolazione, toccate due volte con tre dita.

▪ **Per usare la Modalità Vista**

1. Toccate due volte con tre dita.

L'ingrandimento sarà temporaneamente disabilitato ed apparirà il localizzatore vista.

2. Per spostare la vista, tenete un dito al suo interno e trascinatela.
3. Per uscire dalla Modalità Vista ed essere spostati nella nuova posizione della finestra, toccate due volte con un dito.
4. Per uscire dalla Modalità Vista ed essere spostati nella posizione della finestra precedente, toccate due volte con un dito.

▪ **Per utilizzare lo strumento SpeakIt**

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate SpeakIt.

Apparirà lo strumento SpeakIt, e sulla finestra saranno visibili le maniglie di ridimensionamento.

2. Per leggere una singola parola, toccatela una volta.
3. Per leggere un blocco di parole, trascinate diagonalmente con un dito per evidenziare le parole che volete far leggere. Quando avrete completato il trascinamento, tutte le parole evidenziate verranno lette.
4. Per uscire dallo strumento SpeakIt, toccate due volte con tre dita.

▪ **Per usare il lettore Applicazione**

1. Aprite il documento, la pagina web o l'e-mail che volete leggere.
2. Avviate il Lettore Applicazione usando uno dei seguenti due metodi:
 - Per iniziare la lettura da una parola specifica: Toccate due volte con un dito la parola da cui volete iniziare a leggere.
 - Per iniziare la lettura dalla posizione del cursore di testo, toccate due volte con due dita.

Il Lettore Applicazione inizierà la lettura.

3. Per iniziare e interrompere la lettura o spostarvi/leggere per parola, righe, frasi o paragrafi, usate i gesti di lettura del Lettore Applicazione, elencati nella tabella di seguito.
4. Per leggere un blocco di parole, trascinate diagonalmente con un dito per evidenziare le parole che volete far leggere.

Quando avrete completato il trascinamento, tutte le parole evidenziate verranno lette.

5. Per uscire dal Lettore Applicazione, toccate due volte con tre dita.

quando uscite dal lettore applicazione, il cursore si posizionerà automaticamente sull'ultima parola che è stata evidenziata nel lettore applicazione, se un cursore esiste.

Gesti di Lettura del Lettore Applicazione

Comando	Gesto
Avvia / Interrompi la Lettura	Tocco singolo a due dita
Leggi dalla nuova posizione	Tocco singolo con un dito.
Leggi Parola Successiva	Scorrimento verso destra con un dito
Leggi Parola Precedente	Scorrimento verso sinistra con un dito
Leggi Parola Corrente	Doppio tocco con un dito <i>Nota:</i> se ripetete questo gesto più volte sulla stessa parola in un intervallo di 2 secondi o inferiore, passerete tra: Leggi/Fai lo spelling/Fai lo spelling fonetico. Questo comportamento verrà resettato dopo che saranno passati 2 secondi.

Comando	Gesto
Leggi Parola Sotto	Scorrimento verso il basso con un dito
Leggi Parola Sopra	Scorrimento verso l'alto con un dito
Leggi Frase Successiva	Scorrimento verso destra con due dita
Leggi Frase Precedente	Scorrimento verso sinistra con due dita
Leggi Paragrafo Successivo	Scorrimento verso il basso con due dita
Leggi Paragrafo Precedente	Scorrimento verso l'alto con due dita
Fine del documento	Scorrimento verso il basso a quattro dita
Inizio del documento	Scorrimento verso l'alto a quattro dita


Funzioni di ingrandimento

Le "funzioni di ingrandimento" rappresentano tutti i miglioramenti visivi disponibili in ZoomText Ingranditore e ZoomText Ingranditore/Lettore. Queste funzioni includono la selezione del livello di ingrandimento, i tipi di finestre ingrandite, i miglioramenti dello schermo e le opzioni di navigazione.

- [La Scheda Ingrandimento della barra degli strumenti](#)
- [Aumentare e Ridurre l'Ingrandimento](#)
- [Usare la funzionalità Ingrandimento 1x](#)
- [Scorrere la Vista Ingrandita](#)
- [Finestre Ingrandite](#)
- [Miglioramenti Schermo](#)
- [Vista testo in tempo reale](#)
- [Impostazioni di Navigazione](#)

La Scheda Ingrandimento della Barra degli Strumenti

La scheda Ingrandimento della Barra degli Strumenti fornisce pulsanti di azione rapida per attivare e impostare tutte le funzionalità di ingrandimento di ZoomText. Molti di questi sono pulsanti multifunzione, che vi permettono sia di attivare la funzionalità sia di aprire un menù per modificare le sue impostazioni. I pulsanti sono raggruppati per categoria, e dispongono di comode etichette ed icone per una facile identificazione.

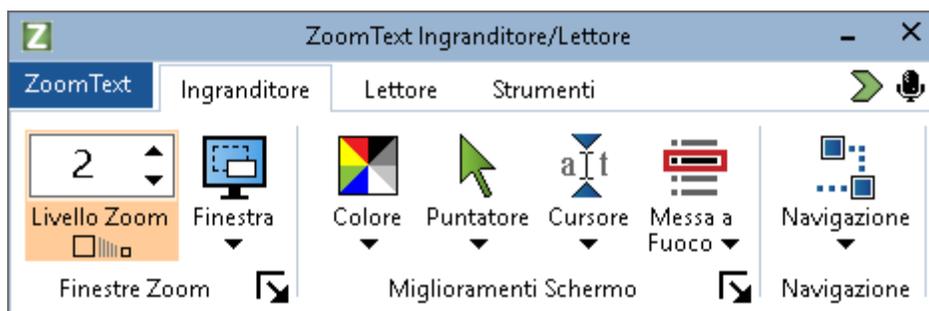

La Scheda Ingrandimento della Barra degli Strumenti

- **Livello di Ingrandimento** Imposta il livello di ingrandimento da 1x a 60x.
- **Finestra.** Seleziona il tipo di finestra per la vista ingrandita. I tipi di finestre ingrandite che sono disponibili dipendono dal fatto che stiate eseguendo il sistema con un solo monitor o con più monitor, impostati su "Estendi questi display".
- **Colore.** Attiva e disattiva i miglioramenti del colore e visualizza un menu di impostazioni di miglioramento del colore. I miglioramenti del colore migliorano la nitidezza dello schermo, rendendo più facile la visione e riducendo l'affaticamento degli occhi. Potete scegliere tra schemi di colore preimpostati o creare le vostre impostazioni di colore personalizzate.

- **Puntatore.** Attiva e disattiva i miglioramenti del puntatore e permette di impostare le opzioni di miglioramento del puntatore. I miglioramenti del puntatore rendono facile localizzare e seguire il puntatore del mouse. Potete scegliere tra vari schemi preimpostati per il puntatore o creare le vostre impostazioni del puntatore personalizzate.
- **Cursore.** Attiva e disattiva i miglioramenti del cursore e seleziona le impostazioni di miglioramento del cursore. I miglioramenti del cursore rendono più facile localizzare e seguire il cursore di testo. Potete scegliere tra vari schemi preimpostati per il cursore o creare le vostre impostazioni del cursore personalizzate.
- **Focus.** Attiva e disattiva i miglioramenti del focus e seleziona le impostazioni di miglioramento del focus. I miglioramenti del focus rendono facile localizzare e seguire la focalizzazione dei controlli quando premete Tab e le frecce nei menu, nelle finestre di dialogo, nelle barre degli strumenti e in altri controlli delle applicazioni. Potete scegliere tra vari schemi preimpostati per il focus o creare le vostre impostazioni del focus personalizzate.
- **Navigazione.** Visualizza un menu da cui potete aprire la finestra di dialogo Impostazioni di Navigazione, dove potete impostare come ZoomText farà scorrere la finestra ingrandita per mantenere gli oggetti in movimento in vista, ad esempio il puntatore del mouse, il cursore di testo, il focus della tastiera e altri oggetti che si muovono per lo schermo.

Aumentare e Ridurre l'Ingrandimento

ZoomText fornisce una vasta gamma di livelli di ingrandimento, che vi permettono di regolare la vista ingrandita in base alle vostre esigenze. I livelli di ingrandimento includono:

- Da 8x in incrementi di 1
- Da 10x a 16x in incrementi di 2
- Da 20x a 36x in incrementi di 4
- Da 42x a 60x in incrementi di 6
- Livelli frazionari di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x.

Potete aumentare e ridurre l'ingrandimento in qualsiasi momento usando i tasti rapidi Aumenta Ingrandimento e Riduci Ingrandimento, la rotellina del mouse o la casella spin Livello di ingrandimento sulla scheda Ingrandimento della barra degli strumenti.

Nota: Quando usate più monitor con il tipo di finestra ingrandita impostato su MultiVista Locale o MultiVista Globale, ogni vista (su ogni display) avrà il proprio livello di ingrandimento distinto. I comandi per regolare l'ingrandimento avranno sempre effetto sulla vista selezionata. Potete forzare le viste inattive ad usare lo stesso ingrandimento di quella attiva impostando l'opzione **Mantieni le Viste allo stesso Livello di Ingrandimento** nella finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli.

▪ Per aumentare o ridurre l'ingrandimento usando i tasti rapidi

- Premete i tasti rapidi Aumenta Ingrandimento e Riduci Ingrandimento:
 - Per aumentare l'ingrandimento, premete **Caps Lock + Freccia Su**.
 - Per ridurre l'ingrandimento, premete **Caps Lock + Freccia Giù**.

▪ Per regolare l'ingrandimento usando la rotellina del mouse


- Tenete premuti **Caps Lock + Shift** e fate scorrere la rotellina del mouse per regolare l'ingrandimento.
- **Per regolare l'ingrandimento usando la casella spin Livello di Ingrandimento**
 - Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, regolate il livello nella casella spin **Livello di ingrandimento** cliccando i pulsanti su e giù o premendo le frecce Su e Giù (quando la casella spin è focalizzata).

Selezionare un set di livelli di ingrandimento

ZoomText fornisce 3 set di livelli di ingrandimento. Potete aumentare e diminuire l'ingrandimento usando Tutti i livelli di ingrandimento, Solo i livelli preferiti o Solo i livelli interi.

- **Tutti i livelli di ingrandimento** utilizza l'insieme completo dei livelli di ingrandimento per ingrandire e ridurre. Questa è la modalità predefinita.
 - **Livelli di ingrandimento preferiti** utilizza un set personalizzato di livelli di ingrandimento per ingrandire e ridurre. Potete scegliere qualunque combinazione di livelli di ingrandimento per definire i vostri preferiti.
 - **Livelli interi** esclude tutti i livelli frazionari quando si modifica il livello di ingrandimento.
- **Per scegliere un set di livelli di ingrandimento e personalizzare i livelli preferiti**
 1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Finestre Ingrandite**, che appare nell'angolo in basso a destra del gruppo **Finestre Ingrandite**.
 - Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Finestre Ingrandite.*
 2. Selezionate la scheda **Ingrandimento**.

3. Nella casella combinata **Utilizza questi livelli di zoom**, selezionate il set di livelli di ingrandimento che volete usare.
4. Se avete selezionato **Solo Livelli di Ingrandimento Preferiti**, andate alla casella elenco **Livelli di Ingrandimento Preferiti**, quindi selezionate i livelli di ingrandimento che volete usare e deselezionate quelli che non volete usare.
5. Fate clic su **OK**.

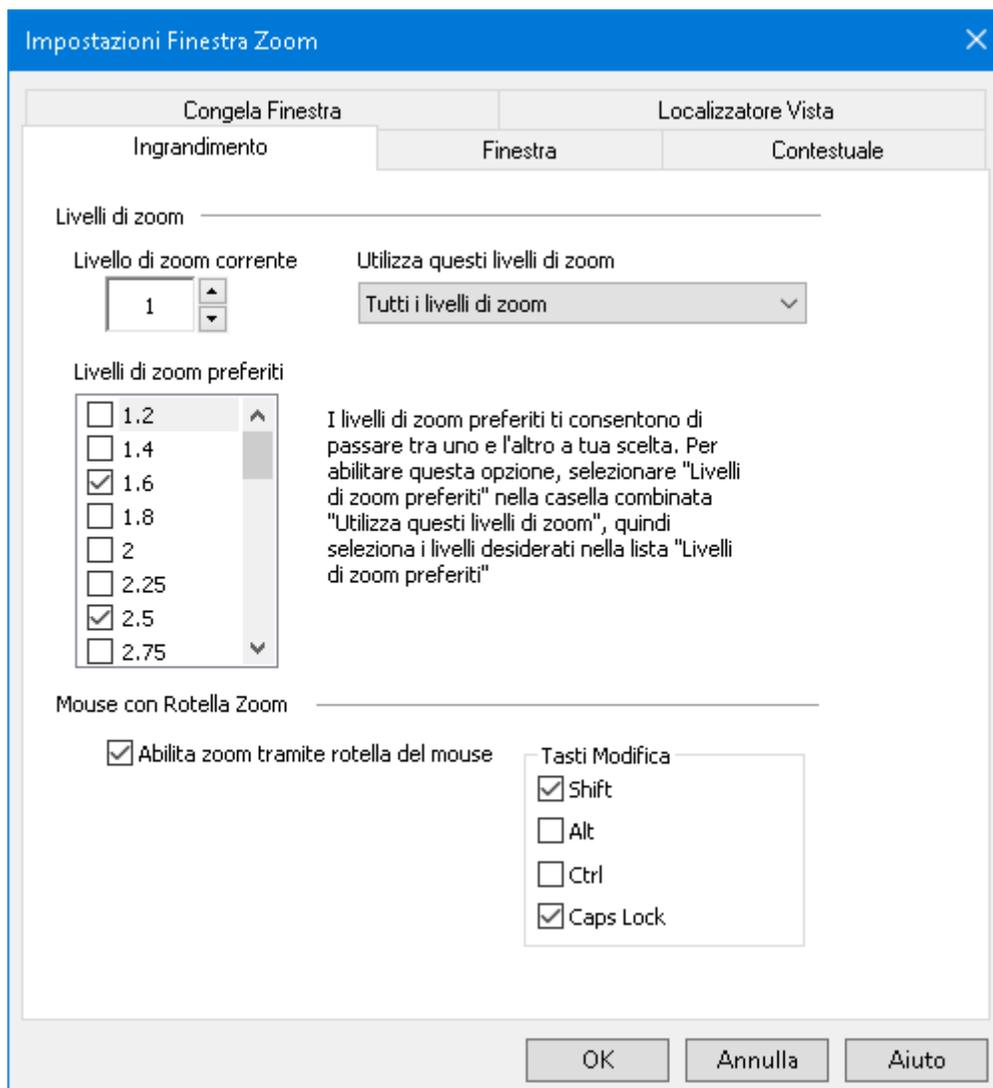

La scheda Ingrandimento

Impostazione	Descrizione
<i>Livelli di Ingrandimento</i>	
Livello di Ingrandimento Corrente	Imposta il livello di ingrandimento. I livelli includono: da 1x a 8x in incrementi di 1, da 10x a 16x in incrementi di 2, da 20x a 36x in incrementi di 4, da 42x a 60x in incrementi di 6, nonché i livelli frazionarie di 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x.
Utilizza questi livelli di ingrandimento	Seleziona l'insieme dei livelli di ingrandimento che ZoomText utilizzerà per aumentare o ridurre lo zoom.
Livelli di ingrandimento preferiti	Un elenco di caselle di controllo per selezionare i livelli di ingrandimento preferiti. Per poter effettuare queste selezioni, dovete scegliere Solo Livelli di Ingrandimento Preferiti nella casella combinata Usa questi livelli di ingrandimento .

Personalizzare lo Zoom con Rotellina del Mouse


Molte applicazioni usano la rotellina del mouse per scorrere i documenti ed eseguire altre azioni. ZoomText combina i tasti modificatori con la rotellina del mouse per evitare di interferire con queste applicazioni. Per default, lo zoom con rotellina di ZoomText usa Caps Lock e Shift come tasti modificatori. Se necessario, potete cambiare i tasti modificatori o disabilitare del tutto lo zoom con rotellina.

▪ Per configurare lo zoom con rotellina

1. Nella scheda Ingrandimento della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Finestre Ingrandite**, che appare nell'angolo in basso a destra del gruppo **Finestre Ingrandite**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Finestre Ingrandite.

2. Selezionate la scheda **Ingrandimento**.
3. Assicuratevi che sia selezionata la casella elenco **Abilita zoom con rotellina**.
4. Selezionate il tasto (o i tasti modificatori) che devono essere premuti per usare la rotellina per lo zoom.
5. Fate clic su **OK**.

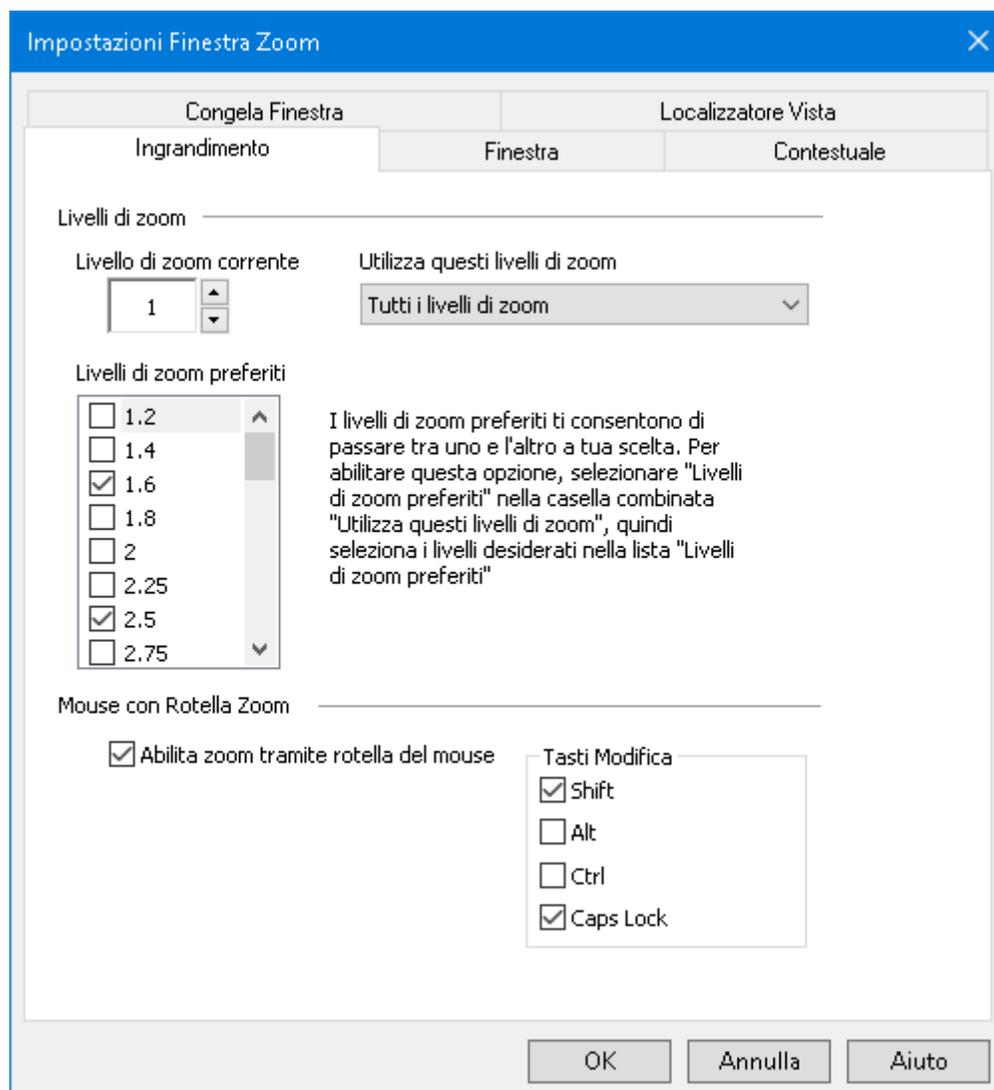

La scheda Ingrandimento

Impostazione	Descrizione
<i>Zoom tramite Rotellina del mouse</i>	
Abilita zoom con rotellina	Abilita l'uso della rotellina del mouse per regolare il livello di ingrandimento.
Tasti Modificatori	Seleziona la combinazione di tasti da usare per lo zoom con rotellina. Dovrete tenere premuti questi tasti mentre girate la rotellina del mouse.

Usare la funzionalità Ingrandimento 1x

La funzione Ingrandimento 1x vi permette di passare istantaneamente dalla vista ingrandita a quella standard (1x), senza dover ridurre l'ingrandimento in modo progressivo, un livello alla volta. Quando passate a 1x, tutte le altre funzioni di ingrandimento e di lettura di ZoomText rimarranno attive, in modo da poter utilizzare le altre funzioni di ZoomText anche quando lo schermo non è ingrandito.

▪ Per usare Ingrandimento 1x

Fate una delle azioni seguenti:

- Premete il tasto rapido Ingrandimento 1x: **Caps Lock + Invio**.
- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, cliccate sul pulsante Ingrandimento 1x sotto la casella spin **Livello di ingrandimento**, o spostatevi alla casella spin Livello di ingrandimento e premete **Invio**.

Ogni pressione del tasto rapido alternerà l'ingrandimento tra il livello attuale e 1x.



Il pulsante Ingrandimento 1x

Nota: quando usate l'ingrandimento 1x, potete sempre usare i comandi e i controlli di ZoomText per aumentare l'ingrandimento in modo progressivo.

Scorrere la Vista Ingrandita

Le viste ingrandite di ZoomText scorrono automaticamente per seguire il movimento del mouse, il cursore di testo e il focus dell'applicazione. Potete anche usare i comandi di scorrimento per scorrere in qualsiasi direzione e in qualsiasi area dello schermo. La fluidità dei comandi di scorrimento è particolarmente utile quando vi serve scorrere e leggere allo stesso tempo. I comandi di scorrimento permettono anche di saltare istantaneamente a qualsiasi bordo, saltare al centro dello schermo e salvare e ripristinare una vista di qualsiasi punto dello schermo.

▪ Per scorrere la finestra ingrandita

Mentre tenete premuti i tasti **Caps Lock + Shift**:

1. Premete la freccia corrispondente alla direzione di scorrimento desiderata: **Sinistra, Destra. Suo Giù**.
2. Per aumentare la velocità dello scorrimento, premete di nuovo la stessa freccia. Ogni pressione farà aumentare la velocità.
3. Per diminuire la velocità dello scorrimento, premete la freccia opposta. Ogni pressione diminuirà la velocità fino all'arresto dello scorrimento.
4. Per scorrere in un'altra direzione, premete la freccia corrispondente alla nuova direzione.
5. Per interrompere la modalità di scorrimento, premete **Invio** o rilasciate i tasti **Caps Lock e Shift**.

▪ Per saltare a un bordo o al centro dello schermo

Tenendo premuti i tasti **Caps Lock + Ctrl**:

- Premete la freccia corrispondente al bordo desiderato: **Sinistra, Destra. Suo Giù**.
- Premete **Home** per saltare al centro dello schermo.

▪ **Per salvare e ripristinare una vista specifica dello schermo**

La vista corrente può essere salvata e poi ripristinata in un secondo momento usando i seguenti tasti rapidi:

- Per salvare la vista, premete **Caps Lock + Ctrl + Pagina Giù**
- Per ripristinare la vista, premete **Caps Lock + Ctrl + Pagina Su**

Finestre Ingrandite

Una finestra ingrandita mostra una vista ingrandita dello schermo del computer. Potete pensare a una finestra ingrandita come ad una lente di ingrandimento che viene tenuta di fronte allo schermo. Una finestra ingrandita può mostrare solo una parte dello schermo alla volta, ma facendo scorrere la vista ingrandita potrete visualizzare tutto lo schermo. La vista ingrandita segue automaticamente tutte le vostre attività, incluso il movimento del puntatore del mouse, del cursore di testo e del focus della tastiera, scorrendo automaticamente in modo appropriato.

- [Usare Uno o Più Monitor](#)
- [Selezionare una Finestra Ingrandita](#)
- [Regolare le finestre ingrandite](#)
- [Vista contestuale](#)
- [Vista statica](#)
- [Modalità Panoramica](#)
- [Gestire Monitor Multipli](#)

Usare Uno o Più Monitor

Quando il vostro sistema funziona con un solo monitor, o con due monitor impostati su "Duplica questi schermi", potete impostare la vista ingrandita su uno dei seguenti tipi di finestre ingrandite: Piena, Sovrapposta, Lente, Linea nonché su quattro posizioni ancorate: Alto, Basso, Sinistra e Destra.

Quando il sistema funziona con più monitor impostati su "Estendi questi schermi", potete impostare la vista ingrandita su uno dei seguenti tipi: Estesa, Clonata, Zoom 1x, MultiVista Locale e MultiVista Globale.

Selezionare finestre ingrandite

Potete cambiare tipo di finestra ingrandita in qualsiasi momento mentre ZoomText è in esecuzione. I tipi di finestre ingrandite disponibili dipendono dal fatto che il tuo sistema sia configurato con un solo monitor o con più monitor configurati con desktop estesi.

Nota: questa sezione fornisce descrizioni e spiegazioni sull'uso delle finestre ingrandite disponibili con monitor multipli. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del supporto per monitor multipli di ZoomText, compreso l'hardware supportato, le configurazioni consigliate e la risoluzione dei problemi, consultate [Gestire monitor multipli](#).

▪ Per selezionare una finestra ingrandita

1. Nella scheda **Ingranditore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Finestra**.
2. Selezionate **Un monitor** o **Monitor multipli**, a seconda della vostra configurazione attuale.
3. Selezionate il tipo di finestra ingrandita desiderato.

La vista ingrandita sui vostri monitor cambierà in base al tipo di finestra ingrandita selezionato.


Suggerimento! Potete anche passare tra i vari tipi di finestra ingrandita premendo il tasto rapido Tipo di Finestra Ingrandita: **Caps Lock + Z**.

Potete anche scegliere un tipo di finestra ingrandita nella finestra di dialogo Finestre Ingrandite, facendo quanto segue:


1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate **Finestra > Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Finestre Ingrandite, che mostrerà la scheda Finestra.

2. Selezionate il tipo di finestra ingrandita desiderato.
3. Fate clic su **OK**.

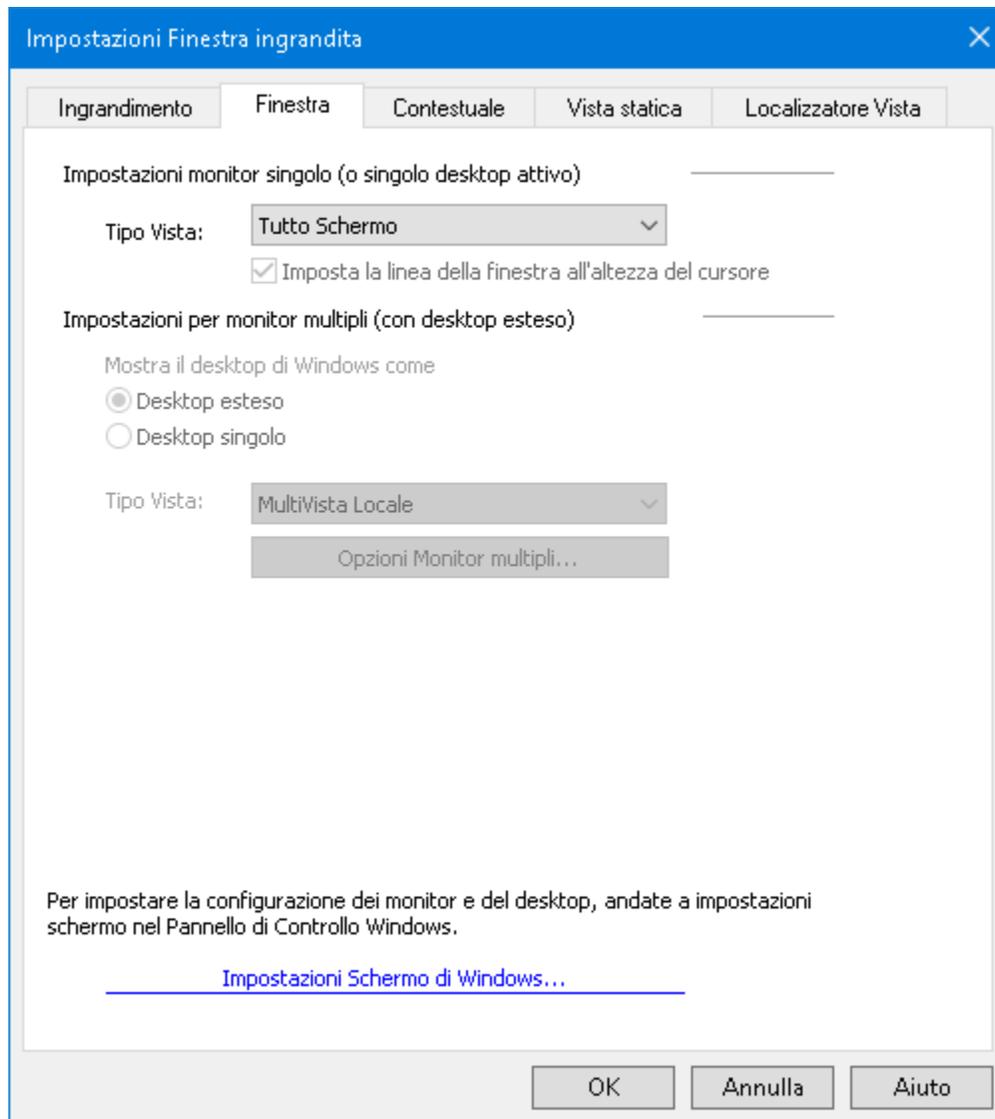

La scheda Finestra (quando si usa un solo monitor)

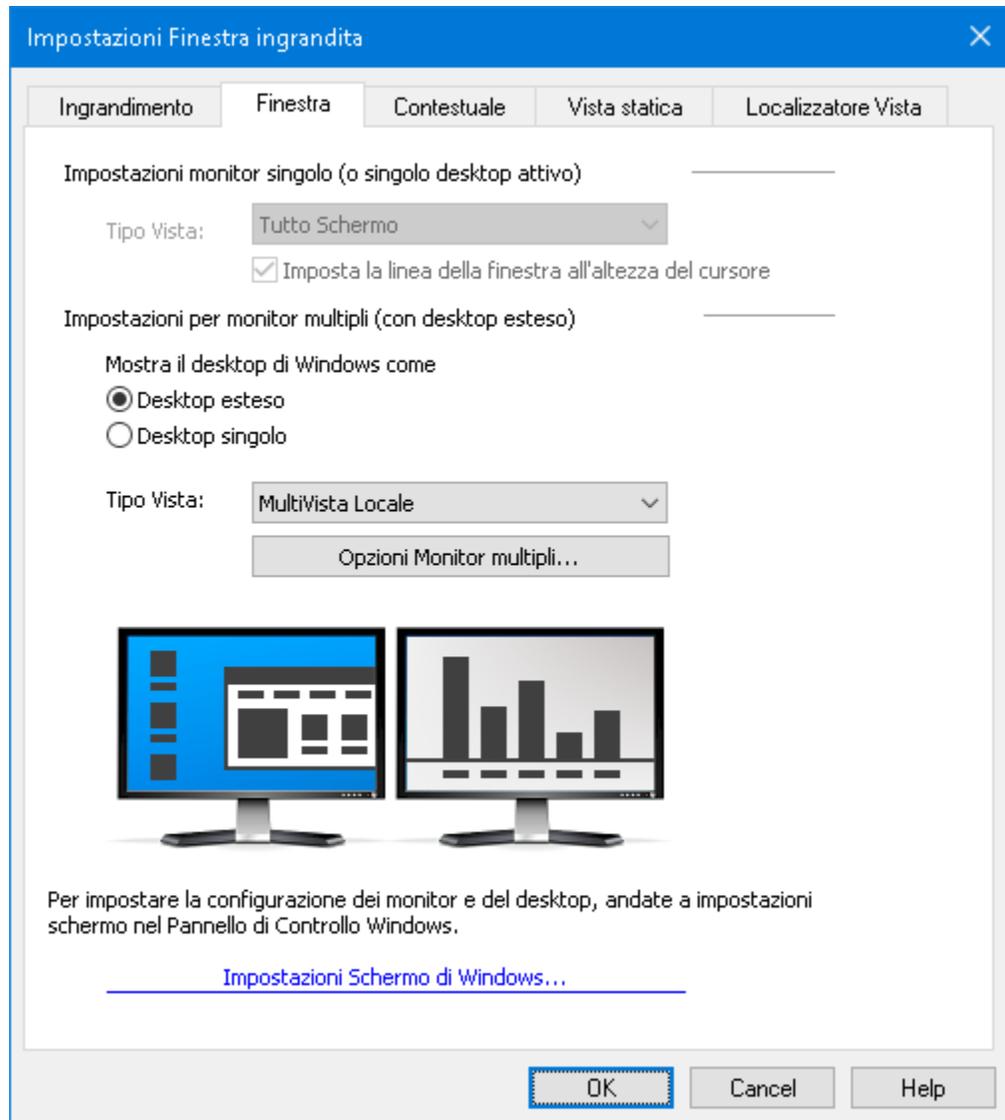

La scheda Finestra (quando si usano più monitor)

Impostazione	Descrizione
<i>Impostazioni monitor singolo (o singolo desktop attivo)</i>	
Tipo Finestra	<p>Seleziona il tipo di finestra ingrandita quando si usa un solo monitor o un singolo display duplicato su più monitor.</p> <p>Piena. Mostra una finestra ingrandita che occupa l'intero schermo.</p> <p>Sovrapposta. Visualizza una finestra di zoom che appare sopra lo schermo normale, e può</p>

Impostazione	Descrizione
	<p>essere ridimensionata e spostata in modo da occupare qualsiasi area.</p> <p>Lente Visualizza una finestra ingrandita che si sposta sullo schermo normale come una lente d'ingrandimento, visualizzando ciò che si trova direttamente sotto di essa. La lente segue automaticamente mentre spostate il puntatore del mouse, digitate testo e navigate tra i programmi.</p> <p>Linea. Visualizza una finestra ingrandita che si sposta su e giù per lo schermo come un righello di ingrandimento, visualizzando ciò che si trova direttamente sotto di esso. La linea segue automaticamente mentre spostate il puntatore del mouse, digitate testo e navigate tra i programmi.</p> <p>Ancorata. Divide lo schermo a metà, mostrando una vista "ancorata" ingrandita da un lato e una vista normale (non ingrandita) dall'altro. La vista ingrandita può essere ancorata a qualsiasi bordo dello schermo: superiore, inferiore, sinistro o destro.</p> <p>Per informazioni sulla regolazione delle finestre ingrandite, vedere Regolazione di una finestra ingrandita.</p>
<p>Imposta l'altezza della finestra all'altezza del cursore</p>	<p>Man mano che il cursore di testo si sposta sul testo più grande o più piccolo, l'altezza della finestra Linea aumenta o diminuisce, in modo che venga visualizzata solo la riga di testo corrente.</p>
<p><i>Impostazioni per monitor multipli (con desktop esteso)</i></p>	

Impostazione	Descrizione
<p>Mostra il desktop di Windows come</p>	<p>Seleziona la modalità Desktop di Windows quando si utilizzano più monitor, configurati come display estesi.</p> <p>Desktop esteso. Questa modalità consente di espandere il desktop di Windows su più schermi. Questo offre uno spazio di lavoro più ampio, in modo da poter organizzare icone e applicazioni su diversi display. Questo è utile quando si lavora con più applicazioni contemporaneamente.</p> <p>Desktop singolo. Questa modalità consolida il desktop di Windows sul display principale ingrandito, fornendo al contempo una vista non ingrandita sul display secondario. Tutte le icone del desktop e gli elementi della barra delle applicazioni verranno spostati sul display principale. Questa configurazione è utile quando preferite lavorare su un display ingrandito, utilizzando l'altro per una vista normale (a volo d'uccello) del desktop di Windows.</p> <p><i>Nota:</i> in modalità Desktop singolo, quando tornate alla modalità Desktop esteso, gli elementi delle icone che si trovavano sul display secondario non torneranno automaticamente su di esso. Dovrete spostarli manualmente sull'altro schermo.</p>
<p>Tipo finestra</p>	<p>Seleziona il tipo di finestra ingrandita quando si utilizzano più monitor configurati come display estesi.</p> <p>Span Visualizza una singola vista ingrandita contigua che si estende su tutti i monitor. La</p>

Impostazione	Descrizione
	<p>vista ingrandita traccia e scorre per seguire l'attività sull'intera area estesa.</p> <p><i>La vista Span è progettata per gli utenti che desiderano unire due monitor per creare una vista ingrandita più ampia.</i></p> <p>Clonata. Visualizza la stessa vista ingrandita su due o più schermi. La vista ingrandita traccia e scorre per seguire l'attività sull'intera area estesa. Nota: la vista Clonata è disponibile solo quando i display sono impostati sulla stessa risoluzione e sullo stesso orientamento; Verticale o Orizzontale.</p> <p><i>La vista Clonata è progettata per quelle situazioni in cui due o più utenti devono vedere la stessa vista ingrandita su monitor separati.</i></p> <p>Zoom 1x Visualizza una vista ingrandita sul display principale e una vista non ingrandita (1x) sul display secondario. Entrambe le viste (ingrandita e 1x) tracciano e scorrono per seguire l'attività sull'intero display esteso.</p> <p>Nota: Quando si utilizzano più monitor configurati come display estesi, Windows designa uno dei dispositivi di visualizzazione come "display principale", ovvero quello in cui vengono visualizzate le icone del desktop, la barra delle applicazioni con il menu di Windows e il widget per passare da un'app all'altra. Potete selezionare qual è il vostro display principale nella finestra di dialogo Risoluzione dello schermo, a cui è possibile accedere facendo clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi area vuota del desktop e</p>

Impostazione	Descrizione
	<p>quindi facendo clic su Risoluzione dello schermo .</p> <p><i>La vista Zoom 1x è progettata per gli utenti che desiderano vedere contemporaneamente una vista ingrandita e una vista normale (a volo d'uccello) del proprio spazio di lavoro. Questa vista ideale anche per quelle situazioni in cui un utente ipovedente e un utente normovedente lavorano insieme sullo stesso sistema. L'utente ipovedente vedrà la vista ingrandita, mentre quello normovedente vedrà la vista a dimensione normale.</i></p> <p>MultiVista Locale Visualizza viste ingrandite separate dei desktop su ciascun monitor. In altre parole, il monitor 1 visualizzerà soltanto il desktop 1, mentre il monitor 2 visualizzerà soltanto il desktop 2.</p> <p>Quando si usa MultiVista Locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarà attiva e scorrerà soltanto una vista ingrandita alla volta. • Quando il puntatore del mouse o il focus dell'applicazione si spostano da un desktop all'altro, la vista attiva cambia automaticamente. Potete cambiare vista attiva in qualsiasi momento premendo il tasto rapido Vista attiva: Caps Lock + V. Quando tenete premuto il tasto rapido Vista Attiva, le viste ingrandite saranno bloccate nella loro posizione. In questo stato bloccato, potete muovere il puntatore del mouse, e qualsiasi oggetto che state trascinando con il mouse dalla vista ingrandita su un monitor potrà essere

Impostazione	Descrizione
	<p>spostato nella vista ingrandita dell'altro monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per default, ogni vista ha il suo livello di ingrandimento, che può essere regolato solo quando la vista è attiva. I tasti di Aumento e Riduzione Ingrandimento, lo zoom con rotellina e i controlli di regolazione per potenza riguardano sempre la vista attiva. Potete forzare le viste inattive ad usare lo stesso ingrandimento di quella attiva impostando l'opzione Mantieni le Viste allo stesso Livello di Ingrandimento nella finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli. <p><i>La MultiVista Locale è progettata per gli utenti che vogliono viste ingrandite separate di ogni desktop, con ogni vista vincolata in modo da non scorrere mai al di fuori del proprio desktop.</i></p> <p>MultiVista Globale. Visualizza viste ingrandite separate su ogni monitor, con la vista di ogni monitor in grado di scorrere e monitorare l'attività su tutte le aree del desktop. In altre parole, la vista ingrandita di ogni monitor può mostrare il proprio desktop oltre a quello dell'altro monitor.</p> <p>Quando si usa MultiVista Globale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soltanto una vista ingrandita sarà attiva e in movimento alla volta, e quella vista attiva scorrerà da un desktop all'altro per seguire il puntatore del mouse e il focus dell'applicazione. Per cambiare la vista

Impostazione	Descrizione
	<p>attiva, premete il tasto rapido Vista Attiva: Caps Lock + V. Quando tenete premuto il tasto rapido Vista Attiva, le viste ingrandite saranno bloccate nella loro posizione. In questo stato bloccato, potete muovere il puntatore del mouse, e qualsiasi oggetto che state trascinando con il mouse dalla vista ingrandita su un monitor potrà essere spostato nella vista ingrandita dell'altro monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per default, ogni vista ha il suo livello di ingrandimento, che può essere regolato solo quando la vista è attiva. I tasti di Aumento e Riduzione Ingrandimento, lo zoom con rotellina e i controlli di regolazione per potenza riguardano sempre la vista attiva. Potete forzare le viste inattive ad usare lo stesso ingrandimento di quella attiva impostando l'opzione Mantieni le Viste allo stesso Livello di Ingrandimento nella finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli. <p><i>MultiVista Globale è progettata per gli utenti che vogliono visualizzare due posizioni all'interno della stessa finestra in un'applicazione o nello stesso desktop.</i></p>
Opzioni Monitor Multipli	<p>Apri la finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli, dove potete selezionare e configurare le opzioni per le viste di ZoomText supportate dai monitor multipli.</p>

Impostazione	Descrizione
Impostazioni Schermo di Windows	Apre il Pannello di controllo di Windows alle Impostazioni dello schermo, dove puoi impostare la configurazione dei vostri monitor.

Regolare le Finestre Ingrandite

ZoomText fornisce una scelta di tipi di finestre ingrandite, che occupano lo schermo intero o soltanto una sua parte. I tipi di finestra ingrandita che occupano solo una parte dello schermo includono: lente, sovrapposta, linea e ancorata. Quando usate una finestra ingrandita non a tutto schermo, potete decidere di ridimensionarla o spostarla in una nuova posizione.

▪ Per spostare o ridimensionare una finestra ingrandita

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Finestra** o spostatevi a **Finestra** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Finestra**, selezionate **Strumento di Regolazione Finestra Ingrandita**.

Apparirà lo strumento di regolazione, e sulla finestra saranno visibili le maniglie di ridimensionamento.

3. Per ridimensionare la finestra, trascinate una delle maniglie.
4. Per spostare la finestra, cliccate dentro di essa.
5. Per far scorrere il contenuto della finestra, tenete premuto **Ctrl**, poi trascinate al suo interno.
6. Per uscire dallo strumento di regolazione, fate clic destro o premete **Esc**.

Nota: potete anche attivare lo Strumento di Regolazione Finestra Ingrandita premendo il relativo tasto rapido: **Caps Lock + A**.

Vista contestuale

Quando si utilizzano livelli di ingrandimento elevati, spesso a schermo si verificano eventi al di fuori dell'area attualmente ingrandita.

Prendendo come esempio la ricerca nel menù Start di Windows, la vista ingrandita mostra il testo che avete inserito nella casella di ricerca, ma non vi permette di mettere a fuoco i risultati di ricerca. Per visualizzarli, dovrete far scorrere la schermata, operazione che può richiedere tempo e risultare scomoda.

In questi casi, la Vista contestuale può venirvi in aiuto. Questa funzione fa apparire una finestra all'interno della vista ingrandita, la quale visualizza l'output, il risultato o la selezione a fianco dell'azione che state compiendo. Nell'esempio della ricerca nel menù Start, la vista contestuale visualizzerà il primo risultato a fianco della casella di ricerca. Quando scorrete con le frecce, la Vista contestuale vi mostrerà gli altri risultati di ricerca.

La Vista contestuale è disponibile in ZoomText e Fusion. Supporta i seguenti scenari d'uso, ma ne saranno disponibili altri con i prossimi aggiornamenti: ricerca del menu Start di Windows, barra della formula di Excel, riquadro Commenti di Word ed Elenco dei link in una pagina Web (solo Fusion). Tutti questi scenari sono abilitati di default.

Consultate [Scenari della Vista contestuale](#) per maggiori informazioni.

Nota: la Vista contestuale può essere usata con i seguenti tipi di finestra ingrandita: **Tutto schermo**, **Ancorata**, **Clonata**, **Multi vista locale**, **Aperta** e **Zoom 1x**.

- **Per attivare o disattivare la Vista contestuale**


1. Nella scheda **Ingranditore** della barra degli strumenti di ZoomText o fusion, selezionate il pulsante **Finestra**.
2. Scegliete **Vista contestuale**.
3. Selezionate **Attiva** o **Disattiva**.

▪ **Per cambiare le impostazioni della Vista contestuale**

1. Nella scheda **Ingranditore** della barra degli strumenti di ZoomText o fusion, selezionate il pulsante **Finestra**.
2. Scegliete **Vista contestuale**.
3. Selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni finestra ingrandita, con evidenziata la scheda Vista contestuale.

4. Modificate le impostazioni della Vista contestuale come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

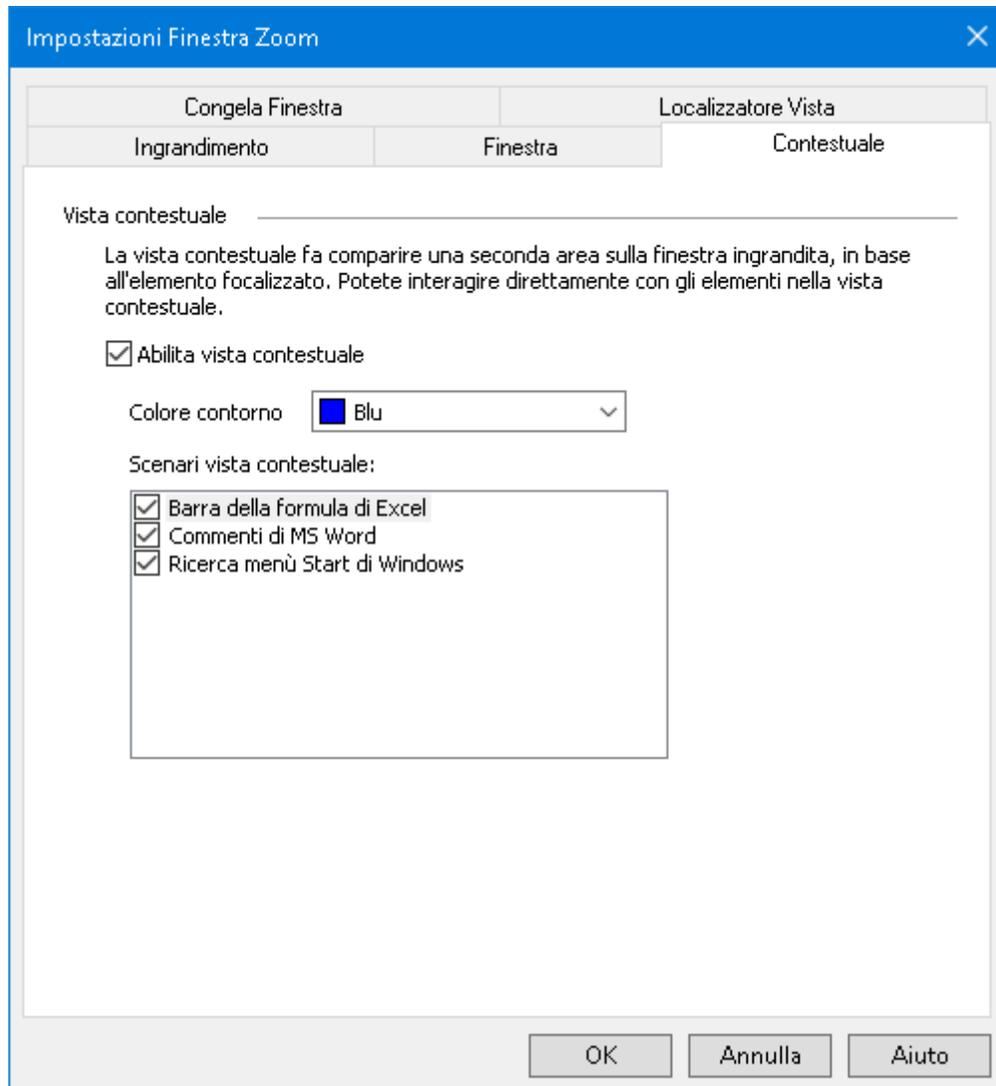

La scheda Vista contestuale

Scenari Vista contestuale

Gli scenari della Vista contestuale sono azioni preimpostate che potete compiere con ZoomText o Fusion. Potete abilitare o disabilitare gli scenari tramite le Impostazioni della Vista contestuale.

Al momento, la Vista contestuale supporta i seguenti scenari: ricerca del menu Start di Windows, barra della formula di Excel, riquadro

Commenti di Word ed Elenco dei link in una pagina Web (solo Fusion). Per tutte queste circostanze, la Vista contestuale è abilitata di default.

▪ **Per abilitare o disabilitare gli scenari**

1. Nella scheda **Ingranditore** della barra degli strumenti di ZoomText o fusion, selezionate il pulsante **Finestra**.
2. Scegliete **Vista contestuale**.
3. Selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni finestra ingrandita, con evidenziata la scheda Vista contestuale.

4. Nell'elenco degli Scenari, selezionate e deselezionate gli elementi di vostro interesse.
5. Fate clic su **OK**.

Di seguito sono riportati esempi di come usare la Vista contestuale.

Ricerca nel menù Start di Windows

Quando usate la casella di ricerca nel menù Start di Windows, noterete che non vi è possibile vedere il primo risultato di ricerca nella vista ingrandita. Con la Vista contestuale attiva, il miglior risultato apparirà accanto alla casella di ricerca. Potete fare clic sul risultato, oppure scorrere l'elenco utilizzando le frecce.

I seguenti comandi della Vista contestuale sono disponibili nel menù Start di Windows:

- Per espandere o comprimere la Vista contestuale, usate **Caps Lock + T**.

- Per visualizzare il primo risultato dell'elenco, usate **Caps Lock + Shift + T**.

Barra della formula di Excel

La Vista contestuale è disponibile quando lavorate con le formule in Microsoft Excel. Excel mostra la formula di una cella nella barra della formula, visualizzata nella parte superiore del foglio di calcolo, Molto distante dalla posizione effettiva della cella. La Vista contestuale porta la formula accanto alla cella focalizzata. Se volete passare al campo formula, potete fare clic su di esso o utilizzare il tasto **Caps Lock + Shift + T**.

Altre volte, potreste voler leggere il foglio di calcolo senza la formula visualizzata. In questi casi, potete disattivare la Vista contestuale con **Caps Lock + T**. In Excel, la Vista contestuale è compresa di default.

I seguenti comandi della Vista contestuale sono disponibili in Excel:

- Per espandere o comprimere la Vista contestuale, usate **Caps Lock + T**.
- Per visualizzare la barra della formula, usate **Caps Lock + Shift + T**.

Commenti in Microsoft Word

Se distribuite un documento di Word per la revisione, è possibile che altri utenti aggiungano commenti al documento. Il riquadro o l'elenco Commenti è posizionato all'estrema destra dello schermo. Nella Vista contestuale, ogni commento viene posizionato accanto al testo a cui fa riferimento. Questo elimina la necessità di scorrere fino al commento, leggerlo, quindi tornare al punto del testo in cui si stava leggendo.

I seguenti comandi della Vista contestuale sono disponibili in Word:

- Per espandere o comprimere la Vista contestuale, usate **Caps Lock + T**.

- Per visualizzare il commento, usate **Caps Lock + Shift + T**.
- Per tornare al testo sul punto di inserimento, usate **Esc**.

Elenco link (solo Fusion)

Mentre leggete una pagina web con Fusion, potete premere **Insert + F7** per avere un elenco di link presenti sulla pagina. Con la Vista contestuale attiva, mentre scorrete l'elenco, l'URL di ogni link apparirà accanto ad esso. Potete fare clic o premere **Invio** per selezionare il link.

I seguenti comandi della Vista contestuale sono disponibili nell'elenco link di Fusion:

- Per espandere o comprimere la Vista contestuale, usate **Caps Lock + T**.
- Per mostrare l'URL del link, usate **Caps Lock + Shift + T**.
- Per aprire l'elenco dei link, usate **Insert + F7**.

Impostazione	Descrizione
<i>Impostazioni Vista contestuale</i>	
Abilita Vista contestuale	Abilita o disabilita la funzione Vista contestuale
Colore contorno	Imposta il colore per il contorno della finestra Vista contestuale
Scenari Vista contestuale	Abilita o disabilita le azioni per la Vista contestuale

Usare la modalità Panoramica ed il Localizzatore Vista

La modalità panoramica mostra l'area dello schermo che viene attualmente ingrandita e permette di selezionare una nuova area da ingrandire. Quando la modalità Panoramica è attivata, l'ingrandimento viene disattivato e il Localizzatore Vista appare nella schermata normale. Spostando il puntatore del mouse, il Localizzatore Vista si sposta sulla parte di schermo non ingrandita, permettendovi di selezionare un'area dello schermo da ingrandire.

▪ Per usare la Modalità Panoramica

1. Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, selezionate **Finestra > Modalità Panoramica**.
- Premete il tasto rapido Attiva/Disattiva Modalità Panoramica: **Caps Lock + O**.

L'ingrandimento sarà temporaneamente disabilitato ed apparirà il localizzatore vista.

2. Spostate il Localizzatore Vista sulla posizione a schermo desiderata.

3. Fate clic per applicare l'ingrandimento alla nuova posizione.

L'ingrandimento riprenderà sull'area dello schermo selezionata.


Potete configurare il Localizzatore Vista affinché appaia in varie forme e colori. Il Localizzatore Vista può anche essere configurato per apparire sulle parti dello schermo non ingrandite, quando si usano i tipi di finestra ingrandita Sovrapposta o Ancorata.

▪ Per configurare il Localizzatore Vista

1. Nel menù **Ingrandimento**, fate clic sul pulsante **Finestre**, quindi scegliete **Localizzatore Vista**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Finestra Ingrandita, che mostrerà la scheda la scheda localizzatore Vista.

2. Regolate le impostazioni del Localizzatore come desiderate.
3. Fate clic su **OK** per rendere effettive le modifiche.

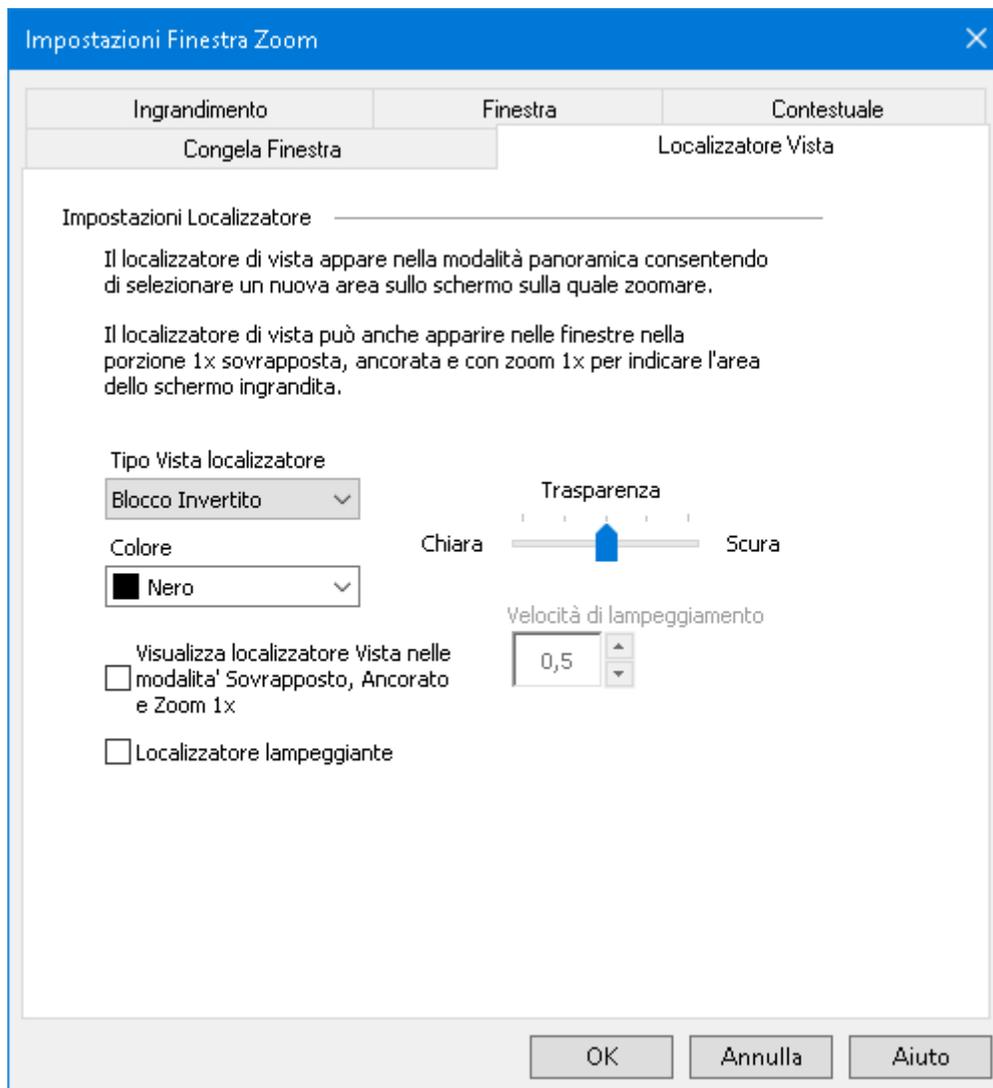

La scheda Localizzatore Vista

Impostazione	Descrizione
<i>Impostazioni Localizzatore Vista</i>	
Localizzatore Vista	Seleziona il tipo di Localizzatore Vista che viene visualizzato: Blocco, Blocco Invertito, Cornice o Croce.
Colore	Seleziona il colore in cui apparirà il Localizzatore Vista.
Trasparenza	Imposta il livello di trasparenza per il Localizzatore Vista. Il livello di trasparenza controlla la quantità dell'immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore Vista.
Visualizza localizzatore Vista nelle modalita' Sovrapposto, Ancorato e Zoom 1x	Abilita la visualizzazione del Localizzatore Vista nella parte di schermo a 1x quando vengono usate le finestre ingrandite Sovrapposta, Ancorata o 1x.
Localizzatore Vista Lampeggiante	Attiva o disattiva il lampeggiamento del Localizzatore Vista.
Velocità di lampeggiamento	Imposta la velocità di lampeggiamento per il Localizzatore Vista in secondi (da 0,5 a 5, in incrementi di 0,5).

Gestire Monitor Multipli

Nella sezione "Finestre Zoom", avete appreso quali sono i tipi di finestre zoom disponibili e come selezionare una finestra .

Questa sezione fornisce informazioni su come configurare le opzioni dei monitor multipli di ZoomText, come impostare al meglio un sistema con più monitor per lavorare con ZoomText, e come risolvere i problemi relativi al supporto ai monitor multipli di ZoomText.

Al momento, il supporto ai monitor multipli di ZoomText funziona con due schermi estesi. Il supporto per tre o più schermi estesi verrà aggiunto in una prossima release.

Nota: Per informazioni su come impostare il sistema con schermi multipli, cercate sul sito web di Microsoft le istruzioni relative alla vostra versione di Microsoft Windows.

- [Opzioni Monitor multipli](#)
- [Hardware supportato](#)
- [Configurazioni raccomandate](#)
- [Configurare i Monitor](#)
- [Regolazioni automatiche](#)
- [Comportamento delle funzioni di ZoomText](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)

Opzioni Monitor multipli

Le opzioni per i Monitor Multipli forniscono una serie di impostazioni per personalizzare il comportamento di delle finestre zoom quando vengono usati più monitor. Questi comportamenti includono il modo in cui il puntatore del mouse si sposta tra i desktop e i monitor, nonché il modo in cui vengono applicati e regolati l'ingrandimento e i miglioramenti dello schermo per ogni monitor.

Nota: Per le descrizioni dei tipi di finestre zoom disponibili nel supporto per monitor multipli, consultate [Selezione delle finestre zoom](#).

▪ Per configurare le opzioni dei monitor multipli


1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Finestra** o spostatevi a **Finestra** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Finestra**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Finestra Zoom.

3. Selezionate la scheda **Finestra**.
4. Selezionate **Opzioni Monitor Multipli...**

Apparirà la finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli.

5. Regolate le impostazioni dei monitor multipli come desiderate.
6. Fate clic su **OK**.

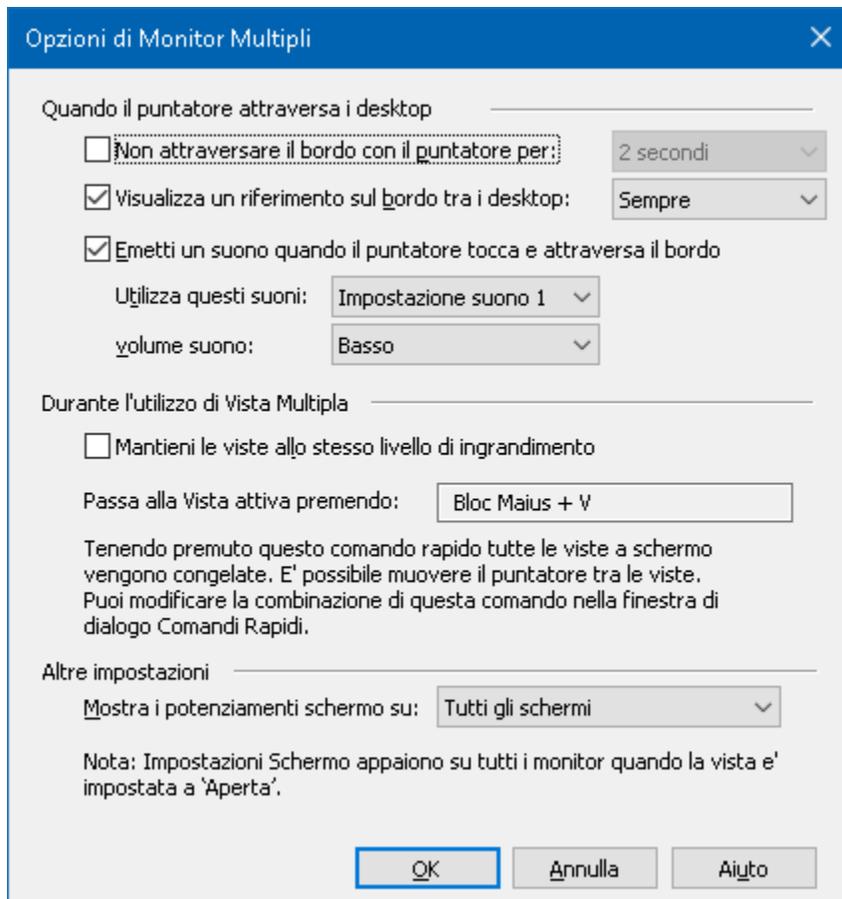

La finestra di dialogo Opzioni Monitor Multipli

Impostazione	Descrizione
<i>Quando il puntatore attraversa i desktop</i>	
Non attraversare il bordo con il puntatore per:	Impedisce al puntatore del mouse di passare da un desktop all'altro finché il puntatore non preme contro il bordo per la quantità di tempo selezionata nella casella combinata adiacente. Nota: quando questa opzione è attivata, potete far attraversare il puntatore immediatamente toccando il bordo due volte (rapidamente).
Mostra un marcatore di bordo tra i desktop	Visualizza un marcatore di bordo sul confine tra i desktop, secondoa seconda dello stile selezionato nella casella combinata adiacente.

Impostazione	Descrizione
	Il marcatore di bordo vi aiuta ad orientarvi nei display estesi.
Emetti un suono quando il puntatore tocca e attraversa il bordo	Riproduce dei suoni per avvisarvi quando il puntatore del mouse tocca il confine tra i desktop e quando passa da un desktop all'altro.
Usa questi suoni:	Seleziona i suoni da riprodurre quando il puntatore tocca e attraversa il desktop. Ci sono quattro set di suoni tra cui scegliere.
Volume suoni:	Imposta il volume per gli avvisi sonori.
<i>Durante MultiVista</i>	
Mantieni le viste allo stesso livello di ingrandimento	Quando si usano le finestre zoom MultiVista Locale o MultiVista Globale; questa impostazione forza le viste attive e inattive ad usare lo stesso livello di ingrandimento su tutti i monitor. Quando regolate il livello di ingrandimento nella vista attiva, anche le altre viste verranno automaticamente regolate di conseguenza.
Cambia la vista attiva premendo:	Mostra il tasto rapido assegnato al cambio della vista attiva quando si usano le finestre zoom MultiVista Globale o MultiVista Locale.
<i>Altre impostazioni</i>	
Mostra i miglioramenti schermo su:	Imposta su quali monitor si applicheranno i miglioramenti dello schermo.

Hardware per monitor multipli supportato

Il supporto per monitor multipli di ZoomText funzionerà con la maggior parte delle tecnologie di visualizzazione progettate per il sistema operativo Windows. Queste tecnologie supportate includono schede video, monitor, proiettori nonché connessioni per schermi, tra cui VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Nella maggior parte dei casi, se il vostro sistema sta già funzionando con display multipli impostati su: "Estendi questi Display", il supporto per monitor multipli di ZoomText funzionerà anche su quel sistema. Se si verifica un problema con il supporto per monitor multipli di ZoomText, consultate "Risoluzione dei problemi con i monitor multipli" in questo capitolo, o contattate VisionDept per assistenza.

Configurazioni dei monitor consigliate

Il supporto dei monitor multipli di ZoomText funzionerà con la maggior parte delle marche e dei modelli di monitor e proiettori, anche in presenza di più monitor con dimensioni o risoluzioni diverse. Tuttavia, vi consigliamo di applicare i seguenti consigli per ottenere massima comodità e produttività dal vostro sistema a monitor multipli.

Dimensioni, orientamento e allineamento dei monitor

Per una migliore visualizzazione, vi consigliamo di usare un set di monitor abbinati, fisicamente affiancati o sovrapposti sulla scrivania. Dopo aver disposto, nella finestra di dialogo Risoluzione Schermo, i monitor esattamente nel modo in cui si trovano fisicamente sulla scrivania, potrete semplicemente spostare il puntatore del mouse tra un monitor e l'altro come se lavoraste su un unico grande schermo. Per istruzioni su come disporre gli schermi, consultate [Configurare gli Schermi per il Supporto ai Monitor Multipli](#).

Questi fattori - dimensione, orientamento e allineamento - sono particolarmente importanti quando si usa la finestra zoom di tipo Span, in cui viene mostrata un'unica vista ingrandita su più schermi. Se l'allineamento, l'orientamento o la dimensione non corrispondono sui vari schermi, la vista risultante in questo tipo di finestra potrebbe creare confusione.

Risoluzioni degli schermi

Per una vista ingrandita più chiara possibile, vi raccomandiamo di impostare ogni monitor alla sua risoluzione nativa. Usare un monitor ad una risoluzione non nativa può degradare l'immagine nella vista normale, il che si traduce un ulteriore degrado se la vista è ingrandita. *Nota:* Questa raccomandazione si applica anche quando si usa un solo monitor.

Configurare gli Schermi per il Supporto ai Monitor Multipli

Per utilizzare il supporto ai monitor multipli di ZoomText, il vostro sistema deve avere più monitor collegati, abilitati e configurati con le seguenti impostazioni:

- I monitor devono essere impostati su "Estendi questi display" nella finestra di dialogo Risoluzione Schermo.
- I monitor devono essere perfettamente allineati su un lato nella finestra di dialogo Risoluzione schermo.
- I display estesi dovrebbero essere disposti in modo da corrispondere perfettamente alla disposizione fisica dei monitor sulla scrivania.

Di seguito verranno fornite indicazioni per effettuare tutti questi aggiustamenti.

▪ Per impostare i monitor su «Estendi questi display»

Potete impostare i vostri monitor su «Estendi questi display» utilizzando i seguenti metodi:

Metodo 1: Usare la scorciatoia per cambiare schermo: **Windows + P**

- Quando premete la scorciatoia **Windows + P** la barra di commutazione dei display apparirà sul vostro schermo. Quando la barra di commutazione dei display è visibile, premete la scorciatoia **Windows + P** o i tasti freccia sinistra e destra per scorrere le opzioni per i monitor multipli nella barra di commutazione dei display. Una volta raggiunta l'opzione **Estendi**, premete **Invio**.

Metodo 2: Selezionare nella finestra di dialogo Risoluzione schermo.

1. Fate clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi area vuota del vostro desktop, quindi fate clic su **Risoluzione dello schermo**.

Apparirà la finestra di dialogo Risoluzione dello Schermo.

2. Fate clic sul menù a tendina Schermi multipli e selezionate **Estendi questi schermi**. Potrebbe apparire una finestra di dialogo che vi chiede se volete mantenere le impostazioni modificate. Selezionate **Mantieni le Modifiche**.

Nota: Il supporto per monitor multipli di ZoomText funziona anche quando si usa una combinazione di monitor e proiettore che sono impostati su "Estendi questi schermi".

▪ **Per disporre e allineare i vostri display estesi**

Per allineare e ridisporre i vostri display estesi, fate quanto segue:

1. Fate clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi area vuota del vostro desktop, quindi fate clic su **Risoluzione dello schermo**.

Apparirà la finestra di dialogo Risoluzione dello Schermo. Questa finestra di dialogo mostra una rappresentazione illustrativa di come i vostri display estesi sono attualmente disposti e allineati.

2. Usando il mouse, trascinate gli schermi in modo che corrispondano il più possibile alla disposizione fisica dei monitor sulla scrivania, quindi allineate perfettamente gli stessi bordi dei monitor secondo le seguenti regole.
 - Se i display sono posizionati uno accanto all'altro, i bordi superiore o inferiore devono essere allineati.
 - Se i display sono posizionati in una pila verticale, i bordi sinistro o destro devono essere allineati.
3. Fate clic sui pulsanti **OK** o **Applica**. Potrebbe apparire una finestra di dialogo che vi chiede se volete mantenere le impostazioni modificate. Se appare, selezionate **Mantieni le Modifiche**.

Adeguamento automatico ai cambiamenti dei display

ZoomText rileva automaticamente tutte le modifiche ai display, comprese le seguenti:

- L'aggiunta e la rimozione di display
- L'attivazione e la disattivazione di display
- La modifica della risoluzione schermo di un particolare display
- La modifica della posizione e dell'orientamento di un display
- La modifica della presentazione di questi display (es. estendere o duplicare un display, mostrare solo sul display [numero])

Queste modifiche vengono rilevate sia all'avvio che durante l'esecuzione di ZoomText. Quando viene rilevata una modifica, ZoomText si adatterà automaticamente alle impostazioni precedentemente utilizzate per quella configurazione display. Se una determinata configurazione non è mai stata usata in precedenza, ZoomText userà le impostazioni di default. Ecco alcuni esempi di come ZoomText rileva e si adatta alle modifiche ai display:

- Quando ZoomText rileva il passaggio da un singolo monitor a più monitor con la funzione Display Estesi, passerà automaticamente all'ultimo tipo di finestra usato per i monitor multipli. Quando vengono rilevati monitor multipli con la funzione display estesi per la prima volta, ZoomText attiverà il tipo di finestra di zoom predefinito per i monitor multipli, ovvero MultiVista Locale.
- Quando ZoomText rileva il passaggio da monitor multipli con display estesi a un solo monitor, o a monitor multipli impostati su "Duplica questi display", passerà automaticamente all'ultimo tipo di finestra di zoom usato per un singolo monitor. Quando viene rilevato un solo monitor per la prima volta, ZoomText abilita il tipo di finestra di zoom predefinito per un solo monitor, che è FullIngrandimento Massimo.

Comportamenti delle Funzioni con Monitor Multipli

Quando usate il supporto per monitor multipli di ZoomText, il comportamento di alcune funzioni di ZoomText funzionerà come descritto di seguito.

Funzione	Comportamento Attuale
Lettore Applicazione	<p>Quando usate le seguenti finestre zoom: Span, Clonata, Zoom 1x o MultiVista Globale; la vista ingrandita attiva scorre sempre per seguire l'evidenziazione delle parole lette dal Lettore Applicazione, indipendentemente dal desktop in cui si trova l'applicazione che state leggendo.</p> <p>Quando usate MultiVista Locale, se l'applicazione si trova nella vista inattiva, essa diventerà attiva e scorrerà per seguire le parole lette dal Lettore Applicazione.</p>
Aree di Lettura	<p>Quando usate le seguenti finestre zoom: Span, Clonata, Zoom 1x o MultiVista Globale; la vista ingrandita attiva scorre sempre per far sì che l'area di lettura attivata venga resa visibile, indipendentemente dal desktop in cui si trova.</p> <p>Quando usate MultiVista Locale, se l'area di lettura attivata si trova nella vista inattiva, essa diventerà attiva e scorrerà per far sì che quell'area venga resa visibile.</p>
Touch Screen	Questa funzione non è attualmente supportata quando si utilizzano monitor multipli.

Funzione	Comportamento Attuale
Fotocamera ZoomText	Questa funzione non è attualmente supportata quando si utilizzano monitor multipli.
Supporto per CCTV USB di terze parti	Questa funzione non è attualmente supportata quando si utilizzano monitor multipli.

Risoluzione dei problemi con i Monitor Multipli

Questo argomento fornisce istruzioni per la risoluzione dei problemi che possono verificarsi quando si usa il supporto per Monitor Multipli di ZoomText.

Problema: Il vostro sistema ha tre o più monitor (configurati con la funzione Schermi estesi) e quando cercate di avviare ZoomText appare un messaggio che dice: "Il supporto per monitor multipli di ZoomText richiede un solo schermo esteso abilitato. Disabilitate tutti gli schermi estesi tranne uno, quindi provate a riabilitare i monitor multipli.

Soluzione Al momento, il supporto ai monitor multipli di ZoomText funziona con due schermi estesi. Il supporto per tre o più schermi estesi verrà aggiunto in una prossima release.

Problema: Quando si usa la Vista Span, la metà sinistra della vista ingrandita viene visualizzata sulla destra e viceversa.

Soluzione: L'orientamento dei vostri schermi estesi è invertito rispetto alla loro disposizione fisica. Per risolvere questo problema, invertite la disposizione degli schermi estesi nelle impostazioni della risoluzione schermo; per accedervi, fate clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi area vuota del vostro desktop, quindi fate clic su Risoluzione dello schermo.

Problema: Il mouse non si muove tra i miei monitor ma torna alla posizione di partenza dai bordi esterni.

Soluzione: L'orientamento dei vostri schermi estesi è invertito rispetto alla loro disposizione fisica. Per risolvere questo problema, invertite la disposizione degli schermi estesi nelle impostazioni della risoluzione schermo; per accedervi, fate clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi area vuota del vostro desktop, quindi fate clic su Risoluzione dello schermo.

Problema: ZoomText ingrandisce e fa scorrere solo metà dell'area di visualizzazione.

Soluzione: Il supporto ai monitor multipli di ZoomText è abilitato, ma voi state guardando solo uno dei vostri monitor. L'altra metà dell'area di visualizzazione è mostrata sul secondo monitor.

Miglioramenti Schermo

I miglioramenti schermo migliorano la leggibilità degli oggetti che appaiono a video. Con queste impostazioni potete: regolare i colori dello schermo per migliorare il contrasto e la chiarezza; regolare l'aspetto del puntatore del mouse, del cursore di testo e del focus della tastiera in modo che siano più facili da vedere e seguire.

- [Miglioramenti Colore](#)
- [Miglioramenti Puntatore](#)
- [Miglioramenti Cursore](#)
- [Miglioramenti Focus](#)
- [Usare Inverti Smart](#)

Miglioramenti colore

I miglioramenti del colore migliorano la chiarezza del testo e della grafica, facilitandone la visione e riducendo l'affaticamento degli occhi. Le opzioni di miglioramento del colore consistono in una serie di effetti filtro che regolano il colore, il contrasto e la luminosità. Potete scegliere tra schemi di colore preimpostati o creare le vostre impostazioni di colore personalizzate.

Suggerimento: Quando si utilizzano gli effetti Inverti luminosità e Inverti colore in Google Chrome, l'attivazione della funzione Inverti smart di ZoomText annullerà l'effetto di inversione sulle foto in modo che vengano visualizzate nei loro colori naturali. Per maggiori informazioni su questa funzione, consultate [Usare Inverti Smart](#).

Le opzioni di miglioramento del colore vengono abilitate ed impostate utilizzando il pulsante combinato **Colore**, situato nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti. La parte superiore di questo pulsante attiva e disattiva i miglioramenti del colore, mentre la parte inferiore apre il menu dei colori.

▪ Per attivare e disattivare i miglioramenti del colore

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Colore**.
- Premete il tasto di scelta rapida Migliora Colore Attivo/Disattivo: **Caps Lock + C**

▪ Per selezionare uno schema colori preimpostato

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Colore** oppure passate a Colore e premete **Freccia giù**.
2. Nel menù **Colore**, selezionate **Schema**.

3. Nel menù **Schema**, selezionate lo schema desiderato.

▪ **Per creare uno schema colori personalizzato**

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Colore** oppure passate a **Colore** e premete **Freccia giù**.


2. Nel menù **Colore**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni miglioramento Schermo, che mostrerà la scheda Colore.

3. Selezionate **Personalizzate...**

4. Regolate le impostazioni personalizzate come desiderate.

5. Fate clic su **OK**.

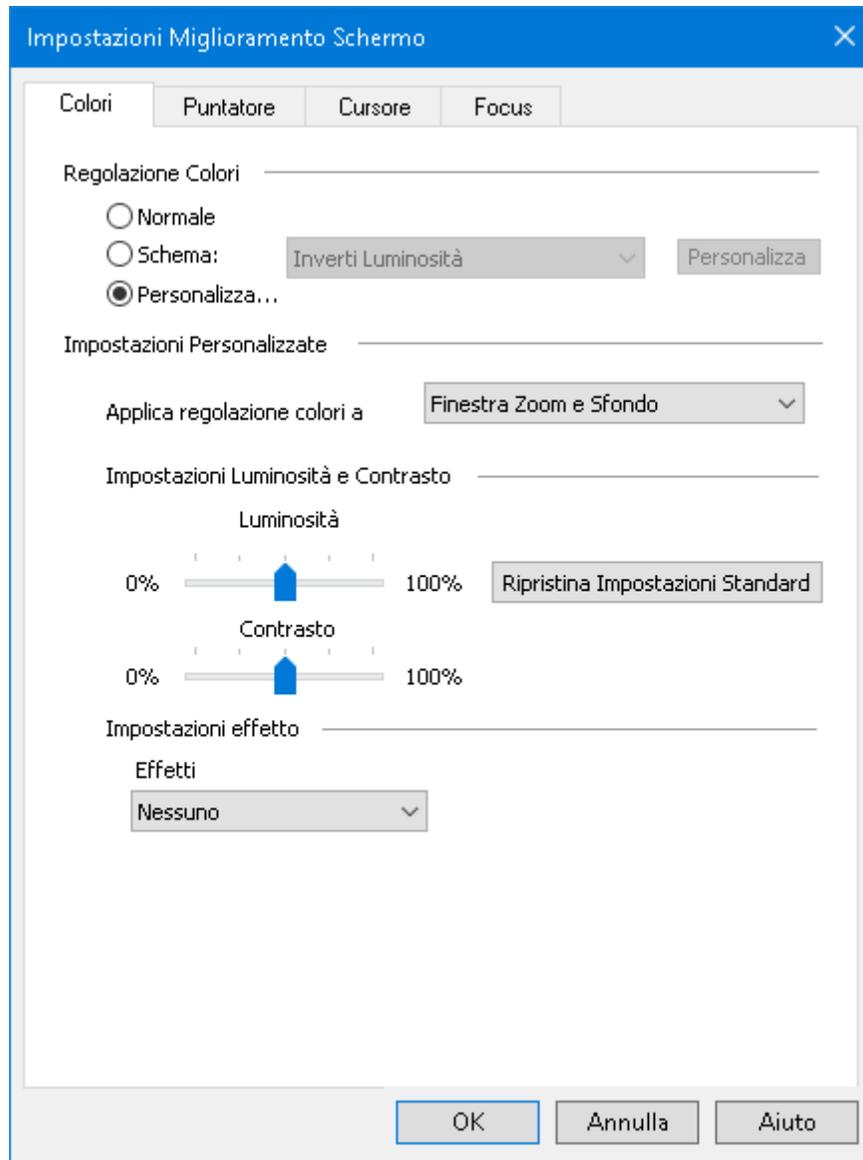

La scheda Colore

Impostazione	Descrizione
<i>Miglioramento colore</i>	
Normale	Disabilita tutti i miglioramenti del colore.
Schema	Attiva uno schema colori preimpostato (selezionabile nella casella combinata adiacente).

Impostazione	Descrizione
Personalizzato	Attiva le impostazioni personalizzate, permettendovi di creare il vostro schema colori personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le impostazioni personalizzate in modo che corrispondano allo schema colori preimpostato selezionato. Questo vi permette di usare uno schema preimpostato come punto di partenza per crearne uno personalizzato.
<i>Impostazioni luminosità e contrasto</i>	
Luminosità	Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine a schermo da 0% a 100%. La luminosità normale è del 50%.
Contrasto	Aumenta o diminuisce il contrasto dell'immagine a schermo da 0% a 100%. Il contrasto normale è del 50%.
Ripristina impostazioni standard	Ripristina la luminosità e il contrasto al 50% (normale).
<i>Impostazioni effetti</i>	
Effetti	<p>Seleziona il tipo di effetto colore e attiva le impostazioni associate.</p> <p>Nessuno. Non verrà applicato nessun filtro.</p> <p>Inverti Luminosità. Inverte la luminosità di tutti i colori dello schermo. I colori chiari diventeranno scuri e viceversa.</p> <p>Inverti Colori. Inverte tutti i colori dello schermo.</p>

Impostazione	Descrizione
	<p>Tinta. Trasforma tutti i colori dello schermo in una sola tonalità, conservando i loro valori di chiaro e scuro. Quando l'effetto Tinta è selezionato, apparirà una casella combinata Colore che permette di selezionare il colore della tinta.</p> <p>Due Colori. Trasforma tutti i colori dello schermo in uno spettro a due colori. Quando l'effetto a due colori è selezionato, appariranno le caselle combinate Colore del Testo e Colore dello Sfondo, che vi permetteranno di definire lo spettro a due colori.</p> <p>Sostituzione Colore. Sostituisce un colore dello schermo con un altro. Quando l'effetto Sostituzione Colore è selezionato, appariranno le caselle combinate denominate 'Con' e 'Sostituisci', che vi permetteranno di scegliere il colore da sostituire e il colore con il quale verrà sostituito. Verrà inoltre visualizzato un cursore a scorrimento Larghezza di banda, che vi consente di espandere la gamma di colori da sostituire con tonalità vicine al colore selezionato.</p>

Miglioramenti puntatore

I miglioramenti del puntatore rendono facile localizzare e seguire il puntatore del mouse. Potete impostare le dimensioni, nonché il colore del puntatore e attivare un localizzatore che sottolinea la posizione del puntatore sullo schermo. Potete scegliere tra gli schemi per il puntatore preimpostati o creare le vostre impostazioni del puntatore personalizzate.

Le opzioni di miglioramento del puntatore vengono abilitate ed impostate utilizzando il pulsante combinato **Puntatore**, situato nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti. La parte superiore di questo pulsante attiva e disattiva i miglioramenti del puntatore, mentre la parte inferiore apre il menu puntatore.

▪ Per attivare e disattivare i miglioramenti del puntatore

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Puntatore**.
- Premete il tasto rapido Attiva / Disattiva Miglioramento Puntatore: **Caps Lock + F**


▪ Per selezionare uno schema puntatore preimpostato

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Puntatore** oppure passate a **Puntatore** e premete Freccia giù.
2. Nel menù **Puntatore**, selezionate **Schema**.
3. Nel menù **Schema**, selezionate lo schema del puntatore desiderato.

▪ **Per creare uno schema puntatore personalizzato**

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Puntatore** oppure passate a **Puntatore** e premete Freccia giù.
2. Nel menù **Puntatore**, selezionate **Impostazioni**

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni miglioramento Schermo, che mostrerà la scheda Puntatore.
3. Selezionate **Personalizzate...**
4. Regolate le impostazioni personalizzate come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

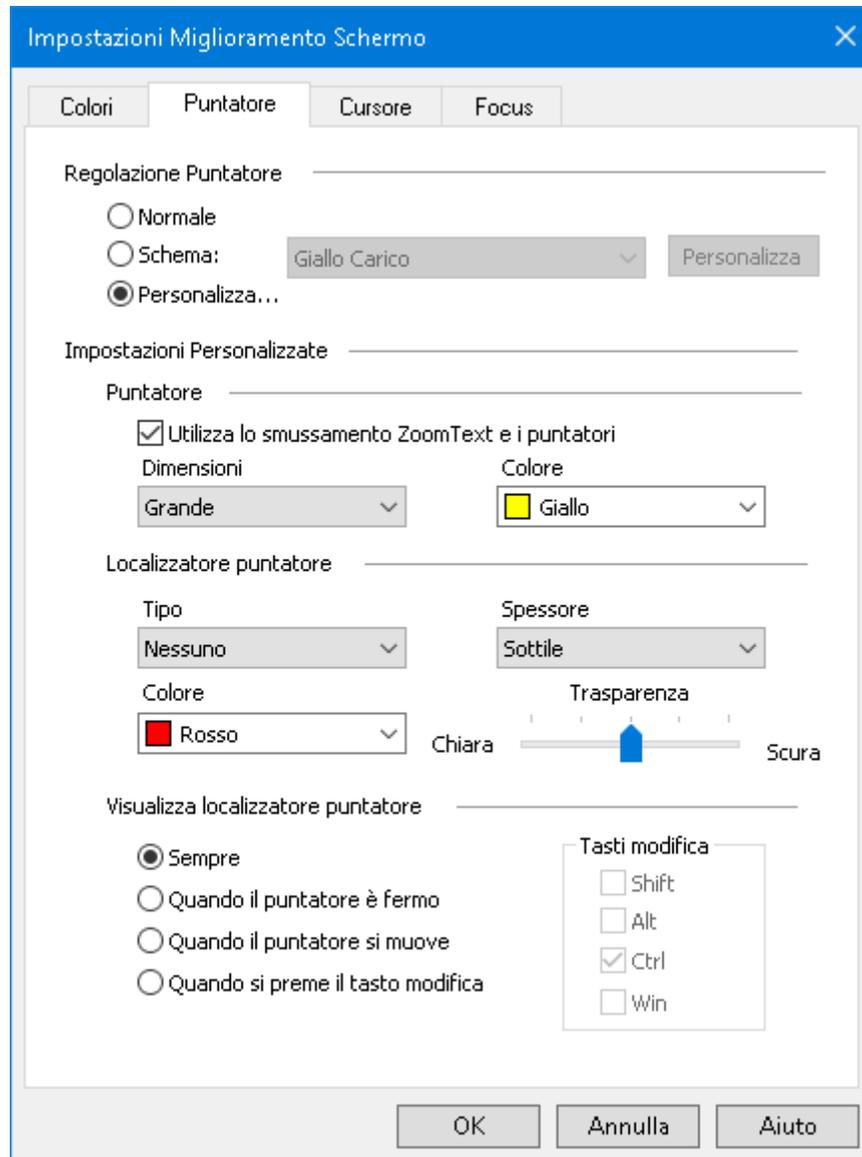

La scheda Puntatore

Impostazione	Descrizione
Miglioramento Puntatore	
Normale	Disabilita tutti i miglioramenti del puntatore.
Schema	Attiva uno schema puntatore preimpostato (selezionabile nella casella combinata adiacente).

Impostazione	Descrizione
Personalizzato	Attiva le Impostazioni personalizzate, permettendovi di creare il vostro schema puntatore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le Impostazioni personalizzate in modo che corrispondano allo schema puntatore preimpostato selezionato. Questo vi permette di usare uno schema preimpostato come punto di partenza per crearne uno personalizzato.
<i>Impostazioni Personalizzate</i>	
<i>Puntatore</i>	
Dimensione	Imposta la dimensione del puntatore del mouse migliorato. Sono disponibili quindici impostazioni incrementali.
Colore	Imposta il colore per il puntatore del mouse.
Blocca dimensione puntatore	Quando aumentate o diminuite l'ingrandimento, la dimensione del puntatore cambia a sua volta relativamente al livello di ingrandimento. Bloccando il puntatore, lo manterrete alla stessa dimensione indipendentemente dal livello di ingrandimento.
<i>Localizzatore puntatore</i>	
Tipo	Seleziona il tipo di localizzatore puntatore: Cerchio . Visualizza un cerchio centrato sul punto focale del puntatore.

Impostazione	Descrizione
	<p>Sonar. Visualizza dei cerchi animati che si irradiano verso l'interno nel punto focale del puntatore.</p> <p>Croce piena. Visualizza una serie di mirini che si estendono su tutta la finestra ingrandita, intersecando il punto focale del puntatore.</p> <p>Linee guida. Visualizza una serie di linee guida centrate sul punto focale del puntatore.</p>
Colore	Imposta il colore per il localizzatore puntatore.
Spessore	Imposta lo spessore del localizzatore puntatore: Sottile, Medio o Spesso.
trasparenza	Imposta il livello di trasparenza per il localizzatore puntatore. Il livello di trasparenza controlla la quantità dell'immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore puntatore.
<i>Mostra localizzatore puntatore</i>	
Sempre	Il localizzatore puntatore viene sempre mostrato.
Quando il puntatore è fermo	Il localizzatore puntatore verrà visualizzato solo quando il puntatore è fermo (non in movimento).
Quando il puntatore si muove	Il localizzatore puntatore verrà visualizzato solo quando il puntatore è in movimento.
Quando si preme il tasto modificatore	Il localizzatore puntatore verrà visualizzato solo quando i tasti modificatori del puntatore vengono tenuti premuti.

Impostazione	Descrizione
Tasti Modificatori	<p>Permette di selezionare un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzeranno il localizzatore puntatore.</p> <p><i>Nota:</i> l'opzione Mostra il localizzatore puntatore deve essere impostata su Quando viene premuto il tasto modificatore.</p>

Miglioramenti cursore

I miglioramenti del cursore rendono più facile localizzare e seguire il cursore di testo. Potrete scegliere tra una serie di localizzatori ad alta visibilità, che segneranno la posizione del cursore senza oscurare il testo circostante. Potete scegliere tra gli schemi cursore preimpostati o creare le vostre impostazioni personalizzate per il cursore.

Le opzioni di miglioramento del cursore vengono abilitate ed impostate utilizzando il pulsante combinato **Cursore**, situato nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti. La parte superiore di questo pulsante attiva e disattiva i miglioramenti del cursore, mentre la parte inferiore apre il menu dei cursori.

▪ Per attivare e disattivare i miglioramenti del cursore

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Cursore**.
- Premete il tasto rapido Miglioramento Cursore Attivo/Disattivo: **Caps Lock + R**.

▪ Per scegliere uno schema cursore preimpostato


1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Cursore** oppure passate a Cursore e premete **Freccia giù**.
2. Dal menù **Cursore**, selezionate **Schema**.
3. Nel menù **Schema**, selezionate lo schema desiderato.

▪ Per creare uno schema cursore personalizzato

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Cursore** oppure passate a Cursore e premete **Freccia giù**.
2. Nel menù **Cursore**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni miglioramento Schermo, che mostrerà la scheda Cursore.

3. Selezionate **Personalizzate...**
4. Regolate le impostazioni personalizzate come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

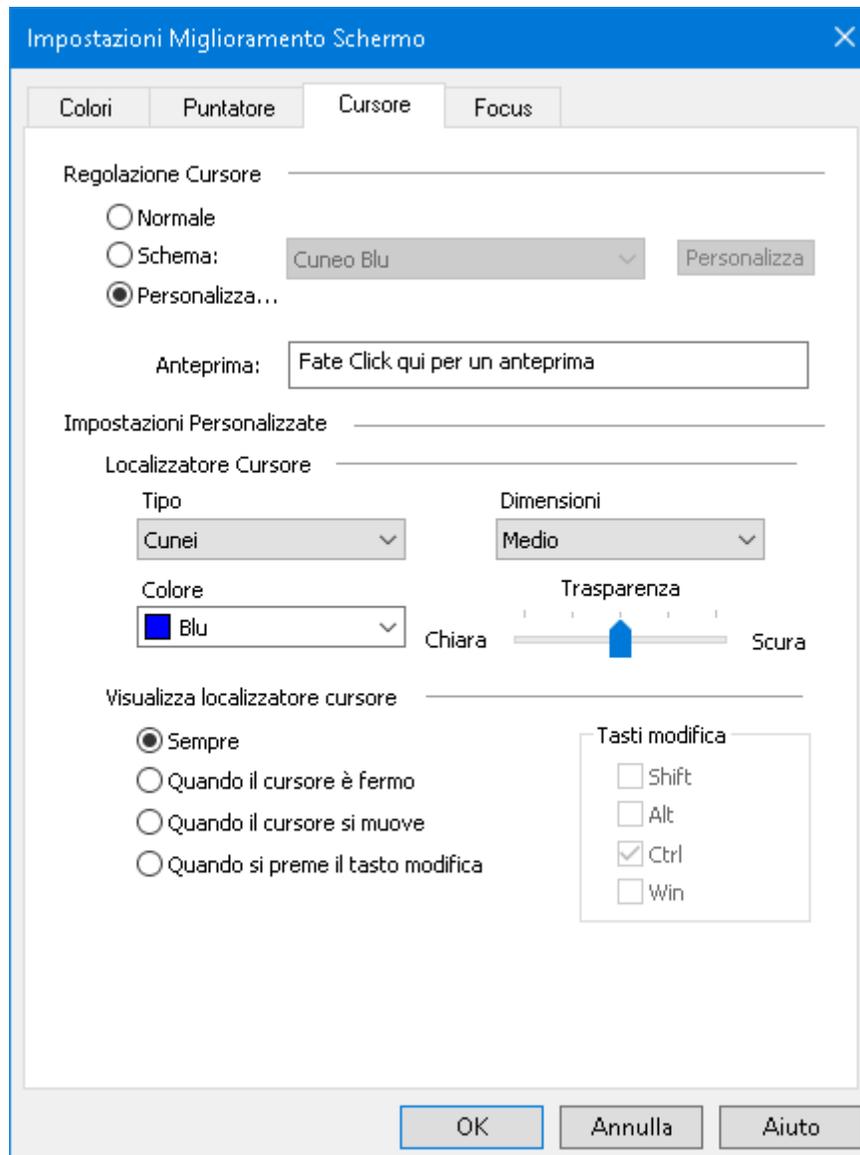

La scheda Cursore

Impostazione	Descrizione
<i>Miglioramento cursore</i>	
Normale	Disabilita tutti i miglioramenti del cursore.
Schema	Attiva uno schema cursore preimpostato (selezionabile nella casella combinata adiacente).
Personalizzato	Attiva le Impostazioni personalizzate, permettendovi di creare il vostro schema cursore personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le Impostazioni personalizzate in modo che corrispondano allo schema colori preimpostato selezionato. Questo vi permette di usare uno schema preimpostato come punto di partenza per crearne uno personalizzato.
Anteprima	Quando fate clic nella casella Anteprima, apparirà un cursore di testo a cui si applicheranno le impostazioni di miglioramento del cursore selezionate.
<i>Impostazioni Personalizzate</i>	
<i>Localizzatore cursore</i>	
Tipo	<p>Seleziona il tipo di localizzatore cursore:</p> <p>Cuneo. Visualizza dei cunei triangolari sopra e sotto il cursore.</p> <p>Cunei singoli. Mostra un singolo cuneo triangolare sopra o sotto il cursore.</p> <p>Cerchio. Visualizza un cerchio intorno al cursore.</p>

Impostazione	Descrizione
	Cornice. Visualizza una cornice rettangolare intorno al cursore.
Dimensione	Imposta la dimensione del localizzatore cursore: sottile, medio o spesso.
A due Colori.	Imposta il colore per il localizzatore cursore.
trasparenza	Imposta il livello di trasparenza per il localizzatore cursore. Il livello di trasparenza controlla la quantità dell'immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore cursore.
<i>Mostra localizzatore cursore</i>	
Sempre	Il localizzatore cursore viene sempre mostrato.
Quando il cursore è fermo	Il localizzatore cursore verrà visualizzato solo quando il cursore è fermo (non in movimento).
Quando il cursore si muove	Il localizzatore cursore verrà visualizzato solo quando il cursore è in movimento.
Quando si preme il tasto modificatore	Il localizzatore cursore verrà visualizzato solo quando i tasti modificatori del cursore vengono tenuti premuti.
Tasti Modificatori	Permette di selezionare un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzeranno il localizzatore cursore. Nota: l'opzione Mostra il localizzatore cursore deve essere impostata su Quando viene premuto il tasto modificatore .

Miglioramenti Focus

I miglioramenti focus rendono facile localizzare e seguire la focalizzazione dei controlli quando premete Tab e le frecce nei menu, nelle finestre di dialogo, nelle barre degli strumenti e in altri controlli delle applicazioni. Quando questa impostazione è attiva, potrete scegliere tra una serie di localizzatori ad alta visibilità, che segneranno la posizione del focus senza oscurare il testo circostante. Potrete scegliere tra gli schemi del focus preimpostati o configurare le vostre impostazioni personalizzate per il focus.

Le opzioni di miglioramento del colore vengono attivate ed impostate usando il pulsante multifunzione **Focus**, situato nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti. La parte superiore di questo pulsante attiva e disattiva i miglioramenti del focus, mentre la parte inferiore apre il menu delle impostazioni del focus.

▪ Per attivare e disattivare i miglioramenti del focus

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Focus**.
- Premete il tasto rapido Attiva / Disattiva Miglioramento Focus: **Caps Lock + F**

▪ Per selezionare uno schema focus preimpostato


1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Focus** spostatevi su **Focuse** premete il tasto freccia giù.
2. Dal menu **Focus** scegliete **Schema**.
3. Dal menu **Schema**, scegliete lo schema focus desiderato.

▪ **Per creare uno schema focus personalizzato**

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Focus** o spostatevi su **Focus** e premete il tasto freccia giù.
2. Dal menu **Focus** scegliete **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni miglioramento Schermo, che mostrerà la scheda Focus.

3. Selezionate **Personalizzate...**
4. Regolate le impostazioni personalizzate come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

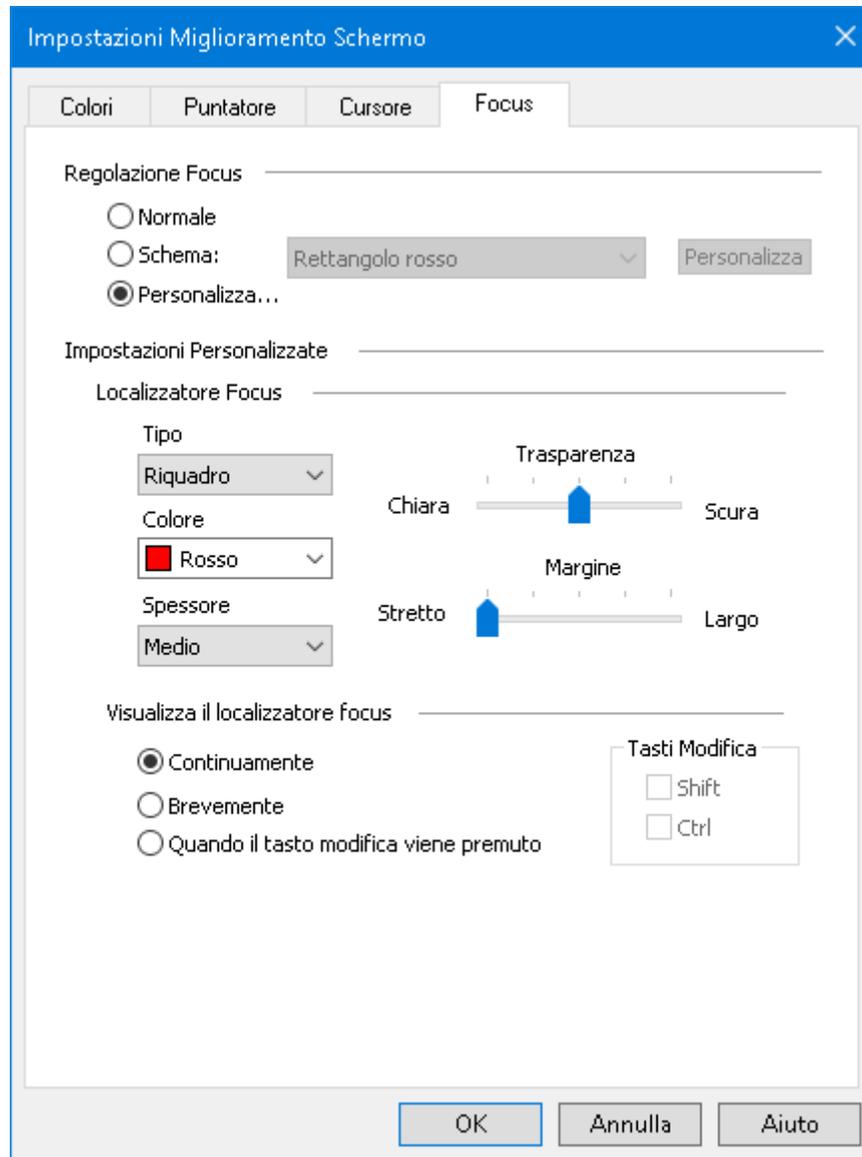

La scheda Focus

Impostazione	Descrizione
<i>Miglioramento Focus</i>	
Normale	Disabilita tutti i miglioramenti del focus.
Schema	Attiva uno schema focus preimpostato (selezionabile nella casella combinata adiacente).

Impostazione	Descrizione
Personalizzato	Attiva le Impostazioni personalizzate, permettendovi di creare il vostro schema focus personalizzato.
Personalizza	Attiva e configura le Impostazioni personalizzate in modo che corrispondano allo schema focus preimpostato selezionato. Questo vi permette di usare uno schema preimpostato come punto di partenza per crearne uno personalizzato.
<i>Impostazioni Personalizzate</i>	
<i>Localizzatore Focus</i>	
Tipo	<p>Seleziona il tipo di localizzatore focus:</p> <p>Blocco Visualizza un blocco sopra il controllo che ha il focus.</p> <p>Sottolineatura. Visualizza una linea sotto il controllo che ha il focus.</p> <p>Cornice. Visualizza una cornice rettangolare intorno al controllo che ha il focus.</p>
Colore	Imposta il colore per il localizzatore focus.
Spessore	Imposta lo spessore del localizzatore focus: Sottile, Medio o Spesso.
Trasparenza	Imposta il livello di trasparenza per il localizzatore focus. Il livello di trasparenza controlla la quantità dell'immagine del desktop che è visibile attraverso il localizzatore del focus.

Impostazione	Descrizione
	<i>Nota:</i> Questa impostazione non è disponibile quando il colore del localizzatore è impostato su 'Inverti'.
Margine	Aumenta o diminuisce lo spazio tra il controllo focalizzato e il localizzatore focus.
<i>Mostra il localizzatore focus</i>	
Continuamente	Il localizzatore focus viene sempre visualizzato (quando un controllo è focalizzato).
Brevemente	Il localizzatore di messa a fuoco sarà visualizzato a schermo per 1.5 secondi da quando il controllo viene focalizzato.
Quando si preme il tasto modificatore	Il localizzatore focus verrà visualizzato solo quando i tasti modificatori del focus vengono tenuti premuti.
Tasti ModificatoriTasti Modificatori	Permette di selezionare un tasto o una combinazione di tasti che, se premuti, visualizzeranno il localizzatore focus. <i>Nota:</i> L'opzione Visualizza il localizzatore focus deve essere impostata su Quando viene premuto il tasto modificatore .

Usare Inverti Smart

E' frequente che le persone ipovedenti che utilizzano il computer facciano uso di filtri fotografici che invertono contrasto e colori dello schermo, con conseguente riduzione del bagliore, aumento della leggibilità dei testi a monitor, riduzione dell'affaticamento oculare e maggiore comfort. Tuttavia, questi effetti si traducono spesso in immagini che assomigliano ai negativi delle pellicole, poco piacevoli e spesso incomprensibili allo sguardo.

La funzionalità Inverti Smart, che si trova nel gruppo Miglioramento Schermo, contiene le funzionalità Inverti Contrasto e Inverti Colore; quando le si attiva, ZoomText invertirà o annullerà i rispettivi effetti nelle foto, in modo che appaiano nei loro colori naturali.

Nota: Questa funzione è attualmente disponibile in Internet Explorer 11 e Google Chrome, ma sarà presto aggiunta ad altri browser e applicazioni web.

▪ **Per attivare e disattivare l'inversione smart nel menu Colore**

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Colore** o spostatevi asu **Colore** e premete il tasto freccia giù.
2. Dal menù **Colore**, selezionate **Inverti Rapido**.

▪ **Per attivare o disattivare Inverti Smart tramite un tasto rapido**

Premete il tasto rapido Inverti Smart: **Caps Lock + I**.

Nota: Inverti Smart può essere abilitato o disabilitato solo quando sono abilitate le funzioni Inverti Contrasto o Inverti colori.

Vista testo in tempo reale

La Vista testo in tempo reale è una funzionalità di ingrandimento di ZoomText che migliora la leggibilità del testo a schermo nei browser Web e nelle altre applicazioni in cui l'arrotondamento xFont non è supportato. Visualizza una riga continua di testo chiaro e di facile lettura nella parte superiore o inferiore dello schermo, che mostra il contenuto del cursore, del puntatore del mouse o del focus durante la navigazione all'interno di documenti, e-mail e pagine Web. Tale contenuto verrà mostrato in una finestra chiamata Vista testo in tempo reale, di cui potrete personalizzare il tipo e la dimensione dei caratteri nonché il contrasto dei colori per meglio adattarsi alle vostre esigenze di lettura.

- [Attivare e disattivare la Vista testo in tempo reale](#)
- [Usare la Vista testo in tempo reale](#)
- [Selezionare uno schema per la Vista testo in tempo reale](#)
- [Personalizzare la Vista testo in tempo reale](#)
- [Impostazioni](#)
- [Icone della Vista testo in tempo reale](#)
- [Comandi della Vista testo in tempo reale](#)

Attivare e disattivare la Vista testo in tempo reale

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Vista testo in tempo reale**, oppure selezionate la freccia in basso sul pulsante **Vista testo in tempo reale** e scegliete **Nascosta**.
- Premete il tasto rapido Attiva / Disattiva Vista testo in tempo reale: **Caps Lock + E**.

Usare la Vista testo in tempo reale

Quando la Vista testo in tempo reale è attiva, la riga che si trova sotto il puntatore del mouse o alla posizione del cursore verrà mostrata nella finestra di visualizzazione. Se la riga di testo supera la larghezza della finestra di visualizzazione, apparirà una freccia di scorrimento all'estremità sinistra o destra del testo visualizzato.

Per mostrare un'ulteriore porzione del testo, fate quanto segue:

- Premete **Caps Lock + Freccia destra** per spostarvi in avanti di un carattere alla volta.
- Premete **Caps Lock + Freccia sinistra** per spostarvi indietro di un carattere alla volta.
- Se il puntatore del mouse è focalizzato su una riga di testo, spostatela a sinistra o a destra per continuare a leggere il testo.

Selezionare uno schema per la Vista testo in tempo reale

Per selezionare uno schema predefinito, fate quanto segue:


1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla metà inferiore del pulsante **Vista testo in tempo reale**, oppure spostate il focus su di esso e premete **Freccia giù**.
2. Nel menù **Vista testo in tempo reale**, selezionate **Schema**.
3. Nel menù **Schema**, selezionate lo schema desiderato.
4. Fate clic su **OK** per salvare la selezione.

Personalizzare la Vista testo in tempo reale

Per spostare la finestra di visualizzazione, cambiare il tipo e la dimensione del carattere o cambiare il colore di primo piano e dello sfondo, fate quanto segue:

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla metà inferiore del pulsante **Vista testo in tempo reale**, oppure spostate il focus su di esso e premete **Freccia giù**.

2. Nel menù **Vista testo in tempo reale**, selezionate **Impostazioni**.
3. Dall'elenco degli schemi, selezionate uno schema da usare come punto di partenza.
4. Nella finestra Impostazioni personalizzate, potete impostare le seguenti opzioni:
 - **Posizione:** permette di posizionare la Vista testo in tempo reale nella parte alta o bassa della finestra.
 - **Dimensione:** aumenta o diminuisce la dimensione del testo e della finestra di visualizzazione.
 - **Carattere:** seleziona un carattere per visualizzare il testo.
 - **Schema colori:** potete selezionare uno schema predefinito dalla lista oppure premere il pulsante Personalizza per scegliere specifici colori per il testo, lo sfondo della finestra nonché i colori degli accenti per le frecce di scorrimento, la posizione del cursore, le caselle di controllo e i pulsanti.
 - **Visualizza:** selezionate cosa visualizzare nella finestra Testo in tempo reale. Per esempio, solo il testo che appare mentre digitate o vi spostate, solo il testo che appare sotto il puntatore del mouse, solo quello che appare durante l'uso di uno strumento di lettura (come la modalità Vista applicazione del Lettore applicazione), o tutto il contenuto.
5. Fate clic su **OK** per salvare le modifiche.

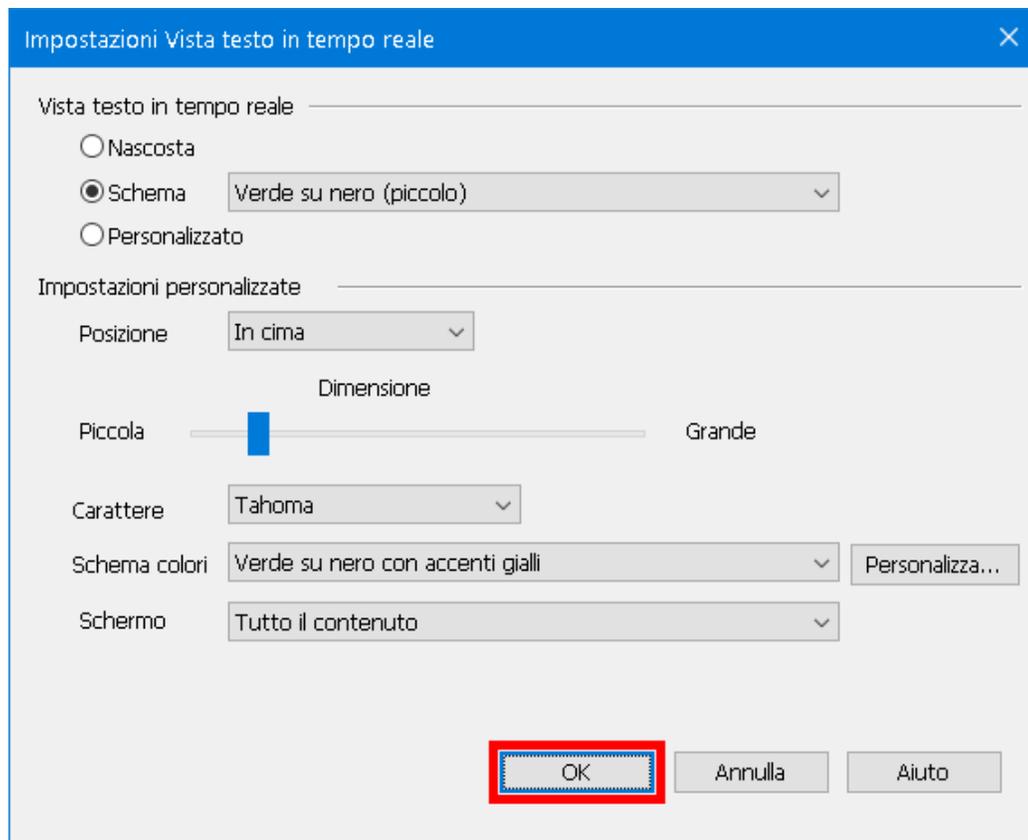

Impostazioni

Impostazione	Descrizione
<i>Testo in tempo reale</i>	
Nascosta	Attiva o disattiva la Vista testo in tempo reale
Schema	Attiva uno schema colori preimpostato (selezionabile nella casella combinata adiacente).
Personalizzata	Attiva le impostazioni personalizzate, permettendovi di creare il vostro schema colori personalizzato.

Impostazione	Descrizione
<i>Impostazioni Personalizzate</i>	
Posizione	Posiziona la finestra Vista in tempo reale nella parte alta o bassa dello schermo.
Dimensione	Aumenta o riduce la dimensione del testo e della finestra di visualizzazione in tempo reale.
Carattere	Scegliete il carattere da usare per il testo mostrato nella finestra di visualizzazione.
Schema Colori	Selezionate uno schema colori predefinito per avere il giusto contrasto per il testo, lo sfondo della finestra di visualizzazione e le frecce di scorrimento. Le frecce di scorrimento sono note come accenti.
Personalizza	<p>Apri la finestra delle impostazioni per gli schemi colore della Vista in tempo reale, da cui potrete selezionare specifici colori per il carattere, lo sfondo e gli accenti per gli elementi a schermo come frecce di scorrimento, caselle di controllo, pulsanti nonché per la posizione del cursore. Consultate Schema colore della Vista in tempo reale per maggiori informazioni.</p>

Impostazione	Descrizione
Visualizza	<p>Selezionate cosa visualizzare nella finestra Testo in tempo reale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutto il contenuto • Testo durante la digitazione e la navigazione • Testo sotto il puntatore del mouse • Solo quando si usa uno strumento di lettura come la Vista applicazione del Lettore applicazione.

Icone della Vista testo in tempo reale

Queste immagini vengono mostrate nella finestra Vista in tempo reale. Appariranno quando il focus è su un elemento, oppure vi passate sopra con il puntatore del mouse.

Questa immagine...	Indica...
▶	<p>Scorre a destra per visualizzare più testo. Tasto rapido: Caps Lock + Freccia destra</p>
◀	<p>Scorre a sinistra per visualizzare più testo Tasto rapido: Caps Lock + Freccia sinistra</p>
✓	<p>L'elemento attuale è selezionato in un elenco.</p>
▼	<p>L'elemento attuale è parte di un menù o un elenco a tendina. Premete Freccia giù per selezionare altri elementi nell'elenco.</p>

Questa immagine...	Indica...
☑	L'elemento attuale è selezionato in un elenco di caselle di controllo.
☐	L'elemento attuale non è selezionato in un elenco di caselle di controllo.
☑	L'elemento rappresenta più caselle di controllo, alcune selezionate e altre non selezionate.
●	L'elemento è selezionato in un gruppo di pulsanti radio.
○	L'elemento è deselezionato in un gruppo di pulsanti radio.
↕	L'elemento è una casella spin. Premete le Freccce Su e Giù per aumentare o diminuire il valore corrente quando la casella spin è focalizzata.
↔	L'elemento è un controllo slider. Premete le frecce Sinistra o Destra per aumentare o diminuire il valore quando lo slider è focalizzato.
▽	L'elemento corrente è parte di una struttura gerarchica ad albero attualmente espansa.
▷	L'elemento corrente è parte di una visualizzazione ad albero compressa.
└	L'elemento corrente è parte di una visualizzazione ad albero.

Comandi della Vista testo in tempo reale

Comando	Tasti di scelta rapida
Attiva/Disattiva Vista testo in tempo reale	Caps Lock + E Caps Lock + Alt + E (layout per i portatili) Caps Lock + spazio + M, E Comando a livelli
Aumenta dimensione di finestra e testo nella Vista in tempo reale	Caps Lock + pagina su Layout desktop Caps Lock + Alt + Pagina su Layout per i portatili Caps Lock + Spazio + M, Pagina su Comando a livelli
Riduci dimensione di finestra e testo della vista in tempo reale	Caps Lock + pagina giù Layout desktop Caps Lock + Alt + Pagina giù Layout per i portatili Caps Lock + Spazio + M, Pagina giù Comando a livelli
Scorri a Destra	Caps Lock + Freccia destra Layout desktop Caps Lock + Alt + Freccia destra Layout per i portatili Caps Lock + Spazio + M, Freccia destra Comando a livelli
Scorri a Sinistra	Caps Lock + freccia sinistra Layout desktop Caps Lock + Alt + Freccia sinistra Layout per i portatili Caps Lock + Spazio + M, Freccia sinistra Comando a livelli

Schema colori per la Vista testo in tempo reale

Gli schemi predefiniti forniscono un comodo punto di partenza per la configurazione della Vista testo in tempo reale, che potrete poi personalizzare per creare il vostro schema personalizzato di colori per il testo, lo sfondo e gli elementi dello schermo.

Per creare uno schema personalizzato, fate quanto segue:

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, fate clic sulla metà inferiore del pulsante **Vista testo in tempo reale**, oppure spostate il focus su di esso e premete Freccia giù.
2. Nel menù **Vista testo in tempo reale**, selezionate **Impostazioni**.
3. Selezionate **Personalizza**.
Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni schema colori Vista in tempo reale.
4. Regolate le impostazioni personalizzate come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

Impostazioni

Impostazione	Descrizione
Colore del testo	Selezionate il colore del testo mostrato nella finestra di visualizzazione.
Colore Sfondo	Selezionate il colore dello sfondo per la finestra di visualizzazione.
Colore degli accenti	Selezionate il colore per gli elementi dello schermo come frecce di scorrimento, caselle di controllo, pulsanti nonché per la posizione del cursore.

Impostazione	Descrizione
Inverti Colori.	Inverte i colori del testo e dello sfondo. Ad esempio, testo giallo su fondo nero diventerà testo nero su fondo giallo.

Impostazioni di Navigazione

Le impostazioni di navigazione controllano come ZoomText farà scorrere la finestra di zoom per mantenere gli oggetti in movimento in vista, incluso il puntatore del mouse, il cursore di testo, il focus della tastiera e altri oggetti che appaiono e si muovono sullo schermo. Con queste impostazioni potete: scegliere gli oggetti e gli eventi che ZoomText tratterà nella finestra di zoom, scegliere come gli oggetti e gli eventi tracciati saranno posizionati nella finestra di zoom, indirizzare automaticamente il puntatore del mouse nella vista ingrandita o al controllo attivo, nonché restringere il movimento del puntatore del mouse.

- [Tracciamento](#)
- [Allineamento](#)
- [Mouse](#)
- [Scorrimento](#)

Tracciamento

Quando digitate testo o vi spostate nei menù, nelle finestre di dialogo e in altri controlli, la finestra di zoom scorrerà automaticamente per mantenere visibile il focus. Questo comportamento viene determinato dalle opzioni di tracciamento di ZoomText, che vi permettono di scegliere quali elementi volete che ZoomText mantenga tracciati quando diventano attivi. Potete anche limitare il tracciamento ad un'area selezionata dello schermo.

▪ Per regolare le impostazioni di tracciamento

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Navigazione**.
2. Nel menù **Navigazione**, selezionate **Tracciamento**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni di Navigazione, che mostrerà la scheda Tracciamento.

3. Regolate le impostazioni di tracciamento come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.



La scheda Tracciamento

Impostazione	Descrizione
<i>Traccia i seguenti elementi</i>	
Puntatore del Mouse	Abilita il tracciamento del puntatore del mouse.
Cursore di testo	Abilita il tracciamento di cursore del testo.
Menù	Abilita il tracciamento delle voci di menu quando ricevono il focus della tastiera.
Controlli	Abilita il tracciamento dei controlli quando ricevono il focus della tastiera.
Tool Tip	Abilita il tracciamento dei ToolTip quando appaiono.

Impostazione	Descrizione
Finestre	Abilita il tracciamento delle finestre quando diventano attive.
Avvisi	Abilita il tracciamento dei pop up di avviso quando appaiono.

Allineamento


Le opzioni di allineamento controllano come la finestra ingrandita scorre per mantenere in vista gli elementi tracciati. Ci sono due tipi generali di allineamento: bordo e centro. Con l'allineamento Bordo, la finestra ingrandita scorre solo quanto necessario per mantenere l'oggetto tracciato in vista. Con l'allineamento al centro, la finestra ingrandita scorre quanto necessario per mantenere l'oggetto tracciato al centro della finestra. Un terzo tipo di allineamento, chiamato "allineamento smart", metterà in risalto un controllo assieme alla massima porzione possibile del suo controllo o la sua finestra gerarchicamente superiore.

▪ Per regolare le impostazioni di allineamento

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Navigazione**.
2. Nel menù **Navigazione**, selezionate **Allineamento**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni di navigazione, che mostrerà la scheda Allineamento.

3. Regolate le impostazioni di allineamento come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.

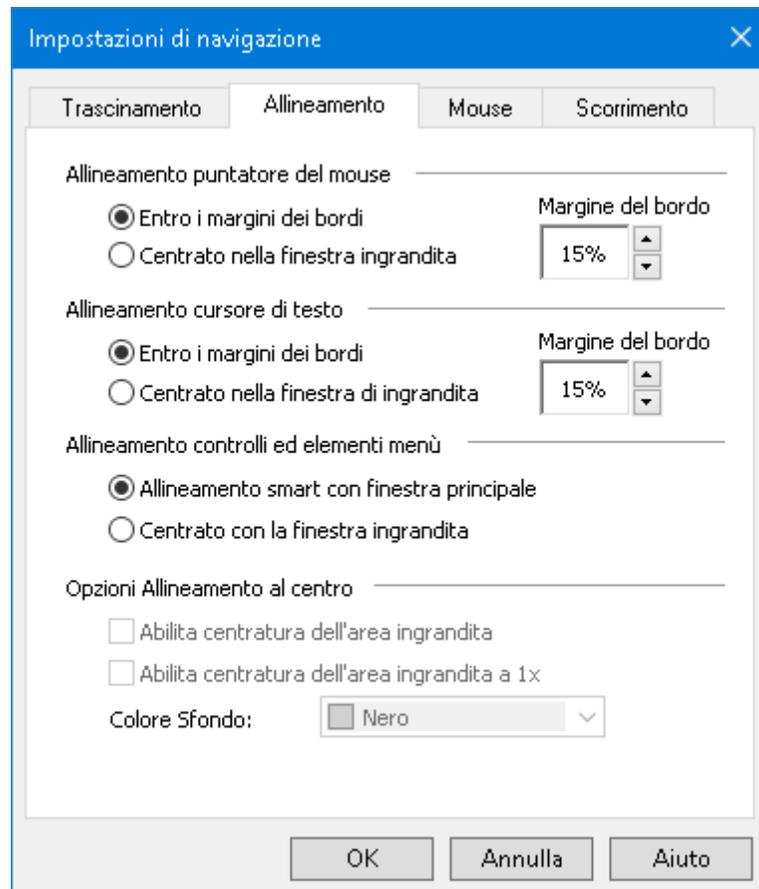

La scheda Allineamento

Impostazione	Descrizione
All'interno dei margini	La finestra ingrandita scorrerà solo quanto necessario per mantenere l'oggetto tracciato in vista.
Al Centro della Finestra ingrandita	La finestra ingrandita scorrerà in modo da mantenere l'oggetto tracciato al centro della vista.
Margini	Definisce quanto vicino al bordo può andare un oggetto tracciato prima che la finestra inizi a scorrere. Il margine può essere impostato da 0% a 50%; metà della larghezza e dell'altezza della finestra di zoom.

Impostazione	Descrizione
Allineamento Smart con finestra gerarchicamente superiore	La finestra ingrandita scorre per mettere in vista il controllo o la voce di menu tracciata, oltre alla massima porzione della finestra o del menù gerarchicamente superiore.
Abilita Tracciamento reale del centro	Il tracciamento reale del centro mantiene sempre gli oggetti tracciati al centro del monitor. Questo significa anche che il bordo del desktop di Windows verrà spostato verso il centro del monitor, quando necessario. Quando questo accade, l'area al di fuori del desktop apparirà come un colore di sfondo. Il tracciamento reale del centro è disponibile quando la finestra ingrandita è impostata su Piena, ed il vostro sistema è in esecuzione con un singolo monitor.
Abilita tracciamento reale del centro a 1x	Abilita il tracciamento reale del centro quando è in uso l'ingrandimento a 1x. Il tracciamento reale del centro mantiene sempre gli oggetti tracciati al centro del monitor. Il tracciamento reale del centro a 1x è disponibile quando la finestra ingrandita è impostata su Piena, ed il vostro sistema è in esecuzione con un singolo monitor.
Colore Sfondo	Scegliete un colore di sfondo per il tracciamento reale del centro.

Mouse


Le opzioni di navigazione mouse, il posizionamento del puntatore e i vincoli del puntatore, rendono facile esplorare e muoversi sullo schermo con il mouse. La funzione Posizionamento del Puntatore il puntatore del mouse sarà sempre messo nella vista ogni volta che vi serve. Con la funzione Restrizioni del Puntatore, potete far sì che il mouse possa muoversi soltanto orizzontalmente o verticalmente, oppure che non possa uscire dalla finestra attiva.

▪ Per impostare le opzioni di navigazione del mouse

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Navigazione**.
2. Nel menù **Navigazione**, selezionate **Mouse**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni di Navigazione, che mostrerà la scheda Mouse.

3. Fate clic su **OK**.
4. Regolate le impostazioni di navigazione mouse come desiderate.

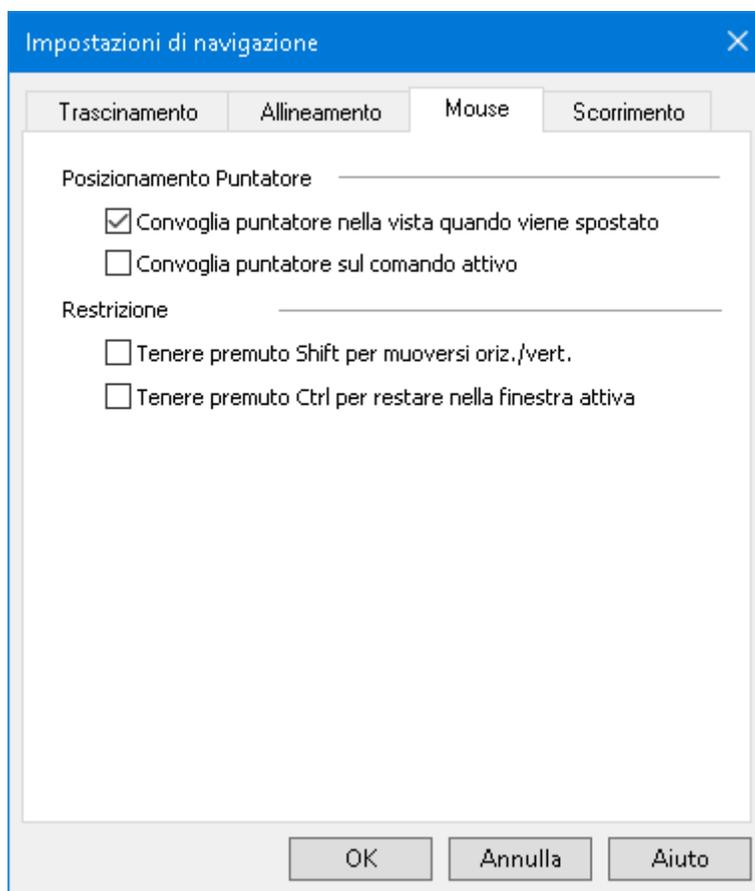

La scheda Mouse

Impostazione	Descrizione
Posiziona il puntatore nella vista quando viene spostata	Sposta automaticamente il puntatore al centro della vista ingrandita, ogni volta che il puntatore si sposta mentre si trova all'esterno della stessa.
Posiziona il puntatore sul controllo attivo	Sposta automaticamente il puntatore su controlli ed elementi di menù quando ricevono il focus.
Tieni premuto Shift per spostare solo orizzontalmente o verticalmente	Se viene tenuto premuto il tasto Shift il puntatore del mouse si sposterà solo orizzontalmente o verticalmente, a seconda della direzione iniziale del movimento. Questa modalità di movimento più ristretta fornisce

Impostazione	Descrizione
	un modo più facile per scorrere righe e colonne di informazioni.
Tieni premuto Ctrl per restare nella finestra attiva	Se viene tenuto premuto il tasto Ctrl il puntatore del mouse si sposterà solo orizzontalmente o verticalmente, a seconda della direzione iniziale del movimento. Questa modalità di movimento più ristretta fornisce un modo più facile per scorrere righe e colonne di informazioni.

Scorrimento


Lo scorrimento omogeneo fornisce uno scorrimento più naturale quando la vista ingrandita si muove per mantenere in vista il focus. Quando digitate testo o vi spostate nei menù, nelle finestre di dialogo e in altri controlli, la vista ingrandita scorrerà in modo lineare lungo lo schermo invece di saltare in modo brusco.

▪ **Per attivare e regolare le impostazioni di scorrimento omogeneo**

1. Nella scheda **Ingrandimento** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Navigazione**.
2. Nel menù **Navigazione**, selezionate **Scorrimento**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni di Navigazione, che mostrerà la scheda Scorrimento.

3. Regolate le impostazioni di scorrimento omogeneo come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.

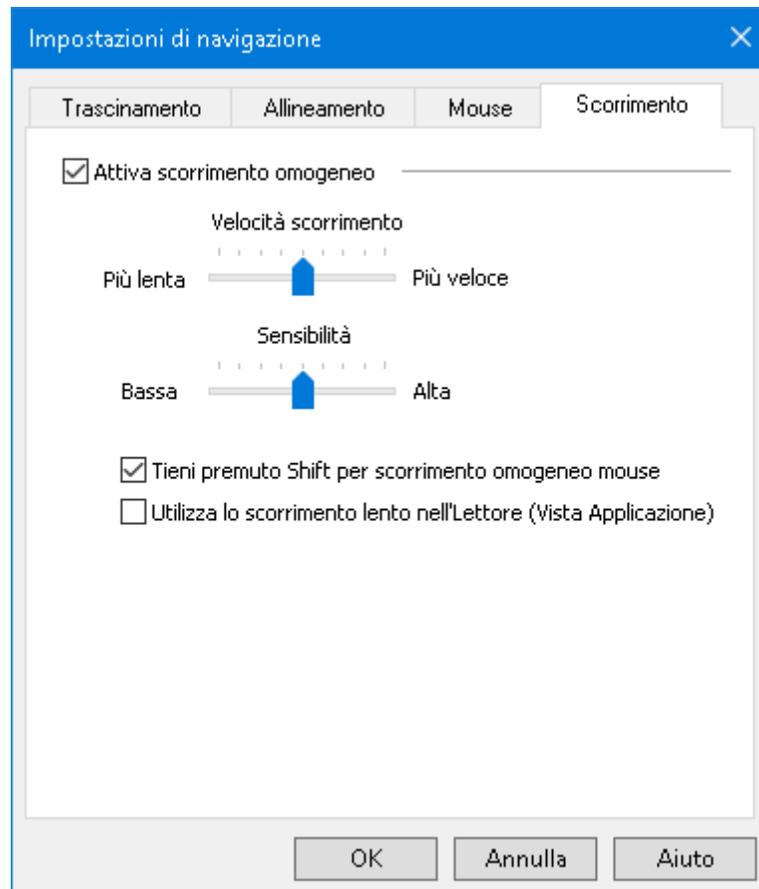

La scheda Scorrimento

Impostazione	Descrizione
Attiva scorrimento omogeneo	Abilita la funzione Scorrimento Omogeneo di ZoomText. Premete CapsLock + S per attivare o disattivare.
Velocità di scorrimento	Controlla quanto velocemente ZoomText si sposta da una posizione all'altra.
Sensibilità	La sensibilità definisce in quali situazioni si applica lo scorrimento omogeneo. Se la sensibilità è impostata su bassa, ZoomText utilizzerà lo scorrimento omogeneo solo per piccoli spostamenti. Se la sensibilità è impostata su alta, verrà applicato anche per spostamenti più ampi.

Impostazione	Descrizione
Usa Scorrimento omogeneo per il mouse	Abilita lo scorrimento omogeneo quando si usa il puntatore del mouse per spostarsi sullo schermo.
Usa Scorrimento Omogeneo nel Lettore Applicazione	Abilita lo scorrimento omogeneo tra le parole evidenziate dal Lettore Applicazione.

Funzioni del Lettore


Le "Funzioni del lettore" rappresentano le caratteristiche principali di lettura di schermo e documenti in ZoomText Ingranditore/Lettore. Queste funzioni includono: la voce di ZoomText; il riscontro della tastiera, del mouse e del programma; gli strumenti Lettore Applicazione e Zone di Lettura; il Cursore di Testo e i Comandi di Lettura.

*Nota:*Le funzioni del lettore non sono disponibili in ZoomText Ingranditore.

- [La scheda Lettore della barra degli strumenti](#)
- [La voce di ZoomText](#)
- [Funzioni di Riscontro](#)
- [Lettore Applicazione](#)
- [Aree di Lettura](#)
- [Leggere con il Cursore di Testo](#)
- [Comandi di Lettura](#)

La scheda Lettore della barra degli strumenti

La scheda Lettore della barra degli strumenti fornisce pulsanti di azione rapida per attivare e impostare tutte le funzioni del Lettore di ZoomText. Molti di questi sono pulsanti multifunzione, che vi permettono sia di attivare la funzionalità sia di aprire un menù per modificare le sue impostazioni. I pulsanti sono raggruppati per categoria, e dispongono di comode etichette ed icone per una facile identificazione.

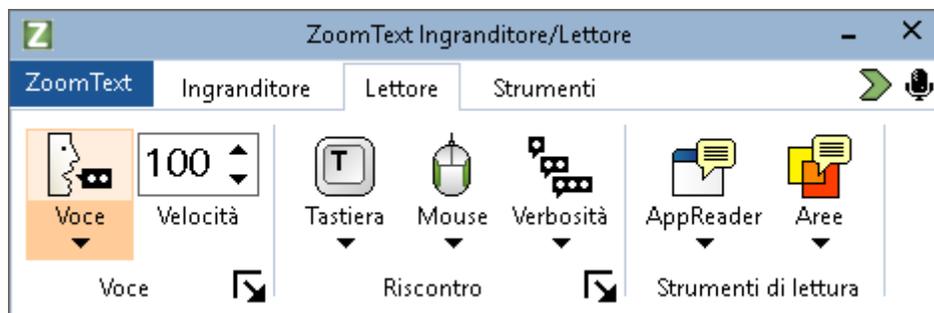

La scheda Lettore della barra degli strumenti

Nota: La scheda Lettore apparirà solo se ZoomText è in esecuzione come ZoomText Ingranditore/Lettore.

- **Voce.** Attiva e disattiva la voce per la lettura dello schermo e permette di aprire la finestra di dialogo Impostazioni Voce, dalla quale potete selezionare e personalizzare le impostazioni della voce.
- **Velocità.** Controlla la velocità di lettura di ZoomText.
- **Tastiera.** Attiva e disattiva il riscontro della tastiera e imposta le impostazioni di riscontro della tastiera. Il riscontro della tastiera vocalizza istantaneamente i caratteri e le parole che digitate.
- **Mouse.** Attiva e disattiva il riscontro del mouse e imposta le impostazioni di riscontro del mouse. Il riscontro del mouse legge automaticamente il testo sotto il puntatore.

- **Prolissità.** Seleziona un livello di prolissità. La prolissità vi permette di regolare la quantità di informazioni che vi verranno lette quando un elemento di programma riceve il focus.
- **Lettore Applicazione.** Lancia il Lettore Applicazione per leggere il testo dell'ultima applicazione attiva. Il Lettore Applicazione leggerà in modo continuativo documenti, pagine web ed e-mail all'interno dell'applicazione.
- **Aree.** Vi permette di creare, modificare e spostarvi tra le varie aree di lettura. Le Aree di lettura vi permettono di vedere e sentire istantaneamente specifiche posizioni nelle vostre applicazioni.

La voce di ZoomText

ZoomText vi permette di selezionare e personalizzare la voce per adattarla alle vostre preferenze personali. Potete scegliere tra una voce maschile o femminile, regolare la velocità e il volume della voce e personalizzare lo stile di lettura e i segnali acustici. Potete anche abilitare e disabilitare la voce a seconda della necessità del momento.

- [Abilitare e Disabilitare la Voce](#)
- [Regolare la Velocità della Voce](#)
- [Scegliere una Voce](#)
- [Aggiungere e Rimuovere Voci](#)
- [Configurare l'Elaborazione Testo](#)
- [Configurare i Suggerimenti](#)
- [Configurare l'audio](#)

Abilitare e Disabilitare la Voce

Potete abilitare e disabilitare in qualsiasi momento le funzioni di lettura vocale senza disattivare le funzioni di l'ingrandimento.

▪ **Per abilitare e disabilitare la voce**

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate **Attiva Voce** o **Disattiva Voce**.
- Premete il tasto rapido Attiva/Disattiva Voce: **Caps Lock + Alt + Invio**.

Nota: il Lettore Applicazione continuerà a parlare anche quando la voce è disattivata.

Ci possono essere momenti in cui potreste voler interrompere l'output vocale mentre è in corso. Ad esempio, quando ZoomText sta leggendo una casella dei messaggi con cui avete già familiarità. Potete forzare ZoomText a interrompere la lettura di questo testo senza disattivare la voce completamente.

▪ **Per interrompere la lettura vocale mentre è in corso**

Premete e rilasciate il tasto **Ctrl**.

Verrà interrotta la lettura di qualsiasi cosa veniva pronunciata.

Regolare la Velocità della Voce

La Velocità della Voce vi permette di controllare la velocità con cui ZoomText parla.

▪ Per regolare la velocità della voce

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda Lettore della barra degli strumenti, regolate il livello nella casella spin **Velocità**.
- Premete i tasti rapidi Voce Più Lenta e Voce Più Veloce
 - o Voce Più Veloce: **Caps Lock + Alt + Freccia Su**
 - o Voce Più Lenta: **Caps Lock + Alt + Freccia Giù**

Nota: la velocità della voce può anche essere regolata nella finestra di dialogo Impostazioni Voce. Per maggiori informazioni, consultate [Impostazioni Voce](#).


La velocità può essere regolata separatamente per il Lettore Applicazione. Questa impostazione è situata nella finestra di dialogo Lettore Applicazione (Impostazioni Condivise). Per maggiori informazioni, consultate [Impostazioni Condivise Lettore Applicazione](#).

Impostazioni Voce

Le Impostazioni della Voce vi permettono di cambiare e personalizzare la voce di ZoomText. Potete scegliere tra varie voci maschili e femminili, nonché regolarne la velocità, il tono e il volume.

▪ Per regolare le impostazioni della voce

1. Nella scheda **Letto** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Voce** o spostatevi fino a **Voce** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Voce**, selezionate **Impostazioni**.
Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Voce.
3. Selezionate la scheda **Voce**.
4. Assicuratevi che sia selezionata la casella elenco **Abilita output vocale**.
5. Scegliete la lingua, il sintetizzatore e la voce desiderati, quindi regolate la velocità, il tono e il Volume.
6. Per ascoltare un'anteprima delle impostazioni del sintetizzatore, scrivete del testo nella casella di editazione **Testo di Esempio** e poi cliccate su **Leggi Esempio**.
7. Fate clic su **OK**.

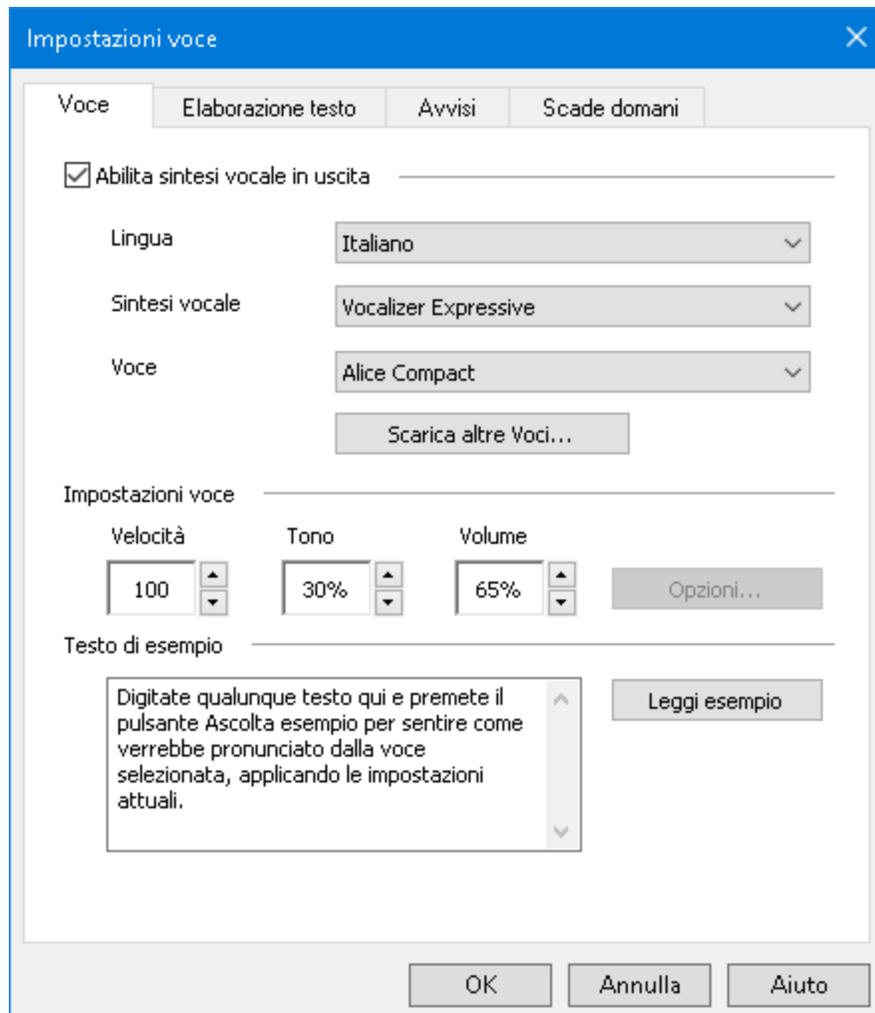

La scheda Voce

Impostazione	Descrizione
Abilita output vocale	Abilita o disabilita l'output vocale per la lettura dello schermo.
Lingua	Mostra un elenco di lingue per il sintetizzatore che sono installate sul vostro sistema.
Sintesi	Mostra un elenco di sintesi vocali installate sul sistema. <i>Nota:</i> ZoomText supporta sintesi vocali basate su SAPI 4 e SAPI 5.

Impostazione	Descrizione
Voce	Mostra un elenco di voci disponibili per la sintesi selezionata.
Aggiungi/Rimuovi Voce ...	Apri l'utilità Aggiungi/Rimuovi Voci . Questa utility vi permette di ascoltare, installare e rimuovere le voci Vocalizer Expressive 2 usate da ZoomText.
<i>Impostazioni voce</i>	
Velocità	Controlla la velocità di lettura di ZoomText. La velocità può essere regolata separatamente per il Lettore Applicazione. * Per maggiori informazioni, consultate Opzioni di Lettura.
Tono	Regola il tono della voce corrente. Il cambio di tono va da 5% a 100%, in incrementi di 5%.
Volume	Regola il volume della voce corrente. Il cambio di volume va da 5% a 100%, in incrementi di 5%.
Opzioni	Mostra opzioni aggiuntive per la sintesi selezionata, inclusa la possibilità di scegliere un gestore di pronunce per la sintesi. Se la sintesi non pronuncia correttamente una parola, potete fornire lo spelling fonetico della parola.
<i>Testo di esempio</i>	
Testo di Esempio / Leggi Esempio	Vi permette di provare le impostazioni attuali della voce. Potete immettere del testo nella casella Testo di Esempio, per poi farlo leggere al sintetizzatore usando il pulsante Leggi Esempio. Le impostazioni vocali correnti

Impostazione	Descrizione
	verranno usate per leggere il testo di esempio, comprese le impostazioni nelle schede Elaborazione testo e Suggerimenti.


* Se il Lettore Applicazione è stato configurato per usare la propria velocità separata, l'impostazione Velocità in questa finestra di dialogo sarà oscurato se essa viene aperta dalla barra degli strumenti Vista Testo del Lettore Applicazione.

Elaborazione Testo

L'elaborazione testo modifica il modo in cui i numeri, la punteggiatura e le parole con caratteri maiuscoli e minuscoli misti vengono pronunciate, in modo che siano lette nel modo corretto a seconda del contesto. In questo modo, potete creare uno stile di lettura che chiarisce ambiguità derivanti da parole complesse o numeri.

▪ **Per impostare le opzioni di elaborazione testo**

1. Nella scheda **Letture** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Voce** o spostatevi fino a **Voce** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Voce**, selezionate **Impostazioni**.
Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Voce.
3. Selezionate la scheda **Elaborazione Testo**.
4. Regolate le impostazioni come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

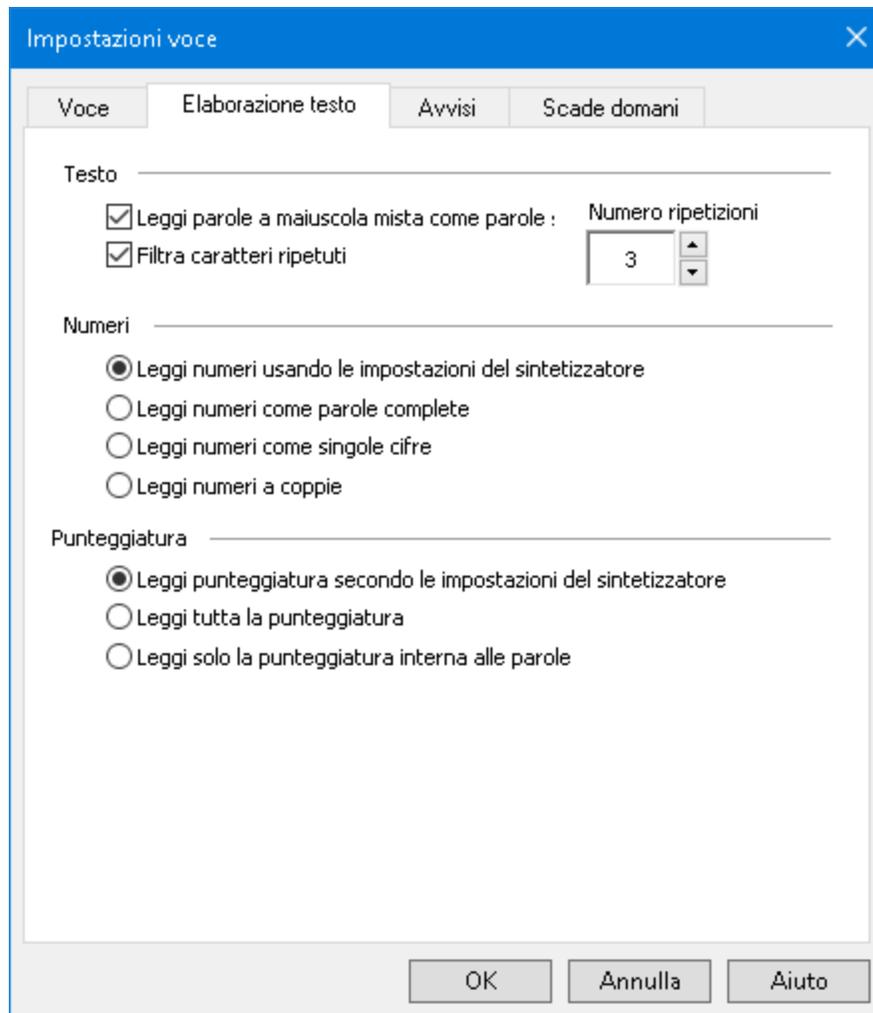

La scheda Elaborazione Testo

Impostazione	Descrizione
<i>Testo</i>	
<p>Leggi parole miste come parole separate</p>	<p>Separa le parole con maiuscole e minuscole miste, leggendole come fossero parole a sé stanti. Ad esempio, la parola ZoomText verrà separata, e verrà letta come Zoom Text anziché come zoomtext.</p>
<p>Filtra caratteri ripetuti</p>	<p>Limita il numero di volte in cui vengono pronunciati i caratteri ripetuti. Questo è utile quando si incontra una stringa di caratteri</p>

Impostazione	Descrizione
	ripetuti usati esclusivamente a scopo di formattazione.
Numero ripetizioni	Imposta il numero massimo di volte in cui un carattere ripetuto viene pronunciato. L'intervallo di possibilità va da 2 a 10.
<i>Numeri</i>	
Leggi numeri rispettando le impostazioni sintetizzatore	I numeri verranno pronunciati rispettando le impostazioni proprie del sintetizzatore in uso.
Leggi numeri come parole complete	I numeri verranno letti secondo la loro rappresentazione in parole. Ad esempio, il numero 1995 verrà letto come millenovecentonovantacinque.
Leggi numeri come singole cifre	I numeri verranno letti come singole cifre. Ad esempio, il numero 1995 verrà letto come uno nove nove cinque.
Leggi numeri come coppie di cifre	I numeri verranno letti come coppie di cifre. Ad esempio, il numero 1995 verrà letto come dieci novantacinque.
<i>Punteggiatura</i>	
Leggi punteggiatura rispettando le impostazioni sintetizzatore	I segni di punteggiatura verranno pronunciati rispettando le impostazioni proprie del sintetizzatore in uso.
Leggi tutta la punteggiatura	Verranno letti tutti i segni di punteggiatura.


Impostazione	Descrizione
Leggi solo la punteggiatura interna alle parole	Solo i segni di punteggiatura che si trovano all'interno delle parole verranno letti. Ad esempio, <code>info@visiondept.it</code> verrà letto come <code>info chiocciola visiondept punto it</code> .

Suggerimenti

I suggerimenti forniscono indicazioni verbali quando si incontrano lettere maiuscole, collegamenti ipertestuali, o si raggiunge l'inizio o la fine di un documento. I suggerimenti possono essere dei temporanei cambi di tono durante la lettura dell'elemento interessato, oppure messaggi parlati quali Link o Maiuscola prima dell'elemento.

▪ Per regolare le impostazioni dei suggerimenti

1. Nella scheda **Letto** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Voce** o spostatevi fino a **Voce** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Voce**, selezionate **Impostazioni**.
Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Voce.
3. Selezionate la scheda **Suggerimenti**.
4. Regolate le impostazioni come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

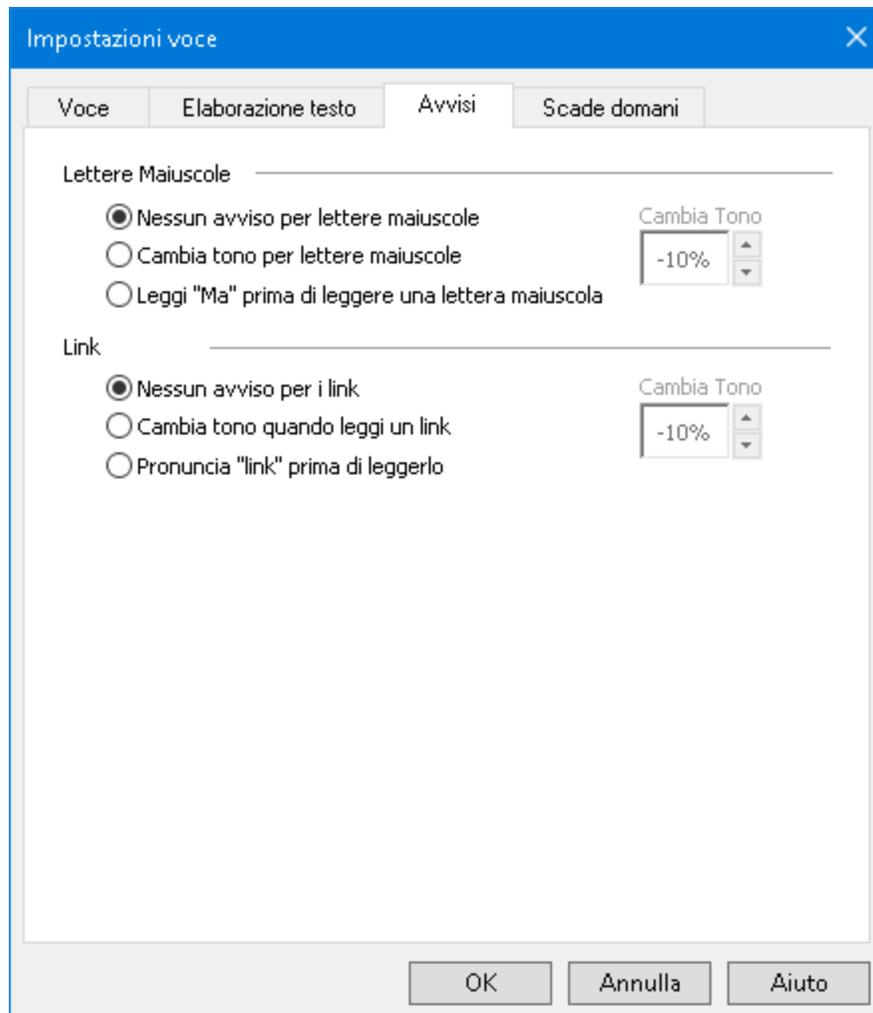

La scheda Suggestimenti

Impostazione	Descrizione
<i>Lettere Maiuscole</i>	
Nessun avviso per lettere maiuscole	Non verrà applicato alcun suggerimento quando viene letta una lettera maiuscola.
Cambia tono quando leggi una lettera maiuscola	Il tono della voce verrà alterato durante la lettura di una lettera maiuscola.
Dici "Maiuscola" prima di leggere una lettera maiuscola	Verrà detta la parola «Maiuscola» prima della lettera.

Impostazione	Descrizione
Cambio di Tono (Lettere Maiuscole)	Quando viene trovata una maiuscola, il tono della voce viene alterato di una certa percentuale. Il cambio di tono va da -50% a +50%, in incrementi di 10%.
Link	
Nessun suggerimento per i link	Non verrà applicato alcun suggerimento quando viene letto un link.
Cambia tono quando leggi un link	Il tono della voce verrà alterato durante la lettura di un link.
Dici "Link" prima di leggere un link	Verrà detta la parola «Link» prima di leggere un link ipertestuale.
Cambio di Tono (Link)	Quando viene trovato un link, il tono della voce viene alterato di una certa percentuale. Il cambio di tono va da -50% a +50%, in incrementi di 10%.

Audio

Per risparmiare batteria, molte cuffie Bluetooth entrano in modalità risparmio energetico quando non ricevono alcun suono. Di conseguenza, quando viene rilevato dell'output vocale, le cuffie potrebbero non riattivarsi in tempo e potrebbero andare perse alcune sillabe del parlato.

Per evitare che ciò accada, potete abilitare l'impostazione **Evita troncamento sintesi**. Questo manterrà le cuffie sempre attive riproducendo una traccia di silenzio. Non sentirete nulla, ma le cuffie rimarranno attive evitando interruzioni nel parlato.


Nota: la batteria delle cuffie potrebbe scaricarsi più velocemente se usate questa opzione.

▪ **Per attivare o disattivare Evita troncamento sintesi**

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Voce**, oppure passate a **Voce** e premete Freccia giù.
2. Nel menù **Voce**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Voce.

3. Scegliete la scheda **Audio**.
4. Selezionate o deselezionate la casella **Evita troncamento sintesi**.
5. Fate clic su **OK**.

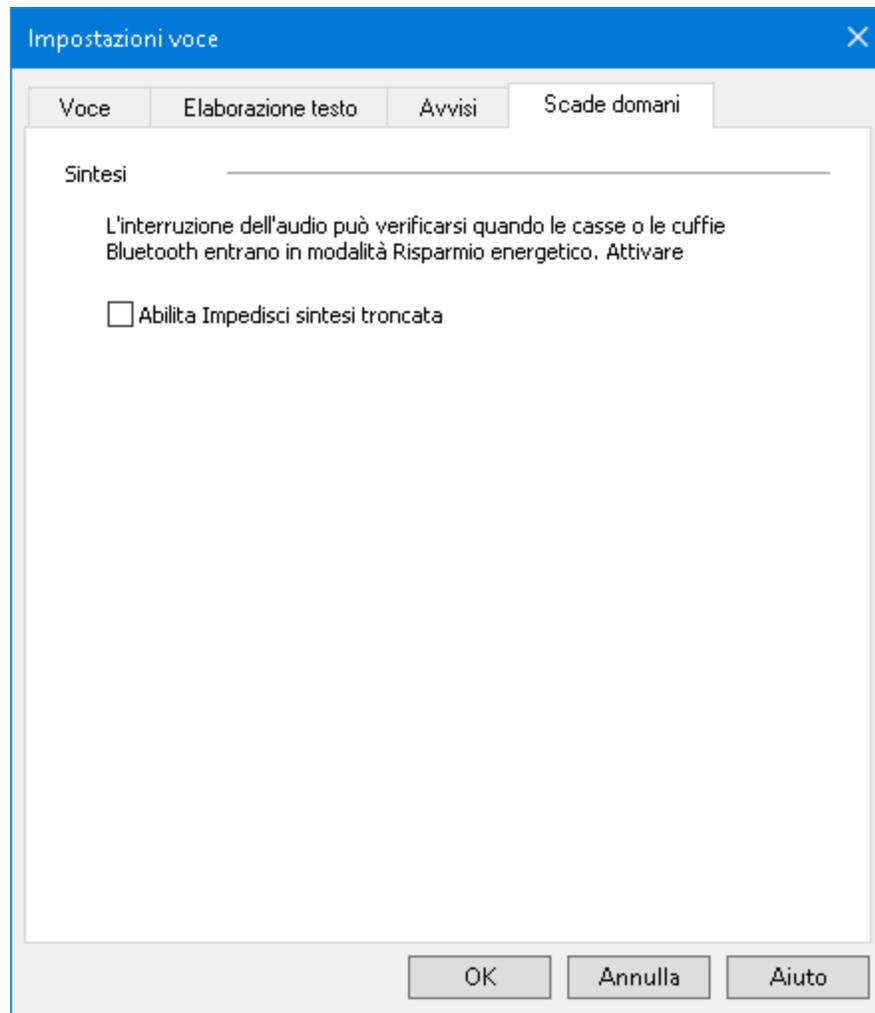

La scheda Audio

Riscontro

Le impostazioni di Riscontro controllano il modo in cui ZoomText parla mentre usate la tastiera, il mouse e vi spostate nelle applicazioni. Queste impostazioni vi permettono di aumentare o diminuire la quantità di informazioni pronunciate dal programma per adattarlo alle vostre esigenze personali.

- [Riscontro Tastiera](#)
- [Riscontro Mouse](#)
- [Riscontro Programmi](#)
- [Prolissità](#)

Riscontro Tastiera

Il riscontro della tastiera vi permette di sentire i tasti e le parole che digitate. Potete decidere di sentire singoli tasti, parole, o sia tasti che parole. Le parole verranno lette una volta completate, quando premete lo Spazio o inserite un carattere di punteggiatura. Potete anche scegliere quali gruppi di tasti stampati e non stampati volete ascoltare.

▪ Per passare tra le modalità di riscontro della tastiera

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Letto** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Tastiera**.
- Premete il tasto rapido Riscontro Tastiera: **Caps Lock + Alt + K**.

▪ Per regolare le impostazioni di riscontro tastiera


1. Nella scheda **Letto** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Tastiera** o spostatevi fino a **Tastiera** e premete il tasto freccia giù.

2. Nel menù **Tastiera**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Riscontro, che mostrerà la scheda Tastiera.

3. Regolate le impostazioni di riscontro tastiera come desiderate.

4. Fate clic su **OK**.

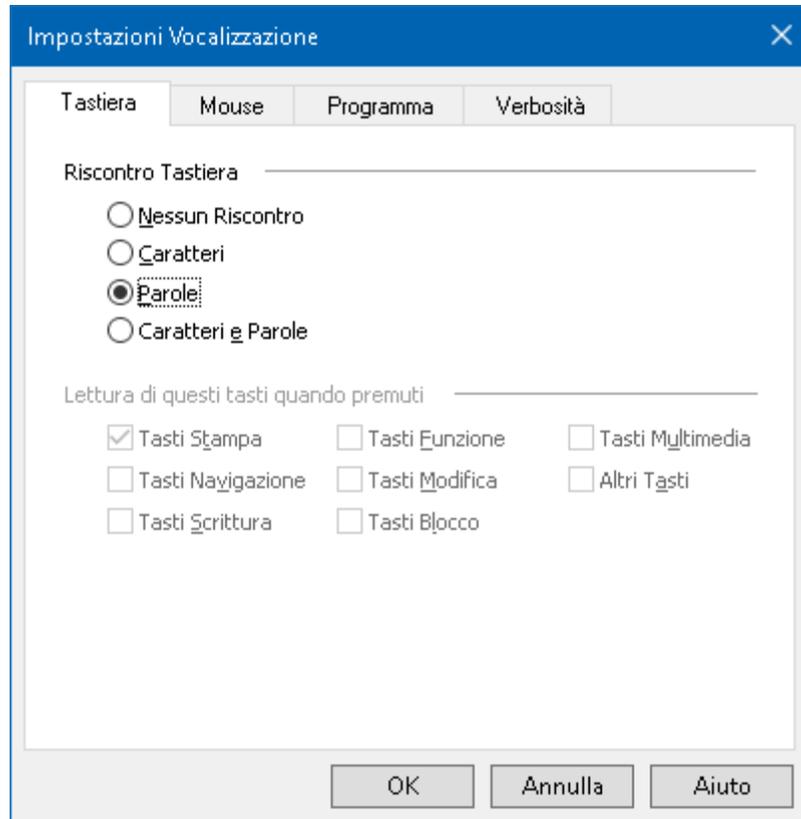

La scheda Tastiera

Impostazione	Descrizione
<i>Riscontro Tastiera</i>	
Nessun Riscontro	Disabilita il riscontro della tastiera.
Tasti	Attiva il riscontro dei singoli tasti. Potete selezionare quali tasti vengono pronunciati usando le impostazioni sotto la voce Pronuncia questi tasti quando vengono premuti .
Parole	Attiva il riscontro della tastiera per parole. Il riscontro avverrà solo quando una parola completata appare sullo schermo.
Tasti e Parole	Attiva il riscontro sia per i tasti che per le parole.

Impostazione	Descrizione
<i>Pronuncia questi tasti quando vengono premuti</i>	
Tasti Stampabili	Dà riscontro per tutti i caratteri stampabili: lettere, numeri e simboli.
Tasti di Navigazione	Dà riscontro per i tasti di navigazione: frecce, Home, End, Pagina Sue Pagina Giù.
Tasti di Editazione	Dà riscontro per i tasti di editazione: Backspace, Insert, Canc, Escapee Invio.
Tasti Funzione	Dà riscontro per i tasti funzione: da F1a F12.
Tasti Modificatori	Dà riscontro per i tasti modificatori: Alt, Ctrl, Shift e il tasto Windows.
Tasti di Blocco	Dà riscontro per i tasti di blocco e il loro stato: Caps Lock, Num Lock, e Scroll Lock.
Altri Tasti	Dà riscontro per tasti vari: Pausa, Stampa schermo e il tasto applicazioni.

*Nota:*Le selezioni alla voce **Pronuncia questi tasti...**Sono disponibili solo quando il riscontro della tastiera è impostato su **Tastio Tasti e Parole.**

Riscontro Mouse

Il riscontro del mouse legge automaticamente il testo sotto il puntatore. Man mano che spostate il mouse sullo schermo, verranno lette singole parole o intere righe di testo, istantaneamente o dopo un breve ritardo.

▪ **Per cambiare la modalità di riscontro del mouse**

Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Mouse**.
- Premete il tasto rapido Modalità Riscontro Mouse: **Caps Lock + Alt + M**


▪ **Per regolare le impostazioni di riscontro del mouse**

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Mouse** o spostatevi fino a **Mouse** e premete il tasto freccia giù.

2. Nel menu **Mouse**, scegliete **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Riscontro, che mostrerà la scheda Mouse.

3. Regolate le impostazioni di riscontro mouse come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.

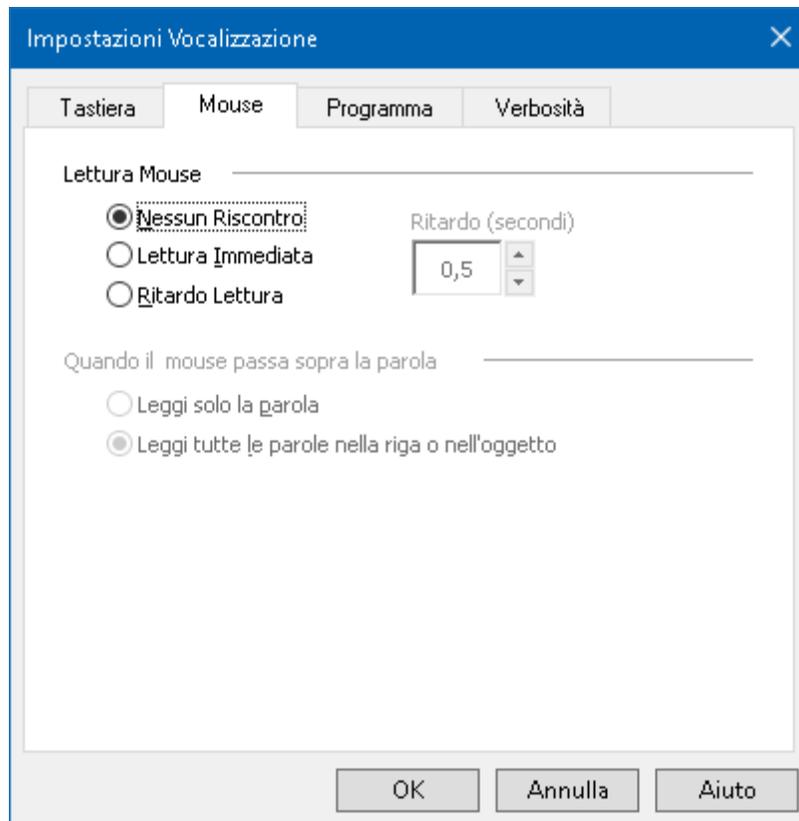

La scheda Mouse

Impostazione	Descrizione
<i>Riscontro Mouse</i>	
Nessun Riscontro	Disabilita il riscontro del mouse.
Riscontro Istantaneo	Abilita il riscontro istantaneo del mouse. Le parole verranno lette immediatamente quando il puntatore del mouse passa sopra di esse.
Riscontro al Passaggio	Abilita il riscontro del mouse dopo un ritardo. Le parole verranno lette dopo che il puntatore del mouse rimane su di esse per l'intervallo di tempo impostato.
Ritardo (secondi)	La quantità di tempo in secondi in cui il puntatore del mouse deve rimanere sopra un oggetto prima che venga letto. Questa

Impostazione	Descrizione
	impostazione si applica solo al Riscontro al Passaggio .
<i>Quando il mouse passa sopra una parola</i>	
Leggi solo la parola	Verrà letta solo la parola sotto il puntatore del mouse.
Leggi tutte le parole nella riga o nell'oggetto	Quando il puntatore del mouse si sposta ad una nuova riga di testo o un nuovo oggetto, tutte le parole nella riga o nell'oggetto verranno lette. Gli oggetti includono: barre del titolo, voci di menu, controlli delle finestre di dialogo, icone del desktop e pulsanti della barra delle applicazioni.

Nota: Quando usate il riscontro del mouse, tenendo premuto il tasto **Shift** potrete alternare la modalità di eco da **Leggi Solo la Parola** a **Leggi tutte le parole nella riga o nell'oggetto** (o viceversa).

Riscontro Programmi


Il riscontro programmi determina quali elementi vengono letti mentre vi spostate ed usate le applicazioni. Questi elementi includono: titoli di finestre, menu, finestre di dialogo, visualizzazioni ad elenco, visualizzazioni ad albero e testo su cui si muove il cursore. La quantità di informazioni che vengono lette per questi elementi può essere regolata usando le Impostazioni di Prolissità.

▪ Per regolare le impostazioni di riscontro programmi

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Impostazioni Riscontro** che appare come l'icona di una freccia diagonale nell'angolo in basso a destra del gruppo **Riscontro**.

Apparirà la finestra di dialogo Riscontro, che mostrerà la scheda Programmi.

2. Regolate le impostazioni di riscontro programmi come desiderate.
3. Fate clic su **OK**.

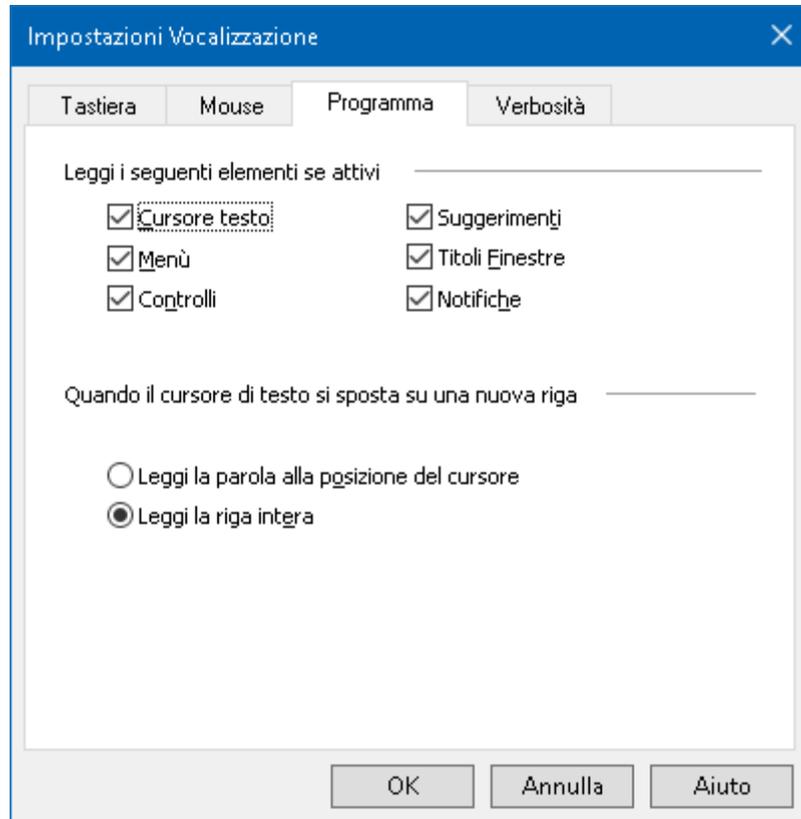

La scheda Programmi

Impostazione	Descrizione
<i>Pronuncia questi elementi quando diventano attivi</i>	
Cursore di testo	Quando il cursore di testo si sposta, il testo nella nuova posizione del cursore verrà letto. La quantità di testo che viene letta dipende da quanto il cursore si sposta; per carattere, parola, riga, frase o paragrafo.
Menù	Quando aprite un menù a tendina, ne verrà letto il titolo seguito da ogni elemento che evidenziate.
Controlli	Mentre vi spostate attraverso le finestre di dialogo, le visualizzazioni ad albero e le visualizzazioni ad elenco, ogni elemento verrà letto quando viene evidenziato o selezionato.

Impostazione	Descrizione
Tool Tip	Quando appare un ToolTip, verrà letto automaticamente.
Titoli delle Finestre	Quando una finestra diventa attiva, il contenuto della sua barra del titolo verrà letto.
Avvisi	Quando appare un popup di avviso, verrà letto.
<i>Quando il cursore di testo si sposta su una nuova riga</i>	
Leggi la parola al cursore	Quando il cursore del testo si sposta su una nuova riga, verrà letta la parola alla nuova posizione del cursore.
Leggi la riga intera	Quando il cursore di testo si sposta su una nuova riga, l'intera riga verrà letta.

Prolissità

La prolissità vi permette di regolare la quantità di informazioni che vengono lette sui controlli dei programmi quando diventano attivi o evidenziati. I controlli dei programmi includono: finestre di applicazioni e documenti, menu, finestre di dialogo, pulsanti, icone e altro ancora.

Tre livelli di prolissità - Basso, Medio e Alto - vi permettono di aumentare o diminuire rapidamente la prolissità. Un livello più alto fornisce più informazioni, mentre uno più basso fornisce meno informazioni. Ognuno di questi livelli di prolissità può essere completamente personalizzato secondo le vostre esigenze personali.

▪ Per passare tra i livelli di prolissità

Fate una delle azioni seguenti:


- Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Prolissità**.
- Premete il tasto rapido Livello di Prolissità: **Caps Lock + Alt + B**.

▪ Per regolare le impostazioni di prolissità

1. Nella scheda della **Lettore** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Prolissità** o spostatevi fino a **Prolissità** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menu **Prolissità** selezionate **Impostazioni**.

*Apparirà la finestra di dialogo **Riscontro**, che mostrerà la scheda **Prolissità**.*

3. Regolate le impostazioni di prolissità secondo le vostre esigenze.
4. Fate clic su **OK**.

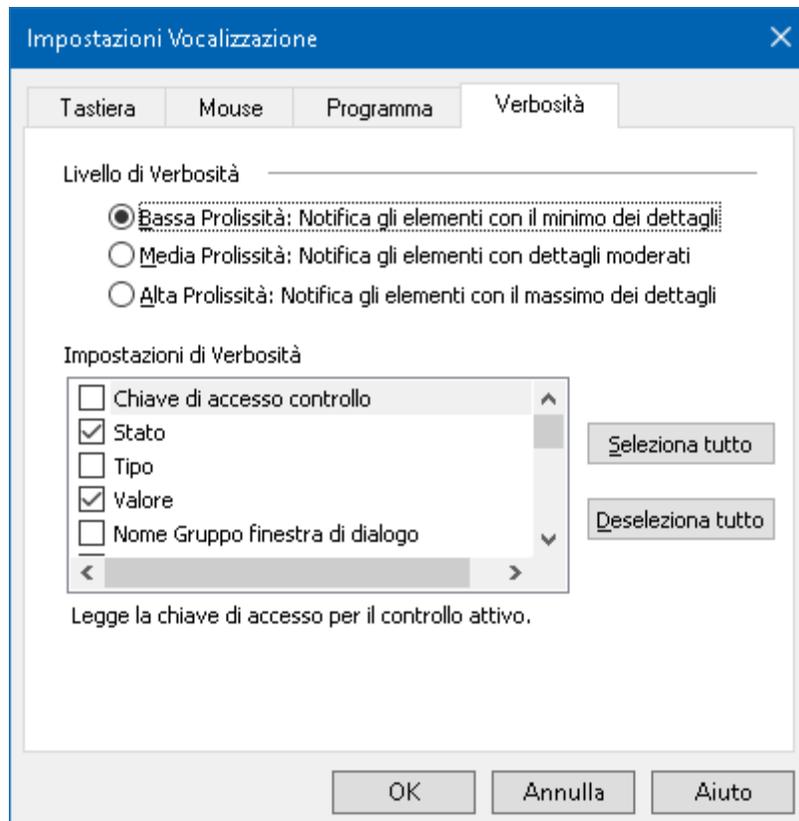

La scheda Prolissità

Impostazione	Descrizione
<i>Livello di Prolissità</i>	
Prolissità Bassa	Legge i controlli nei programmi con il minimo livello di dettaglio.
Prolissità Media	Legge i controlli nei programmi con un livello moderato di dettaglio.
Prolissità Alta	Legge i controlli nei programmi con il massimo livello di dettaglio.
Impostazioni di Prolissità	Un elenco di caselle di controllo che definiscono i vari livelli di prolissità. Le impostazioni visualizzate riflettono il livello di prolissità corrente e si aggiornano

Impostazione	Descrizione
	automaticamente quando viene selezionato un livello di prolissità diverso.
Seleziona Tutto	Seleziona tutti gli elementi nella casella elenco Impostazioni Prolissità.
Deseleziona Tutto	Deseleziona tutti gli elementi nella casella elenco Impostazioni Prolissità.

Lettores Applicazione

Il Lettores Applicazione è uno strumento di produttività che legge automaticamente documenti, pagine web ed e-mail mentre voi seguite a schermo, oppure se preferite rilassare gli occhi e ascoltare. Il Lettores Applicazione può leggere automaticamente il testo dall'inizio alla fine, scorrere velocemente avanti e indietro, oppure leggere aree specifiche del testo che selezionate cliccando e trascinando con il mouse. In qualunque modo decidiate di leggere, con il Lettores Applicazione sarà facile.

- [Modalità di lettura del Lettores Applicazione](#)
- [L'Ambiente Vista Testo](#)
- [Avviare ed utilizzare il Lettores Applicazione](#)
- [Impostazioni Vista Applicazione](#)
- [Impostazioni Vista testo](#)
- [Impostazioni Condivise](#)

Modalità di lettura del Lettore Applicazione


Prima di iniziare a usare il Lettore Applicazione, è necessario comprendere le diverse modalità di lettura e la loro disponibilità in diverse applicazioni. Comprendere queste caratteristiche vi aiuterà a utilizzare il Lettore Applicazione nel modo più utile e produttivo.

Il Lettore Applicazione fornisce tre modalità di lettura: Vista Applicazione, Vista Testo e lo Strumento SpeakIt.

- **Vista Applicazione** legge direttamente nell'applicazione sorgente. La visualizzazione della vostra applicazione o documento non viene modificata, quindi potrete entrare o uscire dal Lettore Applicazione in modo assolutamente trasparente. La Vista Testo è ideale per gli utenti che vogliono un'esperienza di lettura integrata direttamente nell'applicazione, o che non richiedono le caratteristiche di miglioramento del testo fornite dalla Vista Testo.
- **Vista Testo** legge in un ambiente speciale, nel quale il testo viene riformattato per una lettura più facile. Il testo viene presentato in una singola riga di testo che scorre orizzontalmente (modalità Singola Riga) o in righe (modalità Tutto Schermo). In entrambe le viste vi sarà possibile modificare impostazioni quali carattere, contrasto dei colori, evidenziazione delle parole e livello di ingrandimento. La Vista Testo è ideale per gli utenti che preferiscono leggere visivamente, ma desiderano farlo in un ambiente di lettura migliorato. Per saperne di più sull'Ambiente Vista Testo, consultate [L'Ambiente Vista Testo](#).
- **Lo Strumento SpeakIt** legge precise aree dello schermo, che potete selezionare cliccando e trascinando con il mouse. Qualsiasi testo visibile sullo schermo può essere letto, anche se si trova al di fuori dell'applicazione attiva. Lo strumento SpeakIt è ideale per leggere istantaneamente blocchi di testo tramite semplici gesti del mouse.

Potete utilizzare il Lettore in quasi tutte le applicazioni; tuttavia, le modalità di lettura disponibili dipenderanno dal livello di supporto del Lettore per l'applicazione specifica: Supporto Completo o Supporto Base.

- **Supporto Completo** permette di utilizzare tutte e tre le modalità di lettura: Vista Testo, Vista Applicazione e Strumento SpeakIt. Il Supporto Completo è disponibile nella maggior parte delle applicazioni che visualizzano lunghi passaggi di testo, come Microsoft Word, Microsoft Outlook, Adobe Reader e Internet Explorer.
- **Il Supporto Base** vi permette di usare solo lo strumento SpeakIt. Se provate ad avviare il Lettore Applicazione in Vista Testo o Vista Applicazione in un'applicazione dove è fornito soltanto il supporto Base, il Lettore si avvierà automaticamente in modalità Strumento SpeakIt.

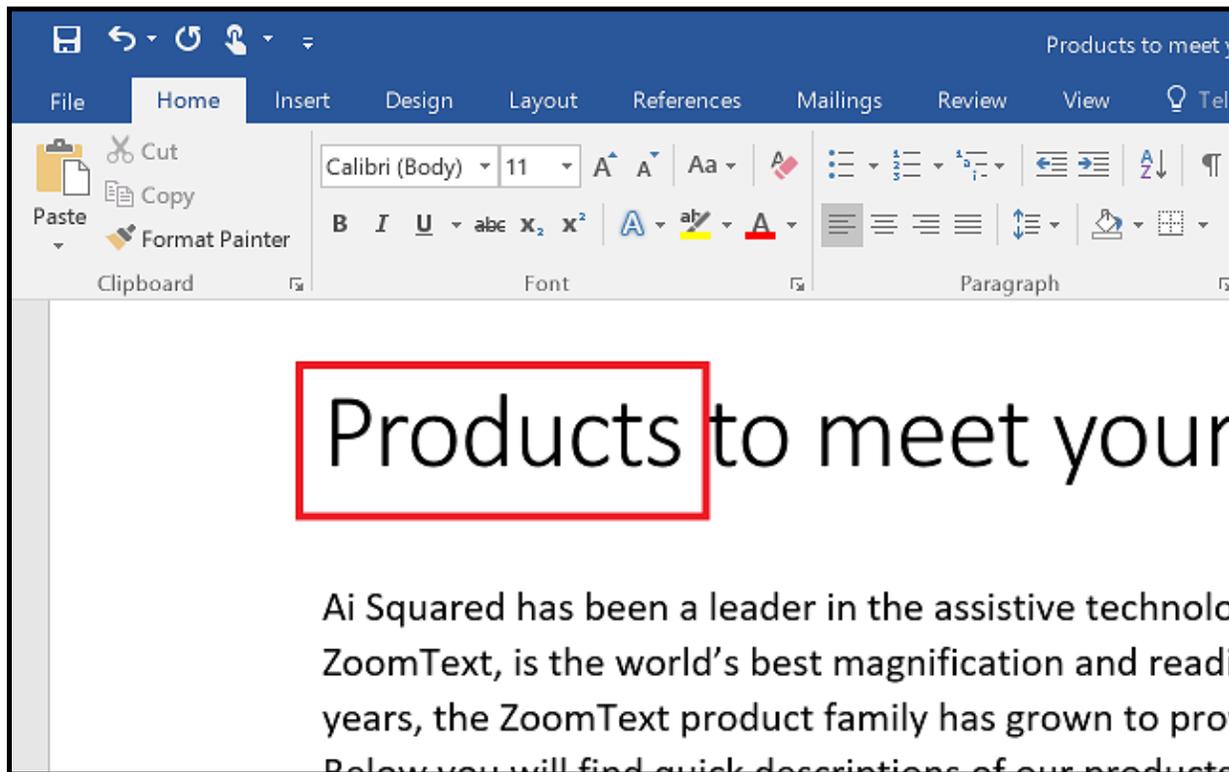


Lettore Applicazione che evidenzia le parole pronunciate in Microsoft Word.


L'ambiente della vista Testo

La Vista Testo del Lettore Applicazione è un ambiente speciale di lettura in cui il testo è riformattato per una più facile lettura. Il testo viene presentato in una sola riga di testo che scorre in orizzontale, chiamato Vista Telescrivente, o righe multiple di testo, chiamato Vista Suggeritore. In entrambe le visualizzazioni è possibile selezionare la propria scelta di tipo di carattere, colori ad alto contrasto, parole evidenziate e livello di ingrandimento.

La vista Testo occupa l'intero schermo con una barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo e il testo del documento di sotto di essa. Il testo del documento è formattato e visualizzato in base alle impostazioni correnti della vista testo.

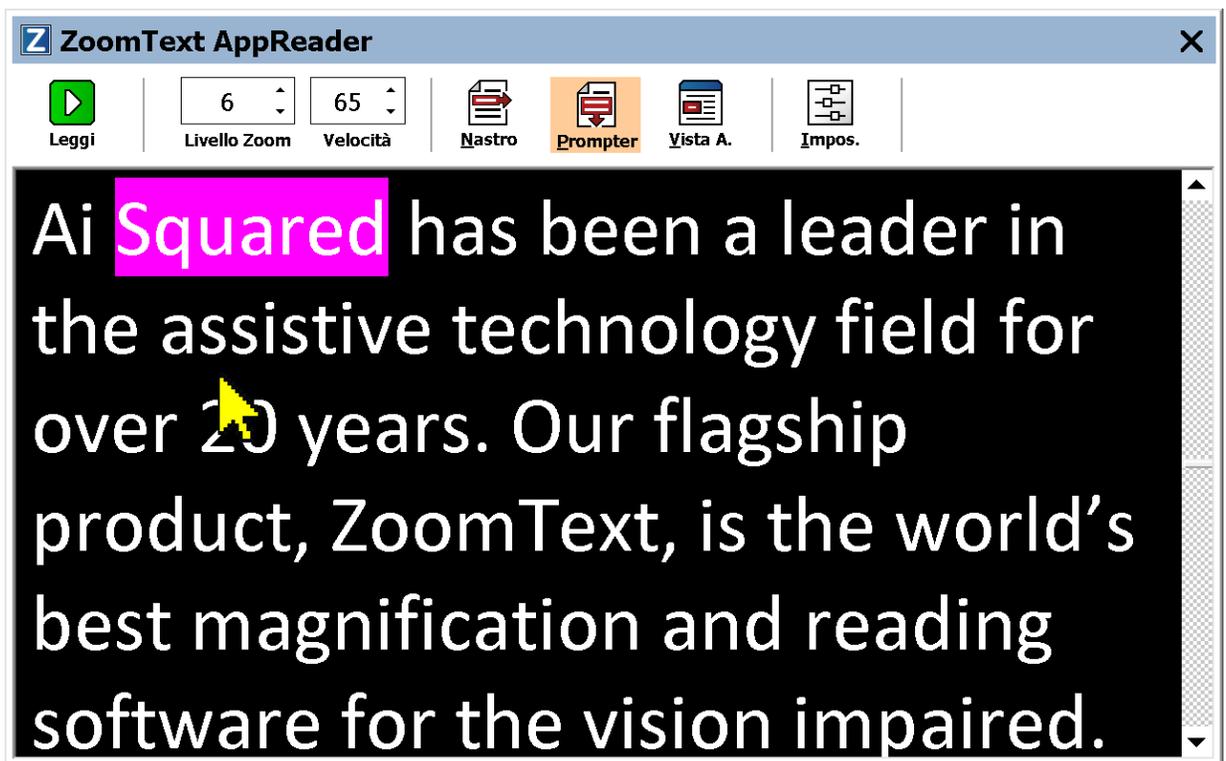

La vista testo del Lettore Applicazione in modalità suggeritore.

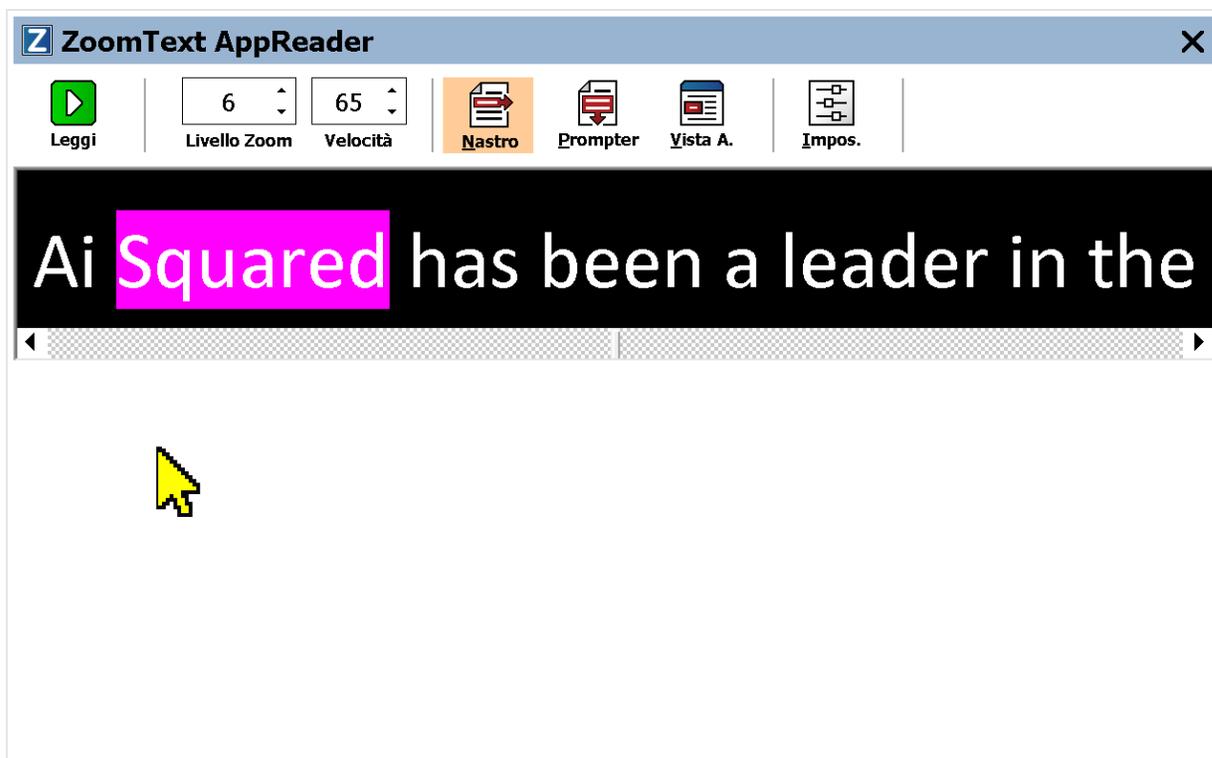

La Vista Testo del Lettore Applicazione in modalità telescrivente.

La barra degli strumenti della vista Testo fornisce i controlli essenziali per operare con la vista, e fornisce l'accesso alle finestre di dialogo di configurazione per la visualizzazione della Vista Testo.



La barra degli strumenti della Vista Testo

- **Avvia/Pausa.** Avvia e interrompe la lettura della parola evidenziate. Quando viene eseguita la modalità di riproduzione, viene visualizzato il pulsante Pausa sulla barra degli strumenti.
- **Livello di Zoom.** Imposta il livello di ingrandimento usato dalla Vista Testo, da 1x a 36x.
- **Velocità.** Controlla la velocità di lettura di ZoomText.

- **Telescrivente.** Consente di visualizzare una sola riga di testo. Durante la lettura, il testo scorre in orizzontale come un nastro della telescrivente.
- **Suggeritore.** Visualizza righe multiple di testo con a capo automatico che non superano la larghezza dello schermo della Vista Testo. Durante la lettura, il testo scorre verticalmente come un gobbo.
- **Vista Applicazione** Scambia il lettore Applicazione da Vista testo a Vista Applicazione
- **Impostazioni.** Apre la finestra di dialogo del lettore Applicazione per modificare le impostazioni della Vista Testo.

Avviare ed utilizzare il Lettore Applicazione

Ci sono vari modi per lanciare il Lettore Applicazione nelle sue varie modalità, comprese opzioni di menu e tasti di scelta rapida. Questi metodi sono descritti di seguito, insieme ai comportamenti unici di ogni modalità.

▪ Per lanciare il Lettore Applicazione usando il comando Leggi dal Puntatore

- Posizionate il puntatore del mouse sulla parola dalla quale volete iniziare la lettura, poi premete il comando Leggi dal Puntatore: **Caps Lock + Alt + Click Sinistro**

Il Lettore Applicazione si avvierà nella modalità selezionata e inizierà a leggere dalla parola cliccata. Per interrompere la lettura, fate clic o premete Invio. Per ricominciare, fate doppio click (su qualsiasi parola) o premete Invio. Per istruzioni complete sulla lettura con il Lettore Applicazione, consultate "Leggere con il lettore Applicazione" qui sotto.

▪ Per lanciare il Lettore Applicazione direttamente in Vista Applicazione o Vista Testo

- Scegliete **Usa Vista Testo** o **Usa Vista Applicazione** nel menu del pulsante **Lettore Applicazione** o premete uno dei seguenti tasti di scelta rapida:
 - Lancia Vista Applicazione: **Caps Lock + Alt + A**
 - Lancia Vista Testo: **Caps Lock + Alt + T**

Il Lettore Applicazione si avvierà nella modalità selezionata e inizierà a leggere dalla posizione corrente del cursore di testo. Se non esiste un cursore di testo, il Lettore Applicazione inizierà a leggere dalla prima parola visibile all'interno della vista ingrandita, che si trova all'interno della finestra. Altrimenti, il Lettore Applicazione inizierà a leggere dalla prima parola visibile nell'applicazione. Per istruzioni

complete sulla lettura con il Lettore Applicazione, consultate "Leggere con il lettore Applicazione" qui sotto.

▪ **Per lanciare lo strumento SpeakIt**

- Scegliete **Usa lo Strumento SpeakIt** nel menu del pulsante **Lettore Applicazione** o premete il tasto di scelta rapida **Lancia Strumento SpeakIt: Caps Lock + Alt + S**

Lo Strumento SpeakIT si attiverà.

▪ **Per lanciare il Lettore Applicazione nella modalità selezionata (quella selezionata dal menù)**

- Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Lettore Applicazione** o premete il tasto di scelta rapida **Lancia Lettore Applicazione: Caps Lock + Alt + R**

Il Lettore applicazione si avvierà nella modalità selezionata.

Leggere con il Lettore Applicazione

▪ **Per avviare e interrompere la lettura automatica**

Premete **Invio** o fate doppio click su qualsiasi parola da cui volete cominciare a leggere.

▪ **Per andare avanti e indietro per parole, righe, frasi o paragrafi**

Usate i comandi di navigazione elencati qui sotto.

▪ **Per passare tra Vista Applicazione e Vista Testo**

Premete **Tab**.

▪ **Per uscire dal Lettore Applicazione**

Fate un **Click Destro** o premete **Esc**.

Quando uscite dal Lettore Applicazione, il cursore si posizionerà automaticamente sull'ultima parola che è stata evidenziata nel Lettore Applicazione, se un cursore esiste.

Comandi di navigazione del Lettore Applicazione

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per lanciare il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Lettore Applicazione dal puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Esegui Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Esegui Vista testo	Caps Lock + Alt + T
Esegui strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S
Esegui Lettore Applicazione (modalità selezionata)	Caps Lock + Alt + R

Mentre il Lettore Applicazione è attivo, i seguenti tasti modali possono essere usati per lavorare con il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti Modali
Parola Successiva	Ctrl + Freccia Destra
Parola Precedente	Ctrl + Freccia Sinistra
Frase Successiva	Freccia Destra
Frase Precedente	Freccia Sinistra
Paragrafo Successivo	Freccia Giù
Paragrafo Precedente	Freccia Su
Pagina Successiva	Pagina Giù

Comando	Tasti Modali
Pagina Precedente	Pagina Su
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Su
Riga Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Destra
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Giù
Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Sinistra
Prima Parola nella Riga	Home
Ultima Parola nella Riga	End
Inizio del documento	Ctrl + Home
Fine del documento	Ctrl + End
Link Successivo	L
Link Precedente	Shift + L
Attiva Link	Ctrl + Invio

* Quando usate il comando Parola Corrente, pressioni ripetute entro due secondi faranno quanto segue:

- Prima pressione: legge la parola
- Seconda pressione: fa lo spelling della parola
- Terza pressione: fa lo spelling fonetico della parola («Ancona, Bologna, Como»...)

Impostazioni Vista Testo


Le impostazioni della Vista Testo vi permettono di personalizzare l'aspetto del testo e l'evidenziazione delle parole nell'ambiente Vista Testo.

▪ **Per regolare le impostazioni della Vista Testo:**

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, scegliete **Lettore Applicazione > Impostazioni Vista Testo**.

Si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni Lettore Applicazione, nella scheda Vista Testo.

2. Regolate le impostazioni secondo le vostre esigenze.
3. Cliccate **OK**.

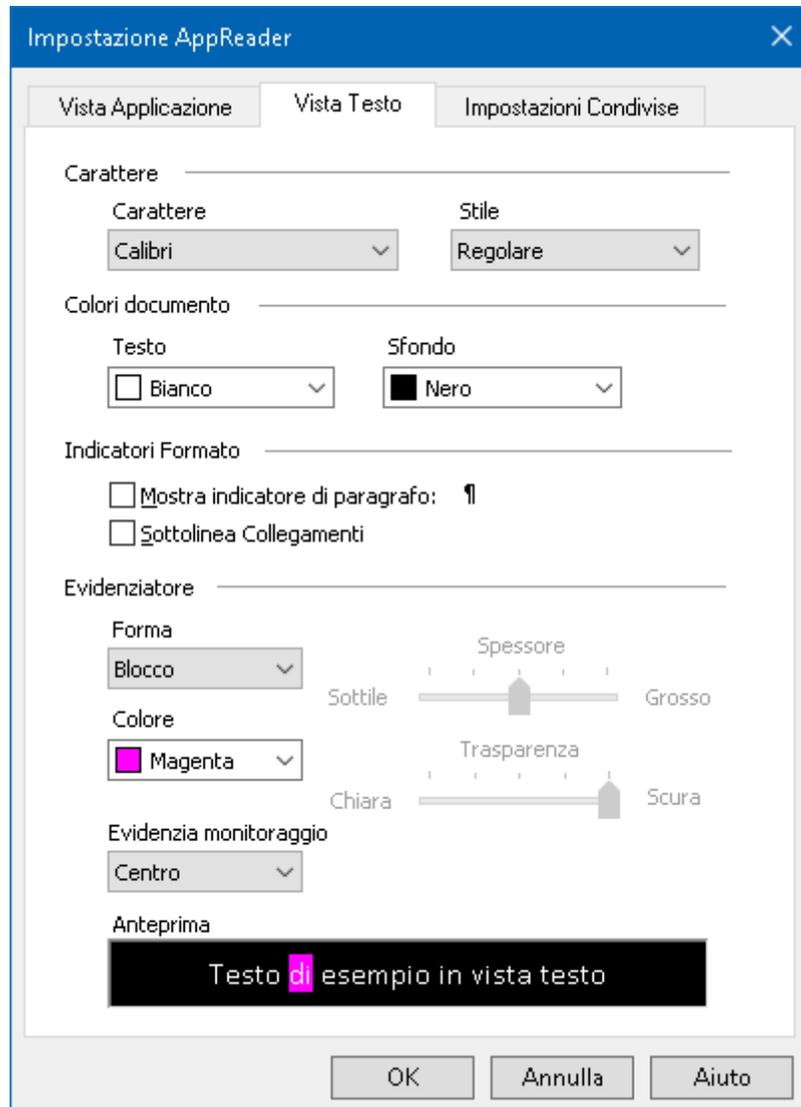

La scheda Vista Testo

Impostazione	Descrizione
Caratteri	
Carattere	Imposta il tipo di carattere con cui sarà visualizzato il documento catturato, come Arial, Tahoma o Verdana.
Stile	Imposta lo stile del carattere con cui sarà visualizzato il documento catturato, come Normale, Grassetto o Corsivo.

Impostazione	Descrizione
<i>Colori documento</i>	
Testo	Imposta il colore del testo in cui sarà visualizzato il documento catturato. Il testo e lo sfondo non possono essere impostati sullo stesso colore.
Sfondo	Seleziona il colore di sfondo per la Vista Testo. Il testo e lo sfondo non possono essere impostati sullo stesso colore.
<i>Contrassegni Formato</i>	
Mostra marcatori di paragrafo	Mostra i marcatori di paragrafo dove finiscono i paragrafi nel documento sorgente.
Sottolinea Link	Quando è selezionato, i collegamenti ipertestuali sono sottolineati nelle viste a Singola Riga e a Tutto Schermo.
<i>Evidenziazione</i>	
Forma	Imposta la forma usata per evidenziare le parole: Blocco, Sottolineatura, Cornice o Cuneo.
Colore	Imposta il colore dell'evidenziazione.
Spessore 1, 2	Imposta lo spessore dell'evidenziazione delle parole.
Trasparenza 2	Imposta la trasparenza dell'evidenziazione delle parole.
Tracciamento Evidenziazione	Imposta il tipo di tracciamento: Bordo, Centro o Salto in avanti. Con l'allineamento Bordo, la finestra ingrandita scorre solo quanto basta per mantenere visibile la parola evidenziata.

Impostazione	Descrizione
	Con l'allineamento centrato, essa scorrerà in modo da mantenere la parola evidenziata al centro della finestra. Con Salto Avanti, quando la parola evidenziata esce dalla vista ingrandita, la finestra scorrerà per portare la parola evidenziata nell'angolo superiore sinistro.
Anteprima	Visualizza un testo di esempio con un'anteprima delle impostazioni di carattere, colore ed evidenziazione selezionate.

1 Questa impostazione non è disponibile quando la forma dell'evidenziazione è impostata su 'Blocco'.

2 Questa impostazione non è disponibile quando la forma dell'evidenziazione è impostata su 'Blocco' o il colore dell'evidenziazione è impostato su 'Inverti'.

Nota: Ulteriori impostazioni per la Vista Testo sono disponibili nella scheda impostazioni Condivise.

Aree di Lettura

Le Aree di lettura vi permettono di vedere e sentire istantaneamente specifiche posizioni nelle vostre applicazioni. Per esempio, la vostra applicazione di database potrebbe visualizzare una dozzina di campi di informazioni, o più. Nel vostro flusso di lavoro standard potrebbero però interessarvi solo alcuni di questi campi. Usando le Aree di Lettura, potete vedere e/o sentire questi campi in modo istantaneo semplicemente premendo una combinazione di tasti.

Potete creare fino a 10 aree di lettura per ogni applicazione. Appena passate ad un'applicazione, le relative aree di lettura verranno caricate e saranno pronte all'uso.

- [Creare, modificare e eliminare](#)
- [Usare le Aree di Lettura](#)
- [La barra degli strumenti Aree di Lettura](#)
- [Impostazioni Aree di Lettura](#)

Creare, Modificare e Eliminare Aree di Lettura

Creare una nuova area di lettura è un processo semplice. Per la maggior parte delle nuove aree, dovete semplicemente tracciare la porzione di schermo interessata, digitare un nome per l'area, ed infine decidere se l'area dovrà essere visualizzata, letta o entrambe. Potete sempre modificare l'area di lettura in un secondo momento, quindi non preoccupatevi troppo di fare errori.

▪ **Per creare una nuova area di lettura**

1. Aprite l'applicazione in cui volete creare l'area di lettura. Assicuratevi che la scheda, la vista o la finestra che vi interessa sia visualizzata.
2. Attivate lo strumento di Creazione Area facendo una delle azioni seguenti:
 - Passate all'interfaccia utente di ZoomText. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate **Aree > Nuova**.
 - Premete il tasto rapido Crea Area: **Caps Lock + Alt + C**.

Lo strumento di Creazione Aree verrà attivato, e mostrerà tutte le aree create per l'applicazione attiva.

3. Spostate il puntatore del mouse in modo che la porzione di schermo della nuova area sia visualizzata.
4. Tenete premuto il tasto sinistro del mouse, trascinate il rettangolo di selezione attorno all'area, infine rilasciate il pulsante.

Quando completate il trascinamento rilasciando il tasto sinistro del mouse, la finestra di dialogo Aree di lettura verrà attivata. Questa finestra di dialogo vi permette di dare un nome alle vostre aree e selezionare le relative opzioni. Per informazioni sulla finestra di dialogo aree di Lettura, consultate [Impostazioni Aree di Lettura](#).

5. Nella finestra di dialogo **Nome Area**, digitate un nome per la vostra area di lettura.

Quando vi spostate al controllo successivo nella finestra, il nome della nuova area apparirà nella casella elenco Aree di Lettura.

6. Sotto la voce **Area Relativa A**, selezionate la posizione dell'area relativamente alla finestra dell'applicazione.
7. Alla voce **Azioni Area**, invece, selezionate le opzioni desiderate.
8. Per testare la nuova area, fate clic su **Attiva**.

La finestra di dialogo Aree di Lettura sarà temporaneamente nascosta mentre l'area viene mostrata o letta ad alta voce, a seconda dell'opzione che avete scelto.

9. Per creare ulteriori aree, fate clic su **Nuova Area**, quindi ripetete i passi da 4 a 9.
10. Quando avete finito di creare e modificare le aree, fate clic su **OK**.

▪ **Per modificare un'area di lettura**

1. Aprite l'applicazione che contiene l'area di lettura che volete modificare.
2. Attivate lo strumento di Modifica Zone facendo una delle seguenti azioni:
 - Passate all'interfaccia utente di ZoomText. Nella scheda **Lettores** della barra degli strumenti, selezionate **Aree > Modificca**.
 - Premete il tasto Modifica Aree: **Caps Lock + Alt + E**.

Lo strumento di Modifica Aree verrà attivato, e mostrerà tutte le aree create per l'applicazione attiva. La barra degli strumenti Aree di Lettura verrà mostrata sopra l'area attiva.

3. Muovete il puntatore per mettere in vista l'area desiderata, oppure premete i pulsanti Precedente e Successiva nella barra degli strumenti Aree di Lettura.

Nota: i pulsanti **Precedente** e **Successiva** risulteranno oscurati se è stata creata una sola area di lettura.

4. Fate clic dentro l'area per attivare la barra degli strumenti e le maniglie di ridimensionamento, poi regolate l'area come segue:
 - Per ridimensionare l'area, trascinate una delle maniglie.
 - Per spostare l'area, cliccate dentro di essa.
 - Per testare la lettura dell'area, premete il relativo pulsante **Riproduci**.
5. Per spostarvi ad un'altra area, premete il numero dell'area o fate clic sui pulsanti **Precedente** e **Successiva**.
6. Per modificare un'altra area, ripetete i passi 3 e 4.
7. Per uscire dallo strumento di **Modifica Aree**, fate click con il tasto destro o premete **Esc**.

▪ **Per eliminare un'area di lettura**

1. Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate **Aree > Impostazioni**.

*Apparirà la finestra di dialogo **Aree di Lettura**.*

2. Nella casella combinata **Mostra Aree Definite Per**, scegliete l'applicazione per la quale avete definito l'area che volete eliminare.

L'elenco di aree verrà aggiornato per mostrare le aree associate all'applicazione scelta.

3. Nella casella elenco **Aree**, selezionate l'area che volete eliminare.
4. Fate clic su **Elimina**.

L'area eliminata verrà rimossa dall'elenco delle aree.

5. Per eliminare un'altra area, ripetete i passi da 2 a 4.
6. Quando avete finito di eliminare le aree, fate clic su **OK**.

Usare le Aree di Lettura

Una volta che avete creato delle aree di lettura per un'applicazione, potete usarle ogni volta che l'applicazione attiva. Potete attivare un'area alla volta, tramite il menù o il tasto rapido, oppure entrare in una modalità che vi permette di navigare tra tutte le aree di lettura.

▪ Per attivare un'area di lettura specifica

1. Aprite l'applicazione che contiene le aree di lettura che volete attivare.
2. Per attivare l'area desiderata, fate una delle azioni seguenti:
 - Passate all'interfaccia utente di ZoomText. Nella scheda **Lettores** della barra degli strumenti, selezionate **Aree > Attiva > Numero Zona**.
 - Premete il tasto rapido Attiva Area: **Caps Lock + Alt + Numero Area**.
 - Premete il tasto rapido Elenco Aree: **Caps Lock + Alt + L**, poi selezionate l'area desiderata dal menù.
 - Premete i tasti rapidi Area Precedente e Area Successiva:

Area Successiva: **Caps Lock + alt + N**

Area Precedente: **Caps Lock + Alt + P**.

L'area di lettura selezionata verrà visualizzata e/o letta, a seconda delle impostazioni scelte.

Le aree di lettura per ogni applicazione sono numerate, da 1 a 10. I tasti rapidi delle Aree di Lettura corrispondono a questi numeri. Ad esempio, il tasto per l'area di lettura 1 è **Caps Lock + Alt + 1**, per l'area 2 sarà **Caps Lock + Alt + 2**, e così via.

Nota: il tasto per l'area di lettura 10 è **Caps Lock + Alt + 0**.

■ Per navigare tra tutte le aree di lettura

1. Aprite l'applicazione che contiene le aree di lettura tra le quali volete navigare.
2. Per attivare la modalità Navigazione Aree, fate una delle azioni seguenti:
 - Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate **Navigazione Aree**
 - Premete il tasto rapido Naviga Aree: **Caps Lock + Alt + G**.

La modalità Navigazione Aree verrà attivata, e la barra degli strumenti delle Aree di Lettura sarà visualizzata sopra la prima area attiva. Verranno letti il nome e il numero dell'area.

3. Per avviare e interrompere la lettura dell'area, premete Riproduci/Pausa.

Nota: il pulsante Riproduci/Pausa non sarà disponibile (oscurato) quando vi trovate su un'area non impostata per essere letta.


4. Per andare ad un'altra area, usate i pulsanti Precedente e Successiva.
5. Per uscire dalla modalità Navigazione, premete **Esc** o il tasto destro del mouse.

La barra degli strumenti Aree di Lettura

La barra degli strumenti Aree di Lettura appare sopra l'area attiva ogni volta che accedete a un'area di lettura. La barra fornisce controlli per spostarvi e leggere nell'area selezionata.



Barra degli Strumenti Aree di
Lettura:
modalità Modifica e Navigazione

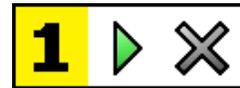

Barra degli Strumenti Aree di
Lettura:
modalità Attivazione

	<p>Riproduci/Pausa/Stop. Avvia e interrompe la lettura. Quando viene eseguita la modalità di Riproduzione, il pulsante Pausa o Stop apparirà sulla barra degli strumenti, a seconda della modalità attiva. Il pulsante Pausa appare nelle modalità Navigazione o Attivazione, dato che in queste modalità potete interrompere e riprendere la lettura alla parola selezionata. In modalità di Modifica apparirà invece il pulsante Stop, dato che la lettura riprende sempre alla prima parola nell'area.</p> <p>Tasto rapido: Invio</p>
	<p>Precedente. Attiva l'area di lettura precedente.</p> <p>Tasto rapido: Shift + Tab</p> <p><i>Nota:</i> questo pulsante non appare in modalità di Attivazione.</p>
	<p>Successiva. Attiva l'area di lettura successiva.</p> <p>Tasto Rapido: Tab</p> <p><i>Nota:</i> questo pulsante non appare in modalità di Attivazione.</p>



Chiudi. Esce dalla modalità Area di Lettura.

Tasto Rapido: **Esc**

Impostazioni delle Aree di Lettura

Le Impostazioni delle Aree di lettura vi permettono di creare, analizzare e modificare aree di lettura. Quando viene attivata, la finestra di dialogo Aree di Lettura mostra un elenco di aree di lettura definite per l'applicazione attiva. Selezionando un'area nell'elenco Aree, potete modificare le sue impostazioni, attivare l'area o eliminarla. Potete anche creare una nuova area o scorrere tra le aree create per l'applicazione attuale.


Per informazioni complete su come creare, modificare, eliminare o attivare le aree di lettura, consultate [Creare, Modificare e Eliminare Aree di lettura](#) e [Usare le Aree di Lettura](#).

■ Per regolare le impostazioni delle Aree di Lettura

1. Nella scheda **Letture** della barra degli strumenti, selezionate **Aree > Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Aree di Lettura, che mostrerà l'elenco delle aree create.

2. Regolate le impostazioni delle Aree di Lettura come desiderate.
3. Fate clic su **OK**.

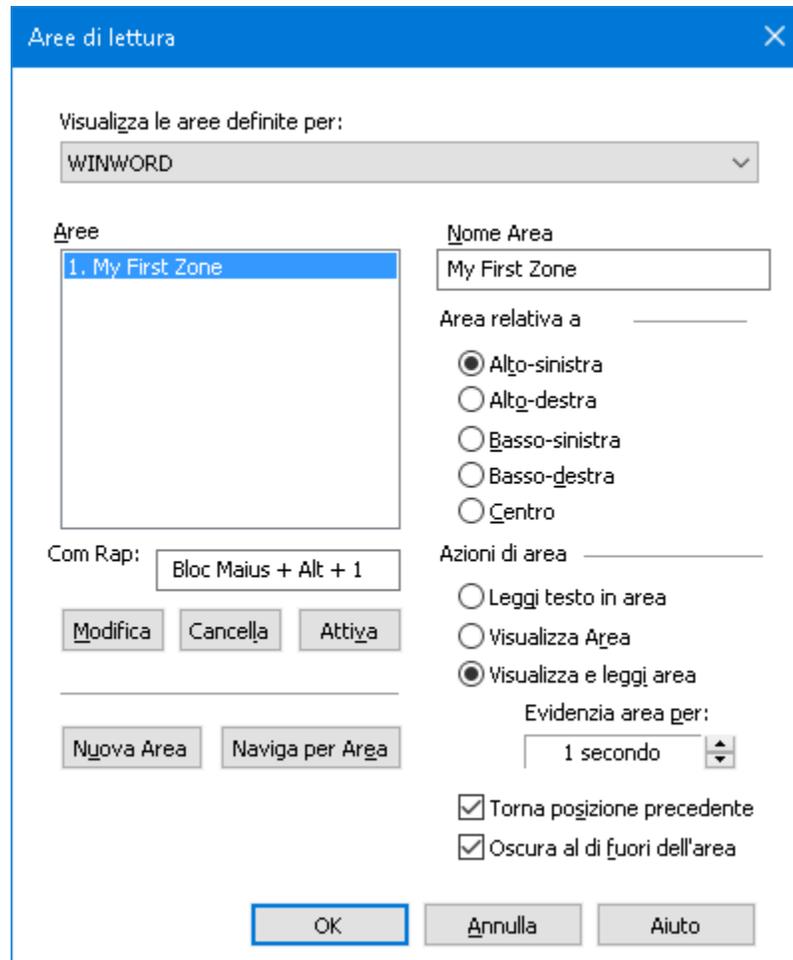

La finestra di dialogo Aree di Lettura.

Impostazione	Descrizione
Visualizza le aree definite per:	Mostra un elenco di applicazioni attualmente in esecuzione. Le aree associate all'applicazione selezionata appariranno nella casella elenco Aree .
Aree	Mostra un elenco di aree associate all'applicazione selezionata, selezionate nell'elenco Visualizza Aree Definite Per .
Tasto Rapido	Mostra il tasto rapido per l'area selezionata.
Modifica	Attiva lo strumento Modifica Area. Quando è attivata, la finestra di dialogo Aree di Lettura

Impostazione	Descrizione
	verrà nascosta e appariranno le aree associate all'applicazione selezionata. Apparirà anche lo strumento Modifa Area, il quale vi permette di ridimensionare e spostare qualsiasi area.
Elimina	Elimina l'area selezionata.
Attiva	Attiva l'area selezionata. Quando un'area viene attivata, la finestra di dialogo Aree di Lettura viene nascosta, e l'area selezionata viene mostrata o letta a seconda delle impostazioni che avete scelto. In seguito, apparirà nuovamente la finestra di dialogo Aree di Lettura.
Nuova Area	Attiva lo strumento Aree di Lettura. Quando è attivata, la finestra di dialogo Aree di Lettura verrà nascosta e appariranno le aree associate all'applicazione selezionata. Apparirà anche lo strumento Nuova Area, che vi permette di creare una nuova area di lettura.
Naviga Aree	Attiva la modalità di navigazione tra le aree. Quando è attivata, la finestra di dialogo Aree di Lettura verrà nascosta e apparirà l'area selezionata, oltre alla barra di navigazione delle aree. Usando la barra degli strumenti di navigazione o la tastiera, potete avviare o interrompere la lettura dell'area corrente, oltre a spostarvi all'area precedente o successiva.
Nome Area	Vi permette di digitare un nome riconoscibile per l'area attuale. Questi nomi appariranno nella casella elenco Aree nella finestra di dialogo Aree di Lettura. Appariranno anche

Impostazione	Descrizione
	<p>nel menù Aree di Lettura, quando si preme il tasto rapido Elenco Aree di Lettura: Caps Lock + Alt + L, o quando si fa clic su Aree > Attiva nella scheda Lettore della Barra degli Strumenti.</p>
<i>Area relativa a</i>	
<p>in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso a destra o al centro</p>	<p>Imposta la posizione dell'area relativamente all'applicazione attiva. Ciò garantisce che l'area sia sempre nella posizione corretta, anche quando la finestra viene ridimensionata o spostata.</p> <p><i>Nota:</i> in alcuni casi, quando si ridimensiona la finestra di un'applicazione, verranno anche ridimensionati i suoi controlli. Quando questo accade, potreste dover ridimensionare le aree una ad una.</p>
<i>Azioni Area</i>	
<p>Leggi Testo dell'Area</p>	<p>Quando l'area viene attivata, tutto il testo al suo interno verrà letto.</p>
<p>Visualizza Area</p>	<p>Quando l'area di lettura viene attivata, verrà messa in vista ed evidenziata.</p>
<p>Visualizza e leggi area</p>	<p>Quando l'area di lettura viene attivata, verrà messa in vista, evidenziata e letta a voce.</p>
<p>Evidenzia zona pr</p>	<p>Impostate il tempo, in secondi, per il quale l'area rimarrà evidenziata.</p> <p><i>Nota:</i> l'evidenziazione avrà luogo soltanto quando selezionate Scorri su Area.</p>

Impostazione	Descrizione
Torna alla posizione precedente	Dopo che viene visualizzata l'area, ZoomText scorrerà per mostrare di nuovo la posizione visualizzata prima dell'attivazione.
Oscura al di fuori dell'area	Quando un'area di lettura viene visualizzata, tutto ciò che è al di fuori verrà oscurato.

Leggere con il Corsore di Testo

I comandi di lettura con il cursore di testo vi permettono di spostarvi e leggere mentre create e modificate i documenti; potete leggere per parole, righe, frasi o paragrafi. Quando usate questi comandi, il cursore di testo si sposterà secondo la corrispondente unità di testo. Per esempio, quando premete il comando Leggi Frase Successiva, il cursore si sposterà all'inizio della frase successiva e l'intera frase verrà pronunciata. La seguente tabella elenca i comandi di lettura del cursore di testo.

Comando	Tasto Rapido	Tasti a Livelli
Leggi Carattere Precedente	Freccia Sinistra	N/A
Leggi Carattere Successivo	Freccia Destra	N/A
Leggi Parola Precedente	Ctrl + Freccia Sinistra	N/A
Leggi Parola Successiva	Ctrl + Freccia Destra	N/A
Leggi Riga Precedente 3	Freccia Su	N/A
Leggi Riga Successiva 3	Freccia Giù	N/A
Leggi Frase Precedente	Caps Lock + Alt + Freccia Sinistra	N/A
Leggi Frase Successiva	Caps Lock + Alt + Freccia Destra	N/A
Leggi Paragrafo Precedente	Ctrl + Freccia Su	N/A
Leggi Paragrafo Successivo	Ctrl + Freccia Giù	N/A

Comando	Tasto Rapido	Tasti a Livelli
Leggi Carattere Corrente 1	Alt + Ctrl + Shift + Invio	N/A
Leggi Parola Corrente 2	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Su	N/A
Leggi Riga Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Destra	N/A
Leggi Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Giù	N/A
Leggi Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Sinistra	N/A

Una seconda pressione del comando Leggi Carattere Corrente leggerà il carattere foneticamente utilizzando l'iniziale di una città: "Ancona, Bologna, Como, ...".

Se si preme due volte rapidamente il comando Dire Parola Corrente, accadrà quanto segue:

- Prima pressione: legge la parola
- Seconda pressione: fa lo spelling della parola
- Terza pressione: fa lo spelling fonetico della parola («Ancona, Bologna, Como»...)

Nota: Le pressioni ripetute devono avvenire entro due secondi.

³ Questo comando legge la parola corrente o l'intera riga secondo l'impostazione del Riscontro Programmi **Quando il cursore di testo si sposta ad una nuova riga.**

Oltre ai comandi di lettura del testo elencati sopra, ZoomText parlerà anche quando si usano i tasti standard di navigazione e modifica del testo, elencati nella tabella seguente.

Tasti	Azione dell'Applicazione	Azione ZoomText
BackSpace	Elimina il carattere a sinistra del cursore.	Legge il carattere eliminato.
Canc	Elimina il carattere a destra del cursore.	Legge il nuovo carattere a destra del cursore.
Home	Sposta il cursore all'inizio della riga.	Legge la prima parola sulla riga (oppure niente se la riga inizia con uno spazio o una tabulazione).
End	Sposta il cursore alla fine della riga.	Pronuncia «Fine Riga».
Pagina Su	Scorre in su di una schermata.	Legge la parola o la riga in cui si viene a trovare il cursore, in base all'impostazione di Riscontro Programmi «Quando il cursore passa a una nuova riga».
Pagina Giù	Scorre in giù di una schermata.	Legge la parola o la riga in cui si viene a trovare il cursore, in base all'impostazione di Riscontro Programmi «Quando il cursore passa a una nuova riga».
Ctrl + Home	Sposta all'inizio del documento.	Legge la parola o la riga in cui si viene a trovare il cursore, in base all'impostazione di Riscontro Programmi «Quando il cursore passa a una nuova riga».

Tasti	Azione dell'Applicazione	Azione ZoomText
Ctrl + End	Sposta alla fine del documento.	Legge la parola o la riga in cui si viene a trovare il cursore, in base all'impostazione di Riscontro Programmi «Quando il cursore passa a una nuova riga».

Comandi di Lettura

I comandi di lettura leggono ad alta voce vari elementi del desktop e delle applicazioni su richiesta. Per default, questi comandi non hanno tasti rapidi assegnati. Tuttavia, tasti rapidi possono essere assegnati usando la finestra di dialogo Tasti di Comando.

Comando	Tasto Rapido	Tasti a Livelli
Leggi la data corrente	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, D
Leggi l'ora corrente	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, T
Leggi titolo di colonna della cella	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, C
Leggi il commento della cella	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, N
Leggi la formula della cella	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, O
Leggi il titolo di riga della cella	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, R
Leggi Appunti	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, P
Leggi il pulsante predefinito della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, B
Leggi nome del gruppo nella finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, G
Leggi messaggio della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, M

Comando	Tasto Rapido	Tasti a Livelli
Leggi scheda della finestra di dialogo	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, A
Leggi Focus	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, F
Leggi il testo selezionato	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, S
Leggi la barra di stato	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, U
Leggi il Titolo della Finestra	Non assegnato	Caps Lock + Spazio, Y, W

Strumenti


Gli Strumenti rappresentano ulteriori funzioni di produttività, disponibili nella scheda Strumenti della barra degli strumenti, compresi lo Strumento di Ricerca, la Fotocamera, il Lettore in Background, il Registratore e l'Assistente Vocale.

- [La scheda Strumenti della Barra degli Strumenti](#)
- [Strumento di Ricerca](#)
- [Fotocamera](#)
- [Lettore in Background](#)
- [Registratore](#)
- [Assistente vocale](#)

Nota: le le funzionalità Registratore e Lettore in Background non sono disponibili in ZoomText ingranditore.

La scheda Strumenti della Barra degli Strumenti

La scheda Strumenti della barra degli strumenti fornisce pulsanti rapidi per lanciare gli Strumenti di ZoomText. Molti di questi sono pulsanti multifunzione, che vi permettono sia di attivare la funzionalità sia di aprire un menù per modificare le sue impostazioni. I pulsanti sono raggruppati per categoria, e dispongono di comode etichette ed icone per una facile identificazione.

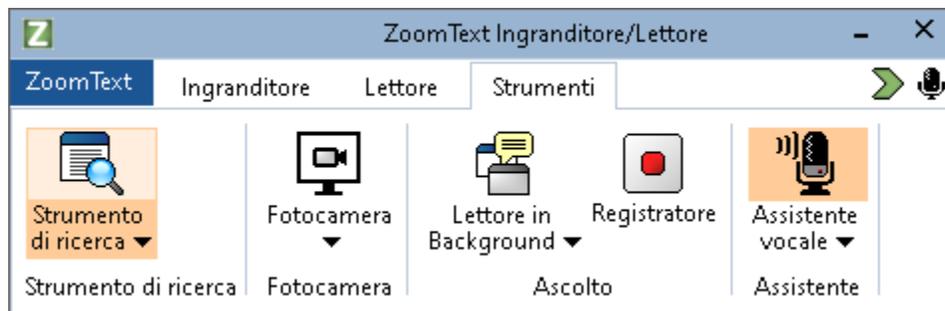

La scheda Strumenti della Barra degli Strumenti.

Nota: il Lettore in Background e il Registratore appariranno solo in ZoomText Ingranditore/Lettore.

- **Strumento di Ricerca.** Lancia lo Strumento di ricerca, che vi permette di cercare, scorrere, navigare e leggere rapidamente documenti, pagine web ed e-mail.
- **Fotocamera.** Avvia la funzione Fotocamera ZoomText, quando una fotocamera supportata è collegata e disponibile per ZoomText.
- **Lettore in Background.** Lancia il Lettore in Background con il testo acquisito dagli appunti di Windows.
- **Registratore.** Lancia il Registratore ZoomText con il testo acquisito dagli appunti di Windows.

- **Assistente Vocale.** Lancia l'Assistente Vocale di ZoomText, che vi permette di usare i comandi vocali per eseguire azioni ZoomText utilizzando la voce.

Strumento di Ricerca

Lo Strumento di ricerca vi permette di cercare, scorrere, navigare e leggere rapidamente documenti, pagine web ed e-mail. Potete cercare specifiche parole o frasi per trovare gli argomenti di vostro interesse. Quando avete trovato un argomento di vostro interesse, potete far sì che lo Strumento di ricerca inizi a leggere da quella posizione. Lo Strumento di Ricerca può anche attivare link e controlli, permettendovi di navigare facilmente tra varie pagine. Tutte queste azioni vengono eseguite usando la barra degli strumenti e la finestra di dialogo dello Strumento di Ricerca, nonché i suoi tasti di comando.

Nota: le funzionalità di lettura a voce non sono disponibili quando lo Strumento di Ricerca viene eseguito in ZoomText Ingranditore/Lettore.

Lo Strumento di Ricerca fornisce due modalità di ricerca delle pagine: **Ricerca per pagina** e **Ricerca per elenco**. Di seguito sono descritte queste modalità e il modo per accedervi.

Nota: lo Strumento di Ricerca può essere utilizzato in una varietà di applicazioni basate su documenti, tra cui Internet Explorer, Chrome, Firefox, Microsoft Word e Microsoft Outlook.

Avviare lo Strumento di Ricerca

▪ Per avviare lo Strumento di Ricerca


Fate una delle azioni seguenti:

- Nella scheda Strumenti della barra degli strumenti, fate clic su pulsante Strumento di Ricerca.
- Premete il tasto Esegui Strumento di Ricerca: **Caps Lock + Ctrl + F**.

Apparirà la finestra di dialogo-Barra degli Strumenti dello Strumento di Ricerca.

Ricerca nella Pagina

Ricerca nella Pagina visualizza una semplice barra degli strumenti dove potete digitare una parola o una frase che volete trovare, e poi usare i controlli della barra degli strumenti o i comandi da tastiera per spostarvi attraverso tutte le occorrenze nella pagina. Potete anche limitare la ricerca a specifici elementi di una pagina web come titoli, link o controlli.

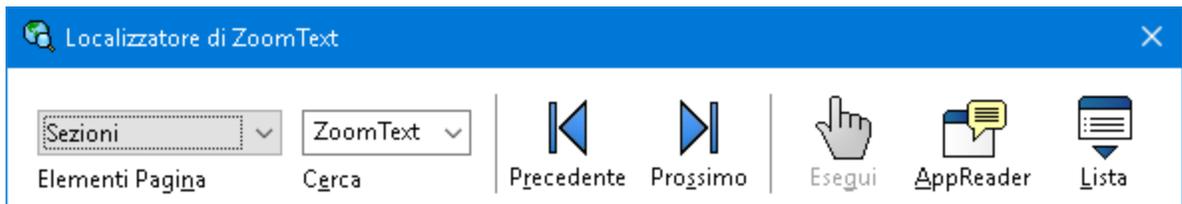

Strumento di ricerca: barra degli strumenti Ricerca nella Pagina.

■ Per usare Ricerca nella Pagina

1. Se lo Strumento di Ricerca è attualmente impostato su Ricerca per Elenco, fate clic sul pulsante Elenco per passare a Ricerca nella Pagina.
2. Selezionate il tipo di elementi della pagina per cui volete cercare. Selezionate **Tutto il Testo**, raccomandato per la maggior parte delle ricerche, per cercare parole o frasi in tutta la pagina, incluse le etichette nascoste per immagini e controlli.
3. Nella casella **Cerca**, digitate il testo che volete cercare.

Se la parola o la frase cercata non esiste per il tipo di elemento selezionato, la casella di ricerca diventerà arancione e i pulsanti di navigazione saranno disabilitati.

Nota: quando Elementi della Pagina è impostato su Tutto il Testo, è necessario digitare almeno un carattere nella casella di ricerca per avviare una ricerca. Quando è selezionato qualsiasi tipo di elemento, potrete navigare tra gli elementi del tipo specificato senza immettere alcun carattere.

4. Fate clic sui pulsanti **Successivo** e **Precedente** per navigare tra i risultati di ricerca.


Mentre vi spostate, ogni elemento verrà evidenziato. Se usate ZoomText Ingranditore/Lettore, e la voce è abilitata, verrà letta la frase contenente la parola cercata.

5. Per far sì che lo Strumento di ricerca esegua un link o un controllo, premete il pulsante **Esegui**.
6. Per iniziare la lettura dall'elemento corrente, fate clic sul pulsante **Lettore Applicazione**. *
7. Per attivare o disattivare l'output vocale dello Strumento di Ricerca, fate clic sul pulsante **Voce**. *
8. Per uscire dallo strumento di Ricerca, premete il pulsante **Esci** nella barra del titolo.

* In ZoomText Ingranditore, le opzioni Voce e Lettore Applicazioni non sono disponibili, quindi questi pulsanti sono oscurati.

Ricerca in Elenco

La Ricerca in Elenco espande la barra degli strumenti in una finestra di dialogo che visualizza un elenco di intestazioni, link, controlli e altri elementi comuni che si trovano nella pagina. Potete cercare, filtrare e ordinare l'elenco per individuare rapidamente un elemento di interesse.

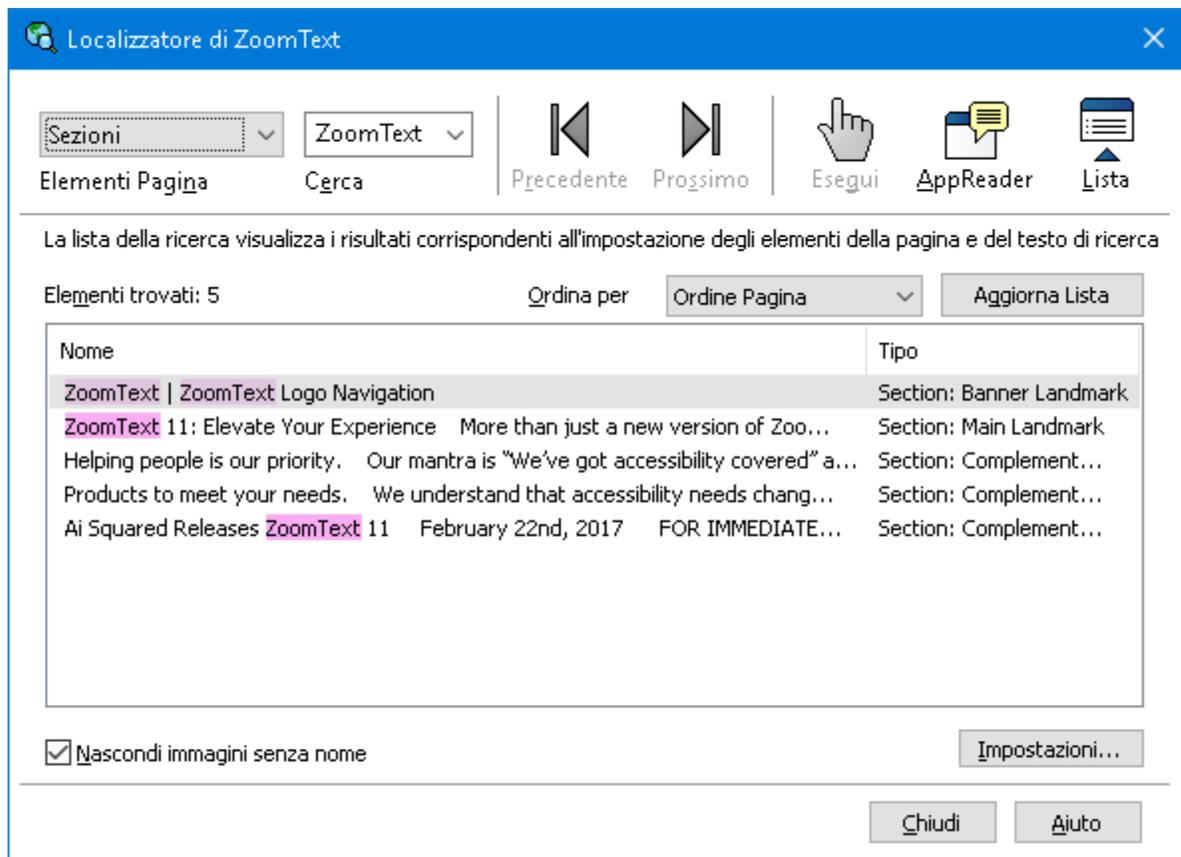

Strumento di ricerca: Barra degli strumenti/Finestra di dialogo Elenco

▪ Per usare Ricerca in Elenco

1. Se lo Strumento di Ricerca è attualmente impostato su Ricerca in Elenco, fate clic sul pulsante Elenco per passare a Ricerca nella Pagina.
2. Nella casella combinata **Elementi nella Pagina**, selezionate i tipi di elementi che volete vedere nella casella combinata Elementi Trovati.
3. Per cercare o filtrare l'elenco, digitate una parola o frase nella casella **Cerca**.

Man mano che digitate nella casella di ricerca, l'elenco verrà automaticamente filtrato per visualizzare solo gli elementi che contengono la stringa di ricerca. Se quanto avete digitato non corrisponde ad alcun testo nella pagina, la casella di ricerca diventerà arancione.

4. Selezionate l'ordinamento desiderato nella casella elenco Ordina Per. Potete anche ordinare l'elenco cliccando sulle intestazioni **Nome** e **Tipo** in cima all'elenco.
5. Per iniziare la lettura dall'elemento selezionato, fate clic sul pulsante **Lettore Applicazione**. *
6. Per far sì che lo Strumento di ricerca esegua un link o un controllo, premete il pulsante **Esegui**.
7. Per far sì che lo Strumento di Ricerca vada alla posizione dell'elemento selezionato, fate clic sul pulsante **Vai A**.
8. Per uscire dallo strumento di Ricerca, premete il pulsante **Esci** nella barra del titolo.

* In ZoomText Ingranditore, non è disponibile l'opzione Lettore Applicazione, che quindi sarà oscurata.

▪ **Aggiornare l'elenco durante la Ricerca in Elenco**

Alcune pagine web contengono aree di contenuti che cambiano dinamicamente, come i titoli principali dei siti di notizie o i risultati sportivi. Quando lo Strumento di Ricerca si avvia o passa alla Ricerca in Elenco, farà apparire solo i risultati della ricerca attualmente visibili, ignorando i cambiamenti dinamici successivi. Se sapete che una pagina si è aggiornata dinamicamente e volete aggiornare l'elenco di elementi trovati, premete il pulsante **Aggiorna Elenco**.

▪ **Nascondere le immagini senza nome nella Ricerca in Elenco**

Molte pagine web contengono immagini senza nome, quindi ambigue. Per evitare che queste immagini senza nome ingombrino l'elenco degli elementi trovati, mettete la spunta accanto alla casella di controllo **Nascondi Elementi Senza Nome**.

Tasti di Comando dello Strumento di Ricerca

Il seguente tasto rapido può essere usato per lanciare lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Strumento di Ricerca	Caps Lock + Ctrl + F

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per eseguire lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui Strumento di Ricerca	Caps Lock + Spazio, F

Mentre lo Strumento di Ricerca è attivo, i seguenti tasti modali possono essere usati per controllare lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti
Scorri in Alto i Tipi di Elementi	Ctrl + Freccia Su
Scorri in Basso i Tipi di Elementi	Ctrl + Freccia Giù
Esegui Elemento	Ctrl + Invio
Primo elemento (nell'elenco filtrato)	Ctrl + Home
Ultimo Elemento (nell'elenco filtrato)	Ctrl + End
Controllo Successivo	Ctrl + C
Form Successivo	Ctrl + F
Intestazione Successiva	Ctrl + H
Intestazione Successiva di Livello 1 ... 6	Ctrl + 1 ... 6

Comando	Tasti
Immagine Successiva	Ctrl + I
Link Successivo	Ctrl + L
Elenco Successivo	Ctrl + S
Tabella Successiva	Ctrl + T
Elemento Successivo	Invio o Ctrl + Destra
Controllo Precedente	Ctrl + Shift + C
Form Precedente	Ctrl + Shift + F
Intestazione Precedente	Ctrl + Shift + H
Intestazione precedente di livello 1 ... 6	Ctrl + Shift + 1 ... 6
Immagine Precedente	Ctrl + Shift + I
Link Precedente	Ctrl + Shift + L
Elenco Precedente	Ctrl + Shift + S
Tabella Precedente	Ctrl + Shift + T
Elemento Precedente	Shift + Invio o Ctrl + Sinistra
Lettore Applicazione	Alt + R
Attiva o Disattiva Ricerca in Elenco	Alt + L
Esci dallo Strumento di Ricerca	Esc

Impostazioni Strumento di Ricerca per Evidenziazione e Voce


Le impostazioni dello strumento di Ricerca vi permettono di configurare l'evidenziazione e la voce che vengono usate per gli elementi trovati. L'evidenziazione rende facile vedere e seguire ogni elemento trovato quando si usano i comandi successivo e precedente. Le impostazioni di evidenziazione vi permettono di personalizzare l'aspetto dell'evidenziazione, compresa la forma, il colore e il livello di trasparenza. La voce dello strumento di Ricerca leggerà ogni risultato quando usate i comandi Precedente o Successivo. Le impostazioni di voce vi permettono di attivare e disattivare la vocalizzazione degli elementi trovati.

▪ **Per impostare le opzioni di evidenziazione dello Strumento di Ricerca**

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Strumento di Ricerca** o spostatevi fino a **Strumento di Ricerca** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Strumento di Ricerca**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Strumento di Ricerca.

3. Selezionate la scheda **Evidenziazione**.
4. Regolate le impostazioni di evidenziazione come desiderate.
5. Fate clic su **OK**.

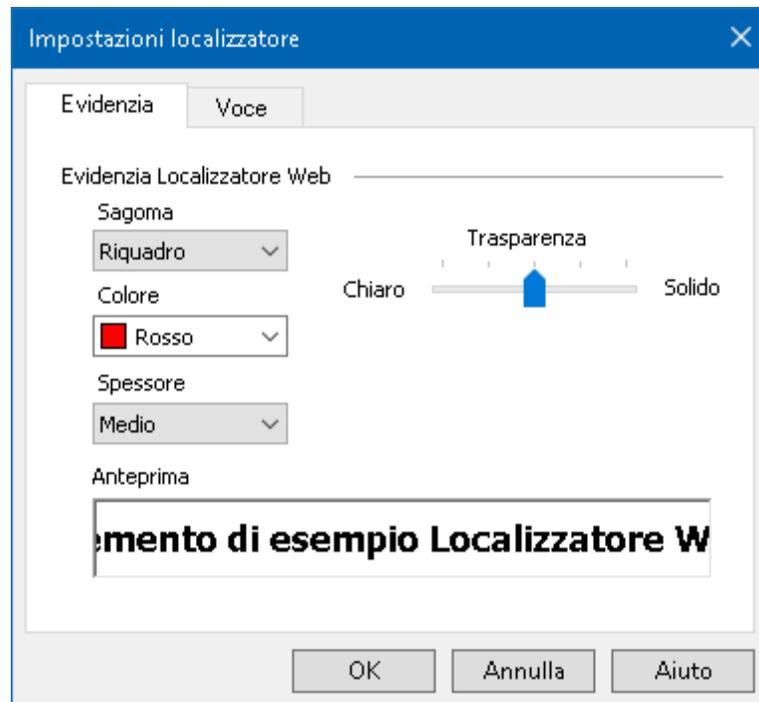

La finestra di dialogo *Impostazioni Strumento di Ricerca*.

Impostazione	Descrizione
<i>Evidenzia Strumento di Ricerca</i>	
Forma	Imposta la forma usata per evidenziare la parola/frase o l'elemento della pagina web trovato come risultato di ricerca: Blocco, Sottolineatura o Cornice.
Colore	Imposta il colore dell'evidenziazione.
Spessore	Imposta lo spessore dell'evidenziazione.
trasparenza	Imposta la trasparenza dell'evidenziazione. <i>Nota:</i> Questa impostazione non è disponibile quando il colore di evidenziazione è impostato su "Inverti".

Impostazione	Descrizione
Anteprima	Visualizza un testo di esempio con un'anteprima delle impostazioni di evidenziazione selezionate.

▪ **Per regolare le impostazioni di voce dello Strumento di Ricerca**

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Strumento di Ricerca** o spostatevi fino a **Strumento di Ricerca** e premete il tasto freccia giù.


2. Nel menù **Strumento di Ricerca**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Strumento di Ricerca.

3. Selezionate la scheda **Voce**.

4. Regolate le impostazioni della voce come desiderate.

5. Fate clic su **OK**.

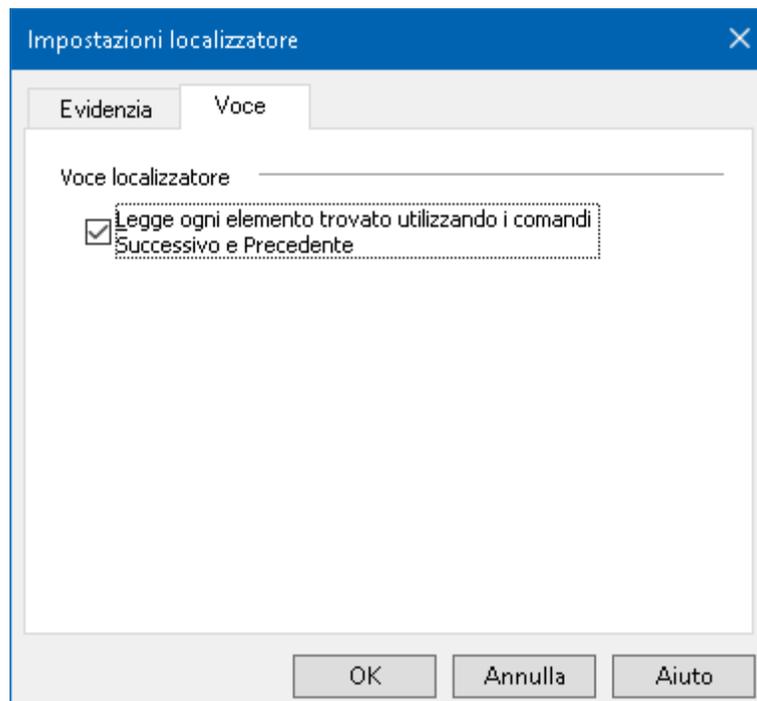


La scheda Voce delle Impostazioni Strumento di Ricerca


Impostazione	Descrizione
<i>Voce Strumento di Ricerca</i>	
Leggi ogni elemento trovato utilizzando i comandi Successivo e Precedente	Attiva o disattiva la lettura degli elementi trovati quando vengono usati i comandi Precedente e Successivo.

Fotocamera ZoomText

La funzione Fotocamera ZoomText vi permette di usare qualsiasi webcam ad alta definizione per ingrandire documenti stampati e altri oggetti direttamente sullo schermo del tuo computer, comprese le bollette, le riviste, le fotografie, le etichette dei medicinali, gli oggetti artigianali e altro. Semplici controlli permettono di ingrandire e rimpicciolire rapidamente, nonché di scegliere tra colori originali e ad alto contrasto. Potete passare tra una visualizzazione a schermo intero ed una ancorata, che vi permette di vedere l'immagine della fotocamera e il desktop di Windows allo stesso tempo. Utilizzando webcam HD economiche e facilmente disponibili, la funzione Fotocamera ZoomText offre un complemento o un'alternativa portatile e conveniente alle telecamere a circuito chiuso convenzionali.

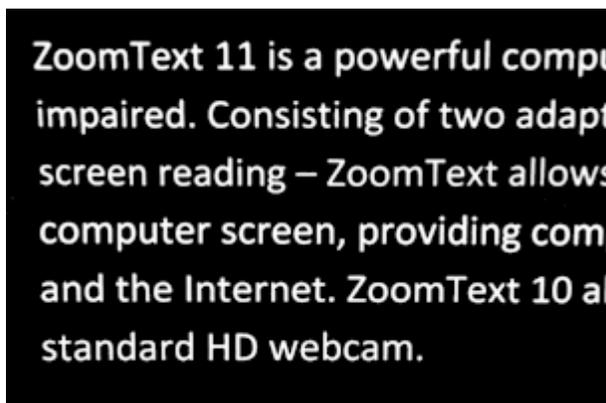

Fotocamera ZoomText: Vista a Schermo Intero

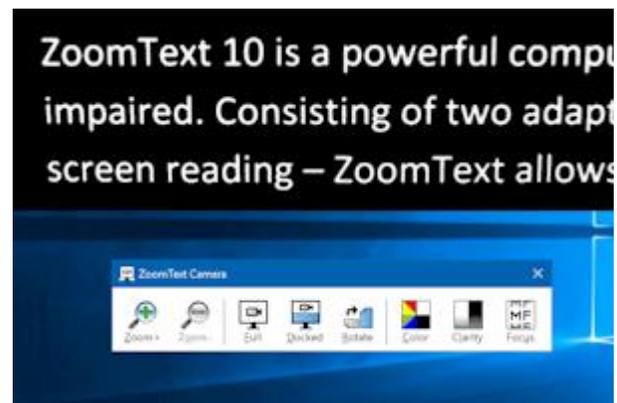

Fotocamera ZoomText: Vista Ancorata

Iniziamo con la Fotocamera ZoomText

Prima di poter utilizzare la funzione Fotocamera ZoomText, dovrete acquistare una fotocamera e un supporto adatto, posizionare la fotocamera nel vostro spazio di lavoro e scegliere la fotocamera nelle impostazioni della Fotocamera ZoomText.

Procurarsi una fotocamera e un supporto idonei

Per utilizzare la funzione Fotocamera ZoomText, avrete bisogno di una webcam HD con autofocus. Per la migliore qualità, la vostra webcam dovrebbe offrire una risoluzione video di 1080p con correzione automatica in condizioni di scarsa luminosità. Dovrete avere anche una porta USB 2.0 disponibile per collegare la webcam.

Oltre alla fotocamera, avrete anche bisogno di un supporto adatto a posizionarla in modo sicuro sopra gli oggetti che volete vedere. Il supporto dovrebbe essere stabile e regolabile.

Posizionare la fotocamera nel proprio spazio di lavoro

Per ottenere le migliori prestazioni con la funzione Fotocamera ZoomText, usate le seguenti linee guida quando impostate la tua fotocamera sul vostro spazio di lavoro:

- Posizionate la fotocamera il più vicino possibile allo schermo del computer. Questo vi permetterà di manipolare facilmente gli oggetti sotto la fotocamera mentre visualizzate l'immagine.
- Assicuratevi che ci sia un'illuminazione sufficiente intorno alla fotocamera per minimizzare le ombre nell'inquadratura.
- Regolate il supporto in modo che la fotocamera sia a circa 10 centimetri dall'oggetto.
- Selezionare una fotocamera (quando sono presenti più telecamere)

ZoomText rileva automaticamente tutte le webcam che sono collegate o integrate nel vostro sistema. Se il vostro computer ha più di una webcam, dovrete dire a ZoomText quale volete usare. Questa impostazione si trova nelle impostazioni della fotocamera nella finestra di dialogo Strumenti di ZoomText.

▪ Per selezionare una fotocamera

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Fotocamera** o spostatevi fino a **Fotocamera** e premete il tasto freccia giù.

2. Nel menù **Fotocamera**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Fotocamera

3. Nella casella elenco **Fotocamera Attiva**, scegliete la fotocamera che volete usare.
4. Fate clic su **OK**.

Usare la Fotocamera ZoomText

Seguite i seguenti passi per avviare, configurare ed usare la Fotocamera ZoomTextn.

▪ Per avviare la Fotocamera ZoomText

1. Fate una delle azioni seguenti:
 - Nella barra degli strumenti **Strumenti**, fate clic sul pulsante **Fotocamera**.
 - Premete il tasto rapido Esegui Fotocamera: **Caps Lock + Ctrl + C**

L'immagine della fotocamera apparirà nella metà superiore dello schermo, mentre la vista ingrandita del desktop di ZoomText rimarrà nella metà inferiore. Nella metà inferiore apparirà anche la barra degli strumenti della Fotocamera.

2. Se la barra degli strumenti Fotocamera non è visibile, premete **Caps Lock + Ctrl + C** per per attivare la modalità Tasti a Livelli della Fotocamera, quindi premete **T** per rendere visibile la barra degli strumenti.



La barra degli strumenti Fotocamera ZoomText

- **Per ruotare l'immagine della fotocamera**

Posizionate un documento sotto la fotocamera in modo che sia orientato dal lato corretto. Se il documento non è orientato correttamente sullo schermo, cliccate sul pulsante **Ruota** fino a quando l'immagine non appare orientata correttamente.

- **Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine**

Premete i pulsanti **Zoom +** e **Zoom -** per regolare l'ingrandimento per una lettura confortevole.

- **Per impostare i colori dell'immagine**

1. Fate clic sul pulsante **Colore**.


Apparirà il menù Colore.

2. Potete selezionare tra **Normale** (colore pieno), ed una serie di **Schemi a Due Colori** ad alto contrasto.
3. Per passare tra la modalità Normale e lo Schema a Due Colori selezionato, premete **Caps Lock + Ctrl + C** per attivare la modalità Tasti a Livelli della fotocamera, quindi premete **Alt + Invio**

- **Per regolare la nitidezza (Luminosità/Contrasto)**

1. Fate clic sul pulsante **Nitidezza**.

Apparirà la finestra di dialogo Nitidezza Fotocamera.

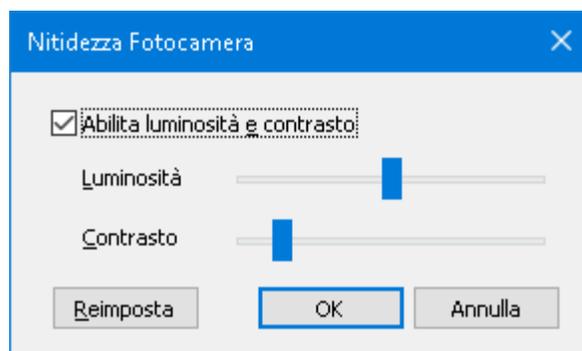

2. Mettete la spunta accanto all'opzione **Abilita luminosità e contrasto**
3. Muovete i cursori **Luminosità** e **Contrasto** per regolare la nitidezza.
4. Fate clic sul pulsante **Ripristina** per reimpostare i valori di contrasto e luminosità ai valori predefiniti.
5. Fate clic su **OK**.

Suggerimento: usate l'impostazione della luminosità per eliminare le macchie di luce che appaiono nell'immagine.

Nota: questo pulsante non sarà disponibile (oscurato) se la vostra fotocamera non supporta allo stesso tempo la regolazione della luminosità e del contrasto.

▪ Per regolare il focus della fotocamera

1. Selezionate il pulsante **Focus**.

Apparirà la finestra di dialogo Focus Fotocamera.



2. Mettete la spunta accanto all'opzione **Abilita Focus Fotocamera Manuale**
3. Spostate il cursore **Focus** per regolare il focus dell'immagine.
4. Fate clic su **OK**.

Nota: questo pulsante non sarà disponibile (oscurato) se la vostra fotocamera non supporta l'autofocus.

▪ **Per spostare la posizione della vista ancorata**

Fate clic sul pulsante Ancorata. Ogni clic sul pulsante Ancorata passerà tra 4 modalità in senso orario: ancorata in alto, ancorata a destra, ancorata in basso e ancorata a sinistra.

▪ **Per passare tra la vista a schermo intero e la vista ancorata**

Fate una delle azioni seguenti:

- Per passare tra la vista Ancorata e a Schermo Intero, premete **Caps Lock + Ctrl + C** per attivare la modalità Tasti a Livelli per la Fotocamera, quindi premete **Tab** per passare tra le viste.
- Dalla vista ancorata, nella barra degli strumenti Fotocamera ZoomText, premete il pulsante **Piena**.

Nota: per default, quando avviate la Fotocamera ZoomText in modalità Schermo Intero o passate a questa modalità successivamente, apparirà una finestra di dialogo per informarvi che la barra degli strumenti Fotocamera ZoomText non è disponibile in modalità Schermo Intero. La finestra di dialogo mostrerà anche un elenco di tasti rapidi che potete usare per controllare la Fotocamera ZoomText, sia in vista Ancorata che in vista a Schermo Intero. Se rimanete bloccati in vista a schermo Intero, potete premere **Esc** per uscire dalla Fotocamera ZoomText.

▪ **Per uscire dalla Fotocamera ZoomText**

Fate una delle azioni seguenti:

- Dalla vista a Schermo Intero, premete **Esc**.
- Dalla vista Ancorata, premete il pulsante **Esci**.

Prestazioni Video e di Sistema con la Fotocamera

Sui computer più datati, quando usate la Fotocamera ZoomText potreste riscontrare prestazioni lenee del sistema e della fotocamera quando la fotocamera è configurata per funzionare a una risoluzione più alta, in particolare a risoluzioni di 1280 e superiori. Per risolvere il problema,

abbassate la risoluzione fino a che le prestazioni del sistema e della fotocamera non sono aun livello accettabile. L'impostazione Risoluzione per la Fotocamera ZoomText si trova nella scheda Fotocamera nella finestra di dialogo Strumenti. Consultate Impostazioni Fotocamera ZoomText qui sotto.

Impostazioni Fotocamera ZoomText


Le impostazioni della Fotocamera ZoomText vi permettono di lanciare ed impostare la Fotocamera ZoomText.

▪ **Per configurare le impostazioni della Fotocamera ZoomText**

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a **Fotocamera** o spostatevi fino a **Fotocamera** e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Fotocamera**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Fotocamera

3. Regolate le impostazioni della fotocamera come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.

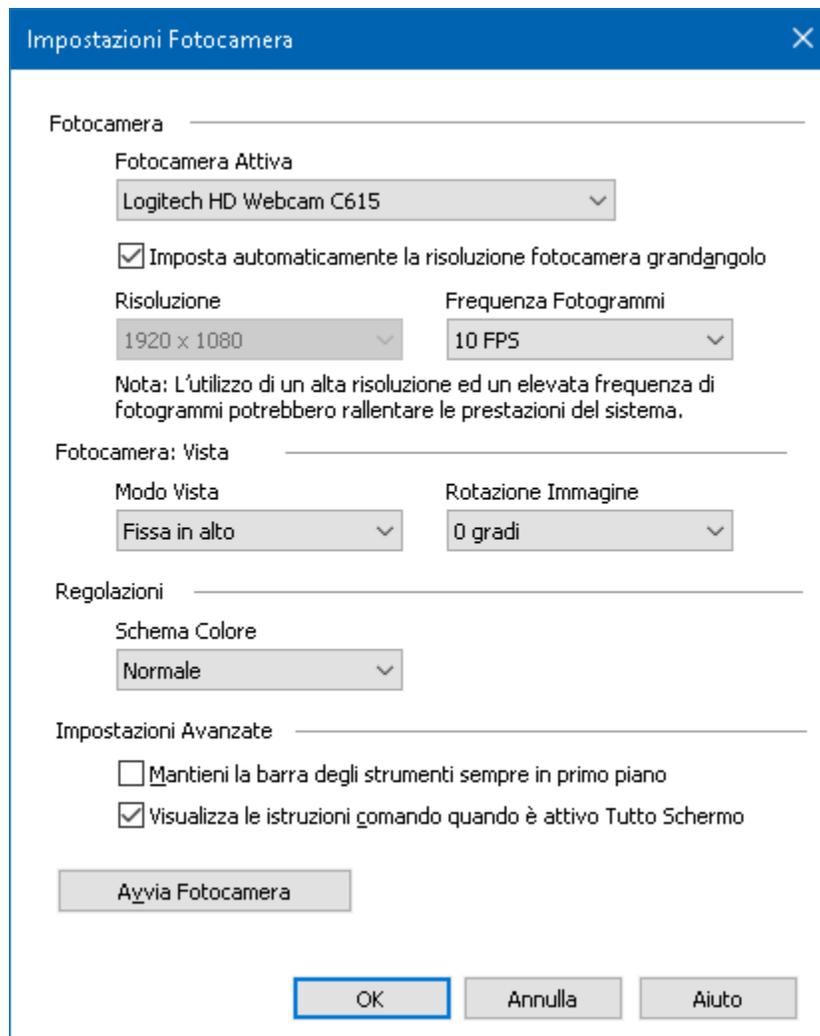

La finestra di dialogo Fotocamera ZoomText

Impostazione	Descrizione
<i>Fotocamera</i>	
Fotocamera Attiva	Mostra il nome della fotocamera attiva e vi permette di selezionare una fotocamera diversa.
Imposta automaticamente la risoluzione fotocamera grandangolo	ZoomText selezionerà automaticamente una risoluzione per la fotocamera che corrisponda il più possibile a quella dello schermo.

Impostazione	Descrizione
Risoluzione	<p>Mostra la risoluzione corrente della fotocamera e vi permette di selezionare una specifica risoluzione. Per usare questa funzione, dovrete togliere la spunta all'opzione Imposta Automaticamente Risoluzione Grandangolo.</p> <p><i>Nota:</i> L'utilizzo di un alta risoluzione ed un elevata frequenza di fotogrammi potrebbero rallentare le prestazioni del sistema.</p>
Frequenza Fotogrammi	<p>Mostra la frequenza corrente e vi permette di selezionare una frequenza diversa.</p> <p><i>Nota:</i> L'utilizzo di un alta risoluzione ed un elevata frequenza di fotogrammi potrebbero rallentare le prestazioni del sistema.</p>
<i>Vista Fotocamera</i>	
Modo Vista	Mostra la vista attuale e vi consente di selezionare una vista diversa.
Rotazione Immagine	Mostra la rotazione corrente e vi consente di selezionare una rotazione diversa.
<i>Miglioramenti</i>	
Schema Colore	Mostra il filtro colori attuali e vi consente di selezionare un filtro diverso.
<i>Impostazioni Avanzate</i>	
Mantieni la barra degli strumenti sempre in primo piano.	<p>Quando è selezionata, la barra degli strumenti Fotocamera rimane sopra altre finestre anche quando quest'ultima non è focalizzata.</p> <p><i>Nota:</i> Questa impostazione è anche disponibile nel menu di sistema nella barra del</p>

Impostazione	Descrizione
	titolo della fotocamera (visualizzata cliccando l'icona della fotocamera nella barra del titolo della barra degli strumenti Fotocamera).
Visualizza le istruzioni sui comandi quando è attivo Tutto Schermo	Abilita o disabilita la visualizzazione di un avviso con istruzioni sui comandi quando si passa alla vista a schermo intero.
Esegui Fotocamera	Esegue la Fotocamera ZoomText. Questo pulsante sarà oscurato se la Fotocamera è già attiva.

Tasti di Comando per la Fotocamera

Il seguente tasto rapido può essere usato per lanciare la fotocamera ZoomText.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Ctrl + C

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per lanciare la fotocamera ZoomText.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Spazio, C

Quando la barra degli strumenti Fotocamera è attiva, i seguenti tasti modali possono essere usati per regolare le impostazioni della fotocamera.

Comando	Tasti Modali
Mostra Barra Strumenti	T
Zoom Avanti	Freccia Su
Zoom Indietro	Freccia Giù
Ruota Immagine	Sinistra/Destra

Comando	Tasti Modali
Ancorata/Tutto Schermo	Tab
Posizione ancorata	Caps Lock + Sinistra/Destra
Nitidezza Attiva/Disattiva	Shift + Invio
Ripristino Nitidezza	Shift + Backspace
Aumenta Luminosità	Shift + Freccia Su
Riduci Luminosità	Shift + Freccia Giù
Aumenta Contrasto	Shift + Freccia Sinistra
Riduci Contrasto	Shift + Freccia Destra
Due-Colori Attivo/Disattivo	Alt + Invio
Schema due colori	Alt + Sinistra/Destra
Messa a fuoco Automatica/Manuale	Ctrl + Invio
Messa a Fuoco Avanti	Ctrl + Freccia Su
Messa a Fuoco Indietro	Ctrl + Freccia Giù
Esci	X

Lettore in Background

Il Lettore in Background vi permette di copiare per poi ascoltare documenti, pagine web, e-mail o qualsiasi testo mentre eseguite contemporaneamente altre operazioni. Basta copiare il testo che si vuole ascoltare negli appunti di Windows e avviare il Lettore in Background. Mentre il testo viene letto ad alta voce, siete liberi di digitare note, navigare sul web o fare altre operazioni sul tuo computer.

▪ Per lanciare il Lettore in Background

1. Selezionate il testo che volete ascoltare, quindi copiatelo negli appunti di Windows.
2. Fate una delle seguenti azioni per lanciare il Lettore in Background:
 - Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate **Lettore in Background**.
 - Premete il tasto rapido Lancia lettore in Background: **Caps Lok + Ctrl + B**.

Apparirà la barra degli strumenti del Lettore in Background, che inizierà automaticamente a leggere il testo che avete copiato negli appunti di Windows.



La Barra degli Strumenti del Lettore in Background

Nota: se la barra degli strumenti non appare quando avviate il Lettore in Background, significa che è stata selezionata l'opzione Avvia la Barra degli Strumenti Ridotta a Icona nelle impostazioni del Lettore in Background. Per accedere a questa opzione e

disabilitarla, consultate [Impostazioni del Lettore in Background](#) qui sotto.

Una volta che avete avviato il Lettore in Background, potete controllarlo usando la barra degli strumenti o i tasti di comando.

- **Per portare in primo piano la barra degli strumenti del Lettore in Background**

Premete il tasto Lancia Lettore in Background: **Caps Lock + Ctrl + B**, poi premete **T**.

- **Per controllare il Lettore in Background tramite la barra degli strumenti**

1. Per avviare e interrompere la lettura, cliccate sul pulsante **Play / Pausa**.
2. Per saltare avanti e indietro, usate i pulsanti **Avanti** e **Indietro**.
3. Per ricominciare dall'inizio premete il pulsante **Ricomincia**.
4. Per leggere il nuovo testo che avete appena copiato negli appunti, premete il pulsante **Acquisisci**.
5. Per uscire dal lettore in Background, premete il pulsante **Chiudi** a fianco della barra del titolo.

- **Per controllare il Lettore in Background usando i tasti di comando**

1. Se il Lettore in Background non è attivo, premete il tasto rapido Lettore in Background: **Caps Lock + Ctrl + B**.
2. Per avviare e arrestare la lettura, premete **Invio**.
3. Per scorrere avanti e indietro per frasi, premete **Destra** o **Sinistra**.
4. Per scorrere avanti e indietro per parole, premete **Ctrl + Destra** o **Ctrl + Sinistra**.
5. Per ricominciare la lettura dall'inizio, premete **Shift + Invio**.

6. Per leggere il nuovo testo che avete appena copiato negli appunti, premete **C**.
7. Per uscire dal Lettore in Background, premete **X**.

Impostazioni del Lettore in Background


Le impostazioni del Lettore in Background vi permettono di scegliere come appare la barra degli strumenti quando avviate ed eseguite il Lettore in Background.

▪ Per regolare le impostazioni del Lettore in Background

1. Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, fate clic sulla freccia accanto a **Lettore in Background**, oppure spostatevi a **Lettore in Background** e premete la freccia Giù.
2. Nel menù **Lettore in Background**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Lettore in Background.

3. Regolate le impostazioni del Lettore in Background come desiderate.
4. Fate clic su **OK**.

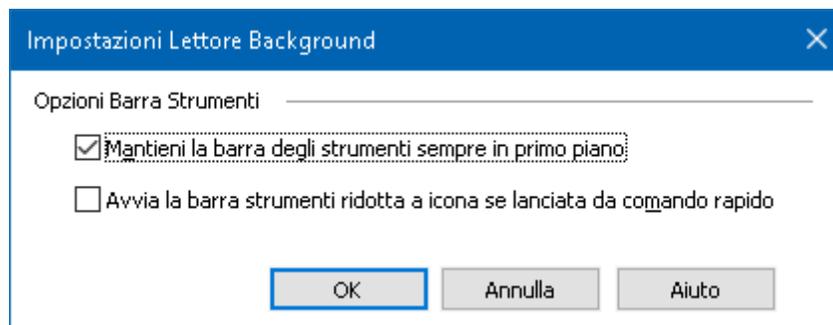

La finestra di dialogo Lettore in Background

Impostazione	Descrizione
<i>Opzioni Barra Strumenti</i>	
Mantieni la barra degli strumenti sempre in primo piano.	La barra degli strumenti del Lettore in Background rimarrà in cima a tutte le altre finestre anche quando ZoomText non è l'applicazione attiva.
Avvia la barra strumenti ridotta a icona se lanciata da comando rapido	Quando il Lettore in Background viene avviato da un tasto rapido (Leggi Testo degli Appunti o Leggi Testo Selezionato), la barra degli strumenti si avvierà ridotta a icona nella barra delle applicazioni di Windows.

Tasti di Comando del Lettore in Background

Il seguente tasto rapido può essere usato per lanciare il Lettore in Background.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui lettore in Background	Caps Lock + Ctrl + B

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per lanciare il Lettore in Background.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui lettore in Background	Caps Lock + Spazio, B

Mentre la barra degli strumenti del Lettore in Background è attiva, potete usare i seguenti tasti modali per controllare il Lettore in Background

Comando	Tasti Modali
Mostra Barra Strumenti	T
Acquisisci	C

Comando	Tasti Modali
Riproduci / Pausa	Invio
Ricomincia (dall'inizio)	Shift + Invio
Frase Successiva	Destra
Frase Precedente	Sinistra
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Su
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giù
Esci	X

Registratore ZoomText

Il Registratore ZoomText vi permette di trasformare il testo da documenti, pagine web, e-mail o altre fonti in registrazioni audio che potrete poi ascoltare sul vostro computer, o trasferire su un dispositivo mobile per l'ascolto in movimento. Vi basterà copiare il testo che volete registrare ed avviare il Registratore ZoomText. In pochi semplici passi, darete un nome alla vostra registrazione, sceglierete il percorso di output e premerete il pulsante Registra. Ogni registrazione verrà creata utilizzando la vostra scelta di voci Per ZoomText, oppure qualunque altra voce installata suul vostro sistema. Se scegliete iTunes o Windows Media Player come destinazioni, le vostre registrazioni verranno inserite in una comoda playlist denominata "ZoomText Recorder". Se usate iTunes, le vostre registrazioni verranno automaticamente sincronizzate ogni volta che collegate un iPod, iPhone o un qualsiasi altro iDevice.

▪ Per registrare testo dagli Appunti di Windows

1. Selezionate il testo che volete ascoltare, quindi copiatelo negli appunti di Windows.
2. Fate una delle seguenti azioni per lanciare il Lettore in Background:
 - Nella scheda **Lettore** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Registratore**.
 - Premete il tasto rapido Esegui Registratore: **Caps Lock + Ctrl + D**.

Apparirà la barra degli strumenti del Lettore in Background, che conterrà il testo che avete copiato negli appunti di Windows.


Completare il processo di registrazione

Quando avviate il Registratore ZoomText, apparirà la sua finestra di dialogo con il testo acquisito pronto per la registrazione. Tutto quello che dovrete fare sarà scegliere le opzioni di registrazione, quindi premere il pulsante Registra Testo. Apparirà una barra di avanzamento

durante il processo di registrazione, così da farvi sapere che sta procedendo. Potete rimanere a guardare l'indicatore di progresso o passare a un'altra applicazione e fare un uso migliore del vostro tempo. Sentirete un segnale acustico quando il processo di registrazione sarà terminato.

I tempi di registrazione varieranno a seconda della dimensione del buffer di testo, del sintetizzatore scelto, della destinazione e della velocità del sistema. Tuttavia, la nostra regola generale per il tempo di registrazione è di circa 5-10 secondi per pagina di testo.

Nota: Quando "Registra Testo A:" è impostato su iTunes, l'applicazione iTunes si aprirà alla fine del processo di registrazione.

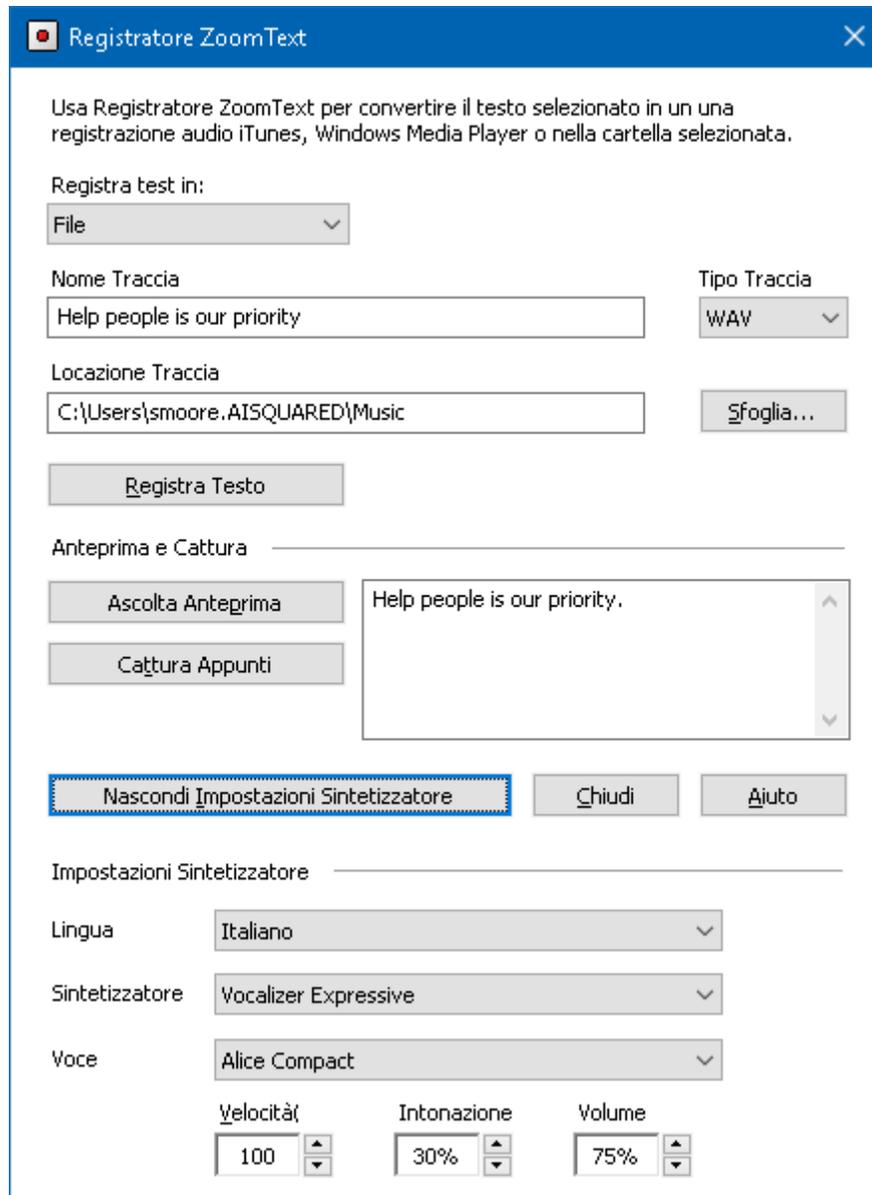

La finestra di dialogo Registratore ZoomText.

Impostazione	Descrizione
Registra Testo A:	Selezionate la destinazione della registrazione. Le scelte sono iTunes, Windows Media player oppure un file. Nota: iTunes e Windows Media Player non appariranno nell'elenco se non sono installati sul sistema.

Impostazione	Descrizione
Nome della traccia	<p>Permette di digitare un nome significativo per la vostra registrazione. Ogni volta che viene acquisito un nuovo testo, il nome della traccia verrà automaticamente impostato sulle prime 5 parole del testo acquisito. Potete sovrascrivere questo testo. Nota: qualsiasi carattere non valido nel nome verrà sostituito con un underscore (_).</p>
Tipo di Traccia	<p>Seleziona o visualizza il tipo di formato di file audio in cui verrà salvato il testo registrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se "Registra Testo A" è impostato su File, potete scegliere WAV o WMA. • Se "Registra Testo A" è impostato su iTunes, il file audio verrà automaticamente impostato su MP3. • Se "Registra Testo A" è impostato su Windows Media Player, il file audio verrà automaticamente impostato su WMA.
Posizione Traccia	<p>Visualizza la cartella corrente in cui verrà salvato il file audio e permette di inserire una nuova cartella. Nota: questo controllo non sarà disponibile se è impostato iTunes come destinazione, in quanto per iTunes la cartella è preimpostata.</p>
Sfoggia...	<p>Apri una finestra di dialogo di Esplora File per selezionare una cartella in cui salvare il file audio. Nota: questo controllo non sarà disponibile se è impostato iTunes come destinazione.</p>

Impostazione	Descrizione
Registra Testo	Avvia il processo di registrazione. Durante il processo di registrazione, questo pulsante diventa "Annulla Registrazione".
<i>Anteprima e Acquisisci</i>	
Ascolta Anteprima / Annulla Anteprima	Legge fino alle prime 400 parole del testo acquisito. Durante l'anteprima, questo pulsante diventerà Annulla Anteprima.
Acquisisci Appunti	Acquisisce il testo attualmente presente negli appunti, sostituendo il testo precedentemente acquisito.
Mostra/Nascondi Opzioni Sintetizzatore	Espande e comprime la sezione della finestra di dialogo del Registratore ZoomText che contiene le impostazioni del sintetizzatore.
<i>Impostazioni Sintetizzatore</i>	
Lingua	Mostra un elenco di lingue per la sintesi vocale disponibili sul vostro sistema.
Sintesi	Mostra un elenco di sintesi vocali installate sul sistema. Nota: ZoomText supporta sintesi vocali basate su SAPI 4 e SAPI 5.
Voce	Mostra un elenco di voci disponibili per la sintesi selezionata.
Velocità	Regola la velocità della voce (se supportata dal sintetizzatore).
Tono	Regola il tono della voce (se supportato dal sintetizzatore).
Volume	Regola il volume della voce (se supportato dal sintetizzatore).

Assistente vocale

L'Assistente vocale offre un modo facile per interagire con ZoomText e Fusion in Windows 10 e 11, utilizzando i comandi vocali. Potete chiedere di attivare varie funzioni di ZoomText o Fusion utilizzando il linguaggio naturale. Questo significa che una stessa funzionalità può essere attivata attraverso un'ampia varietà di frasi, e non soltanto attraverso un singolo comando vocale predefinito. Per esempio, per aumentare l'ingrandimento, potreste dire: «Ingrandisci», "aumenta il livello di ingrandimento" o "aumentare lo zoom".

A differenza dei comandi da tastiera, che possono essere difficili da ricordare, i comandi vocali naturali sono un modo più semplice per interagire con ZoomText o Fusion. L'uso della voce per controllare le azioni può anche essere d'aiuto ad utenti con determinate condizioni fisiche che impediscono loro di utilizzare una tastiera in modo efficace.

Usare l'Assistente Vocale

L'Assistente Vocale accetta comandi vocali per eseguire azioni ZoomText o Fusion. Per attivare la funzione e quindi l'ascolto, potete utilizzare una parola di attivazione, una combinazione di tasti o l'interfaccia utente. Potete impartire i comandi vocali usando il microfono interno del vostro computer, un microfono esterno o il microfono di una cuffia a filo.

Nota: dato che tutta l'elaborazione del riconoscimento vocale avviene tramite Internet utilizzando i servizi Microsoft nel cloud, ci sarà un leggero ritardo a seconda della connessione.

1. Per avviare l'ascolto di un comando, fate una delle azioni seguenti:
 - Premete la combinazione **Caps Lock + Alt + Spazio**.
 - Pronunciate una specifica parola di attivazione, in modo simile a come si fa con un dispositivo Alexa o Google Home. Potete usare una tra due parole per ZoomText e Fusion: "Zoomy" o "Hey Zoomy". Dite la parola di attivazione seguita

da un comando, ad esempio: "Zoomy, silenzia sintesi", o "Zoomy, aumenta ingrandimento".

- Cliccate il pulsante del microfono nell'angolo superiore destro della barra degli strumenti di ZoomText o Fusion



Nota: la parola di attivazione non è disponibile se usate un microfono Bluetooth. In questo caso, dovrete premere **Caps Lock + Alt + Spazio** prima di pronunciare il comando vocale.

2. Quando l'assistente vocale inizia ad ascoltare un comando vocale, viene riprodotto un breve suono e viene visualizzato un indicatore visivo.



Ora potrete pronunciare il comando. Dopo che l'ascolto del comando è terminato, verrà riprodotto un altro suono fino a quando il comando non viene elaborato.



Consultate [Comandi vocali](#) qui sotto per una lista di comandi vocali supportati e suggeriti.

3. Dopo l'elaborazione, l'indicatore visivo scompare, viene riprodotto un altro breve suono e viene eseguita l'azione desiderata.


Se l'Assistente Vocale non sente nulla, dirà: «Scusa, non ho sentito nulla.»

Se l'assistente vocale non vi capisce o il comando vocale non è supportato, dirà: "Mi dispiace, non ho capito."

Attivare o disattivare l'Assistente Vocale

Per spegnere e disabilitare l'assistente vocale, fate una delle seguenti azioni:

- Usate il comando vocale, Disattiva Assistente Vocale.
- Nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti, selezionate il pulsante **Assistente vocale**.

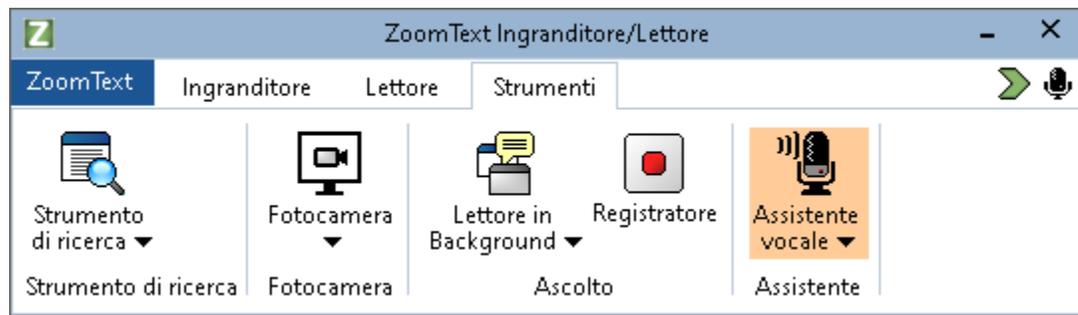

- Cliccate la freccia in basso sul pulsante **Assistente vocale**, quindi scegliete **Impostazioni**.
Nella finestra di dialogo impostazioni Assistente Vocale, deselectionate l'impostazione "Abilita Assistente Vocale".
- Deselectionate Abilita Assistente Vocale nella Procedura di Avvio Guidato.
(ZoomText > Preferenze > Avvio Guidato)

Nota: Quando l'assistente vocale è disattivato, il pulsante del microfono nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti di ZoomText e Fusion non è disponibile.

Disabilitare la parola di Attivazione

Potete disattivare la parola di attivazione e usare **Caps Lock + Alt + Spazio** invece per far sì che l'assistente vocale inizi ad ascoltare un comando. Dopo aver premuto la combinazione, potrete quindi pronunciare il comando.

Per disattivare la parola di attivazione, fate una delle azioni seguenti:

- Usate il comando vocale "Disattiva parola di attivazione".
- Selezionate "Non ascoltare la parola di attivazione" nelle impostazioni dell'assistente vocale.

Nota: Quando la parola di attivazione è disattivata, dovrete sempre premere **Caps Lock + Alt + Spazio** affinché l'Assistente Vocale inizi ad ascoltarvi.

Disattivare i Suoni dell'Assistente vocale

Per disattivare i suoni associati alla parola di attivazione e all'elaborazione dei comandi, fate quanto segue:

1. Nella scheda Strumenti della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a Assistente Vocale o spostatevi fino a Assistente Vocale e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Assistente vocale**, selezionate **Impostazioni**.
Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni Assistente Vocale.
3. Scegliete "Abilita suoni dell'assistente vocale" per attivare o disattivare i suoni della parola di attivazione e dell'elaborazione dei comandi.

Selezionare un microfono per l'uso con l'Assistente Vocale

Quando il vostro computer ha più di un microfono, potete scegliere quale microfono l'assistente vocale dovrà usare per ascoltare i comandi. Questo è utile se state usando Zoom o Teams ed il vostro microfono è silenziato.

Per selezionare un microfono per l'Assistente Vocale, fate quanto segue:


1. Nella scheda Strumenti della barra degli strumenti, cliccate sulla freccia accanto a Assistente Vocale o spostatevi fino a Assistente Vocale e premete il tasto freccia giù.
2. Nel menù **Assistente vocale**, selezionate **Impostazioni**.

Apparirà la finestra di dialogo Assistente Vocale.

3. Selezionate un microfono dall'elenco **Dispositivi di Input**.

Impostazioni dell'assistente vocale

Per abilitare l'Assistente vocale e modificarne le impostazioni, usate il pulsante combinato **Assistente vocale**, situato nella scheda **Strumenti** della barra degli strumenti. La parte inferiore del pulsante apre le impostazioni dell'Assistente Vocale.

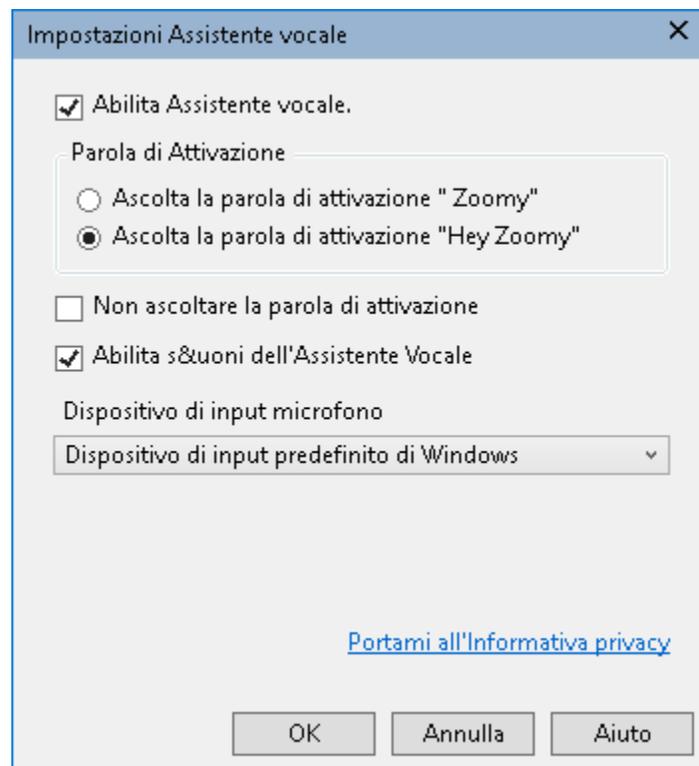

Le impostazioni dell'Assistente vocale

Impostazione	Descrizione
Abilita Assistente vocale.	Abilita o disabilita l'Assistente Vocale
Parola di Attivazione	Potete scegliere di pronunciare la parola "Zoomy" (predefinita) o la frase "Hey Zoomy" per attivare l'assistente vocale.

Impostazione	Descrizione
	<p>La frase Hey Zoomy è utile se vi trovate in un ambiente rumoroso e ZoomText o Fusion interpretano accidentalmente altri suoni come la parola di attivazione Zoomy.</p>
<p>_Non ascoltare la parola di attivazione</p>	<p>Selezionate per far sì che ZoomText o Fusion non ascoltino più la parola di attivazione.</p> <p>Nota: quando la parola di attivazione è disattivata, dovrete sempre premere Caps Lock + Alt + Spazio affinché l'Assistente vocale inizi ad ascoltarvi.</p>
<p>Abilita suoni dell'assistente vocale.</p>	<p>Attiva o disattiva i messaggi e gli indicatori audio dell'Assistente Vocale.</p>
<p>Dispositivo di input microfono</p>	<p>Visualizza un elenco di tutti i microfoni disponibili sul vostro computer (per esempio, un microfono interno e una cuffia) e vi permette di scegliere quale microfono l'assistente vocale deve usare per l'ascolto dei comandi. Designando un microfono diverso per questa funzione rispetto a quello utilizzato per altre applicazioni come Teams o Zoom, potrete disattivare l'audio di tali applicazioni durante le riunioni e continuare a utilizzare l'Assistente vocale.</p>

Comandi Vocali

Di seguito trovate una lista di comandi vocali supportati e suggeriti. Potete sbizzarrirvi a provare le vostre variazioni di questi comandi.

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<i>Comandi di Ingrandimento</i>	
Per aumentare l'ingrandimento	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta ingrandimento • Aumenta il livello di ingrandimento • Ingrandisci • Zoom x, dove x è un livello di zoom, ad esempio: zoom 5 per impostare l'ingrandimento a 5 • Più grande
Per ridurre l'ingrandimento	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuisci il livello di ingrandimento • Diminuisci il livello di ingrandimento • Riduci ingrandimento • Più piccolo
Per attivare o disattivare l'ingrandimento	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom a 1x • Attiva ingrandimento • Disattiva ingrandimento • Disattiva modalità 1x
Per impostare l'ingrandimento a un livello specifico	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta il livello di zoom su x, dove x è un livello di zoom specifico, per esempio, imposta il livello di zoom su 5 • Zoom 10

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrandimento 5
<i>Comandi per la Sintesi</i>	
Per attivare o disattivare la sintesi	<ul style="list-style-type: none"> • Attiva sintesi • Disattiva sintesi • Attiva sintesi • Disattiva voce
Per cambiare la velocità della voce	<ul style="list-style-type: none"> • Cambia la velocità della voce in x, dove x è una velocità specifica, per esempio 140 parole al minuto • Imposta velocità voce a X • Velocità voce X • Parla più velocemente • Parla più lentamente • Aumenta la velocità della voce • Diminuisci la velocità della voce
<i>Miglioramenti Colore</i>	
Per modificare i miglioramenti del colore	<ul style="list-style-type: none"> • Cambia colore • Attiva colore • Disattiva colore
<i>Miglioramenti puntatore</i>	
Per modificare il puntatore	<ul style="list-style-type: none"> • Cambia miglioramento puntatore • Attiva puntatore • Disattiva mouse

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
	<ul style="list-style-type: none"> • Schema puntatore 2 • Puntatore grande giallo
Miglioramenti cursore	
Per modificare il cursore	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica miglioramento cursore • Attiva miglioramento cursore • Disattiva cursore • Attiva cursore • Schema cursore 3 • Cursore cerchio verde
Miglioramenti Focus	
Per modificare i miglioramenti del focus	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica miglioramento focus • Attiva miglioramento focus • Disattiva focus • Schema focus 4 • Focus blocco giallo
Riscontro tastiera	
Per modificare il riscontro della tastiera	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica riscontro tastiera • Disattiva tastiera
Riscontro Mouse	
Per modificare il riscontro del mouse	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica riscontro mouse • Attiva riscontro mouse • Attiva riscontro mouse

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<i>Barra di accesso rapido</i>	
Per lanciare la Barra di Accesso Rapido	<ul style="list-style-type: none"> • Barra di accesso rapido • Accesso rapido • Mostra elenco scorciatoie • Elenco scorciatoie
Per passare alla Barra degli Strumenti ZoomText	<ul style="list-style-type: none"> • Mostra interfaccia utente • Interfaccia Utente • Barra degli strumenti
<i>Prolissità</i>	
Per modificare il livello di prolissità	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica livello di prolissità del lettore • Imposta prolissità su bassa • Imposta la prolissità sulla più alta • Prolissità Media
<i>Strumento di Ricerca</i>	
Per aprire o chiudere lo Strumento di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> • Apri strumento di ricerca • Chiudi strumento di ricerca
<i>Fotocamera</i>	
Per aprire o chiudere la fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> • Esegui Fotocamera • Chiudi fotocamera
<i>Lettore applicazione (Vista testo) / Lettore applicazione (Vista applicazione)</i>	

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<p>Per aprire o chiudere il Lettore applicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia lettore vista applicazione • Chiudi lettore vista applicazione • Lancia lettore vista testo • • Chiudi lettore
<i>Lettore in background</i>	
<p>Per aprire o chiudere il Lettore in background</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esegui lettore in background • Esci dal lettore in Background
<i>Registratore{</i>	
<p>Per aprire o chiudere il registratore</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • Avvia registratore • • Chiudi registratore
<i>Vista statica</i>	
<p>Per avviare lo strumento Vista statica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova Vista statica • Nuova vista statica • Crea vista statica • Crea finestra statica
<p>Per attivare o disattivare la vista statica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Attiva vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
	<ul style="list-style-type: none"> • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4 • Vista statica x, dove x è 1, 2, 3 o 4
Monitor multipli	
Per spostarvi tra i monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Cambia schermo • Finestra successiva • Finestra ancorata a sinistra • Finestra span
Scorrimento	
Per spostare la finestra ingrandita in alto, in basso, a destra, a sinistra o al centro	<ul style="list-style-type: none"> • Mostrami la parte inferiore dello schermo • Salta a destra • Salta a sinistra • Salta verso l'alto • Salta verso il basso • Vai alla ricerca di Windows • Vai all'area delle notifiche
Per spostarsi a un elemento che ha il focus	<ul style="list-style-type: none"> • Vai al focus • Trova il focus
Centro messaggi	
Per aprire il Centro messaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Per aprire il Centro messaggi
Information	

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<p>Per visualizzare l'aiuto dell'Assistente Vocale, oppure la versione del programma e le informazioni di licenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aiuto (apre l'aiuto dell'Assistente vocale) • Apri aiuto (Apre l'aiuto dell'Assistente Vocale) • Finestra di dialogo informazioni su • Apri finestra informazioni • Apri finestra di dialogo informazioni
<p><i>Keyboard Help for JAWS Commands - Fusion Only</i></p>	
<p>Per attivare o disattivare l'aiuto tastiera di JAWS quando si usa Fusion</p> <p>In fusion, potete attivare l'aiuto tastiera di JAWS utilizzando l'Assistente vocale. Quando è attivo l'aiuto tastiera, potete premere una combinazione ed ascoltare che cosa fa, sia all'interno di JAWS che di Fusion. Quando l'Aiuto tastiera è disattivato, la combinazione eseguirà il comando.</p> <p>Per attivare l'Aiuto tastiera in Fusion, dite: "Hey Zoomy, attiva Aiuto tastiera" oppure "Hey Sharky, attiva Aiuto tastiera". Potete anche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attiva/Disattiva Aiuto Tastiera

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<p>attivare l'Aiuto tastiera premendo Insert + 1, per poi disattivarlo premendo Escape oppure nuovamente Insert + 1.</p>	
<i>Picture Smart AI - Solo Fusion</i>	
<p>Descrivi l'intero schermo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Descrivi lo schermo" • Descrivi schermo • Cosa c'è a schermo?
<p>Descrivi la finestra dell'applicazione attiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Descrivi la finestra corrente" • Descrivi finestra • What is on this window?
<p>Acquisisci e Descrivi Documento Stampato da Scanner o Telecamera PEARL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisisci un'immagine e descrivi • Cosa c'è sotto la telecamera? • Cosa c'è sotto lo scanner?
<p>"Descrivi l'immagine negli appunti"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Descrivi l'immagine negli appunti" • Descrivi appunti • Qual è l'immagine negli appunti?
<p>Descrivi il File Immagine attualmente selezionato in Esplora File I formati di immagine supportati includono BMP, JPEG, GIF, TIF, PNG o HEIC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Descrivi il file corrente" • Descrivi file • Qual è l'immagine nel file?

Per fare questa azione...	Usa questo comando...
<p>Describe any currently selected control. Ad esempio, se siete focalizzati su un'immagine all'interno di un documento Word o su un social network come Facebook, questo comando descriverà l'immagine.</p> <p>Quando usate questo comando in una pagina Web, assicuratevi che la finestra del vostro browser web sia a pieno schermo per ottenere i migliori risultati.</p>	<ul style="list-style-type: none">• "Descrivi il controllo corrente"• Descrivi Controllo

Configurazioni

Tutte le impostazioni di ZoomText possono essere salvate e ripristinate utilizzando i file di configurazione. I file di configurazione controllano tutte le funzionalità di ZoomText, come ad esempio il livello di ingrandimento, il tipo di finestra ingrandita, i miglioramenti dello schermo, le opzioni di lettura, le impostazioni per le applicazioni e i tasti di scelta rapida. Non c'è un limite alla quantità di file di configurazione che potete usare, quindi sentitevi liberi di crearne e usarne quanti ve ne servono. Potete anche creare impostazioni specifiche per le applicazioni, le quali si caricheranno automaticamente ogni volta che una certa applicazione diventa attiva.

- [La Configurazione Predefinita](#)
- [Salvare e caricare le configurazioni](#)
- [Tasti di Scelta Rapida per le Configurazioni](#)
- [Impostazioni per le Applicazioni](#)

La Configurazione Predefinita

Quando avviate ZoomText, il file di configurazione predefinito, ZT.ZXC, viene caricato automaticamente. Questo file contiene i valori predefiniti per tutte le impostazioni di ZoomText. Potete creare la vostra configurazione predefinita, che caricherà le vostre impostazioni personalizzate ogni volta che ZoomText viene eseguito. Non preoccupatevi di perdere le impostazioni predefinite originali: il file di default originale può essere facilmente ripristinato.

▪ Per salvare una configurazione predefinita personalizzata

1. Impostate tutte le funzioni di ZoomText come desiderate.
2. Nel menu **ZoomText**, scegliete **Configurazioni > Salva come predefinita**.

Apparirà una finestra di dialogo che vi chiederà di confermare il salvataggio della configurazione.

3. Selezionate **Sì** per sovrascrivere la configurazione predefinita corrente.

▪ Per ripristinare il file di configurazione predefinito originale

1. Nel menu **ZoomText**, scegliete **Configurazioni > Ripristina Predefinite**.

Apparirà una finestra di dialogo che vi chiederà di confermare il ripristino della configurazione.

2. Selezionate **Sì** per sovrascrivere la configurazione predefinita corrente.

Salvare e caricare le configurazioni

Le impostazioni correnti di ZoomText possono essere salvate in un file di configurazione in qualsiasi momento. Questo file di configurazione può essere caricato in un secondo momento, e le impostazioni salvate nel file avranno effetto immediato.

▪ Per salvare le impostazioni in un file di configurazione

1. Impostate tutte le funzioni di ZoomText come desiderate.
2. Nel menu **ZoomText**, scegliete **Configurazioni > Salva configurazione personalizzata**.

Apparirà La finestra di dialogo Save Configuration, che mostrerà i file di configurazione esistenti.

3. Digitate il nome della nuova configurazione nella casella **Nome file**.
4. Fate clic su **OK**.

▪ Per caricare le impostazioni da un file di configurazione

1. Dal menu **ZoomText**, scegliete **Apri Configurazione Personalizzata**.

Apparirà La finestra di dialogo Apri Configurazione, che mostrerà i file di configurazione esistenti.

2. Selezionate il file di configurazione desiderato.
3. Fate clic su **Apri**.

Tasti di scelta Rapida per le Configurazioni

Potete usare tasti di scelta rapida per caricare i file di configurazione, senza bisogno di accedere all'interfaccia di ZoomText. Prima che un tasto di scelta rapida possa essere utilizzato per caricare una configurazione, è necessario assegnargli un file di configurazione. La seguente tabella elenca i tasti di scelta rapida predefiniti per le configurazioni. Per informazioni su come assegnare i file di configurazione ai tasti di scelta rapida, consultate la sezione «Per assegnare un file di configurazione a un comando Carica Configurazione» nell'argomento [La finestra di dialogo Tasti di Comando](#).

Impostazione	Descrizione
Carica File di Configurazione 1	Caps Lock + 1
Carica File di Configurazione 2	Caps Lock + 2
Carica File di Configurazione 3	Caps Lock + 3
Carica File di Configurazione 4	Caps Lock + 4
Carica File di Configurazione 5	Caps Lock + 5
Carica File di Configurazione 6	Caps Lock + 6
Carica File di Configurazione 7	Caps Lock + 7
Carica File di Configurazione 8	Caps Lock + 8

Impostazione	Descrizione
Carica File di Configurazione 9	Caps Lock + 9
Carica File di Configurazione 10	Caps Lock + 0

Impostazioni delle Preferenze

Le impostazioni per le preferenze vi permettono di controllare l'avvio, l'arresto e gli aggiornamenti di ZoomText, , l'aspetto dell'interfaccia utente e il tipo di arrotondamento da applicare nella vista ingrandita.

- [Preferenze del Programma](#)
- [Preferenze dell'Interfaccia Utente](#)
- [Preferenze Arrotondamento](#)
- [Preferenze di lettura classiche](#)
- [Esegui ZoomText come](#)

Preferenze del Programma


Le preferenze del programma controllano come ZoomText si avvia e si chiude, e permettono di abilitare l'aggiornamento automatico.

- **Per impostare le preferenze del programma**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Programma**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Programmi.

2. Regolate le preferenze del programma come desiderate.
3. Fate clic su **OK**.

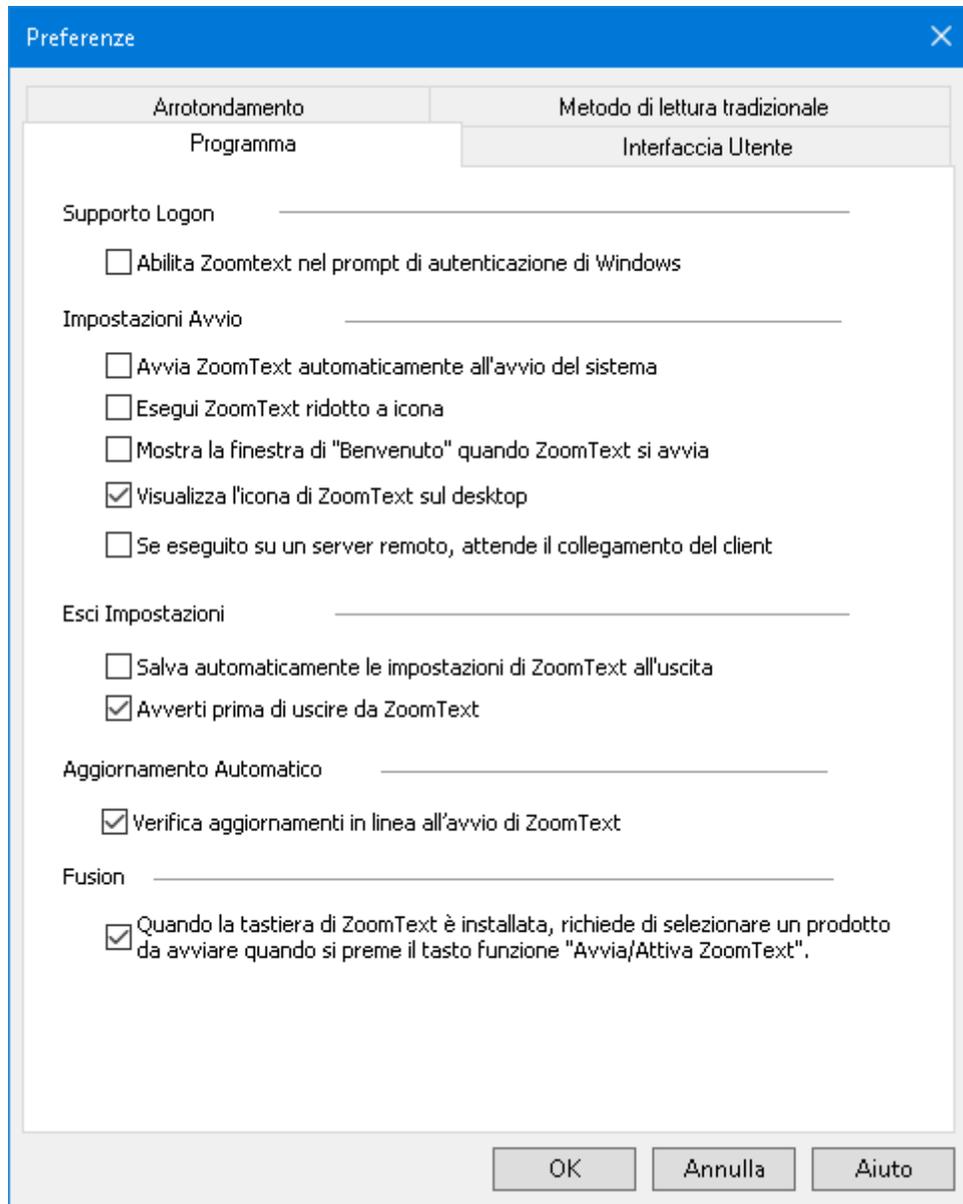

La scheda Programma

Impostazione	Descrizione
<i>Supporto Logon</i>	
Abilita ZoomText nella Schermata di Accesso a Windows	Abilita l'utilità ZoomText Secure Mode nella schermata di accesso a Windows e in altre schermate sicure di Windows. ZoomText Secure Mode fornisce funzioni essenziali di

Impostazione	Descrizione
	ingrandimento e lettura dello schermo nelle schermate sicure.
<i>Impostazioni di Avvio</i>	
Avvia ZoomText automaticamente all'avvio di Windows	ZoomText verrà eseguito automaticamente ogni volta che si avvia il sistema.
Esegui ZoomText ridotto a icona	L'interfaccia utente di ZoomText viene ridotta a icona all'avvio di ZoomText.
Mostra la finestra di "Benvenuto" quando ZoomText si avvia	Ogni volta che ZoomText viene avviato, apparirà la finestra di benvenuto insieme alla barra degli strumenti di ZoomText. La finestra di benvenuto mostra istruzioni e tasti di scelta rapida utili per i nuovi utenti.
Mostra l'icona di ZoomText sul desktop	Visualizza l'icona ZoomText sul desktop.
Se eseguito su un server remoto, attendi che un client si connetta	Quando ZoomText (o Fusion) viene avviato su un server remoto, se ZoomText (o Fusion) non è in esecuzione sul computer client, si avvierà in modalità dormiente e si sveglierà quando ZoomText (o Fusion) verrà lanciato sul computer client.
<i>Chiudi Impostazioni</i>	
Salva automaticamente le impostazioni di ZoomText all'uscita	Tutte le impostazioni di ZoomText verranno salvate nella configurazione attiva quando il programma esce.
Avvisa prima di uscire da ZoomText	Vi verrà chiesta conferma prima di uscire dal programma.

Impostazione	Descrizione
<p>Termina il processo di ingrandimento quando si esce da ZoomText</p>	<p>Termina il processo di ingrandimento quando il programma viene chiuso. Se l'opzione viene disattivata, il processo rimarrà in esecuzione in modo da permettere un più rapido avvio di ZoomText nella stessa sessione di Windows.</p>
Aggiornamento Automatico	
<p>Verifica aggiornamenti online all'avvio di ZoomText</p>	<p>Ogni volta che si avvia ZoomText, se è attiva una connessione Internet, ZoomText controllerà online gli aggiornamenti disponibili. Se sono disponibili aggiornamenti, una procedura guidata vi darà la possibilità di scaricarli e installarli.</p>
Fusion	
<p>Quando la tastiera di ZoomText è installata, chiedi quale prodotto avviare quando si preme il tasto funzione "Avvia/Attiva ZoomText".</p>	<p>Questa impostazione vi chiede di aprire ZoomText o Fusion quando usate il tasto F1 sulla tastiera di ZoomText.</p> <p>Nota: Devono essere vere le seguenti condizioni affinché venga visualizzato il prompt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sia ZoomText che Fusion sono installati. (Se Fusion non è installato, ZoomText è l'applicazione predefinita). 2. State usando una tastiera ZoomText e il software della tastiera ZoomText è installato e abilitato. 3. State usando il tasto funzione F1 (chiamato anche tasto funzione di

Impostazione	Descrizione
	Attivazione) per avviare una delle due applicazioni.
<i>Dati anonimi</i>	
Partecipa al nostro impegno per migliorare i prodotti Freedom Scientific inviando dati anonimi di utilizzo.	Abilita o disabilita l'invio di dati anonimi per migliorare il software.

Preferenze dell'Interfaccia Utente


Le preferenze dell'interfaccia utente controllano come l'interfaccia utente di ZoomText appare sul desktop di Windows.

- **Per impostare le preferenze dell'interfaccia utente**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Interfaccia Utente**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Interfaccia Utente.

2. Regolate le preferenze dell'interfaccia utente come desiderate.
3. Fate clic su **OK**.

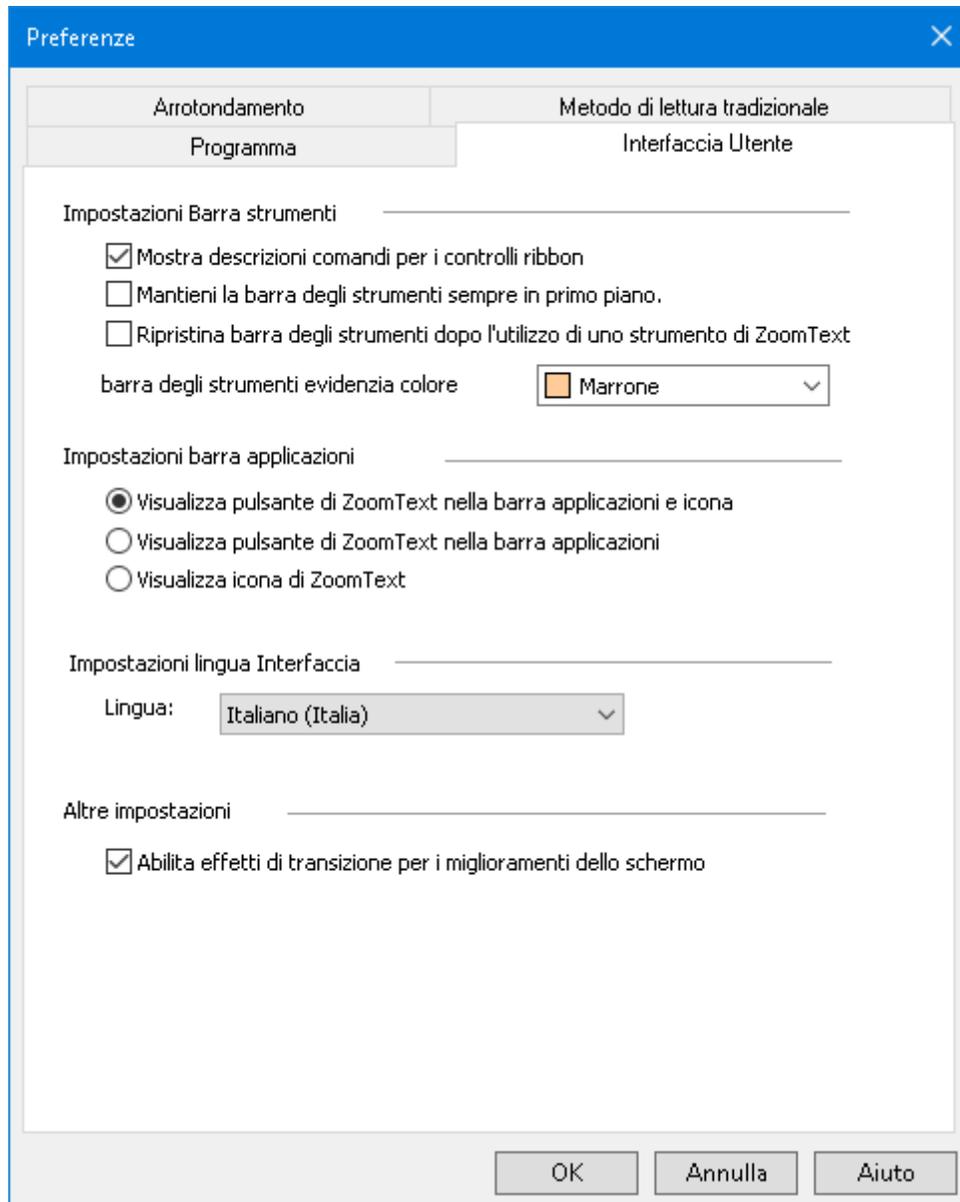

The User Interface tab.

Impostazione	Descrizione
<i>Impostazioni Barra strumenti</i>	
Mostra i tooltip per i controlli dei ribbon	Abilita la visualizzazione di tooltip informativi quando si sposta il mouse sui controlli della barra degli strumenti di ZoomText.

Impostazione	Descrizione
&Mantieni la barra degli strumenti sempre in primo piano.	La finestra dell'interfaccia utente di ZoomText rimarrà in cima a tutte le altre finestre, anche quando ZoomText non è l'applicazione attiva.
Ripristina barra degli strumenti dopo l'utilizzo di uno strumento di ZoomText	La barra degli strumenti verrà sempre ripristinata dopo l'uscita da uno strumento di ZoomText.
colore di evidenziazione barra degli strumenti:	Seleziona il colore che viene utilizzato per evidenziare i controlli sulla barra degli strumenti ZoomText.
<i>Impostazioni barra delle applicazioni</i>	
Visualizza pulsante ZoomText nella barra delle applicazioni e icona nel System Tray	Quando ZoomText è in esecuzione, il relativo pulsante nella barra delle applicazioni e l'icona del system tray sono entrambi visualizzati.
Visualizza pulsante di ZoomText nella barra delle applicazioni	Quando ZoomText è in esecuzione, verrà visualizzato solo il suo pulsante nella barra delle applicazioni.
Visualizza solo l'icona del system tray	Quando ZoomText è in esecuzione, verrà visualizzata solo la sua icona nella barra delle applicazioni.
<i>Lingua Interfaccia</i>	
Lingua	Seleziona la lingua in cui verrà visualizzata l'interfaccia utente di ZoomText. Nota: Questa opzione non è disponibile nelle versioni solo in inglese.

Impostazione	Descrizione
<i>Altre impostazioni</i>	
Abilita effetti di transizione per i miglioramenti dello schermo	Permette spostamenti visivi fluidi quando si passa tra gli schemi di miglioramento dello schermo di ZoomText.

Preferenze Arrotondamento

Le preferenze di arrotondamento controllano come ZoomText arrotonda e rende più nitido il testo e la grafica (incluse le foto) nella vista ingrandita. ZoomText fornisce due tipi di arrotondamento: xFont e Arrotondamento Geometrico, che possono essere abilitati individualmente o simultaneamente.

- **xFont** si applica solo al testo, e visualizza il testo ingrandito alla massima qualità possibile. Non è disponibile in tutte le applicazioni. Quando xFont non è disponibile, l'Arrotondamento Geometrico arrotonderà il testo ingrandito (se abilitato).
- **L'Arrotondamento Geometrico** fornisce un'alta qualità sia alla grafica che al testo dove l'ingrandimento di xFont non può essere applicato. Sono disponibili due tipi di arrotondamento geometrico: ClearSharp e Legacy.
 - **ClearSharp** è il nuovo tipo di arrotondamento geometrico, che produce una migliore qualità di arrotondamento e garantisce prestazioni migliori del sistema.
 - **Legacy** è il vecchio tipo di arrotondamento, che rimane disponibile per gli utenti che preferiscono l'aspetto di quest'ultimo.

Quando ZoomText è abilitato e sta ingrandendo lo schermo, potete passare tra le due modalità di arrotondamento per decidere quale dei due preferite, oppure usare una combinazione di entrambi.

▪ Per passare tra le due modalità di arrotondamento

- Premete il tasto Modalità di Arrotondamento: **Caps Lock + X**.


Potete mostrare e configurare le impostazioni di arrotondamento nella finestra di dialogo Preferenze.

- **Per regolare le preferenze di arrotondamento**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Arrotondamento**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Arrotondamento.

2. Regolate le preferenze di arrotondamento come desiderate.
3. Fate clic su **OK**.

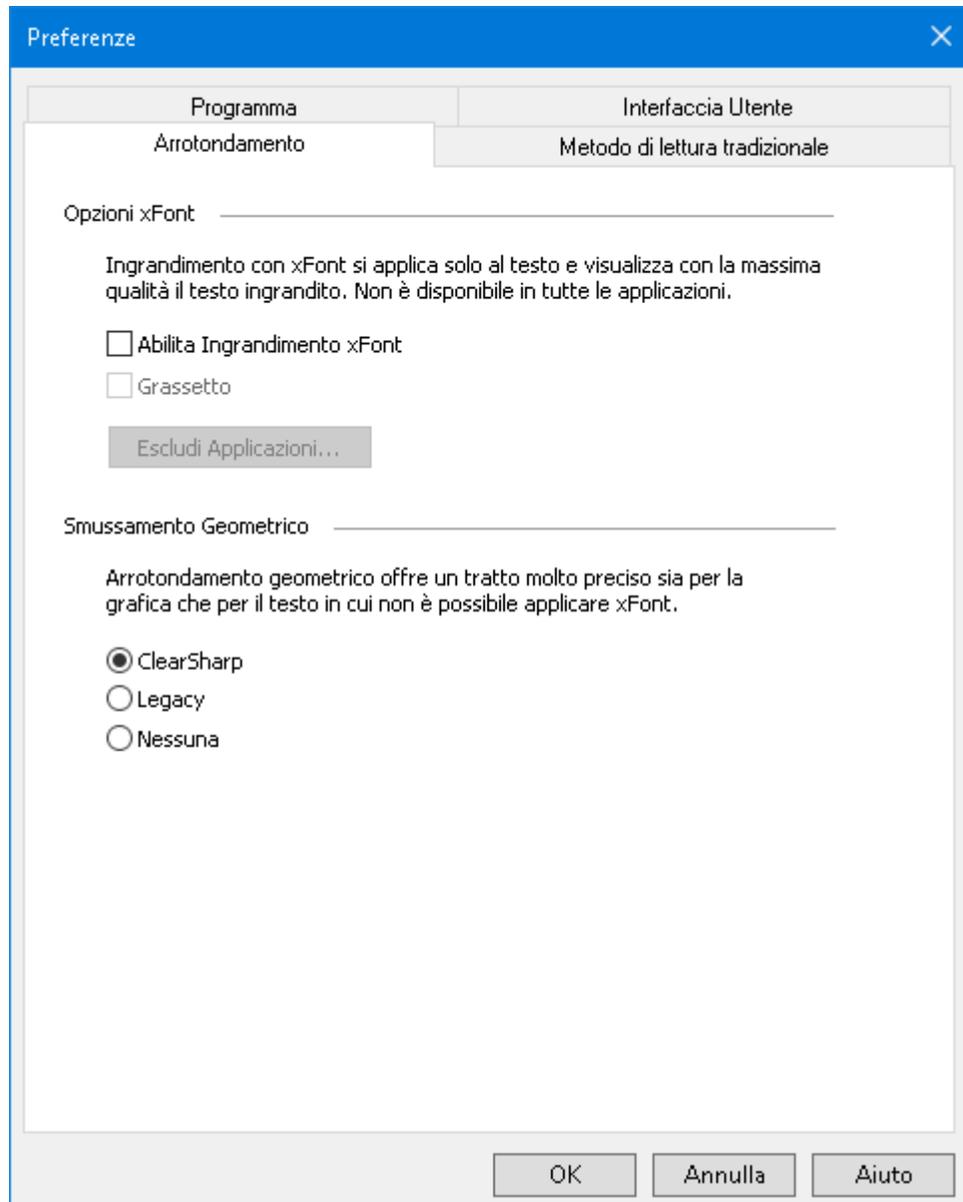

La scheda Arrotondamento

Impostazione	Descrizione
<i>Opzioni xFont</i>	
Abilita Ingrandimento xFont	Abilita l'ingrandimento xFont. xFont visualizza il testo ingrandito alla massima qualità possibile. Non è disponibile in tutte le applicazioni.

Impostazione	Descrizione
Mostra in grassetto il testo ingrandito con xFont	Aggiunge il grassetto al testo ingrandito con xFont.
Escludi Applicazioni	Visualizza le impostazioni per escludere l'uso di xFont nelle applicazioni problematiche. Consultate "Escludere xFont nelle applicazioni problematiche" qui sotto.
<i>Arrotondamento Geometrico</i>	
ClearSharp	Abilita l'arrotondamento geometrico ClearSharp
Legacy	Abilita l'arrotondamento geometrico Legacy.
Nessuno	Disabilita l'arrotondamento geometrico.

Escludere xFont nelle applicazioni problematiche

Alcune applicazioni contengono componenti dell'interfaccia utente che non sono compatibili con la funzione xFont di ZoomText, il che può portare a visualizzare testo mancante o corrotto. Quando questo accade, potete escludere l'uso di xFont all'interno dell'applicazione problematica selezionando (spuntando) il nome dell'applicazione nella finestra di dialogo Escludi applicazioni.

Nota:Le applicazioni note per andare in conflitto con xFont sono state escluse nella configurazione predefinita di ZoomText.

▪ **Per escludere xFont nelle applicazioni selezionate**


1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Arrotondamento**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Arrotondamento.

2. Selezionate **Abilita Ingrandimento xFont**.
3. Selezionate **Escludi Applicazioni...**

Apparirà la finestra di dialogo Escludi Applicazioni.

4. Nella casella elenco **Escludi xFont da**, spuntate le applicazioni da cui volete escludere l'uso di xFont.
5. Fate clic su **OK**.
6. Riavviate ZoomText. Questo passo è necessario per attivare le modifiche applicate nella finestra di dialogo Escludi applicazioni.

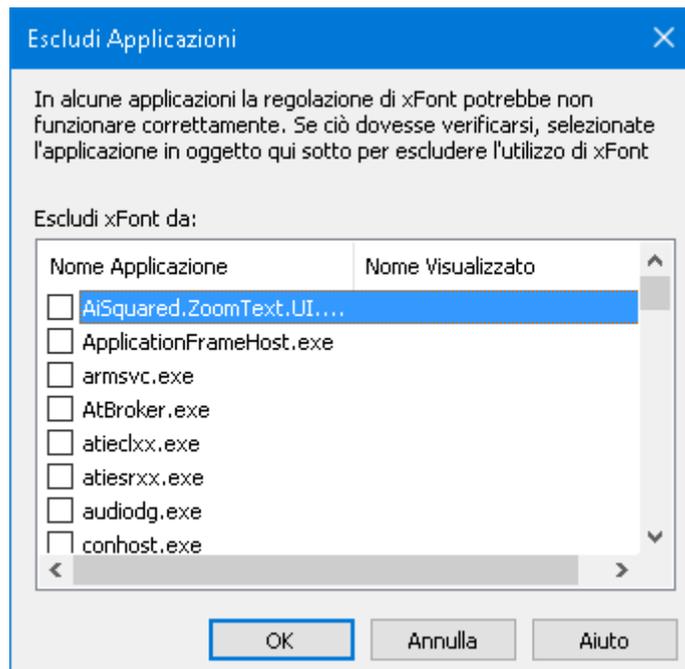

La finestra di dialogo Escludi applicazioni

Impostazione	Descrizione
Escludi xFont da:	Visualizza un elenco di applicazioni attualmente in esecuzione sul sistema. Nelle applicazioni selezionate, XFont non verrà utilizzato.

Preferenze di lettura tradizionale

Nota: Preferenze di lettura tradizionale è uno strumento di supporto utilizzato per risolvere i problemi di lettura tramite sintesi vocale delle applicazioni classiche (app legacy). La modifica di queste impostazioni potrebbe venirvi richiesta dal supporto tecnico.


È possibile che in un ambiente aziendale siano in esecuzione applicazioni obsolete o proprietarie legacy che non supportano alcuna API di accessibilità, ad esempio UI Automation, MSAA (Microsoft Active Accessibility), IAccessible2 o il DOM (Document Object Model). Questo non è un problema per le applicazioni moderne come Chrome, Edge, e le applicazioni di Office come Excel e Outlook. Se, quando usate un'applicazione Legacy insieme all'ultima release di ZoomText o Fusion, avete a disposizione l'ingrandimento ma non la sintesi o il tracciamento, potreste dover abilitare la lettura tradizionale per quella specifica applicazione.

- **Per abilitare la lettura tradizionale per un'applicazione:**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Lettura tradizionale**.

Apparirà la finestra di dialogo Preferenze, che mostrerà la scheda Lettura tradizionale.

2. Nella casella elenco **Abilita lettura tradizionale per**, selezionate le applicazioni per le quali volete abilitare la lettura tradizionale.
3. Selezionate **OK**.

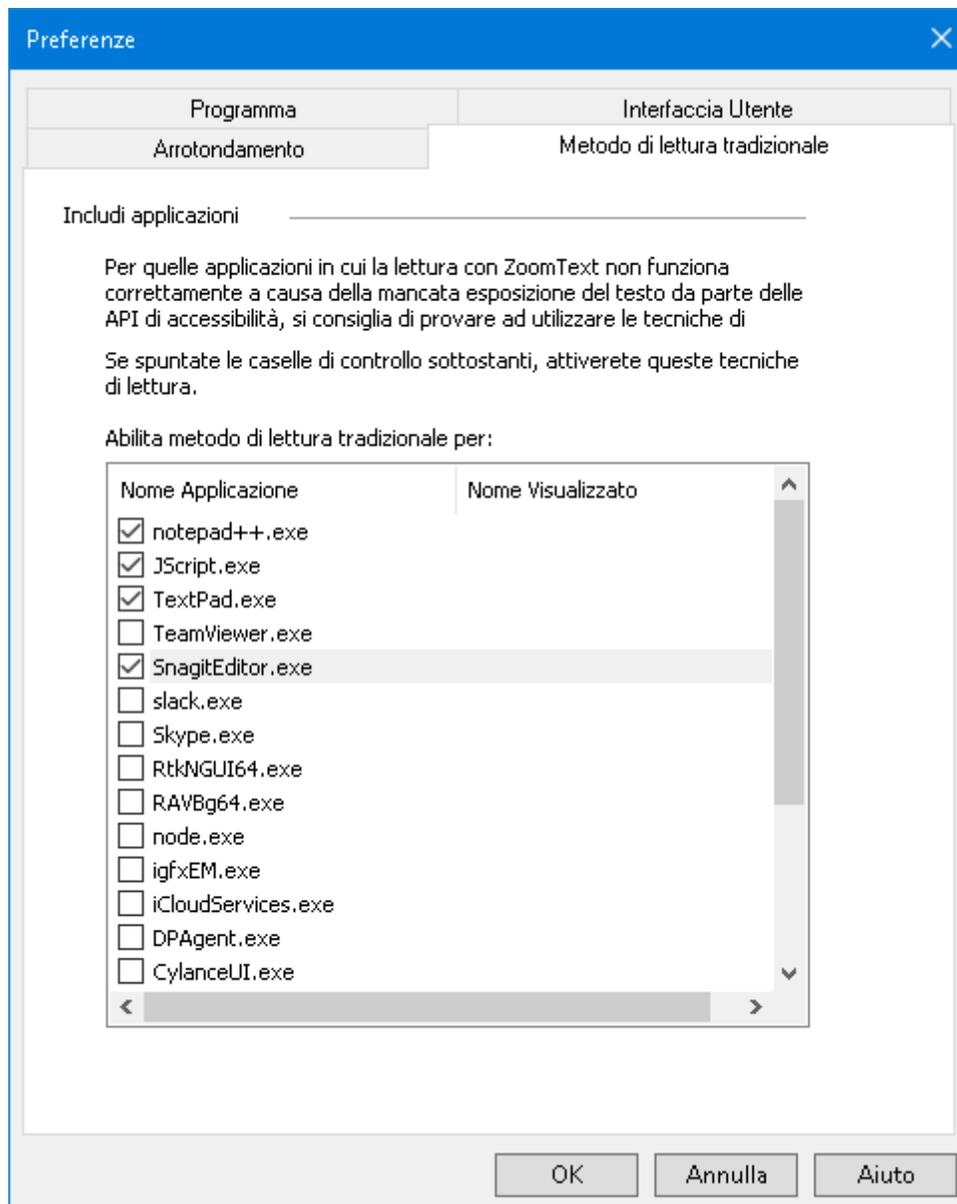

La scheda Lettura tradizionale.

Impostazione	Descrizione
Abilita lettura tradizionale per:	Visualizza un elenco di applicazioni attualmente in esecuzione sul sistema. Le applicazioni attivate utilizzeranno le tecniche di lettura tradizionali.

Esegui ZoomText come

In certe situazioni, potreste volere che un'installazione di ZoomText Ingranditore/Lettore venga avviata ed eseguita solo come ZoomText Ingranditore. Potete fare questo nella finestra di dialogo Esegui zoomText come.


▪ Per decidere la modalità in cui viene eseguito ZoomText

1. Nel menu **ZoomText** scegliete **Preferenze > Esegui ZoomText come**.

Apparirà la finestra di dialogo Esegui ZoomText come.

2. Selezionate la modalità in cui volete che venga eseguito ZoomText.
3. Fate clic su **Riavvia ZoomText ora**.

ZoomText si chiuderà e si riavvierà nella modalità selezionata.

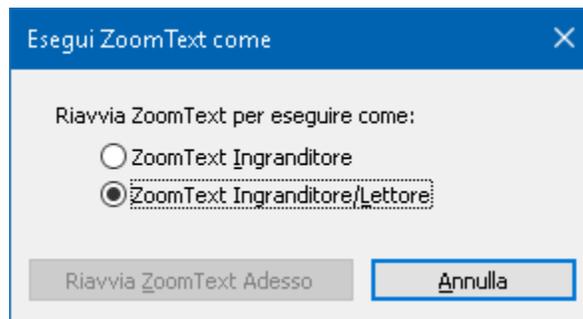

La finestra di dialogo Esegui ZoomText come.

Impostazione	Descrizione
ZoomText Ingranditore	Imposta ZoomText ad avviarsi come ZoomText Ingranditore
ZoomText Ingranditore/Lettore	Imposta ZoomText ad avviarsi come ZoomText Ingranditore/Lettore

Impostazione	Descrizione
Riavvia ZoomText Adesso	Chiude e riavvia ZoomText nella modalità selezionata.

Comandi ZoomText

Questa sezione fornisce un elenco completo di comandi per ZoomText, inclusi tasti rapidi, tasti a livelli e tasti modali.

- [Comandi Lettore Applicazione](#)
- [Comandi del Lettore in Background](#)
- [Comandi della Fotocamera](#)
- [Comandi dello Strumento di Ricerca](#)
- [Modalità Tasti a Livelli](#)
- [Comandi Ingranditore](#)
- [Comandi Programma](#)
- [Comandi Lettore](#)
- [Comandi per le Aree di Lettura](#)
- [Comandi del Registratore](#)
- [Comandi di Lettura](#)
- [Comandi di Scorrimento](#)
- [Comandi di Supporto](#)
- [Comandi del Cursore di Testo](#)
- [Comandi per le Finestre](#)

Comandi Lettore Applicazione

I seguenti tasti di scelta rapida possono essere utilizzati per lanciare il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Lettore Applicazione dal puntatore	Caps Lock + Alt + Click Sinistro
Esegui Vista Applicazione	Caps Lock + Alt + A
Esegui Vista Testo	Caps Lock + Alt + T
Esegui Strumento SpeakIt	Caps Lock + Alt + S
Esegui Lettore Applicazione (modalità selezionata)	Caps Lock + Alt + R

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per eseguire il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui Lettore Applicazione	CapsLock + Spazio, A

Mentre il Lettore Applicazione è attivo, i seguenti tasti modali possono essere usati per lavorare con il Lettore Applicazione.

Comando	Tasti Modali
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Frase Successiva	Destra

Comando	Tasti Modali
Frase Precedente	Sinistra
Paragrafo Successivo	Freccia Giù
Paragrafo Precedente	Freccia Su
Pagina Successiva	Pagina Giù Pagina Giù
Pagina Precedente	Pagina Su
Parola Corrente *	Ctrl + Alt + Shift + Su
Riga Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Destra
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giù
Paragrafo corrente	Ctrl + Alt + Shift + Freccia Sinistra
Prima Parola nella Riga	Home
Ultima Parola nella Riga	End
Inizio del documento	Ctrl + Home
Fine del documento	Ctrl + End
Link Successivo	L
Link Precedente	Shift + L
Attiva Link	Ctrl + Invio

* Quando usate il comando Parola Corrente, pressioni ripetute entro due secondi faranno quanto segue:

- Prima pressione: legge la parola
- Seconda pressione: fa lo spelling della parola
- Terza pressione: fa lo spelling fonetico della parola («Ancona, Bologna, Como»...)

Comandi del Lettore in Background

Il seguente tasto rapido può essere usato per lanciare il Lettore in Background.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui lettore in Background	Caps Lock + Ctrl + B

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per lanciare il Lettore in Background.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui lettore in Background	Caps Lock + Spazio, B

Mentre la barra degli strumenti del Lettore in Background è attiva, potete usare i seguenti tasti modali per controllare il Lettore in Background

Comando	Tasti Modali
Mostra Barra Strumenti	T
Acquisisci	C
Riproduci / Pausa	Invio
Ricomincia (dall'inizio)	Shift + Invio
Frase Successiva	Destra
Frase Precedente	Sinistra
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra

Comando	Tasti Modali
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Su
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giù
Esci	X

Comandi della Fotocamera

Il seguente tasto rapido può essere usato per lanciare la fotocamera ZoomText.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Ctrl + C

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per lanciare la fotocamera ZoomText.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui Fotocamera	Caps Lock + Spazio, C

Quando la barra degli strumenti Fotocamera è attiva, i seguenti tasti modali possono essere usati per regolare le impostazioni della fotocamera.

Comando	Tasti Modali
Mostra Barra Strumenti	T
Zoom Avanti	Freccia Su
Zoom Indietro	Freccia Giù
Ruota Immagine	Sinistra/Destra
Ancorata/Tutto Schermo	Tab
Posizione ancorata	Caps Lock + Sinistra/Destra
Nitidezza Attiva/Disattiva	Shift + Invio
Ripristino Nitidezza	Shift + Backspace
Aumenta Luminosità	Shift + Freccia Su
Riduci Luminosità	Shift + Freccia Giù

Comando	Tasti Modali
Aumenta Contrasto	Shift + Freccia Sinistra
Riduci Contrasto	Shift + Freccia Destra
Due-Colori Attivo/Disattivo	Alt + Invio
Schema due colori	Alt + Sinistra/Destra
Messa a fuoco Automatica/Manuale	Ctrl + Invio
Messa a Fuoco Avanti	Ctrl + Freccia Su
Messa a Fuoco Indietro	Ctrl + Down
Esci	X

Comandi dello Strumento di Ricerca

I seguenti tasti rapidi può essere usato per lanciare lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui Strumento di Ricerca	Caps Lock + Ctrl + F

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per eseguire lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui Strumento di Ricerca	Caps Lock + Spazio, F

Mentre lo Strumento di Ricerca è attivo, i seguenti tasti modali possono essere usati per controllare lo Strumento di Ricerca.

Comando	Tasti Modali
Scorri in Alto i Tipi di Elementi	Ctrl + Freccia Su
Scorri in Basso i Tipi di Elementi	Ctrl + Freccia Giù
Esegui Elemento	Ctrl + Invio
Primo Elemento (nell'elenco filtrato)	Ctrl + Home
Ultimo Elemento (nell'elenco filtrato)	Ctrl + End
Controllo Successivo	Ctrl + C
Form Successivo	Ctrl + F

Comando	Tasti Modali
Intestazione Successiva	Ctrl + H
Intestazione Successiva di Livello 1 ... 6	Ctrl + 1 ... 6
Immagine Successiva	Ctrl + I
Link Successivo	Ctrl + L
Elenco Successivo	Ctrl + S
Tabella Successiva	Ctrl + T
Elemento Successivo	Invio o Ctrl + Destra
Controllo Precedente	Ctrl + Shift + C
Form Precedente	Ctrl + Shift + F
Intestazione Precedente	Ctrl + Shift + H
Intestazione Precedente di Livello 1 ... 6	Ctrl + Shift + 1 ... 6
Immagine Precedente	Ctrl + Shift + I
Link Precedente	Ctrl + Shift + L
Elenco Precedente	Ctrl + Shift + S
Tabella Precedente	Ctrl + Shift + T
Elemento Precedente	Shift + Invio o Ctrl + Sinistra

Comando	Tasti Modali
Lettore Applicazione	Alt + R
Attiva o Disattiva Ricerca in Elenco	Alt + L
Esci dallo Strumento di Ricerca	Esc

Modalità Tasti a Livelli

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per eseguire la modalità Tasti a Livelli.

Comando	Tasti di scelta rapida
Selezione modalità comandi	Caps Lock + Spazio

Quando la modalità a Livelli è selezionata, i seguenti tasti possono essere usati per accedere ai vari gruppi di comandi.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi Lettore Applicazione	A
Esegui Lettore in Background	B
Esegui Fotocamera	C
Esegui Strumento di Ricerca	F
Esegui registratore	D
Comandi Ingranditore	M
Comandi Programma	P
Comandi Lettore	R
Comandi Dire	Y
Comandi di Scorrimento	S
Comandi di Supporto	Q

Comando	Tasti a Livelli
Comandi per le Finestre	W
Comandi per le Aree	Z

Comandi Ingranditore

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare l'ingrandimento.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Ingranditore	Non assegnato
Migliora colori Attivo/Disattivo	Caps Lock + C
Migliora cursore Attivo/Disattivo	Caps Lock + R
Migliora messa a fuoco Attivo/Disattivo	Caps Lock + F
Migliora Puntatore Attivo/Disattivo	Caps Lock + P
Migliora Inverti Smart Attivo/Disattivo	Caps Lock + I
Modalità Arrotondamento	Caps Lock + X
Alterna tra Zoom e 1x	Caps Lock + Invio
Attiva / disattiva Grassetto xFont	Caps Lock + B
Aumenta ingrandimento	Caps Lock + Su
Riduci ingrandimento	Caps Lock + Giù

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare le Aree di Lettura.

Comando	Combinazioni di tasti a livelli
Comandi Ingranditore	Caps Lock + Spazio, M
Migliora colori Attivo/Disattivo	C
Migliora cursore Attivo/Disattivo	R
Migliora messa a fuoco Attivo/Disattivo	F
Migliora Puntatore Attivo/Disattivo	P
Migliora Inverti Smart Attivo/Disattivo	I
Modalità Arrotondamento	X
Alterna tra Zoom e 1x	Invio
Attiva / disattiva Grassetto xFont	B
Aumenta ingrandimento	Su
Riduci ingrandimento	Giù

Comandi Programma

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare i comandi del programma.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Programma	Non assegnato
ZoomText Attivo/Disattivo	Caps Lock + Ctrl + Invio
Mostra interfaccia utente	Caps Lock + Ctrl + U
Carica Configurazione 1 ... 10	Caps Lock + Ctrl + 1 ... 0 Nota: 0 viene usato per caricare la configurazione 10
Gestisci Impostazioni Applicazione	Caps Lock + Ctrl + M
Salva Impostazioni Applicazione	Caps Lock + Ctrl + S

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare i comandi del programma.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi Programma	Caps Lock + Spazio, P
ZoomText Attivo/Disattivo	Invio
Mostra interfaccia utente	U
Carica Configurazione 1 ... 10	1 ... 10 Note: 0 viene usato per caricare la configurazione 10

Comando	Tasti a Livelli
Gestisci Impostazioni Applicazione	M
Salva Impostazioni Applicazione	S

Comandi Lettore

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare il Lettore.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi Lettore	Non assegnato
Modalità riscontro tastiera	Caps Lock + Alt + K
Modalità riscontro mouse	Caps Lock + Alt + M
Riscontro livello di prolissità	Caps Lock + Alt + B
Voce Attiva/Disattiva	Caps Lock + Alt + Invio
Selezione voce	Caps Lock + Alt + V
Voce più veloce	Caps Lock + Alt + Su
Voce più lenta	Caps Lock + Alt + Giù

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare il Lettore.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi Lettore	Caps Lock + Spazio, R
Modalità riscontro tastiera	K
Modalità riscontro mouse	M
Riscontro livello di prolissità	B
Voce Attiva/Disattiva	Invio

Comando	Tasti a Livelli
Selezione voce	V
Voce più veloce	Su
Voce più lenta	Giù

Comandi per le Aree di Lettura

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare le Aree di Lettura.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi per le Aree	Caps Lock + Alt + Z
Crea area	Caps Lock + Alt + C
Modifica area	Caps Lock + Alt + E
Elenco aree	Caps Lock + Alt + L
Naviga Aree	Caps Lock + Alt + G
Area successiva	Caps Lock + Alt + N
Area precedente	Caps Lock + Alt + P
Attiva Area 1 ... 10	Caps Lock + Alt + 1 ... 0 Nota: 0 attiva l'area 10.

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare le Aree di Lettura.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi per le Aree	Caps Lock + Spazio, Z
Crea area	C
Modifica area	E
Elenco aree	L
Naviga Aree	G

Comando	Tasti a Livelli
Area successiva	N
Area precedente	P
Attiva Area 1 ... 10	1 ... 0 Nota: 0 attiva l'area 10.

Comandi del Registratore

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per lanciare il Registratore ZoomText.

Comando	Tasti di scelta rapida
Esegui registratore	Caps Lock + Ctrl + D

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per lanciare il Registratore ZoomText.

Comando	Tasti a Livelli
Esegui registratore	Caps Lock + Spazio, D

Comandi di Lettura

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per attivare i Comandi di Lettura.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi di Lettura	Non assegnato

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per attivare i Comandi di Lettura.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi di Lettura	Caps Lock + Spazio, Y
Leggi la data corrente	D
Leggi l'ora corrente	T
Leggi titolo di colonna della cella	C
Leggi il commento della cella	N
Leggi la formula della cella	O
Leggi il titolo di riga della cella	R
Leggi Appunti	P
Leggi il pulsante predefinito della finestra di dialogo	B
Leggi nome del gruppo nella finestra di dialogo	G

Comando	Tasti a Livelli
Leggi messaggio della finestra di dialogo	M
Leggi scheda della finestra di dialogo	A
Leggi Focus	F
Leggi il testo selezionato	S
Leggi la barra di stato	U
Leggi Titolo della Finestra	W

Comandi di Scorrimento

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare lo Scorrimento.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi di Scorrimento	Non assegnato
Scorri in Alto	Caps Lock + Shift + Su
Scorri in Basso	Caps Lock + Shift + Giù
Scorri a Sinistra	Caps Lock + Shift + Sinistra
Scorri a Destra	Caps Lock + Shift + Destra
Ferma Scorrimento	Caps Lock + Shift + Invio
Salta verso l'alto	Caps Lock + Ctrl + Su
Salta verso il basso	Caps Lock + Ctrl + Giù
Salta a Sinistra	Caps Lock + Ctrl + Sinistra
Salta a Destra	Caps Lock + Ctrl + Destra
Salta al Centro	Caps Lock + Ctrl + Home
Salva Vista	Caps Lock + Ctrl + Pagina Su
Ripristina Vista	Caps Lock + Ctrl + Pagina Giù

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare lo Scorrimento.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi di Scorrimento	Caps Lock + Spazio, S
Scorri in Alto	Su
Scorri in Basso	Giù

Comando	Tasti a Livelli
Scorri a Sinistra	Sinistra
Scorri a Destra	Destra
Ferma Scorrimento	Invio
Salta verso l'Alto	Ctrl + Su
Salta verso il Basso	Ctrl + Giù
Salta a Sinistra	Ctrl + Sinistra
Salta a Destra	Ctrl + Destra
Salta al Centro	Ctrl + Home
Salva Vista	Ctrl + Pagina Su
Ripristina Vista	Ctrl + Pagina Giù

Comandi di Supporto

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per il Supporto.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi di Supporto	Non assegnato
AHOI Attivo/Non attivo	Ctrl + Alt + Shift + A
Report AHOI	Ctrl + Alt + Shift + R
Cattura Schermata	Ctrl + Alt + Shift + C
Rileva Corsore	Ctrl + Alt + Shift + D
Passa Tasto Successivo	Ctrl + Alt + Shift + P
Tracciamento Attivo/Disattivo	Ctrl + Alt + Shift + T
Aggiorna Modello dello schermo	Ctrl + Alt + Shift + U
Informazioni su ZoomText	Ctrl + Alt + Shift + I

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per il Supporto.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi di Supporto	Caps Lock + Spazio, U
AHOI Attivo/non attivo	A
Report AHOI	R
Cattura Schermata	C
Rileva Corsore	D

Comando	Tasti a Livelli
Passa Tasto Successivo	P
Tracciamento Attivo/Disattivo	T
Aggiorna Modello dello schermo	U
Informazioni su ZoomText	I

Comandi del cursore di Testo

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare il Cursore di Testo.

Comando	Tasti di scelta rapida
Carattere Corrente	Alt + Ctrl + Shift + Invio
Parola Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Su
Riga Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Destra
Frase Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Giù
Paragrafo Corrente	Ctrl + Alt + Shift + Sinistra
Frase Successiva	Caps Lock + Alt + Destra
Frase Precedente	Caps Lock + Alt + Sinistra

I seguenti sono comandi da tastiera standard di Windows per spostare il cursore nel testo.

Comando	Tasti di Windows
Carattere Successivo	Destra
Carattere Precedente	Sinistra
Parola Successiva	Ctrl + Destra
Parola Precedente	Ctrl + Sinistra
Riga Successiva	Su
Riga Precedente	Giù
Paragrafo Successivo	Ctrl + Giù
Paragrafo Precedente	Ctrl + Su

Comandi per le Finestre

I seguenti tasti rapidi possono essere usati per controllare le Finestre.

Comando	Tasti di scelta rapida
Comandi per le Finestre	Non assegnato
Tipo finestra Ingrandita	Caps Lock + Z
Strumento di Regolazione Finestra Ingrandita	Caps Lock + A
Vista Congelata Attivo/Disattivo	Caps Lock + E
Nuova Vista Congelata	Caps Lock + N
Sposta mouse su Vista	Non assegnato
Sposta Vista su Mouse	Non assegnato
Cambia Vista Attiva	Caps Lock + V
Modalità panoramica Attivo/Disattivo	Caps Lock + O

I seguenti tasti a livelli possono essere usati per controllare lo Scorrimento.

Comando	Tasti a Livelli
Comandi per le Finestre	Caps Lock + Spazio, W
Tipo finestra Ingrandita	Z
Strumento di Regolazione Finestra Ingrandita	A
Vista Congelata Attivo/Disattivo	E

Comando	Tasti a Livelli
Nuova Vista Congelata	N
Sposta mouse su Vista	Giù
Sposta Vista su Mouse	Su
Cambia Vista Attiva	V
Modalità Panoramica Attivo/Disattivo	O

Supporto ZoomText

ZoomText viene fornito con una varietà di strumenti e servizi di supporto integrati e online che sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Questi strumenti e servizi includono utility per la raccolta di informazioni, articoli tecnici e di spiegazione, e un modo per segnalare un problema al team di supporto del prodotto ZoomText. Alcuni di questi strumenti possono essere utilizzati anche quando si analizza un problema con un rappresentante del supporto tecnico.

- [Informazioni di sistema](#)
- [Strumento di supporto FS](#)
- [Reporting dati](#)
- [Desktop remoto](#)
- [Comandi Fix-It](#)
- [Scheda video](#)
- [programma Early adopter](#)
- [Training center](#)
- [Informazioni su ZoomText](#)


System Information

La finestra di dialogo Informazioni di sistema visualizza una serie di informazioni sull'hardware, il software e la configurazione del vostro sistema che possono essere utili nella diagnosi di un problema.

- **Per visualizzare la finestra di dialogo Informazioni di Sistema**

Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Informazioni di sistema**.

Apparirà la finestra di dialogo Supporto ZoomText, che mostrerà la scheda Informazioni di Sistema.

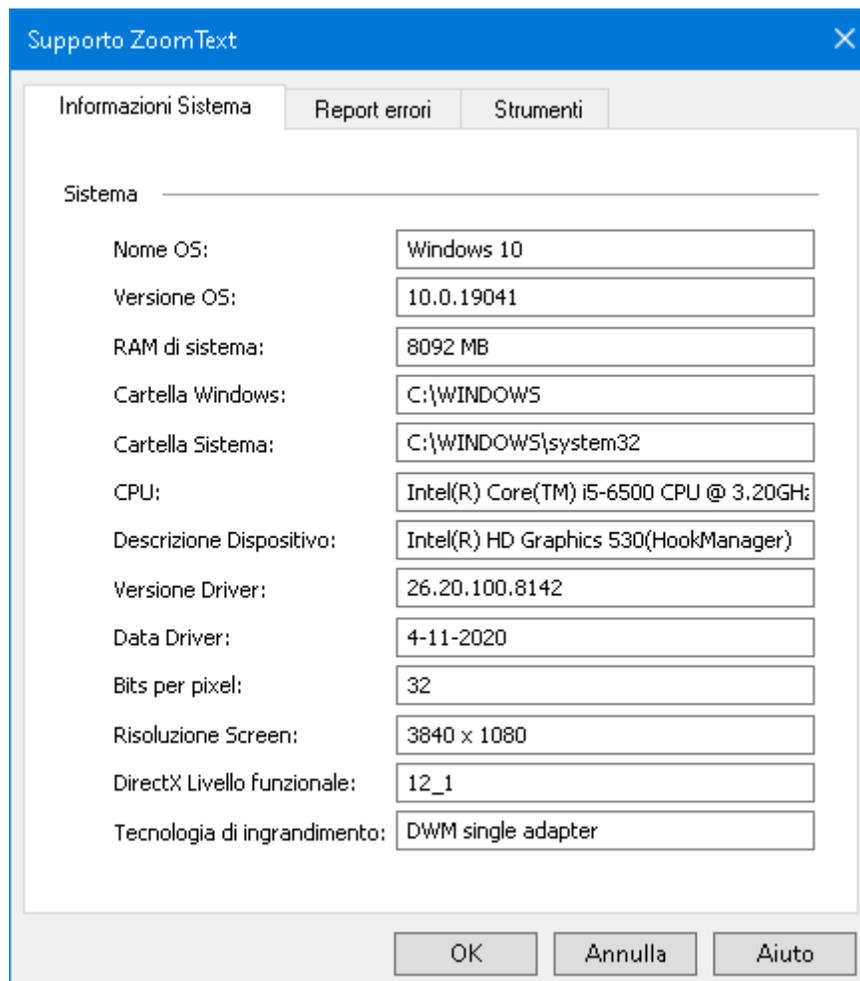

La scheda Informazioni di Sistema.

Report Errori vi permette di inviare informazioni via Internet a Freedom Scientific su qualsiasi errore di ZoomText o Fusion.

Decidere di inviare i report errori aiuterà Freedom Scientific a migliorare i propri prodotti. Le informazioni trasmesse a Freedom Scientific si limitano a un file di dump della memoria nonché a informazioni generiche che consentono a Freedom Scientific di indagare sull'origine del problema, come il numero di versione del prodotto, la data e l'ora in cui si è verificato l'errore, il numero di volte in cui il sistema ha riscontrato un errore e il codice di errore relativo al problema. L'unica informazione relativa al vostro ambiente specifico che viene trasmessa è l'indirizzo MAC del vostro computer per individuare tendenze comuni su un particolare sistema. Tuttavia, non c'è modo per noi di mappare gli indirizzi MAC a un particolare individuo e non vengono trasmesse informazioni di identificazione personale.


Dati Anonimi di Utilizzo vi consente di decidere se inviare o meno dati anonimi di utilizzo a Freedom Scientific. Questo include elementi quali livello di prestazioni e configurazione software.

▪ **Per impostare la segnalazione di errori e dati di utilizzo, fate quanto segue:**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Avanzate > Reportistica dati**.

Apparirà la scheda Supporto ZoomText, con la scheda Report dati attiva.

2. Scegliete se, e in che modo, volete inviare report di errori a Freedom Scientific.
3. Scegliete se volete inviare dati anonimi di utilizzo.
4. Selezionate **OK**.

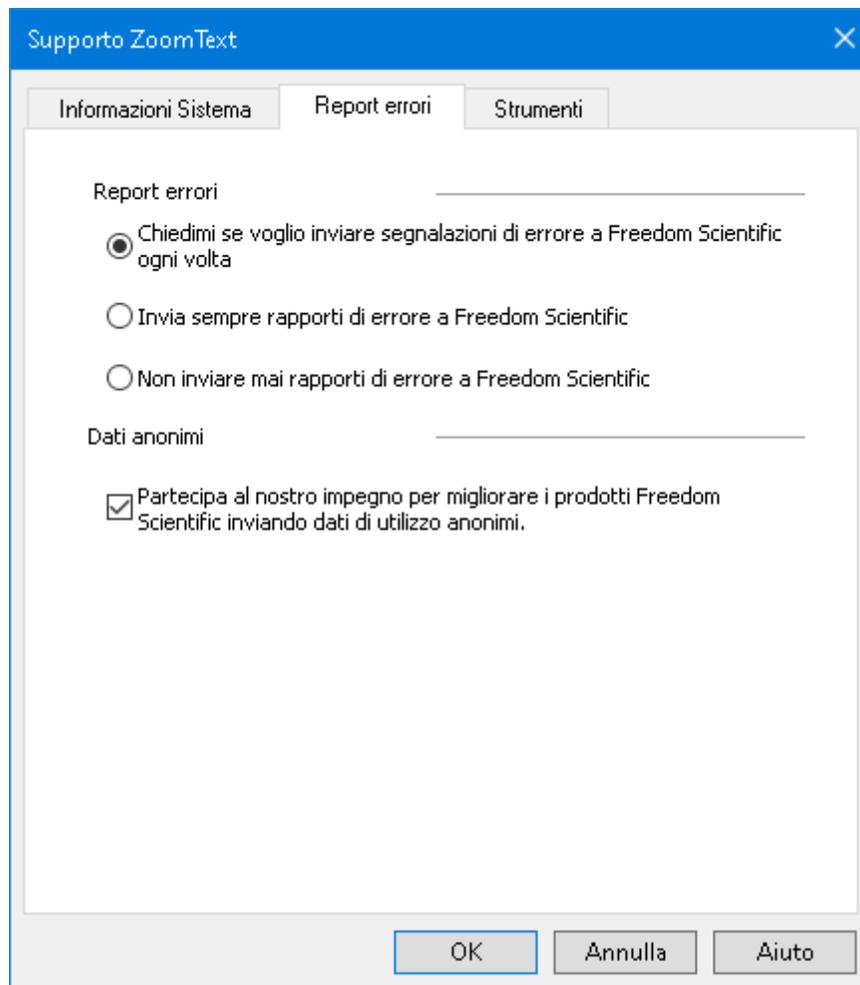

La scheda Report dati

Impostazione	Descrizione
<i>Report errori</i>	
Chiedi se voglio inviare report errori a Freedom Scientific ogni volta	La finestra di dialogo Report Errori verrà visualizzata ogni volta che viene riscontrato un errore. Questa è l'impostazione predefinita.
Invia tutti i i report errori a Freedom	Futuri report verranno automaticamente inviati a Freedom Scientific senza mostrare alcuna finestra di dialogo.

Impostazione	Descrizione
Scientific senza chiedere	
Non inviare mai report errori a Freedom Scientific	Eventuali report di errori futuri non verranno inviati a Freedom Scientific e non vi verrà chiesto di inviare report errori.
<i>Dati anonimi</i>	
Partecipa al nostro impegno per migliorare i prodotti Freedom Scientific inviando dati anonimi di utilizzo.	<p>Quando è selezionata questa casella, vengono raccolti dati sull'utilizzo di questo prodotto. Questo include dati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come avete configurato il prodotto • Come utilizzate il prodotto • Le prestazioni del prodotto <p>Non verrà raccolta alcuna informazione personale identificabile.</p> <p>Avere questa funzione attivata è necessario per utilizzare alcune funzioni come l'assistente vocale. Per maggiori informazioni su che cosa viene raccolto, consultate la nostra Informativa sulla raccolta dei dati.</p>

Strumenti (Supporto)

Gli Strumenti di Supporto ZoomText sono strumenti utilizzati per aiutare il supporto tecnico a risolvere i problemi con l'installazione di ZoomText o Fusion.

- [Strumento di supporto FS](#)
- [Desktop Remoto](#)
- [Fix-It](#)

Desktop remoto

Lo strumento Desktop remoto viene utilizzato per testare e risolvere i problemi di connessione di accesso remoto.

Dalla finestra di dialogo Accesso remoto, potete:

- verificare se il vostro software Freedom Scientific è autorizzato o meno per l'accesso remoto.
- controllare lo stato di ogni canale remoto supportato (Remote Desktop, Citrix o VMWare Horizon).
- riparare qualsiasi canale che viene segnalato come non funzionante.
- testare la connessione tra il client e i server / computer remoti.

▪ **Per verificare se siete autorizzati all'accesso remoto, fate quanto segue:**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Avanzate > Strumenti**.

Apparirà la finestra di dialogo Supporto ZoomText, che mostrerà la scheda Informazioni di Sistema.

2. Fate clic su **Desktop remoto**.

La finestra di dialogo Desktop remoto

3. Nella parte superiore della finestra di dialogo, l'Autorizzazione all'accesso remoto verrà mostrata come Abilitata o Disabilitata.

▪ **Per verificare lo stato di ogni canale di accesso remoto supportato, fate quanto segue:**


1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Avanzate > Strumenti**.

Apparirà la finestra di dialogo Supporto ZoomText, che mostrerà la scheda Informazioni di Sistema.

2. Fate clic su **Desktop remoto**.

La finestra di dialogo Desktop remoto

- Se state eseguendo il prodotto su una macchina client, apparirà una lista di tutti i canali remoti supportati.
 - Se invece siete su una macchina server, apparirà il canale usato dal server.
 - L'elenco mostrerà anche se il canale sta funzionando oppure no.
3. Per testare la connessione tra le macchine client e server, scegliete **Prova connessione**.
4. Per riparare un canale non funzionante, scegliete **Ripara**.

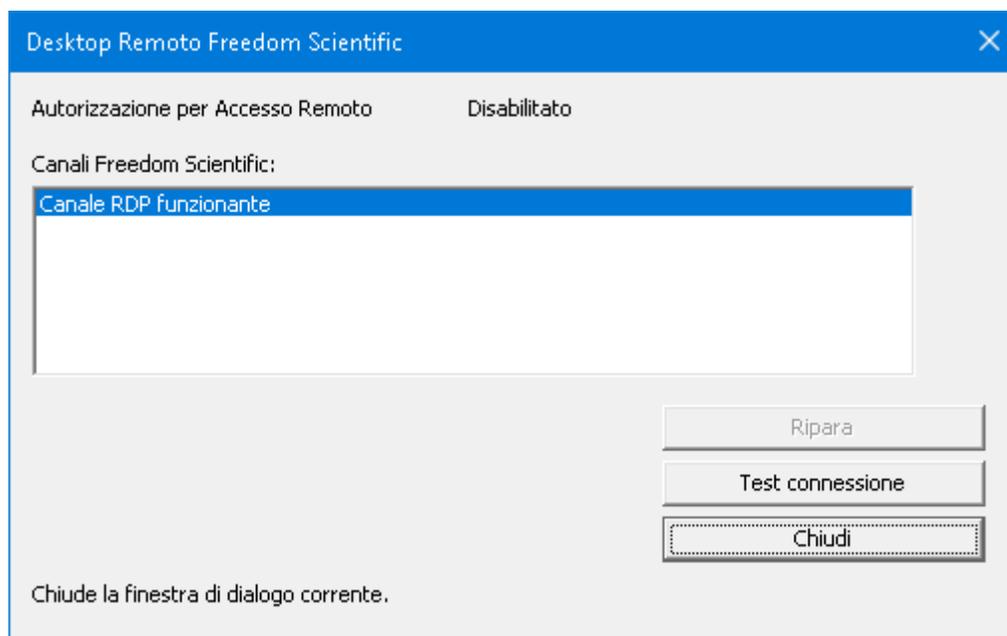

La finestra di dialogo Desktop Remoto.

Scheda video

Nota: Se riscontrate problemi video o di prestazioni del sistema, potrebbe esservi richiesto dal supporto tecnico di modificare le impostazioni della scheda video.


ZoomText viene spesso eseguito su computer dotati di più schede video. Le schede video integrate, che condividono la memoria di sistema con altri componenti, vanno bene per eseguire applicazioni di base e navigare sul web. Le schede grafiche dedicate hanno memoria e processore grafico propri, il che si traduce in migliori prestazioni video per le applicazioni più intensive a livello video.

Se notate un calo delle prestazioni di ZoomText o del sistema (rallentamento o schermata nera), potreste dover impostare ZoomText ad utilizzare una scheda video diversa nel vostro computer.

▪ **Per cambiare la scheda video utilizzata da ZoomText, fate quanto segue.**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Avanzate > Scheda video**.

Apparirà la finestra di dialogo Scheda Video.

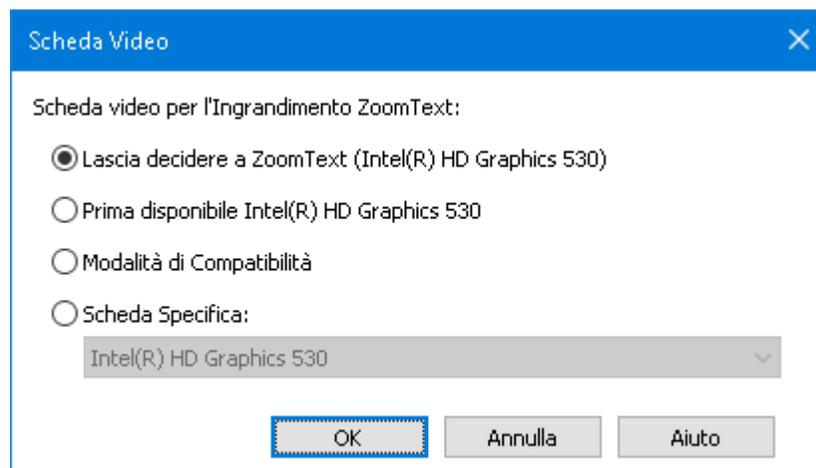

2. Selezionate una delle seguenti opzioni per la scheda video:

- o **Lascia decidere a ZoomText.** Quando ZoomText si avvia, rileverà e sceglierà la migliore scheda video da utilizzare.
 - o **Prima disponibile.** Selezionate questa opzione per lasciare che sia Windows a scegliere la scheda video da utilizzare con ZoomText.
 - o **Modalità di compatibilità.** Selezionate questa opzione se ZoomText non funziona correttamente con la vostra scheda video.
 - o **Scheda specifica.** Selezionate per far sì che ZoomText usi sempre una specifica scheda video. Le schede disponibili appariranno nell'elenco.
3. Selezionate **OK**, quindi **Sì** per riavviare ZoomText affinché le modifiche abbiano effetto.

Programma Early adopter

Nota: il programma Early adopter vi consente di provare in anteprima le funzionalità del prodotto ancora in fase di sviluppo. Man mano che introduciamo gradualmente nuove funzionalità, potete valutarle e fornire feedback che ci aiuteranno ad apportare miglioramenti prima del rilascio finale.

Usare il programma Early Adopter

- **Per attivare o disattivare le funzionalità del programma Early Adopter**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Programma Early adopter**.

Apparirà la finestra di dialogo Programma Early Adopter, che mostrerà le funzionalità disponibili da provare. La finestra di dialogo sarà vuota se non c'è alcuna funzionalità da provare.

2. Selezionate una o più caselle di controllo per attivare le funzionalità. Deselezionate una o più caselle di controllo per disattivare le funzionalità.

Nota: se state testando una versione modificata di una funzionalità già esistente, questa tornerà allo stato originale quando disattivate la casella di controllo.

3. Fate clic su **OK** e riavviate il programma. Le funzionalità che avete attivato saranno disponibili all'uso.

Inviare feedback

Durante la valutazione di una funzionalità, vi invitiamo a fornirci feedback sulla vostra esperienza. Il feedback può essere fornito indipendentemente dal fatto che la funzionalità in questione sia attiva o disattiva.

■ Per inviare feedback


1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Programma Early adopter**.

La finestra di dialogo Programma Early Adopter mostrerà le funzionalità disponibili su cui inviare feedback.

2. Selezionate il pulsante **Invia feedback** relativo alla funzione che state provando.

Apparirà il form di feedback del programma Early adopter.

3. Compilate il form di feedback, quindi fate clic su **Invia feedback**.

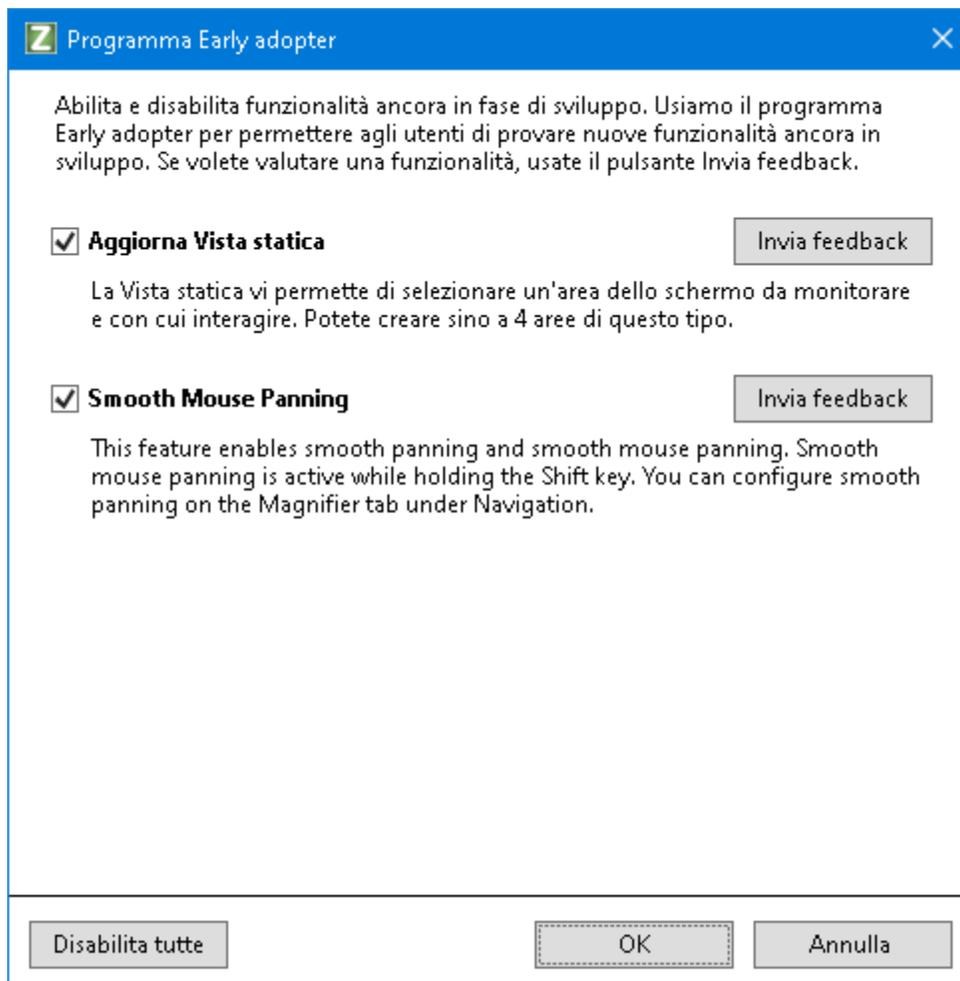

Un esempio della finestra di dialogo Programma Early Adopter

Impostazione	Descrizione
Funzionalità in sviluppo:	Visualizza il nome e la descrizione delle funzionalità disponibili in anteprima. Selezionate la casella di controllo per abilitare la funzionalità. Deselezionate la casella per disabilitare la funzionalità. Quando disattivate una funzionalità, questa tornerà al suo stato originale.
Invia feedback	Apre un form che vi consente di inviare feedback su una funzionalità.
Disabilita tutte	Disabilita tutte le funzionalità.

Training Center

The Training Center provides a wide variety of how-to and technical articles on ZoomText.

- **To open the Training Center**


- In the **ZoomText** menu, choose **Help > Training Center**.

Informazioni su ZoomText

La finestra di dialogo Informazioni su ZoomText mostra le informazioni sul programma e sulla licenza, incluso il tipo di prodotto, la versione, il numero di serie e il nome utente.

▪ **Per visualizzare le Informazioni su ZoomText:**

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Informazioni su**.
Apparirà la finestra di dialogo Informazioni su ZoomText.
2. Quando avete finito di visualizzare la finestra di dialogo, cliccate su **OK**.

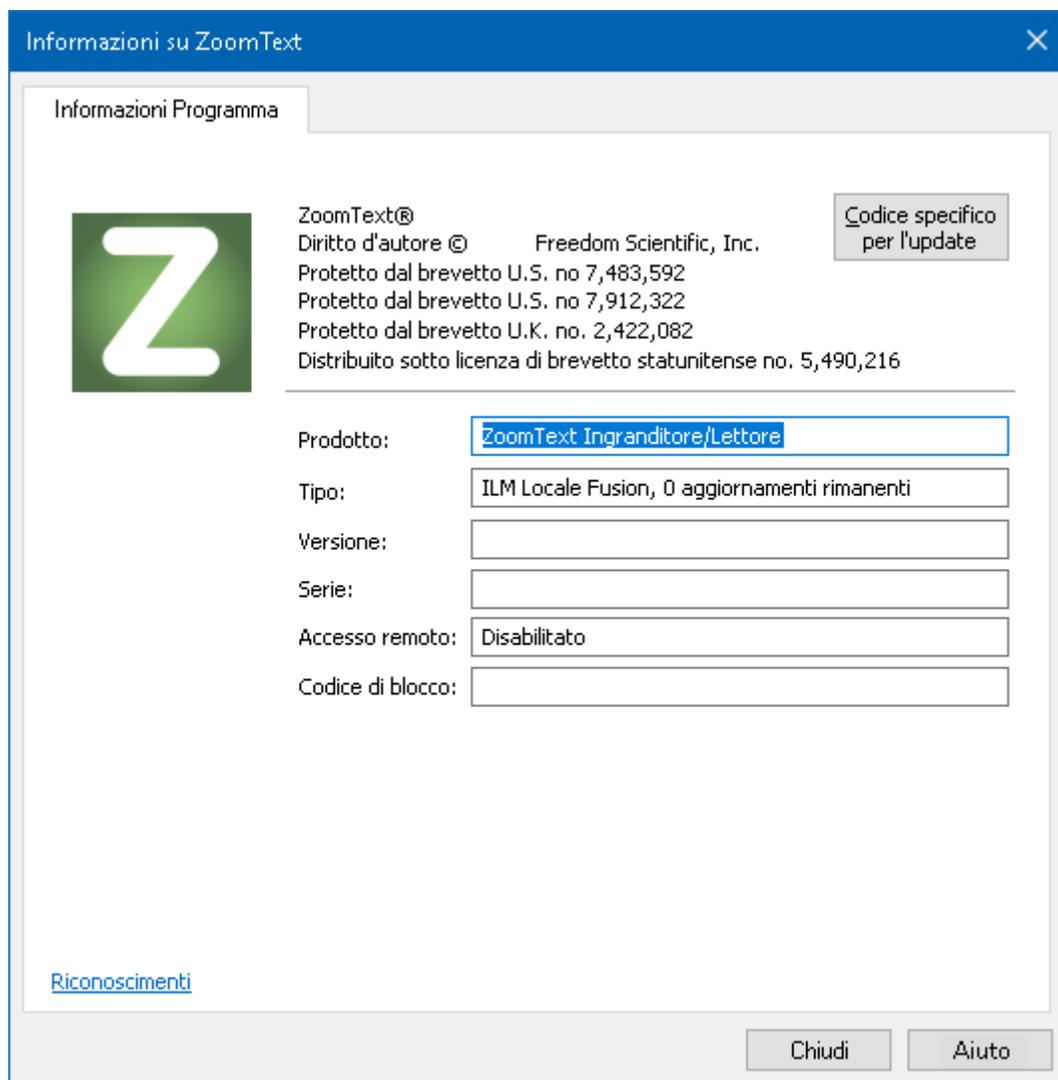

La finestra di dialogo Informazioni su ZoomText.

Impostazione	Descrizione
Prodotto	Visualizza il tipo di prodotto: 'Ingranditore' o 'Ingranditore/lettore'.
Tipo	Visualizza il tipo di installazione: 'Prodotto' o 'Prova'.
Versione	Visualizza la versione del prodotto ZoomText e il numero di build.
Numero di Serie	Visualizza il numero di serie del prodotto. <i>Nota:</i> il numero di serie non viene visualizzato quando si esegue una versione di prova di ZoomText.
Nome	Visualizza il nome dell'utente registrato.
Società	Visualizza il nome della società dell'utente registrato.

Sviluppo di Script

Nel mondo odierno, incentrato sull'informatica, agli individui ipovedenti viene richiesto di raggiungere gli stessi obiettivi lavorativi dei loro colleghi normodotati. In molte situazioni, soprattutto legate al lavoro, può essere difficile per questi individui raggiungere i loro obiettivi, anche quando sono dotati di ZoomText.

Con la funzione di scripting di ZoomText è possibile creare e utilizzare gli script per personalizzare il comportamento di ZoomText e di altre applicazioni, fornendo un feedback visivo e acustico più informativo e automatizzando specifiche operazioni. A sua volta, ciò vi consentirà di lavorare in modo più veloce ed efficiente.

Ecco alcuni esempi di cosa potete fare con gli script di ZoomText:

- Leggere automaticamente specifici campi in un database o in un foglio di calcolo.
- Leggere automaticamente i nuovi elementi nella vostra casella di posta elettronica, nonché leggere automaticamente le e-mail quando vengono aperte.
- Leggere automaticamente controlli e dati in un'applicazione in modo più descrittivo.
- Leggere automaticamente il nuovo testo in una finestra di chat.
- Dire automaticamente quando un campo specifico cambia, come ad esempio quando il saldo in un foglio Excel scende sotto un valore specificato.

Questa sezione fornisce istruzioni per scrivere, registrare e gestire gli script ZoomText.

- [Cosa sono gli Script?](#)
- [Scrivere script](#)
- [Registrare gli Script](#)
- [Gestire gli Script](#)
- [Tasti Rapidi per gli Script](#)
- [Documentazione](#)

Cosa sono gli script e i linguaggi di scripting?

Cos'è uno script? Uno script è un file di testo che contiene dei comandi di programmazione che eseguono una determinata operazione in ZoomText o in un'applicazione. Gli script possono consistere in poche righe di comandi molto semplici, ma anche in molte righe di codice complesso. Gli script di ZoomText sono scritti usando uno dei linguaggi di scripting standard del settore, come VBScript, Jscript/JavaScript, C# o Perl. Non sono richiesti strumenti speciali per scrivere uno script, infatti, gli script possono essere scritti usando il Blocco note di Windows. Tuttavia, è necessario avere qualche conoscenza ed esperienza nella scrittura di script.

Cosa sono i linguaggi di scripting? I linguaggi di scripting sono linguaggi di programmazione che controllano applicazioni esistenti o i loro componenti. I linguaggi di scripting possono essere creati e utilizzati senza un software di programmazione speciale o la necessità di compilare e costruire il codice del programma in modo tradizionale. Quindi, favoriscono uno sviluppo molto rapido e la comunicazione con altri programmi. Ci sono diversi linguaggi di scripting, ognuno dei quali è generalmente progettato per un tipo specifico di utilizzo.

Quali linguaggi di scripting si possono usare per scrivere script per ZoomText? I linguaggi di scripting standard che suggeriamo sono: VBScript, Jscript/JavaScript, C# e Perl.

Scrivere script per ZoomText

Anche se quasi tutti possono imparare a scrivere script di base per ZoomText, scrivere script che fanno davvero la differenza nella produttività richiede una certa esperienza e competenza. Pertanto, Freedom Scientific raccomanda che a progettare, creare e testare gli script sia una persona esperta, preferibilmente che comprenda le esigenze degli utenti ipovedenti.

Uno sviluppatore di script esperto potrebbe essere disponibile all'interno della vostra azienda o organizzazione - verificate con il vostro responsabile di reparto o con il vostro dipartimento IT. Potete anche trovare sviluppatori di script esperti attraverso servizi via Internet. Se non siete in grado di trovare uno scripter, VisionDept può essere in grado di assistervi nel trovare uno scripter - contattate VisionDept allo 02-29-53-48-62 o inviate un'e-mail a supporto@visiondept.it.

Altre fonti per trovare script ZoomText

Con la crescente popolarità dello scripting di ZoomText, una vasta gamma di script per le applicazioni più comuni diventerà disponibile per gli utenti da scaricare e acquistare. Questi script saranno resi disponibili nella libreria di script ZoomText sul sito web di Ai Squared. Per maggiori informazioni, andate su www.aisquared.com/scripting.

Tasti rapidi per gli script

Gli script di ZoomText possono essere scritti in modo da essere eseguiti automaticamente in risposta ad eventi specifici, o quando viene premuto un tasto (o più tasti) di scelta rapida. Quando uno script è scritto per essere eseguito tramite tasti rapidi, i corrispondenti tasti appariranno nella finestra di dialogo Tasti di Comando di ZoomText. Come per tutti gli altri tasti rapidi, potete visualizzare e modificare le assegnazioni dei tasti associati agli script.

▪ Per visualizzare i tasti rapidi associati agli script

1. Nel menù **ZoomText**, selezionate **Preferenze > Tasti di comando**.

Apparirà la finestra di dialogo Tasti di Comando ZoomText.

2. Nella **casella di ricerca**, digitate: **SCRIPT**.

Apparirà una lista di tasti rapidi associati agli script.

3. Per visualizzare la combinazione tasti associata ad uno script, fate clic sul rispettivo script.

La combinazione associata apparirà rispettivamente nelle caselle Tasto Primario e Tasto Modificatore.

4. Impostate la combinazione come desiderate.
5. Ripetete i passaggi 3 e 4 per ogni combinazione che volete modificare.
6. Fate clic su **OK**.

Documentazione per sviluppatori di script

La Documentazione ZoomText per Sviluppatori di script fornisce informazioni istruttive per scrivere e testare gli script di ZoomText.

- **Per visualizzare la documentazione per sviluppatori di script**

Nel menù **ZoomText**, selezionate **Aiuto > Avanzate > Scripting > Documentazione**.

Indice

activation

- activating ZoomText, 18
- dongle authorization, 19
- network license, 19

adding more voices, 20

adjusting zoom windows, 83

Aiuto tastiera di Fusion, 260

Aiuto tastiera di JAWS, 260

alignment (navigation), 150

anonymous data usage, 334

AppReader, 191

App View, 192

reading modes, 192

SpeakIt Tool, 192

starting and using, 198

Text View, 192

Text View settings, 202

Assistente vocale, 260

audio settings, 176

Background Reader, 250

camera, 239

Caps Lock key (using), 27

comandi (per gruppo)

Ingranditore, 313

command keys

all commands, 300

dialog, 45

essential command keys, 43

hotkeys, 41

layered keys, 41

- types of, 41
- commands (by group)
 - AppReader, 301
 - Background Reader, 304
 - Finder, 308
 - Layered Mode, 311
 - Program, 315
 - Reader, 317
 - Reading Zones, 319
 - Say, 223, 322
 - Scroll, 324
 - Support, 326
 - Text Cursor, 219, 328
 - Window, 330
 - ZoomText Camera, 306
 - ZoomText Recorder, 321
- configurations
 - about, 274
 - hotkeys, 277
 - saving and loading, 276
 - the default configuration, 275
- desktop remoto, 338
- dongle authorization, 19
- EAP, 32, 342
- echo settings
 - about, 178
 - Keyboard Echo, 179
 - Mouse Echo, 182
 - Program Echo, 185
 - Verbosity, 188
- enabling and disabling ZoomText, 26
- excluding xFont from applications, 293
- exiting ZoomText, 28
- features
 - Magnifier, 3

- Magnifier/Reader, 6
- Finder, 228
 - commands, 232
 - highlight and voice settings, 235
 - list search, 230
 - page search, 229
 - starting, 228
 - toolbar, 229, 230
- finestre ingrandite
 - quando si usa un monitor, 74
 - quando si usano monitor multipli, 74
 - selezionare, 74
- focus enhancements, 123
- Funzioni di ingrandimento (informazioni su), 60
- getting started
 - new users, 8
- Hey Zoomy, 260
- hints (voice), 173
- hotkeys
 - configuration hotkeys, 277
 - resolving conflicts, 53
- informazioni di sistema, 333
- informazioni su ZoomText, 346
- installing ZoomText, 16
- interfaccia utente, 35
- keyboard echo, 179
- legacy reading preferences, 296
- legal
 - Marchi di fabbrica, 2
- legale
 - Copyright, 2
- Lettore Applicazione
 - L'ambiente della vista Testo, 195
- Live Text View, 128, 136
- logon prompt, 29

- Magnifier toolbar tab, 61
- miglioramenti colore, 109
- miglioramenti cursore, 119
- miglioramenti schermo
 - Miglioramenti colore, 109
 - Miglioramenti cursore, 119
- Miglioramenti schermo
 - Miglioramenti puntatore, 114
- mouse (navigation), 153
- mouse echo, 182
- multiple monitors
 - about, 94
 - Automatic Adjustment to Display Changes, 102
 - Configuring Displays, 100
 - Feature Behaviors in Multiple Monitors, 104
 - Options, 95
 - Recommended Monitor Configurations, 99
 - Supported Multiple Monitor Hardware, 98
 - Troubleshooting, 106
- navigation settings
 - about, 146
 - Alignment, 150
 - Mouse, 153
 - Panning, 156
 - Tracking, 147
- network license, 19
- Oscuramento schermo, 39
- overview mode, 91
- panning (navigation), 156
- parola di attivazione, 260
- pointer enhancements, 114
- preferences
 - about, 280
 - excluding xFont, 293
 - legacy reading, 296

- program, 281
- Run ZoomText As, 298
- smoothing, 290
- user interface, 286
- program echo, 185
- program preferences, 281
- Programma Early adopter, 32, 342
- Reader features (about), 159
- Reader toolbar tab, 160
- Reading Zones
 - about, 206
 - creating, editing and deleting, 207
 - settings, 214
 - toolbar, 213
 - using, 211
- report errori, 334
- Run ZoomText As, 298
- running with one or multiple monitors, 73
- running ZoomText, 24
- Say commands, 223
- scheda video, 340
- screen enhancements
 - about, 108
 - Focus Enhancements, 123
 - Smart Invert, 127
- scripting
 - about, 348
 - documentazione, 353
 - tasti rapidi per gli script, 352
 - what are scripts?, 350
 - writing scripts, 351
- scrolling the magnified view, 70
- secure mode support, 29
- setting up ZoomText, 14
 - adding more voices, 20

- Step 1—Install ZoomText, 16
- Step 2—Start ZoomText, 17
- Step 3—Activate ZoomText, 18
- System Requirements, 15
- Uninstalling ZoomText, 23
- Using the Startup Wizard, 22
- smart invert, 127
- smoothing preferences, 290
 - excluding xFont, 293
- SpeakIt Tool, 192
- starting ZoomText, 17, 25
 - starting automatically, 25
- strumenti
 - Assistente vocale, 260
- support
 - online support, 345
 - report errori, 334
 - supporto ZoomText, 332
- supporto
 - desktop remoto, 338
 - informazioni su ZoomText, 346
 - report errori, 334
 - scheda video, 340
 - system information, 333
- supporto ZoomText, 332
- system requirements, 15
- Tasti Comando
 - a proposito di, 40
- Technical Support, 337
- Tethered View, 84
- Text Cursor commands, 219
- text processing (voices), 169
- toolbar
 - Magnifier tab, 61
 - minimizing and restoring, 37

- operating with the keyboard, 37
- Reader tab, 160
- Tools tab, 226
- ZoomText toolbar, 36
- tools
 - Background Reader, 250
 - Finder, 228
 - support, 337
 - Technical Support, 337
 - ZoomText Camera, 239
 - ZoomText Recorder, 255
- Tools (support), 337
- Tools features (about), 225
- Tools toolbar tab, 226
- touch screen support
 - about, 54
 - Accessing ZoomText Features, 56
 - Using ZoomText On a Touch Screen, 55
- tracking (navigation), 147
- training center, 345
- UAC, 29
- uninstalling ZoomText, 23
- user interface preferences, 286
- using the Startup Wizard, 22
- verbosity, 188
- view locator, 91
- voice
 - adjust the voice rate, 164
 - enabling and disabling, 163
 - The ZoomText Voice, 162
- voice settings, 165
 - Audio, 176
 - Hints, 173
 - Text Processing, 169
 - Voice, 165

Welcome to ZoomText, 1

zoom level

- Choosing a Set of Zoom Levels, 64

 - All Zoom Levels, 64

 - Favorite Zoom Levels, 64

 - Whole Powers, 64

- Customizing Mouse Wheel Zooming, 66

 - mouse wheel zooming, 63

 - Using Zoom to 1x, 69

 - Zooming In and Out, 63

Zoom to 1x, 69

zoom windows

- about, 72

- adjusting, 83

- running with one or multiple monitors, 73

- scrolling the magnified view, 70

- Tethered View, 84

- Using OverView Mode and the View Locator, 91

 - Using Zoom to 1x, 69

 - when using multiple monitors, 72

 - when using one monitor, 72

zooming in and out, 63

ZoomText Camera, 239

- acquiring a camera, 240

- camera settings dialog, 245

- getting started, 239

- setting up a camera, 240

- using, 241

- video and system performance., 244

ZoomText Recorder, 255

ZoomText Secure Mode, 29

- enabling and disabling, 30

- toolbar, 29

ZoomText toolbar, 36

- minimizing and restoring, 37

ZoomText Voice, 162

Zoomy, 260

Note

