

ZoomText Large-Print Teclado



Guia do utilizador v4.1

Direitos de Autor

Software ZoomText Keyboard

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Todos os direitos reservados.

Guia do Utilizador v4.1 ZoomText Large-Print Keyboard (Teclado ZoomText de Letras Grandes)

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Todos os direitos reservados.

Primeira edição: Março, 2016

Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 USA

A cópia, duplicação, venda ou, em qualquer caso, a distribuição não autorizada deste software ou da documentação é uma violação das Leis Federais de Direitos de Autor. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida em qualquer idioma, em qualquer formato, por qualquer meio, sem a autorização expressa escrita da Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

Marcas registadas

ZoomText é uma marca comercial registada da Algorithmic Implementations, Inc.

ZoomText Large-Print Keyboard é uma marca comercial registada da Algorithmic Implementations, Inc.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Acordo da Licença do Software

O software incluindo neste produto é licenciado, não vendido. Deve aceitar o contrato da licença no ecrã de Configuração do software ou devolver imediatamente o Teclado de Letras Grandes ZoomText, juntamente com o software, para receber um reembolso, excluindo os custos de devolução. Depois de instalar o software, pode consultar a licença e a Garantia Limitada do produto em qualquer altura consultando a secção "Informação Legal" nos ficheiros de Ajuda do software. Também pode imprimir uma cópia para os seus registos.

Índice

Bem-vindo ao Teclado ZoomText	2
Funcionalidades do Teclado ZoomText	3
Novo no Software do Teclado versão 4.1	5
Requisitos do Sistema.....	6
Passo 1—Ligue o Teclado ZoomText.....	7
Passo 2—Instale o Software do Teclado	8
Passo 3—Ative o Software do Teclado	9
Passo 4—Atualize o Software do Teclado	14
Passo 5—Use as Teclas de Função	16
Passo 6—Altere a atribuição das Teclas de Função.....	20
Utilizar o Software do Teclado com outros teclados.....	21
As Definições do Teclado ZoomText	22
Aceder às Definições do Teclado ZoomText.....	23
Caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText.....	24
Assistente Atribuir Tecla.....	29
Atribuir Comandos do ZoomText.....	31
Atribuir Comandos do Windows.....	32
Atribuir Comandos do Programa	33
Ativar ou desativar as Teclas de Função do ZoomText.....	34
Abreviaturas da impressão das teclas	35
Luzes de Estado do Teclado	36
Portas USB	37
Manutenção	38
Resolução de problemas.....	39
Aviso de Saúde.....	41
Garantia Limitada.....	42

Bem-vindo ao Teclado ZoomText

Bem-vindo e parabéns pelo seu novo Teclado de Letras Grandes ZoomText. Estamos orgulhosos por ter escolhido o Teclado ZoomText e sabemos que apreciará o seu estilo vanguardistas, as suas funcionalidades e desempenho nos próximos anos.

O guia do utilizador do Teclado ZoomText e o sistema de Ajuda oferecem todas as informações para configurar e usar o seu Teclado ZoomText. Antes de começar, recomendamos que se familiarize com todas as excelentes funcionalidades e vantagens do Teclado ZoomText, que são descritas na próxima secção, com o título apropriado de [Funcionalidades do Teclado ZoomText](#).



Funcionalidades do Teclado ZoomText

O seu novo Teclado ZoomText da "4ª geração" oferece excelentes funcionalidades e benefícios.

- **Design elegante moderno que complementa qualquer local de trabalho.** O Teclado ZoomText tem um design brilhante que é atrativo e amigo da baixa visão, um feito que anteriormente era considerado impossível. Este é o teclado que todos os seus amigos vão admirar.
- **Teclas de elevado contraste que são visíveis, mesmo em fraca luminosidade!** Cada uma das teclas do Teclado ZoomText tem letras grandes que são sempre fáceis de ver, mesmo em condições de fraca luminosidade. E o Teclado ZoomText esta disponível em modelos com cor de elevado contraste, incluindo Branco em Preto e Preto em Amarelo.
- **Um teclado de tamanho completo com as configurações padrão da indústria.** Com uma configuração de teclado de tamanho completo, incluindo teclado numérico e teclas de navegação, o Teclado ZoomText satisfaz todas as suas necessidades em todas as suas aplicações. E o Teclado ZoomText incorpora as configurações padrão da indústria, por isso os seus requisitos de organização também são satisfeitos.
- **Teclado Premium que dá gosto teclar.** O Teclado ZoomText tem teclas premium com base em tesoura para que possa teclar rapidamente, com precisão e conforto. Não irá acreditar na excelente sensação ao usar o teclado e na rapidez com que ganhará confiança ao teclar.
- **Um corpo sólido que não sai das suas mãos.** O Teclado ZoomText tem um corpo sólido e resistente que não sai facilmente da sua secretária e que parece sempre sólido e estável ao seu toque, mesmo que seja agressivo a teclar.

- **Acesso com um toque às funcionalidades favoritas do ZoomText e mais.** Com o software Teclado ZoomText instalado, as teclas de função F1 a F12 podem também ser usadas como Teclas de Função do ZoomText, para poder usar os seus comandos favoritos do ZoomText, do Windows (Internet e multimédia), ou mesmo comandos para abrir uma aplicação, documentos ou página da web — tudo sem memorizar atalhos complicados! E o software do seu Teclado ZoomText pode ser usado com qualquer teclado, por isso as Teclas de Função do ZoomText são aplicadas no teclado do seu portátil ou em qualquer outro teclado que queira usar ou que precise de usar.
- **Duas portas USB convenientemente posicionadas.** O Teclado ZoomText também inclui duas portas USB "sempre à mão" — uma em cada lado do teclado. Ligue o seu rato, a sua pen drive, a webcam, a luz LED ou outro dispositivo USB sem ser necessário usar as portas USB na parte traseira do seu portátil, ou pior, na parte traseira do seu computador que está debaixo da sua secretária.
- **O complemento perfeito.** O Teclado ZoomText de Letras Grandes é o complemento perfeito do Ampliador ZoomText e do Ampliador/Leitor ZoomText (versões 9.03 e superior). Quando usados em conjunto, a sua estação de trabalho de baixa visão fica completa.

Novo no Software do Teclado versão 4.1

A nova versão 4.1 do teclado adiciona as seguintes funcionalidades e melhorias para usar o Teclado ZoomText.

- **Assistente de Atualização do Teclado.** Com o novo Assistente de Atualização Automático, sempre que iniciar o sistema, o assistente de atualização verifica automaticamente se há uma nova versão disponível do software do teclado. Se houver uma nova versão do software disponível, o assistente de atualização oferece-lhe a opção de transferir e instalar o novo software. **Nota:** É necessária uma ligação à Internet para usar esta funcionalidade. Para mais informações, veja [Começar: Passo 4 – Atualizar o Software do Teclado](#).
- **Tempos de pressão/manter pressionado mais curtos para ativar as teclas de função.** O tempo de pressão/manter pressionadas as teclas de função para ativar e iniciar o modo de função pode ser agora configurado para 0,5 segundos e 1 segundo, para acesso mais rápido aos comandos das Teclas de Função do ZoomText. Para mais informações, veja [Caixas de Diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).
- **Limite de tempo configurável para sair do modo de teclas de função.** O limite de tempo do modo das Teclas de Função do ZoomText pode agora ser configurado em incrementos de 3, 4 e 5 segundos. Para mais informações, veja [Caixas de Diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).
- **Escolha de indicações sonoras para indicar que o modo de teclas de função está ativo.** Agora pode ativar as indicações sonoras para indicar que entrou e saiu do modo das Teclas de Função do ZoomText. Um conjunto de 4 sons e três níveis de volume oferecem variadas definições de som para poder escolher uma. Para mais informações, veja [Caixas de Diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).

Requisitos do Sistema

O seguinte hardware e software é necessário para usar o teclado do ZoomText:


- Ligação de teclado USB
- Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista ou XP
- ZoomText 9.03 ou superior (para usar os botões de função do ZoomText)

Passo 1—Ligue o Teclado ZoomText

O seu Teclado ZoomText pode ser ligado ao seu computador em qualquer porta USB disponível.

- **Para ligar o Teclado ZoomText**

1. Ligue o conector USB retangular na extremidade do cabo do teclado a uma das portas USB retangulares do seu computador.

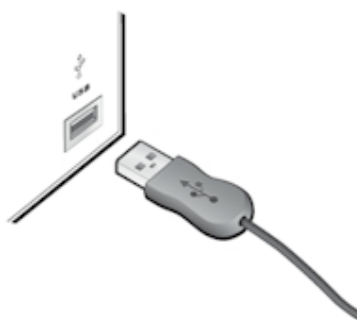

Passo 2—Instale o Software do Teclado

A instalação do Teclado ZoomText é muito simples, o que lhe permite concluir o processo em alguns passos simples.

- **Para instalar o software do teclado**

1. Coloque o CD do software do Teclado ZoomText na unidade CD/DVD.

O programa de Configuração é executado automaticamente.

2. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.



- **Se a Configuração não executar automaticamente**

1. Prima **Windows + R** para abrir a caixa de diálogo **Executar**.
2. Localize a sua unidade CD/DVD.
3. Selecione o programa Configuração e clique **Abrir**.
4. Clique em **OK** na caixa de diálogo Executar.

Passo 3—Ative o Software do Teclado

Depois do programa de Configuração terminar a instalação do software Teclado ZoomText, ser-lhe-á pedido para ativar o software. É necessário ativar o software antes de poder começar a usar as Teclas de Função do ZoomText . O processo de ativação é simples e seguro; demore apenas alguns segundos a concluir quando feito pela Internet. Se saltar o processo de ativação durante o processo de Configuração, ser-lhe-á pedido para ativar novamente o software quando tentar usar as Teclas de Função do ZoomText .

▪ **Para ativar o software Teclado ZoomText**

1. Para ativar o software Teclado ZoomText, precisa do número de serie fornecido com o seu produto comprado. Pode obter o número de série numa das seguintes localizações:
 - Na capa do CD do Teclado ZoomText
 - No lado da caixa do Teclado ZoomText
 - Na contracapa do Guia do Utilizador do Teclado ZoomText.

2. No Assistente de Ativação, introduza o seu nome, empresa e número de série, depois clique no botão **Seguinte**.
 - **Se estiver ligado à Internet**, o seu número de serie e código de ativação são automaticamente enviados para o servidor de ativação da Ai Squared para validação. Depois, um código de ativação é enviado novamente para o seu computador, ativando a licença de software do Teclado ZoomText. Este processo demora apenas alguns segundos a concluir.
 - **Se não estiver ligado à Internet**, o assistente apresenta o seu número de série e código de ativação, juntamente com instruções sobre como obter manualmente um código de ativação. Pode obter um código de ativação do [website de ativação da Ai Squared](#) (usando outro computador com ligação à Internet), ou contactando o departamento de Suporte de Produtos da Ai Squared.

O suporte de ativação por telefone esta disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, Hora da Costa Leste.

Na América do Norte, telefone para: 1 (866) 331-1233
Fora da América do Norte, telefone para +1 (802) 362-5393

Ativar o Software do Teclado ZoomText em Mais do que Um Computador

Versões do software Teclado ZoomText para um único utilizador permitem-lhe instalar e ativar o software até três computadores (de acordo com o Acordo de Licença do Software Teclado ZoomText). São disponibilizadas múltiplas ativações para acomodar indivíduos que usam mais do que um computador, como um computador em casa, um computador no trabalho e um portátil. Embora o software Teclado ZoomText possa ser instalado em três computadores, no máximo, a utilização das várias instalações é limitada a um utilizador de cada vez.

Transferir a sua Licença do Software Teclado ZoomText (desativar o software)

Caso queira transferir o seu Teclado ZoomText para um novo computador ou caso seja necessário reformatar o disco rígido no seu atual computador, é importante que transfira primeiro a sua licença de software para o servidor de ativação da Ai Squared. Isto preserva a sua licença para poder utilizá-la para ativar uma nova instalação do Teclado ZoomText.

▪ Para transferir a licença de software do Teclado ZoomText

No tabuleiro do sistema do Windows (próximo do relógio na barra de tarefas), selecione o ícone do Teclado ZoomText para abrir o menu de contexto. No menu, selecione **Transferir Licença do Software...** Esta ação executará o Assistente de Ativação do Teclado ZoomText para o orientar no processo de transferência. O processo completo irá desativar a instalação do Teclado ZoomText e irá transferir a licença para o servidor de ativação da Ai Squared.

Perguntas Mais Frequentes sobre a Ativação do Teclado ZoomText

Segue-se um conjunto de perguntas e de respostas para permitir compreender a ativação do software Teclado ZoomText.

- **O que é a ativação do produto?**

A ativação do produto é uma tecnologia de anti-pirataria criada para verificar se o Teclado ZoomText tem uma licença legítima.

- **Como funciona a ativação do produto?**

O processo de ativação verifica se o número de série é legítimo e não foi ativado em mais computadores do que o permitido pelo Acordo de Licença do Teclado ZoomText.

- **O que acontece se não ativar o meu produto?**

Se não ativar o seu produto, não pode executar o Teclado ZoomText até o ativar.

- **E se a ativação do meu produto falhar?**

A ativação do produto só falhará em circunstâncias excepcionais. Na maioria dos casos, pode reativar o Teclado ZoomText tão rápida e facilmente como na ativação original. Se a sua tentativa de reativação falhar, contacte o Suporte de Produtos da Ai Squared para obter ajuda.

- **E se precisar de reformatar ou atualizar o meu computador?**

Se precisar de reformatar o seu disco rígido ou atualizar o seu sistema operativo Windows, deve primeiro transferir a licença do seu Teclado ZoomText para o servidor de ativação do Teclado ZoomText. Veja [Transferir a Licença do Software do Teclado ZoomText \(desativar o software\)](#) na secção anterior.

Nota: Não precisa de transferir a sua licença do Teclado ZoomText quando instalar service packs e hot fixes do Windows.

- **E se eu quiser transferir o meu Teclado ZoomText para outro computador?**

Caso queira transferir o seu Teclado ZoomText para um novo computador, é importante transferir primeiro a sua licença de software para o servidor de ativação da Ai Squared. Isto preserva a sua licença para poder utilizá-la para ativar a sua nova instalação do Teclado ZoomText. Veja [Transferir a Licença do Software do Teclado ZoomText \(desativar o software\)](#) na secção anterior.

Passo 4—Atualize o Software do Teclado

O Teclado ZoomText inclui a verificação e atualização automática online da versão. Este serviço mantém a sua instalação do Teclado ZoomText atualizada com as mais recentes resoluções e melhorias. Eis como funciona...

Sempre que iniciar o seu sistema, o Assistente de Atualização verifica se está online. Se estiver ligado, verifica rapidamente se tem a versão mais atualizada. Se houver uma atualização disponível, o Assistente de Atualização pergunta se quer transferi-la. Se clicar no botão 'Sim', a atualização é transferida e é instalada automaticamente.

Se você ou o seu administrador de rede não quiser verificar atualizações sempre que iniciar o ZoomText, pode desativar a atualização automática da seguinte maneira:

- **Para desativar a atualização automática**

1. No tabuleiro do sistema do Windows (próximo do relógio na barra de tarefas), clique no ícone do Teclado ZoomText.

O menu do Teclado ZoomText abre-se.

2. No menu do ZoomText Keyboard, selecione **Definições do Teclado ZoomText...**

A caixa de diálogo Definições do Teclado ZoomText abre-se.

3. Desmarque **Verificar atualizações online sempre que iniciar o ZoomText Keyboard.**
4. Clique em **OK.**

Para além da atualização automática, pode verificar manualmente se há atualizações sempre que quiser.

▪ **Para verificar manualmente se há atualizações.**

1. No tabuleiro do sistema do Windows (próximo do relógio na barra de tarefas), clique no ícone do Teclado ZoomText.

O menu do Teclado ZoomText abre-se.

2. No menu ZoomText Keyboard, selecione **Verificar Atualizações do Programa...**

O Assistente de Atualização abre-se e orienta-o no processo de atualização.

Passo 5—Use as Teclas de Função

Sobre as Teclas de Função do ZoomText

Enquanto o Teclado ZoomText está a ser executado, um grupo de Teclas de Função do ZoomText é sobreposto nas teclas de função (F1 a F12). As Teclas de Função ZoomText permitem aceder com um só toque às funcionalidades e comandos utilizados com mais frequência no Ampliador ZoomText e Ampliador/Leitor ZoomText. Os ícones que representam as configurações predefinidas de comandos estão impressos sobre as teclas de função. As descrições destas configurações predefinidas são descritas na seguinte tabela [Teclas de Função ZoomText Predefinidas](#). Para toda a informação sobre estas funcionalidades, consulte o Guia do Utilizador do ZoomText ou o sistema Ajuda do ZoomText.



Teclas de Função com ícones de Teclas de Função ZoomText

Utilizar as Teclas de Função do ZoomText

Como já foi dito, um grupo de Teclas de Função do ZoomText é sobreposto nas teclas de função (F1 a F12). Por isso, como utiliza as teclas de função normal e as Teclas de Função do ZoomText? Na verdade, é bastante simples. Eis como funciona...

Para começar, as Teclas de Função do ZoomText não interferem com a operação normal das suas teclas de função. Assim, quando tocar nas teclas de função normalmente ativa os respetivos comandos normais em todas as aplicações.

Para utilizar as Teclas de Função do ZoomText, basta manter premida a tecla de função durante meio segundo. O comando atribuído à tecla de função é ativado e o Modo de Tecla de Função do ZoomText fica ativo durante alguns segundos. Enquanto o modo de tecla de função estiver ativo, pode tocar (em vez de manter premidas) nas teclas de função para ativar comandos adicionais. Além disso, para poder indicar que o modo está ativo, é apresentada uma faixa do ZoomText no topo do ecrã e é reproduzido um alerta sonoro rítmico. O modo de tecla de função muda automaticamente 3 segundos depois de tocar na última tecla de função ou imediatamente quando premir qualquer outra tecla. Pode ajustar o tempo de pressão, tempo de saída, aspeto da faixa e os alertas sonoros na [Caixa de Diálogo Definições do Teclado ZoomText](#).







Importante! Se está a usar um portátil ou um teclado compacto configurado para poder manter premida a tecla Fn para ativar os comandos normais das teclas de função, deverá também manter premida a tecla Fn para ativar os Comandos das Teclas de Função do ZoomText.

Utilizar as Teclas de Função com o Ampliador ZoomText.






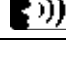
Por definição, seis das teclas de função (F7 a F12) estão atribuídas a voz e a comandos de leitura apenas disponíveis quando executar o Ampliador/Leitor ZoomText. Assim, quando executar o Ampliador ZoomText, se premir estas seis teclas de função não ativará o comando atribuído. Em vez disso, ser-lhe-á pedido para atribuir novamente as teclas de função a um comando disponível à sua escolha. Para mais informações sobre como atribuir novamente as teclas de função, veja a secção [Caixa de Diálogo de Definições do Teclado ZoomText](#).

Teclas de Função ZoomText Predefinidas

Em baixo, pode ler as descrições das Teclas de Função ZoomText predefinidas.

Tecla de Função	Tecla de Função	Descrição
F1		Inicia o ZoomText Também ativa e desativa o ZoomText enquanto é executado.
F2		Apresenta a Barra de Ferramentas do ZoomText.
F3		Ativa e desativa as melhorias de cor do ZoomText.
F4		Abre o Localizador na Web.
F5		Reduz o nível de ampliação do ZoomText.
F6		Aumenta o nível de ampliação do ZoomText.

As seguintes teclas de função são atribuídas a funcionalidades apenas disponíveis no Ampliador/Leitor ZoomText.

F7		Reduz a velocidade da voz.
F8		Aumenta a velocidade da voz.
F9		Inicia o AppReader para ler o texto na última aplicação ativa.
F10		Inicia o DocReader para ler o texto na última aplicação ativa.
F11		Inicia o Background Reader.
F12		Ativa e desativa a voz.

Alterar atribuição das Teclas de Função ZoomText

Pode alterar a atribuição de cada uma das Teclas de Função ZoomText para executar o comando ZoomText, o comando de Internet ou multimédia que quiser ou um comando para abrir uma aplicação, documentou ou página da web. Para mais informações e instruções sobre como alterar a atribuição das teclas de função, veja a secção [Caixa de Diálogo de Definições do Teclado ZoomText](#).

Passo 6—Altere a atribuição das Teclas de Função

Pode alterar a atribuição de cada uma das Teclas de Função ZoomText para executar o comando ZoomText, o comando de Internet ou multimédia que quiser ou um comando para abrir uma aplicação, documentou ou página da web. Para mais informações e instruções sobre como alterar a atribuição das teclas de função, veja a secção [Caixa de Diálogo de Definições do Teclado ZoomText](#).

Utilizar o Software do Teclado com outros teclados

Sabemos que há situações onde o seu Teclado ZoomText não está disponível ou quando precisa de usar outro teclado porque é necessário ou mais adequado à tarefa. Não queremos que tenha que escolher entre usar o Teclado ZoomText com as Teclas de Função do ZoomText e usar outro teclado sem as Teclas de Função do ZoomText, por isso criámos o software Teclado ZoomText e as Teclas de Função do ZoomText para que funcionem em virtualmente qualquer teclado que quiser ou que tenha que usar.

Utilizar as Teclas de Função do ZoomText no portátil e em teclados compactos

Muitos teclados de portáteis e teclados compactos utilizam as teclas de função (F1 a F12) para ativar comandos especiais, como brilho do ecrã, mudar modos de vídeo e controlar o volume do áudio. A ativação destes comandos especiais é normalmente feita mantendo premida a tecla Fn enquanto prima as teclas de funções. Assim, se premir apenas as teclas de função (sem manter premida a tecla Fn) ativa os comandos normais das teclas de função, e os métodos para ativar as Teclas de Função do ZoomText ainda são os mesmos que os descritos no Passo 5—Utilizar as Teclas de Função do ZoomText.

No entanto, em alguns portáteis, a tecla Fn pode ser invertida para que as funções especiais possam ser ativadas sem manter premida a tecla Fn e ativar os comandos normais das teclas de função requerem que mantenha premida a tecla Fn. Neste caso, a tecla Fn deve ser premida quando quiser ativar as Teclas de Função do ZoomText.

As Definições do Teclado ZoomText


As Definições do Teclado ZoomText permitem-lhe reconfigurar cada uma das Teclas de Função ZoomText para executar o comando ZoomText, o comando do Windows (Internet ou multimédia) da sua preferência ou um comando para abrir uma aplicação, documentou ou página da web. As definições do teclado permite-lhe ativar e desativar as teclas de função e ajustar as opções das teclas de função.

- [Como aceder às Definições do Teclado ZoomText](#)
- [Caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText](#)
- [Assistente Atribuir Tecla](#)
- [Atribuir Comandos do Programa](#)
- [Atribuir Comandos do Windows](#)
- [Atribuir Comandos do Programa](#)
- [Desativar as Teclas de Função do ZoomText](#)

Aceder às Definições do Teclado ZoomText

Quando executar o Teclado ZoomText, o respetivo ícone do programa é apresentado no tabuleiro do sistema do Windows (próximo do relógio). Se clicar no ícone do programa, abre um menu de contexto que lhe permite fazer o seguinte:

- Ativar ou desativar as Teclas de Função ZoomText
- Abrir a caixa de diálogo Definições do Teclado ZoomText.
- Ativar ou desativar a faixa do teclado e indicações sonoras
- Ativar ou transferir a licença do produto
- Verificar atualizações do software do teclado
- Ver informação sobre o Teclado ZoomText
- Abrir o sistema de Ajuda do Teclado ZoomText

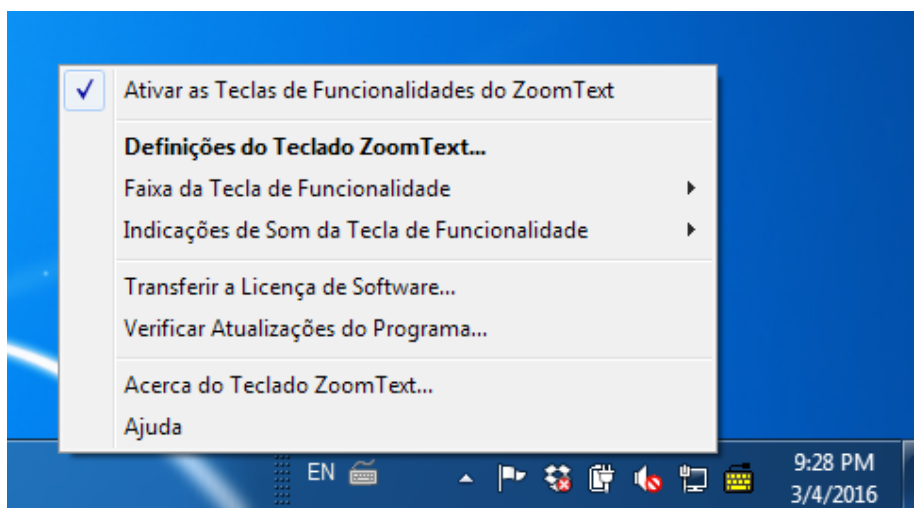

Menu do tabuleiro do Teclado ZoomText

Caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText.

A caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText permite-lhe examinar a atual configuração dos comandos das teclas de função e reconfigurá-los para ativar comandos alternativos — com o assistente Atribuir Tecla. A caixa de diálogo Definições do Teclado ZoomText também lhe permite desativar todas as teclas de função e ocultar o ícone do tabuleiro do Teclado ZoomText.


- **Para abrir as Definições do Teclado ZoomText**

1. No tabuleiro do sistema do Windows, clique no ícone do Teclado ZoomText.

O menu do tabuleiro do Teclado ZoomText abre-se.

2. Selecione **Abrir Teclado ZoomText**.

A caixa de diálogo Definições do Teclado ZoomText abre-se.

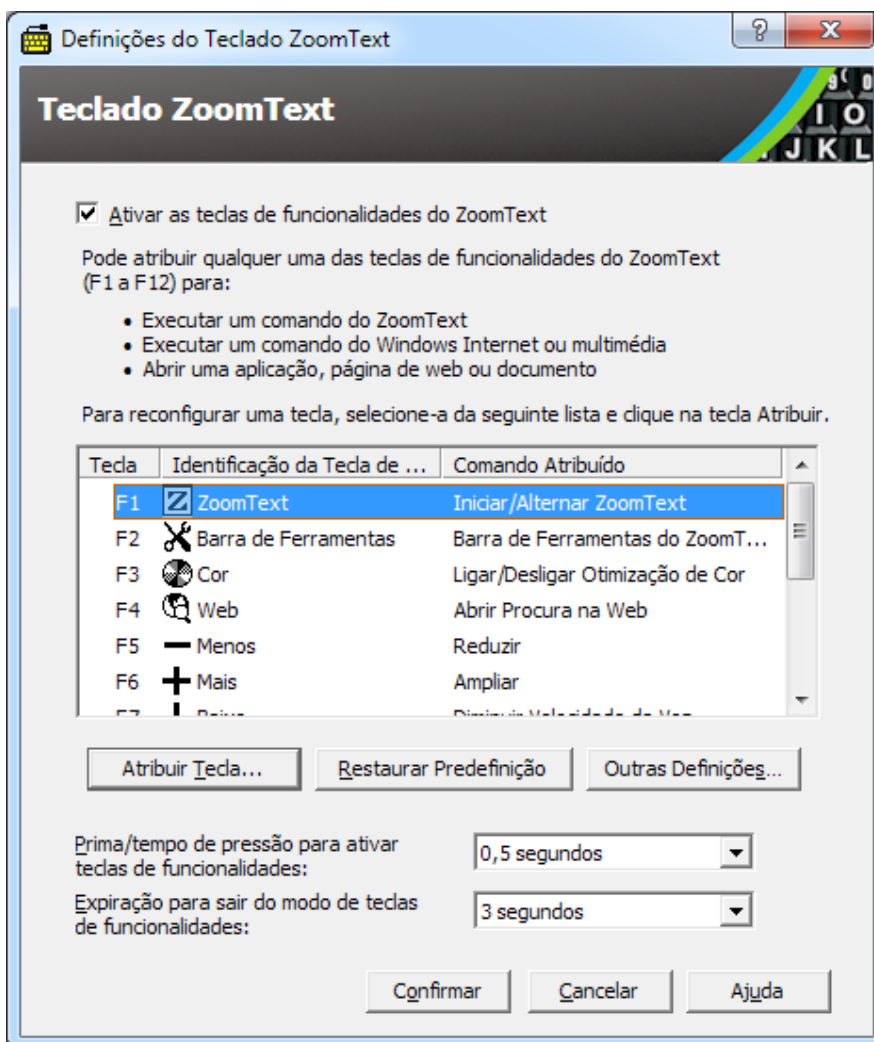

Caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText.

Definição	Descrição
Ativar as teclas de função do ZoomText	Ativa todas as teclas de função do ZoomText. Quando desmarcar esta opção, as teclas de função são desativadas.
Tecla	Apresenta a tecla de função associada a cada tecla de função.
Etiqueta da Tecla de Função	Apresenta o ícone associada a cada tecla de função predefinida.
Comando Atribuído	Apresenta uma descrição do comando atualmente atribuído à tecla de função.
Atribuir Tecla	Abre o assistente Atribuir Tecla da tecla de função destacada.
Repor Predefinições	Repõe todas as configurações da tecla de função para os comandos predefinidos (da fábrica).
Outras Definições...	Abre a caixa de diálogo Outras Definições do Teclado ZoomText .
Tempos de pressão/manter pressionado para ativar as teclas de função:	Ajusta o tempo que a tecla de função deve ser mantida premida para ativar a tecla de função e o modo da tecla de função.
Temporização para sair do modo de teclas de função	Ajusta o tempo durante o qual o modo das teclas de função fica ativo (antes de sair automaticamente) depois de ativar cada tecla de função.

Nota: Também pode abrir as Definições do Teclado ZoomText no menu **Iniciar** do Windows, selecionando **Programas > Teclado ZoomText > Teclado ZoomText**.


Outras Definições do Teclado ZoomText

A caixa de diálogo de Outras Definições do Teclado ZoomText permite-lhe ativar e desativar o ícone do tabuleiro do Teclado ZoomText e a faixa do Teclado ZoomText.

▪ Para abrir as Outras Definições do Teclado ZoomText

1. Na caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText e seleccione o botão **Outras Definições**.

A caixa de diálogo de Outras Definições do Teclado ZoomText abre-se.

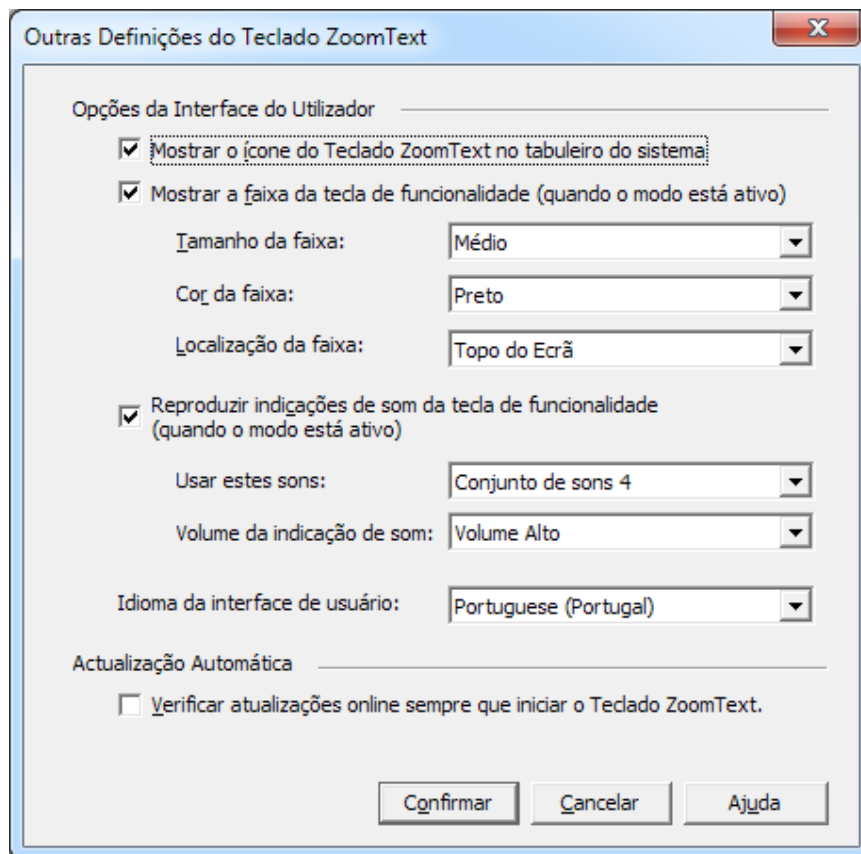

Caixa de diálogo de Outras Definições do Teclado ZoomText

Definição	Descrição
Apresentar o ícone do Teclado ZoomText no tabuleiro do sistema	Apresenta o ícone do Teclado ZoomText no tabuleiro do sistema do Windows. Se clicar no ícone abre um menu para aceder às Definições do Teclado ZoomText e a outras opções.
Apresenta a faixa das teclas de função (quando o modo está ativo)	Apresenta uma faixa do "Teclado ZoomText" quando o modo de teclas de função está ativo. A faixa é uma indicação visual de que o modo está ativo.
Tamanho da faixa	Ajusta o tamanho da faixa do teclado.
Cor da faixa	Seleciona a cor da faixa do teclado.
Posição da faixa	Seleciona a posição da faixa do teclado, que pode ficar no rebordo superior ou inferior do ecrã.
Reproduz as indicações sonoras das teclas de função (quando o modo está ativo)	Reproduz uma indicação sonora quando o modo de teclas de função está ativo. A indicação sonora é uma indicação audível de que o modo está ativo.
Utilizar estes sons	Selecione o estilo de indicação sonora a reproduzir
Volume da indicação sonora	Selecione o nível do volume da indicação sonora.
Idioma da interface do utilizador	Selecione o idioma no qual a interface do utilizador do Teclado ZoomText é apresentado.
Verificar atualizações online sempre que executar o Teclado ZoomText	Sempre que iniciar o seu sistema, o assistente de atualização verifica se há atualizações do programa disponíveis online. Se houver uma nova atualização, o Assistente de Atualização oferece-lhe a opção de transferir e instalar o novo software.

Assistente Atribuir Tecla

Quando seleccionar o botão **Atribuir Tecla** na [caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText](#), abre-se o assistente Atribuir Tecla. O assistente Atribuir Tecla permite-lhe reconfigurar as teclas de função do ZoomText com os comandos do ZoomText, comandos do Windows (Internet ou multimédia) ou para abrir uma aplicação, página da web ou documento.

▪ Para reconfigurar as teclas de função do ZoomText

1. Abra a caixa de diálogo **Definições do Teclado ZoomText** e seleccione a tecla que pretende reconfigurar.
2. Clique no botão **Atribuir Tecla**.

Abre-se o assistente Atribuir Tecla.

3. Escolha o tipo de comando pretendido e depois clique no botão **Seguinte**.

O assistente apresenta uma lista de opções de comandos para o tipo de atribuição seleccionado.


Para informações sobre cada um dos tipos de comandos, veja...

[Atribuir Comandos do ZoomText](#)

[Atribuir Comandos do Windows](#)

[Atribuir Comandos do Programa](#)

Sugestão rápida! Também pode manter premida a tecla **Alt** enquanto prime uma tecla de função para abrir o assistente Atribuir Tecla para essa tecla específica.

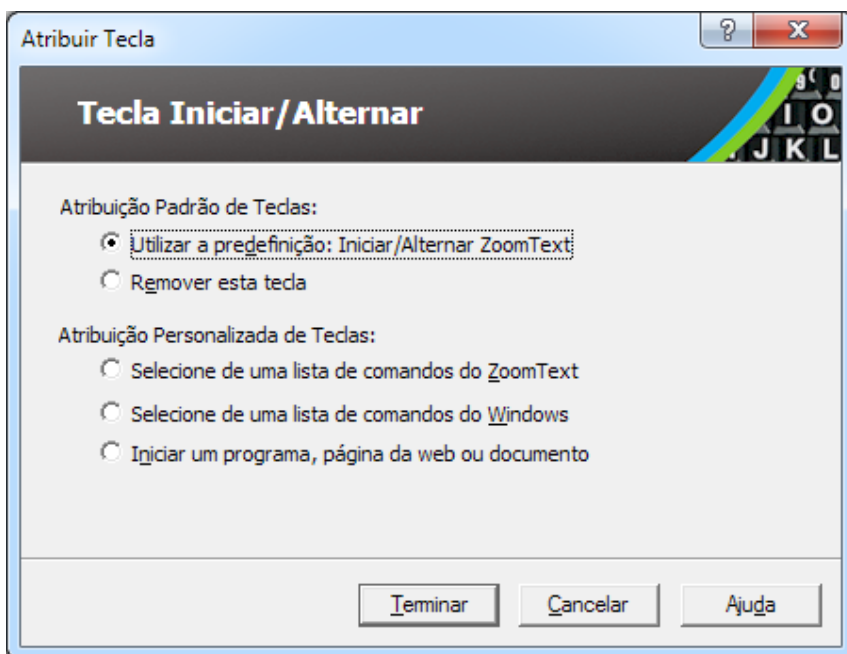

Atribuir Tecla - caixa de diálogo


Definição	Descrição
Utilizar a predefinição:	Define a tecla de função selecionada para usar o comando pré-atribuído (predefinido).
Remover esta configuração	Desativa a tecla de função selecionada.
Escolher de uma lista de comandos do ZoomText	Permite-lhe atribuir um comando do ZoomText à tecla de função selecionada.
Escolher de uma lista de comandos do Windows	Permite-lhe atribuir um comando do Windows (Internet ou multimédia) à tecla de função selecionada.
Iniciar um programa, página da web ou documento	Permite-lhe especificar um programa, página da web ou documento quando premir a tecla de função selecionada.

Atribuir Comandos do ZoomText

Quando seleccionar a opção **Escolher de uma lista de comandos do ZoomText** no [assistente Atribuir Tecla](#), abre-se a seguinte caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo permite-lhe escolher um comando do ZoomText para atribuir a tecla de função seleccionada que escolheu na [caixa de diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).

- **Para atribuir um comando do ZoomText à tecla de função do Zoomtext.**

Escolha o comando do ZoomText pretendido e depois clique no botão **Terminar**.

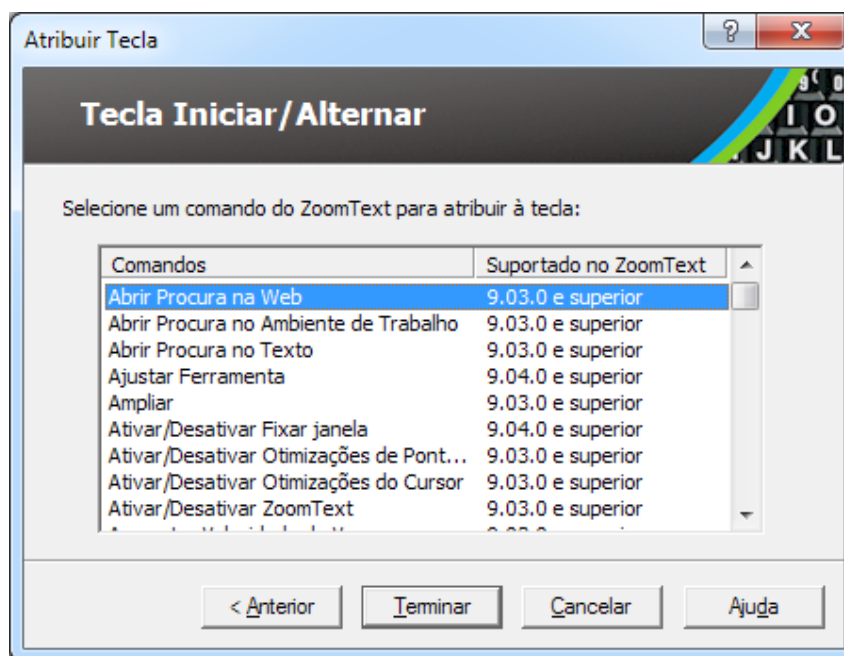


Assistente para Atribuir Tecla - opções dos comandos do ZoomText

Atribuir Comandos do Windows

Quando seleccionar a opção **Escolher de uma lista de comandos do Windows** no [Assistente para Atribuir Tecla](#), abre-se a seguinte caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo permite-lhe escolher um comando de Internet do Windows ou comando multimédia para atribuir a tecla de função seleccionada que escolheu na [caixa de diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).

- **Para atribuir um comando do Windows à tecla de função do Zoomtext.**

Escolha o comando do Windows pretendido e depois clique no botão **Terminar**.

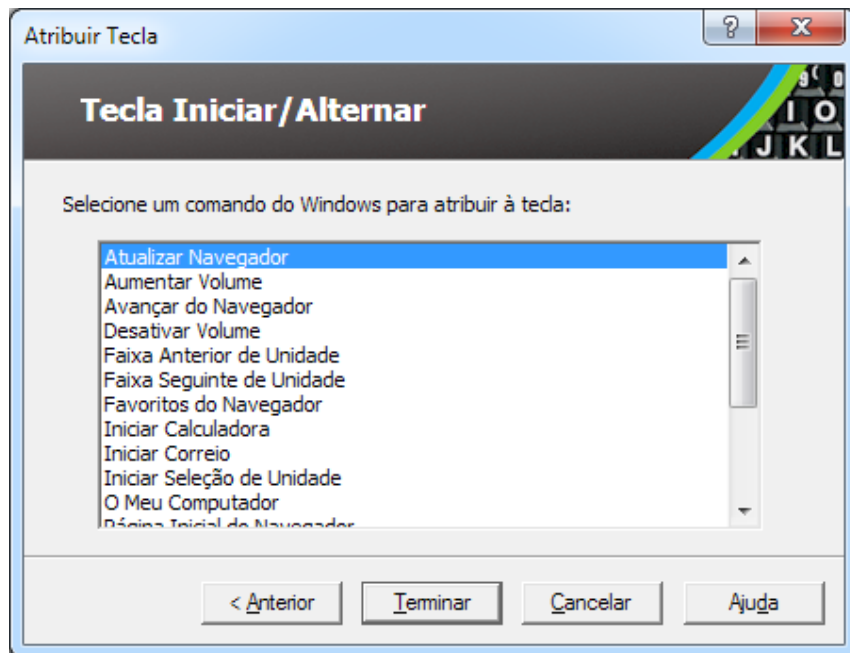


Assistente para Atribuir Tecla - opções dos comandos do Windows

Atribuir Comandos do Programa

Quando seleccionar a opção **Iniciar um programa, página da web ou documento** no [Assistente para Atribuir Tecla](#), abre-se a seguinte caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo permite-lhe especificar um programa, página da web ou documento para abrir quando premir a tecla de função seleccionada que escolheu na [caixa de diálogo das Definições do Teclado ZoomText](#).

- **Para atribuir um comando do programa à tecla de função do ZoomText.**

Introduza o caminho ou URL do programa, página da web ou documento que pretende abrir e depois clique no botão **Terminar**.

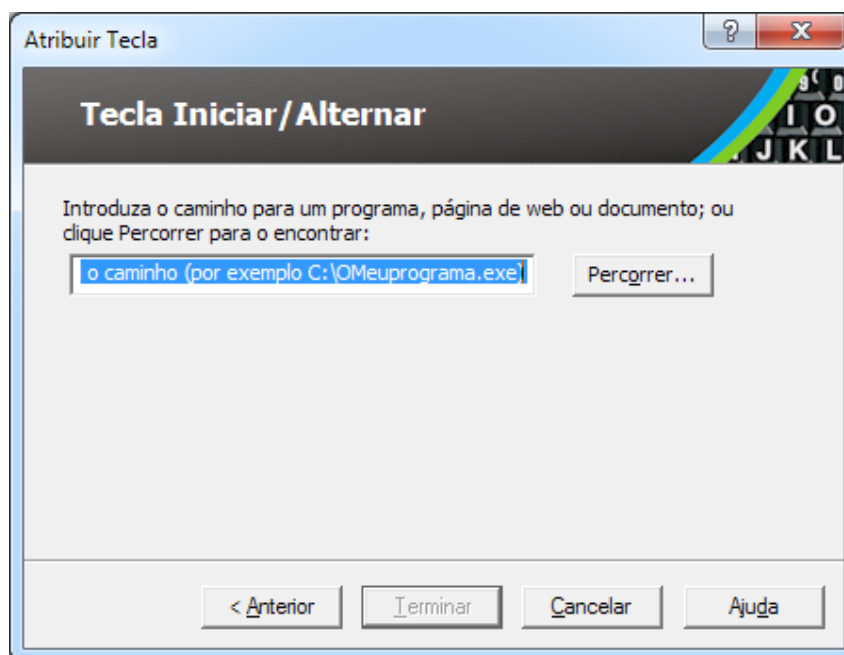

Assistente para Atribuir Tecla - opções dos comandos do programa


Ativar ou desativar as Teclas de Função do ZoomText

Em determinadas ocasiões pode querer ou ser necessário desativar temporariamente as Teclas de Função do ZoomText.

- **Para ativar ou desativar as Teclas de Função do ZoomText**

No tabuleiro do sistema, clique no ícone do Teclado ZoomText e marque ou desmarque **Ativar as Teclas de Função do ZoomText**.



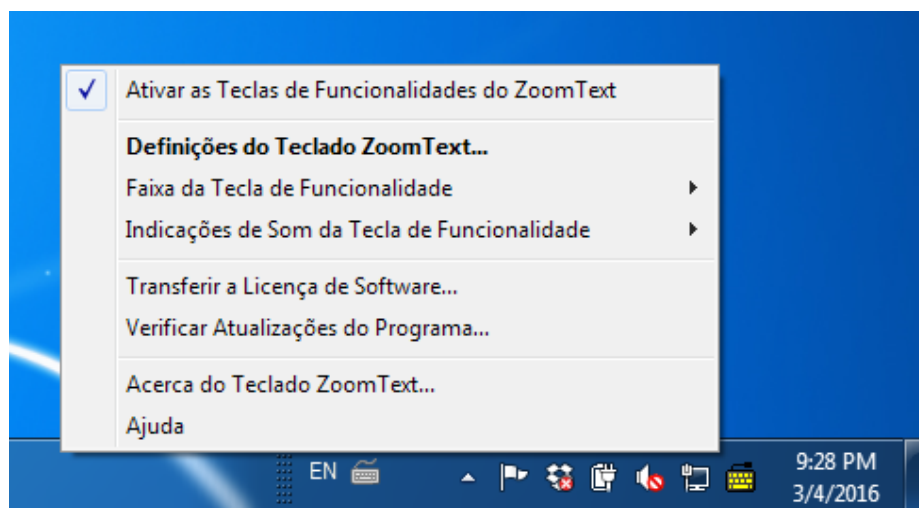







As teclas de função são ativadas quando uma marca for visível próximo do item do menu.



Menu do tabuleiro com teclas de função ativadas

Abreviaturas da impressão das teclas

Para acomodar o formato de grande impressão das teclas no teclado ZoomText, alguns dos nomes de teclas convencionais são abreviados para caberem na tecla. Estas teclas são descritas em baixo.

	Print Screen		Insert
	Scroll Lock		Delete
	Pause / Break		Page Up
	Home		Page Down
	End		Num Lock

Luzes de Estado do Teclado

As luzes do teclado, sobre o teclado numérico, indicam o estado das teclas Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock. Por exemplo, se Num Lock estiver ativado, a luz Num Lock está acesa; se Caps Lock estiver desativado, a luz Caps Lock está desligada.



Luzes de estado do Teclado ZoomText

Portas USB

O Teclado ZoomText inclui duas portas USB "sempre à mão" — uma em cada lado do teclado. Estas portas podem ser usadas para ligar a maioria dos dispositivos USB, incluindo um rato, pen drives, webcams ou luzes LED. Convenientemente posicionadas, pode evitar tentar usar as portas USB na parte traseira do seu portátil, ou pior, na parte traseira do seu computador que está debaixo da sua secretária.

Manutenção

▪ **Derramou líquido no teclado**

Se derramar qualquer líquido no teclado, desligue imediatamente o seu computador e desligue todos os acessórios. Vire o teclado ao contrário para remover o líquido.

- Se o líquido for água, basta deixar o teclado secar antes de o usar novamente.
- Se o líquido for uma substância viscosa, remova o líquido e limpe completamente o teclado com um pano húmido. Deixe o teclado secar antes de o voltar a ligar ao computador.

▪ **Manter o seu teclado limpo.**

Para o melhor desempenho, mantenha o seu teclado limpo e sem sujidade, como migalhas ou poeira. Os teclados devem ser limpos todos os meses, com um produto de limpeza em spray aplicado num pano. Certifique-se de que o computador está desligado antes de limpar.

Resolução de problemas

▪ **Nenhuma parte do teclado funciona.**

Se o seu teclado não funciona, tente cada um dos seguintes procedimentos pela ordem descrita em baixo:

- Evite quaisquer replicadores de portas, hubs USB, comutadores KVM e outros. Ligue o recetor diretamente à porta do computador.
- Verifique se o conector do teclado está firmemente ligado à porta correta do computador.
- Tente ligar a uma porta USB diferente (se houver múltiplas portas).
- Verifique se outro dispositivo USB funciona na mesma porta.
- Desligue o sistema, aguarde 10 segundos e depois reinicie o sistema.

- **Algumas das teclas não funcionam.**

Se algumas das teclas no seu teclado não funcionam, poderá existir um conflito com um componentes de hardware ou de software no seu sistema. Em alguns casos, se ligar o teclado a um replicador de porta, hub USB ou comutador KVM, algumas das teclas poderão funcionar de modo errático. Estes problemas também poderão ocorrer se executar um utilitário de controlo de teclado de terceiros no seu computador. Se o teclado apresentar este comportamento, tente ligá-lo diretamente a uma porta USB no computador e desligar todos os utilitários de controlo de teclado de terceiros.

- **As teclas de função do ZoomText não funcionam.**

Se as teclas de função do ZoomText não respondem, certifique-se de que instalou e executou o software Teclado ZoomText e que as teclas de função estão ativadas. Quando executar o Teclado ZoomText, o tabuleiro do sistema do Windows apresenta um ícone do Teclado do ZoomText (próximo do relógio). Se este ícone não for visível, o software poderá estar a ser executado mas o ícone está ocultado. Neste caso, vá para o menu **Iniciar** do Windows e seleccione **Programas > Teclado ZoomText > Teclado ZoomText**. Isto abre a caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText onde pode ativar as teclas de função e também ativar a apresentação do ícone do Teclado ZoomText no tabuleiro do sistema.

- **As teclas de função do ZoomText ativam os comandos incorretos**

Se as teclas de função do ZoomText ativam comandos diferentes daqueles que lhes foram atribuídos na caixa de diálogo de Definições do Teclado ZoomText, qualquer outro utilitário do teclado pode estar a controlar o teclado. Se for este o caso, deve desativá-lo ou desinstalá-lo para poder continuar a usar as Teclas de Função do ZoomText.

Aviso de Saúde

Como muitas outras atividades, quando usa um computador pode sentir desconforto ocasional nas suas mãos, braços, ombros, pescoço e em outras partes do corpo. No entanto, se apresentar sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dores, palpitações, dores intermitentes, formigueiro, dormência, sensação de queimadura ou rigidez, **NÃO IGNORE ESTES SINAIS DE ALERTA. CONSULTE IMEDIATAMENTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO**, mesmo que os sintomas surjam quando não estiver a trabalhar no seu computador. Sintomas como estes podem estar associados a lesões dolorosas e, por vezes, permanentemente incapacitantes ou a desordens dos nervos, dos músculos, dos tendões e, por vezes de outras partes do corpo. Estas desordens musculoesqueléticas (MSD) incluem síndrome do túnel do carpo, tendinite, tenossinovite e outras condições.

Embora os investigadores ainda não tenham todas as respostas para as muitas questões das MSD, existe o consenso geral de que muitos fatores podem estar associados à sua ocorrência, incluindo: condições médicas e físicas, stress e como ligamos com ele, a saúde geral e a postura de uma pessoa e como usa o seu corpo durante o trabalho e outras atividades (incluindo a utilização do teclado ou dispositivos indicadores). Alguns estudos sugerem que o tempo que uma pessoa passa em frente do teclado também pode ser um fator. Consulte o seu médico para receber orientações que o podem ajudar a trabalhar mais confortavelmente no seu computador e, possivelmente, reduzir o risco de sofrer de MSD.

Se tiver quaisquer questões sobre como seu próprio estilo de vida, as suas atividades ou a sua condição médica ou física podem estar associados a MSD, consulte um profissional de saúde.

Garantia Limitada

O Teclado ZoomText de Grandes Letras tem garantia contra defeitos de fabrico e contra danos associados ao transporte do produto. Os detalhes de cada tipo de garantia são descritos em baixo.

Danos durante o transporte

As embalagens são, por vezes, danificadas durante o transporte pela companhia de transporte. Se for necessário devolver um teclado porque a embalagem está danificada, deverá notificar a Ai Squared até (7) dias depois de receber o teclado. Caso não notifique a Ai Squared no período indicado anteriormente, a Ai Squared só considerará substituir o teclado se assim o desejar.

Defeitos de fabrico

Os teclados são cobertos pela garantia para defeitos de fabrico durante seis (6) meses a partir da data de transporte original.

Os defeitos de fabrico incluem, mas não estão limitados a, itens como teclas que ficam presas ou partidas ou cabos inoperantes. Danos causados pela utilização normal ou desgaste normal do teclado não são cobertos pela garantia. Se tiver quaisquer questões sobre se um problema que o afeta pode ou não estar coberto pela garantia do fabricante, contacte-nos através do (802) 362-3612.

A sua garantia cobre a sua compra, e não o teclado exato que está a usar. Se o seu teclado for enviado para reparação ou para substituição, a garantia continua a contar a partir da data de compra - e não a partir da entrega do seu teclado novo ou reparado.

Política de devolução de todos os teclados

Para devolver um teclado à Ai Squared para reparação ou substituição, deve primeiro receber um número RMA (Autorização de Devolução de Mercadoria) da Ai Squared. Sem um Número RMA válido, as devoluções não serão processadas. Para receber o seu RMA, contacte o departamento de vendas da Ai Squared através do número (802) 362-3612.

A Ai Squared cobrará os custos do transporte da devolução de um produto com defeito durante os primeiros 30 dias a partir da data de compra original. Quando nos contactar, enviaremos a nossa transportadora para recolher a embalagem e para aplicar uma identificação de transporte apropriada. O teclado será reparado ou substituído segundo os nossos critérios.

Se o seu teclado deixar de funcionar depois dos primeiros 30 dias de utilização, deverá também solicitar um RMA à Ai Squared e depois enviar o produto às suas custas. Repararemos ou substituiremos o seu teclado e enviá-lo-emos para si sem custos para si.



Telephone: (802) 362-3612
(800) 859-0270

Fax: (802) 362-1670

E-mail: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Correio: PO Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com